

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
V029100	TROCART STANDARD L:120MM D:3.0MM AVEC ROBINET - CHROME	3661219223856
	STANDARD TROCAR L:120MM D:3.0MM WITH STOPCOCK - CHROMIUM	 3 661219 223856

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

15-029

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Trocarts - Trocars - Trocares

STANDARD

 **Acier chromé**
Chrome steel
Acero cromado



Ø 4.0 mm
85 mm

V029002
19 cm - 7 1/2"

V029000	Ø 3.0 mm	V029100
V029001	Ø 3.5 mm	V029101
V029002	Ø 4.0 mm	V029102
V029003	Ø 4.5 mm	V029103
V029004	Ø 5.0 mm	
V029005	Ø 5.5 mm	
V029006	Ø 6.0 mm	



75 mm
Ø 4.0 mm

V029102
20 cm - 8"

NELSON



85 mm
Ø 10.0 mm

V029451
22 cm - 8 3/4"

V029450	Ø 9.0 mm
V029451	Ø 10.0 mm
V029452	Ø 12.0 mm

UNIVERSAL

V029210	Ø 1.7 - 3.0 - 4.5 - 6.0 mm
V029200	Ø 1.7 - 3.0 - 4.5 mm



60 mm
Ø 6.0
45 mm
Ø 4.5
55 mm
Ø 3.0
45 mm
Ø 1.7
35 mm

V029210
12,5 cm - 5"

XV - 29

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015
 XV - Divers
 XV - Miscellaneous
 XV - Diversos

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
V029100	TROCAR STANDARD L:120MM D:3.0MM AVEC ROBINET - CHROME	3661219223856
	STANDARD TROCAR L:120MM D:3.0MM WITH STOPCOCK - CHROMIUM	 3 661219 223856

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62857

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + CHROME / STAINLESS STEEL + CHROMIUM

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + CHROME

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

15-029

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*