



Mode d'emploi du Mannequin Adolescent Choking

Mannequin d'apprentissage de la manœuvre de désobstruction des voies aériennes chez l'adolescent (manœuvre de Heimlich)

1. Présentation

Le mannequin Adolescent Choking est un mannequin de formation et d'entraînement permettant de simuler avec justesse et réalisme la manœuvre de compression abdominale destinée à la désobstruction des voies aériennes chez l'enfant.

Chaque mannequin est conçu en PVC robuste. La cage thoracique, le sternum et l'appendice xiphoïde procurent les éléments de référence nécessaires à la pratique de désobstruction des voies aériennes.

2. Utilisation

La mise en oeuvre du mannequin se fait en sélectionnant un des 2 corps étrangers : « bille ronde » et « aliment »

La bille ronde est le corps étranger le plus facile à expulser. Le corps étranger « aliment » augmente le volume d'obstruction et le nombre de tentatives pour dégager les voies aériennes.

Sélectionner l'un ou l'autre des 2 corps étrangers afin de ne pas emmêler les cordes de maintien.

3. Entretien et nettoyage

Le mannequin étant conçu pour l'apprentissage de la manœuvre de désobstruction des voies aériennes, seule la surface extérieure devra être nettoyée.

La tête et le torse peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse. Rincer et essuyer le mannequin avec précaution.

Attention précision de stockage : Toujours veiller à stocker le mannequin debout.

4. Caractéristiques techniques

Poids du mannequin avec sac de transport : 4,0 kg

Dimensions : 61 x 36 x 23 cm

Matériau du mannequin : PVC

Matériaux des corps étrangers : coton + PVC

5. Références

Mannequin Adolescent Choking – Référence 100-1615U

Compléter votre gamme avec les références des mannequins Choking

6. Contacts

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc

Avenue Jean Gabriel Domergue

33 070 Bordeaux Cedex

Tél : 05 57 92 31 50

Fax : 05 57 92 31 59

www.ambu.com