


Raiser Pro Block

Assembly instruction

molift[®]
by Etac

BM52099 Rev. C 2021-08-12

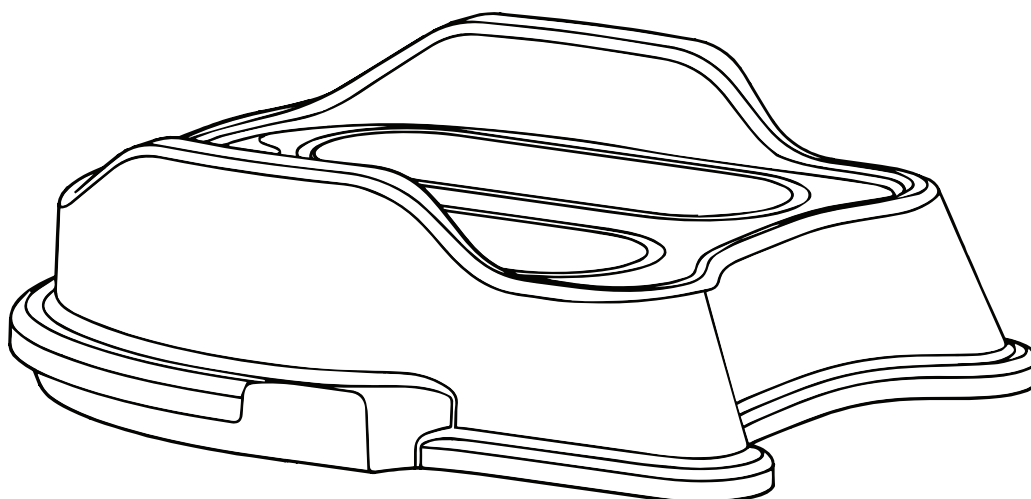

Instructions de montage

28612

Molift Raiser Pro Block

Lisez le manuel d'utilisation principal du Raiser Pro avant utilisation.

Il est important de comprendre parfaitement le contenu du manuel d'utilisation principal avant de tenter d'utiliser l'équipement. Ce manuel d'utilisation principal contient des consignes importantes en matière de sécurité et des informations relatives à l'utilisation du Molift Raiser Pro. Scannez le code QR ci-dessous pour consulter le manuel d'utilisation principal du Molift Raiser Pro ainsi que de la documentation supplémentaire.



Raiser Pro Block

Le Raiser Pro Block est un accessoire à utiliser lorsque les pieds du patient doivent être surélevés lors de l'utilisation du Raiser Pro. Il surélève les pieds de 9 cm. Le produit doit être installé sur le repose-pied du Molift Raiser Pro. Le Raiser Pro Block n'a besoin d'aucune fixation, il s'intègre directement dans le repose-pied.

Charge maximale d'utilisation (SWL) :

170 kg (374 lbs)

Évaluez les risques et prenez des notes.

En tant qu'assistant, vous êtes responsable de la sécurité de l'utilisateur.

Réévaluez les risques aussi souvent que nécessaire en raison de l'état de santé du patient.

Contrôles à réaliser quotidiennement ou avant toute utilisation :


- Assurez-vous que l'utilisateur présente les aptitudes requises à l'utilisation du Block.
- Assurez-vous que le Block ne présente aucun signe de dommage ou de fissure.

Matériau et consignes de nettoyage

Le Molift Raiser Pro Block est fabriqué en polypropylène.

Nettoyez et désinfectez avec de l'alcool à 70 % ou une solution à base d'iso-propanol (45 %).

Vous trouverez des informations sur la date de production, SWL, les matériaux, le nom et la référence de l'article sous le Raiser Block.

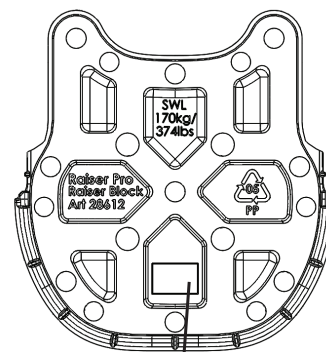

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
20												
22												
24												
26												

Mois et année de fabrication




Identification du recyclage des matériaux



Assurez-vous que le Raiser Pro Block est en place et correctement installé avant utilisation.

Montage du Raiser Pro Block

Assurez-vous que l'utilisateur est assis et que les roues du Molift Raiser Pro sont verrouillées avant d'installer le Raiser Pro Block. Assurez-vous que le Raiser Pro Block est correctement fixé avant d'installer l'utilisateur.

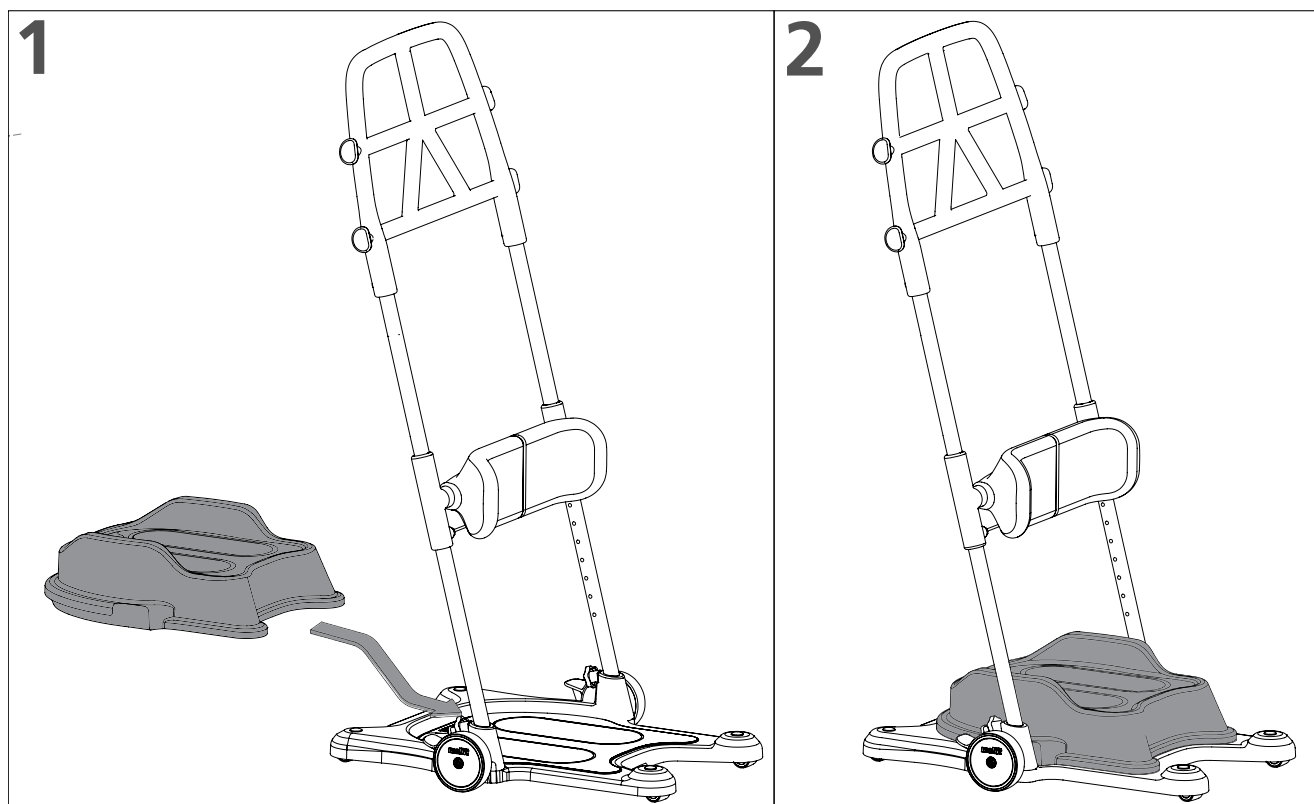

- 1 Glissez le Raiser Pro Block dans le repose-pied par l'arrière.
- 2 Assurez-vous que le Raiser Pro Block est bien en place et qu'il ne présente aucun danger avant utilisation.



Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

molift[®]
by Etac