

Prime

Guide de référence simplifié



Illustration du produit	p 3
Système hydraulique à commande latérale	p 4
Système de freinage	p 5
Position décline et dossier pneumatique	p 6
Barrières latérales	p 6
Fonctions en option :	
Mobilité avancée – Prime Zoom	p 8
Mobilité avancée avec Prime Big Wheel	p 10
Fonctions électriques – Levage électrique	p 12
Fonctions électriques – Fonctions de commande latérale	p 13
Poignées de poussée	p 14
Désinfection	p 15



Système hydraulique à commande latérale



Système hydraulique à commande latérale :

- A **Pour monter** le plan de couchage, appuyez sur la pédale de montée.
- B **Pour abaisser les deux extrémités** du plan de couchage en même temps, appuyez au centre de la pédale (B).
- C **Pour abaisser le plan de couchage uniquement au niveau de la tête**, appuyez sur le côté de la pédale (B) le plus proche du côté tête du brancard.
- D **Pour abaisser le plan de couchage uniquement au niveau des pieds**, appuyez sur le côté de la pédale (B) le plus proche du côté pieds du brancard.

Système de freinage



Pour **serrer les freins**, appuyez sur le **côté rouge** de la pédale

Pour **relâcher les freins** : Appuyez sur le **côté vert** de la pédale



Position déclive et dossier pneumatique



Position déclive : appuyez sur les pédales côté tête/pied pour placer le patient en position déclive ou proclive.

Pour relever ou abaisser le dossier, pressez l'une des deux (ou les deux) poignées de relève-buste jaunes pour obtenir une assistance pneumatique jusqu'à ce que le dossier ait atteint l'angle souhaité.



Barrières



Le levage et l'abaissement des barrières latérales en toute sécurité doivent s'effectuer avec les deux mains. Utilisez une main pour maintenir et positionner la barrière latérale et l'autre main pour actionner le loquet de la barrière latérale.

Options de mobilité avancée

Entraînement motorisé Zoom



Options de mobilité avancée

Guide d'utilisation de Zoom



Débranchez le cordon d'alimentation de la source électrique

1. **Pour endencher ZOOM :** appuyez sur le côté de guidage (**vert**) de n'importe quelle pédale de frein/guidage pour qu'elle atteigne la position la plus basse
2. **Pour activer ZOOM :** saisissez les poignées de poussée et appuyez sur l'un des interrupteurs de déclenchement de mouvement se situant sous ces poignées
3. **Pour ralentir :** poussez ou tirez les poignées dans le sens opposé au mouvement actuel du brancard
4. **Pour arrêter le mouvement :** retirez les mains des interrupteurs et des poignées

Deux voyants LED sur la poignée de poussée indiquent si l'unité est prête à être utilisée :

Si le voyant LED **vert** est allumé, l'unité est prête

Si le voyant LED **orange** est allumé, l'unité n'est pas prête. Par conséquent, vérifiez que :

- la pédale n'est PAS en position de frein (**rouge**) ou en position neutre
- Le cordon d'alimentation n'est PAS branché à la source électrique
- L'interrupteur d'alimentation n'est PAS en position "Arrêt/Manuel"

Options de mobilité avancée

Big Wheel



Options de mobilité avancée

Guide d'utilisation de Big Wheel



Transporter un patient à l'aide de Big Wheel

1. Abaissez le plan de couchage à la position la plus basse.
2. Placez la pédale de frein/guidage (A) en position de guidage.
3. Utilisez les poignées de poussée pour pousser le brancard.
4. Enclenchez les freins pour bloquer le brancard.

Transporter un patient sans Big Wheel

1. Mettez la pédale de frein/guidage (A) en position neutre.
2. Abaissez le plan de couchage à la position la plus basse.
3. Utilisez les poignées de poussée pour pousser le brancard.
4. Enclenchez les freins pour bloquer le brancard.

Fonctions électriques

Levage électrique



Pour surélever le plan de couchage, appuyez sur la pédale



Fonctions électriques

Fonctions de commande latérale



Dossier relevé

Appuyez pour relever le dossier (section tête)

Dossier abaissé

Appuyez pour abaisser le dossier (section tête)



Plicature abaissée

Appuyez pour abaisser la plicature (section pieds)

Plicature relevée

Appuyez pour relever la plicature (section pieds)

Poignées de poussée



Pour utiliser les poignées,

faites pivoter les poignées vers le haut et poussez vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en position.

Pour ranger les poignées de poussée,

soulevez-les et faites-les pivoter vers le bas pour les ranger dans les supports de poignée.

Nettoyage et Désinfection



Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant concernant la solution de nettoyage, les désinfectants et les recommandations de dilution.

Désinfectants recommandés :

- Quaternaires
- Désinfectant phénolique
- Solution d'eau de Javel chlorée
- Alcool isopropylique à 70 %

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale. Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union européenne. Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.

Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe I. Les brancards Série Prime de Stryker sont des brancards de transport et de traitement des patients à usage général. Les brancards de transport ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie.



1125-309-005FR-BL REVA

1125-309-005FR-BL REV A

SDL 06/2020

2020-24758



Copyright © 2020 Stryker



Stryker Medical

3800 E. Centre Avenue Portage,
MI 49002 USA

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330, Pusignan

France

t : +33 4 72 45 36 00

f : +33 4 72 45 36 99

www.stryker.fr

333 710 275 RCS Lyon
Capital social : 27 495 520 EUR