

ETAC Raiser

La sangle de maintien debout Raiser Strap

Caractéristiques

Désignation	Réf.	Longueur	Poids supporté	Matériau	Nettoyage	Longueur de la partie rembourrée	Largeur	Boutonnieres de chaque côté	Réglage
Raiser Strap S/M	82508	180 cm	150 kg	Polyester/ Polyamide	80° en machine	60 cm	8 cm	7	de 60 à 140 cm
Raiser Strap L/XL	82509	210 cm	150 kg	Polyester/ Polyamide	80° en machine	70 cm	8 cm	9	de 70 à 170 cm

Dans quelle situation les utiliser ?


Pour les patients qui présentent un risque de perte d'équilibre : une fois la sangle en place, il n'y a plus de risque qu'il bascule ni sur les côtés, ni vers l'arrière.

Pour rassurer un patient qui a peu confiance en ses capacités ou qui a peur pendant le déplacement.

Comment s'utilisent elles ?

- Installer le patient debout sur la plateforme.
- Passer la sangle par-dessus le patient.
- La positionner à l'endroit voulu : fessier pour plus de maintien/taille pour le déshabillage par exemple.
- Coincer une boutonnière de chaque côté sur les boutons de la poignée
- Régler le serrage si nécessaire en décalant une des boutonnières. Le serrage se règle en fonction du poids du patient, de sa posture sur le guidon, de l'endroit où la ceinture est placée (dos, hanches, fessier) du confort souhaité et du degré d'autonomie du patient.

C'est aussi simple que ça !

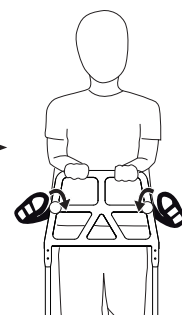

Quels sont les avantages ?

- S'utilise facilement même sans formation.
- Ultra simple et rapide à installer, régler, verrouiller, desserrer, repositionner : gain de temps.
- Facilite certains actes du quotidien pour le soignant comme pour le patient : positionner sous les fesses pendant le déplacement vers les toilettes / repositionner au niveau de la taille pour déshabiller le patient.
- Mise en place sans se déplacer : permet de ne pas quitter le patient des yeux, de garder le contrôle sur l'appareil, et d'agir vite.
- Matériau très résistant fait pour durer.
- Garde bien sa forme grâce au rembourrage.
- Patient sécurisé très rapidement = risque diminué.

