

ETAC Raiser

Les allonges de préhension Raiser Soft Handles

Caractéristiques

La moitié est rembourrée pour offrir une meilleure prise en main, et l'autre sert à l'allonge et à l'attache sur le guidon. Il est conseillé d'en avoir toujours un jeu avec ETAC Raiser car elles peuvent servir pour beaucoup de pathologies.


Désignation	Référence	Longueur	Poids supporté	Matériau	Nettoyage
Raiser Soft Handles (la paire)	82511	75 cm	150 kg	Polyester/Polyamide	78

Dans quelle situation les utiliser ?

Les allonges de préhension servent comme extension lorsque le patient a des difficultés à saisir les poignées ou lorsqu'elles sont trop éloignées pour les atteindre. Ceci concerne en particulier les patients qui ont le dos voûté, qui n'ont pas la souplesse de se pencher vers l'avant, ou qui ont des difficultés pour lever les bras. Les allonges vont permettre au patient d'avoir un point d'appui, une poignée plus proche d'eux pour commencer le redressement et ensuite s'aider des poignées de l'appareil.

Comment s'utilisent elles ?

Elles peuvent s'attacher sur n'importe lequel des barreaux en fonction de la hauteur et de la longueur désirées. Le patient va ensuite pouvoir simplement les attraper de la manière qui lui convient pour se hisser. Elles présentent en outre l'avantage de pouvoir glisser la main dans la boucle pour la refermer sur les deux parties de la boucle et avoir ainsi un point d'appui plus stable et plus fort.

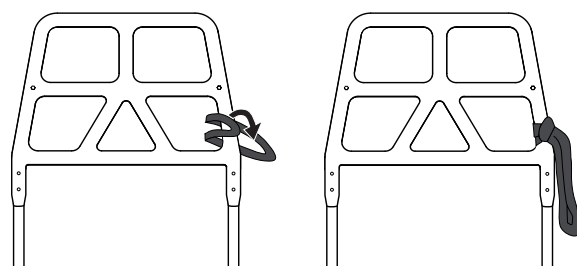

Quels sont les avantages ?

Elles sont très faciles et rapides à mettre en place (gain de temps) et apportent une solution pour la plus grande partie des patients.

Les allonges de préhension Raiser Soft Handles présentent l'avantage de pouvoir rester toujours accrochées à ETAC Raiser, de sorte qu'elles sont toujours disponibles à portée de main et ne se perdent pas.

