

Pansement compressif d'urgence type israélien

Premiers Secours




Caractéristiques :

- **Pansement compressif d'urgence, type israélien**
- Usage unique
- Stérile
- Conformité CE
- Grammage du pansement : 90 gr/m²
- Largeur : 10 cm
- Longueur non étirée : 1.80 m environ
- Longueur étirée : 4.5 m environ
- Dimensions sous vide : 10 x 18 cm
- Poids emballé : 72 grammes



Référence : FA22.21.014

Guide rapide d'utilisation du pansement traumatique

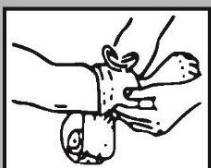

① Placer la compresse sur la blessure




② Passer la bande à travers l'arc en plastique




③ Tendre la bande au travers de l'arc



④ Fixer la bande en la ramenant en sens inverse, arc plaqué

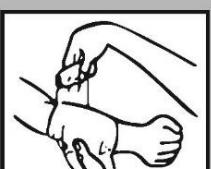

⑤ Enrouler la bande en la serrant fermement, couvrir toute la compresse

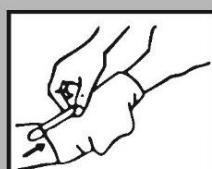

⑥ Fixer la bande sur une épaisseur à l'aide du crochet plastique

