



# Pansement compressif d'urgence type israélien

## Pansement israélien

Pansement compressif israélien composé d'un tampon compressif absorbant stérile et d'une bande élastique. S'applique sur différentes parties du corps pour contrôler le saignement en cas d'hémorragie.



-La plaie est comprimée par une compresse non-adhérente en vue d'assurer l'hémostase.

-L'ensemble constitue également un pansement secondaire stérile, capable d'immobiliser la partie du corps ou le membre blessé et peut, si nécessaire, exercer une pression directe supplémentaire pour arrêter les saignements importants (garrot).

-Un des grands avantages du pansement compressif israélien est qu'il est possible de l'appliquer soi-même, sur toute partie du corps.


-Il facilite la manipulation et permet un gain de temps appréciable en situation d'urgence.

#### Caractéristiques :

- **Pansement compressif d'urgence**, type israélien
- Usage unique
- Stérile
- Conformité CE
- Plusieurs tailles disponibles :
  - 10 cm
  - 15 cm
  - 20 cm



#### Guide rapide d'utilisation du pansement traumatique

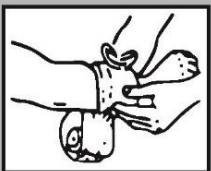


① Placer la compresse sur la blessure




② Passer la bande à travers l'arc en plastique




③ Tendre la bande au travers de l'arc

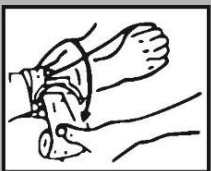

④ Fixer la bande en la ramenant en sens inverse, arc plaqué

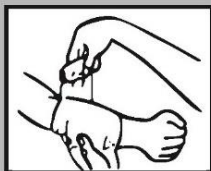

⑤ Enrouler la bande en la serrant fermement, couvrir toute la compresse

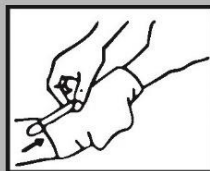

⑥ Fixer la bande sur une épaisseur à l'aide du crochet plastique

#### Références :

- **FA22.21.027 (Tactique 10 cm)**
- **FA22.21.028 (Beige 15 cm)**
- **FA22.21.029 (Beige 20 cm)**

*Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.*

*Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.*

**CORBEN**

59 Rue Stendhal  
76620 Le Havre

FRANCE

Tel +33 (0)2 35 300 185

Fax +33 (0)2 35 300 186

corben@corben.fr

[www.corben.fr](http://www.corben.fr)

