

# Rubis

Confort, hygiène et sécurité au rendez-vous des soins et de la toilette.

## Douche au lit

REF. 3017.00

Conçue pour la toilette et le bien-être des personnes alitées en institution, la douche au lit Rubis permet de doucher simplement et efficacement les patients dépendants en toute sécurité.



Rubis 3017.00 + option toilette réf 3017.60

FABRICATION  
FRANÇAISE  
DEPUIS 1976

**REVAL**  
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

# Douche & Bain

## Rubis

### Etape 1



Pour commencer, remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau indiqué.

### Etape 2



Positionnez l'appareil au bout du lit et sélectionnez une température sur le régulateur de température.  
Appuyez sur le bouton «chauffage» et attendre que l'appareil atteigne la température désirée (environ 12 min à partir d'eau froide)

### Etape 3



Etendez la moitié du drap de bain fourni avec l'appareil sur le matelas et laissez l'autre moitié par dessus les barrières de sécurité du lit.

### Etape 4



Positionnez la protection de lit étanche sous le patient. Elle doit être positionnée de façon la plus uniforme possible et bien attachée aux barrières du lit à l'aide des pinces fournies.

### Etape 5



Retirer le tuyau d'évacuation de son support et positionnez son extrémité à l'endroit le plus bas du matelas.  
Retirez les vêtements du patient et vérifiez la température de l'eau avant de doucher le patient.

### Etape 6



Quand la température de l'eau est conforme, dinez le patient.

### Etape 7



Une fois le bain terminé, séchez le patient et retirez puis rangez la protection étanche. Revêtir le patient.

### Etape 8



La procédure achevée, videz les bacs eaux propres puis eaux sales dans les toilettes ou siphon de sol. Nettoyez et désinfectez l'appareil selon le protocole.



## Douche & Bain

### Rubis



### POINTS FORTS

- Bac «eaux propres» en Inox de grande capacité.
- Robuste pompe d'aspiration des eaux usées à grand débit.
- Régulateur de température IPX5 paramétrable.
- Température sécurisée à 41°C max.
- Habillage en ABS PMMA pour entretien facile.
- Disconnection totale entre circuits eaux propres et usées.
- Evacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés.
- Lavage et désinfection automatique du circuit et réservoir des eaux usées.
- Désinfection thermique des canalisations.

## Douche au lit

REF. 3017.00



#### DIMENSIONS:

• Hauteur h.t. 106 cm Largeur h.t. 94 cm Profondeur h.t. 58 cm

- 1 Pupitre de commande  
 2 Réservoir de désinfectant  
 3 Bac eaux propres  
 4 Robinet lave-mains (option 3017.60)  
 5 Lavabo (option 3017.60)  
 6 Bassine de toilette inox (option 3017.60)  
 7 Main courante inox  
 8 Trappe de maintenance  
 9 Bidon de désinfectant sous trappe

- 10 Roulette pivotante avec frein  
 11 Vanne de réglade débit douchette  
 12 Douchette de lavage à gachette (flexible lg: 1,75m)  
 13 Evacuation centralisée et réhaussee des bacs  
 14 Flexible d'aspiration eau du matelas (lg: 2,4m)  
 15 Prise d'alimentation secteur 230V  
 16 Filtre démontable sur flexible d'aspiration

#### DESCRIPTIF DE LA DOUCHE AU LIT:

- Châssis en alliage d'aluminium.
- Habillages en ABS PMMA.
- 6 roulettes directionnelles Ø100mm, 2 avec freins.
- Mains courantes en acier inoxydable.
- Bac eaux propres en acier inoxydable, capacité 23L.
- Bac eaux usées en PEHD, capacité 28L avec buse de lavage rotative intégrée.
- Réservoir intégré de 5 litres pour désinfectant.
- Pompe de douche 24V, 8 litres/min
- Pompe de vidange 24V, 14 litres/min
- Fonctionnement simultané possible des 2 pompes
- Régulateur électronique de température sécurisé double affichage (température réelle + consigne)
- Voyant alarme eau trop chaude.
- Voyant de niveau pour réservoir de désinfectant.
- Résistance chauffante 2700W
- Sonde de présence d'eau pour résistance chauffante.
- Disjoncteur différentiel 16A 30mA intégré.
- Éléments électriques dans armoire à porte IPX5.
- Boutons de commande éclairés IP68 basse tension.
- Douchette de lavage avec gachette, débit réglable.
- Bidon de désinfectant sous trappe.
- Tuyauterie en Silicone autoclavable.
- Sonorité: 50dBA / 46dBm
- Poids: 38,3kg

#### DESCRIPTIF DE LA PROTECTION DE MATELAS:

- 13% PES - 87% PVC
- 400gr/m<sup>2</sup>
- Norme feu : ISO14116: Index1



#### CONFORMITÉ:

- Dispositif Médical 93/42/CEE Classe I
- IPX4 - Class 1 - CEI 60601

#### ACCESOIRES FOURNIS:

- 1 Protection de matelas pour lit de 120cm
- 1 Drap de bain 158x220cm 100% coton 400gr/m<sup>2</sup>
- 4 pinces de préhension
- 1 bidon de 1L de désinfectant BFR 4.0



## Douche & Bain

### Rubis

3017.11



Protection de lit 120 x 200cm  
Matière: polyuréthane et tissu enduit.

3017.12



Protection de lit à usage unique.

3017.20



Drap de bain 158 x 200cm  
100% coton 400gr/m<sup>2</sup>

3017.50



Adaptateur de remplissage pour col de cygne.  
(1 adaptateur pour robinet, 1 raccord rapide et 1 tuyau de 1m50)

3017.51



Tuyau de douche complet avec douchette à gachette.

3017.53



Pince de préhension.

3017.54



Kit de 2 distributeurs: 1 pour le shampoing et 1 pour le produit lavant.

3017.55



Panier de rangement en acier inoxydable 304L brillant pouvant être accroché devant ou en extrémité de la douche au lit.

3017.56



Bassines de lavage à usage unique en cellulose.  
Conditionnement:  
100pièces

3017.57



Capiluve en ABS pour shampoing et soins capillaires.

3017.60



Kit de toilette incluant:

- Lavabo lave-mains amovible.
- Robinet à bec orientable avec mousseur.
- Bassine de toilette 4.5 l en acier inoxydable 304L.
- Adaptation possible des bassines à usage unique réf.3017.56

3017.58



Pédiluve en ABS pour soins des pieds et toilette des chevilles et talons.

3017.59



Tuyau d'aspiration complet avec filtre et buse inox.

3017.62



Support ergonomique pour douchette et tuyau d'aspiration.

3010.92



Désinfectant concentré BFR4.0 1L  
Dilué à 0.4%, 1L de BFR4.0 produit 25L de solution désinfectante.

3017.80



Musicothérapie.  
Dispositif Bluetooth avec 2 HP.