

Pansement hémostatique d'urgence QuikClot® Combat Gauze

Premiers Secours

Pansement hémostatique coagulant stérile pour arrêter les saignements en urgence. Le QuikClot® Combat Gauze permet d'agir rapidement pour maîtriser efficacement une hémorragie externe.



Caractéristiques :

- Pansement QuikClot Combat Gauze imbibé de substance hémostatique, coagulant stérile, à usage unique, s'applique même d'une seule main.
- **Bande de gaze imprégnée de kaolin pour le traitement local des plaies hémorragiques :**
=>Kaolin = agent hémostatique qui accélère la coagulation du sang en formant un caillot au niveau de la plaie. Cet agent inorganique active le facteur XII de la voie intrinsèque, ce qui accélère la cascade de coagulation et permet un contrôle plus rapide des saignements. Le clou de coagulation est robuste
- Se retire rapidement, sans risque de déchirure et sans risquer de retirer le caillot qui a été formé par l'agent hémostatique.
- peut être utilisé pour le traitement temporaire des plaies qui saignent abondamment, comme les blessures par balles, coups de couteaux, ou autres blessures hémorragiques non compressibles où les garrots ne peuvent pas être appliqués.
- fait partie des recommandations du CoTCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care)
- Ne contient pas de latex, ni produits d'origine animale ou biologique, ni composants allergènes.
- Détectable aux rayons X.
- Normes et Certification : Dispositif médical de classe III

Référence : FA22.21.030

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

CORBEN
59 rue Stendhal
76620 Le Havre
Tel +33 235 300 185
Fax +33 235 300 186
corben@corben.fr
www.corben.fr



Instructions d'utilisation :

Placez la gaze QuikClot sur la plaie et utilisez-la pour exercer une pression directe sur la source du saignement. Au contact de la plaie, ce pansement hémostatique déclenche et accélère la coagulation du sang dans le but de contrôler rapidement l'hémorragie. Lorsqu'il est en place, il suffit d'appliquer une compression de quelques minutes. Bandez la plaie pour maintenir la pression (avec un pansement compressif par exemple). Faites immédiatement appel à un médecin.

Détails techniques :

- Dimensions : (l x L) 7,6 cm x 3,65 m (déplié)
- Poids : 22.7 g
- Conditionnement : unité
- Ne contient pas de latex
- Pliage en Z pour un dépliage facile
- Pansement stérile à usage unique, scellé sous vide, à ouverture facile (6 encoches préformées aux extrémités du sachet)

Référence : FA22.21.030

Mode d'emploi :

MODE D'EMPLOI



1. Ouvrir le conditionnement et retirer la **Combat Gauze**. Conserver le conditionnement vide.



2. Tasser la **Combat Gauze** dans la plaie et l'utiliser pour appliquer une pression directement par-dessus la source de saignement. Plus d'une **Combat Gauze** peuvent être requises.



3. Continuer à appliquer une pression pendant 3 minutes ou jusqu'à arrêt du saignement.



4. Enrouler et attacher le bandage pour maintenir la pression. Consulter immédiatement un médecin. Montrer les consignes de RETRAIT DU PRODUIT figurant sur le conditionnement au personnel médical.

CE
2797
EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP
The Hague
The Netherlands

RETRAIT DU PRODUIT : 1. Retirer délicatement la gaze de la plaie. **2.** Irriguer abondamment la plaie.

