

GUIDE D'UTILISATION DES ÉLECTRODES

En prenant soin de vos électrodes, vous augmenterez leur durée de vie et le confort de stimulation.



1 Assurez-vous que la peau est propre, sèche, sans aucune crème ou lotion.



2 Retirer l'électrode de son support en la saisissant par le bord ou l'onglet prévu à cet effet.



3 Insérer la fiche banane du câble de stimulation dans la connectique de l'électrode en saisissant fermement les coques plastiques.



4 Repositionner toujours l'électrode sur la face ON du support plastifié.



5 Ne jamais plonger l'électrode dans l'eau.



6 Ne jamais décoller l'électrode de son support en saisissant le câble de connectique.



7 Ne jamais déconnecter l'électrode en tirant sur les câbles de connexion.



8 Ne pas repositionner l'électrode sur la face NO du support plastifié.

- L'usage individualisé des électrodes est recommandé.
- Se reporter au manuel d'utilisation du stimulateur pour connaître le format d'électrode adapté à chaque zone anatomique.
- Une légère noisette de gel peut être ajoutée sous l'électrode.
- Toujours repositionner les électrodes dans leur emballage d'origine et les stocker à température ambiante.
- Des électrodes pour peaux sensibles sont recommandées en cas d'allergies.



Pensez aux électrodes individuelles, c'est garantir une hygiène maximale, mais pas que...

POUR UNE LONGÉVITÉ RECORD

ranger les électrodes correctement sur leur support et les stocker au frais.

POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE

1 sachet = 1 patient

POUR UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

renouveler vos électrodes régulièrement



WEB



BLOG



TRAINING



CEFARTENS



YOUTUBE



LINKEDIN

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Frêt | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | Tél. : 05 59 52 86 90 | Fax : 05 59 52 86 91



© DJO France MKGRSMED356 - Rev A - 10/2020 - Dispositif médical de classe I.
Fabricant : DJO LLC. - Lire attentivement les notices et demander conseil à un professionnel de santé.



**TRAITEMENT
EN ÉLECTROTHÉRAPIE**
**PENSEZ AUX ÉLECTRODES
INDIVIDUELLES PAR MESURE D'HYGIÈNE**




**L'EXPERTISE D'UNE GRANDE MARQUE
AU SERVICE DE LA RÉÉDUCATION**

QUALITÉ, CONFORT, EFFICACITÉ

La qualité d'un traitement par électrostimulation est directement liée à la qualité des électrodes utilisées.

Les électrodes Dura-Stick® sont reconnues pour leur qualité par leur gel MultiStick® des électrodes Dura-Stick® et Gel hypoallergénique des électrodes Dura-Stick® Premium Blue gel.

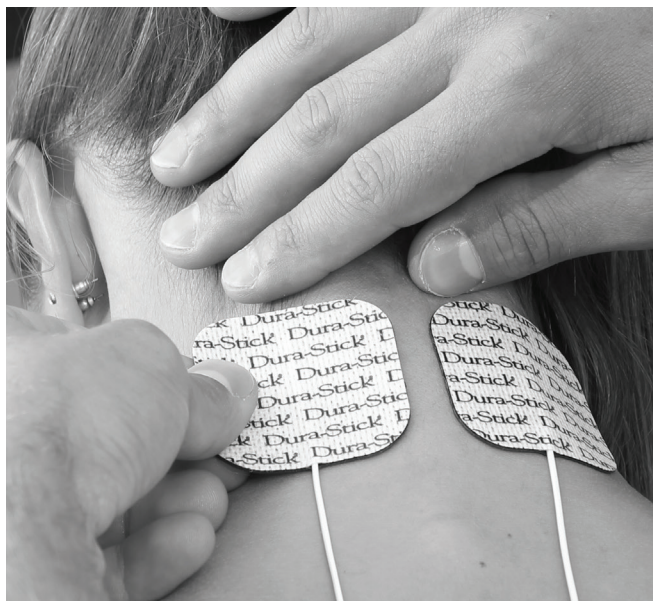

CONNECTIQUE Connectique universelle adaptée à différents types d'appareils : fiches banane mâles 2 mm ou snap.

FORMAT Nombreux formats adaptés à toutes les zones anatomiques : rondes diamètre 32 mm ou 50 mm, carrées, rectangulaires.

MÉTHODE DE CONDUCTION 1000 brins d'acier pour une meilleure répartition du courant, un meilleur confort et une plus grande longévité.

SOUPLESSE Revêtement en textile souple (électrodes Dura-Stick® Plus) ou en polyuréthane (électrodes Dura-Stick® Premium).

LONGÉVITÉ 20 à 60 séances selon la gamme concernée.


ÉLECTRODES DURA-STICK®



AVANTAGES

Longévité : plus de 20 séances.

Économique : un positionnement prix incomparable.


| FORMAT | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
|  Fil 50 x 50 mm - (x 4) | 42190 |

CARACTÉRISTIQUES

Dessus : film textile blanc non lavable.

Dessous : film carbone. Gel Multistick™ hypoallergénique.

Connexion : électrodes à fil.

| FORMAT | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
|  Fil 50 x 90 mm - (x 4) | 42191 |

ÉLECTRODES DURA-STICK® PLUS



AVANTAGES

Longévité : plus de 40 séances.

La référence des électrodes sur le marché.

| FORMAT | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
|  Fil ø 32 mm - (x 4) | 42219 |
|  Fil ø 50 mm - (x 4) | 42197 |
|  Fil 50 x 90 mm - (x 4) | 42199 |
|  Fil 50 x 50 mm - (x 4) | 42198 |
|  Fil 50 x 100 mm (2 sorties) - (x 2) | 42200 |

CARACTÉRISTIQUES

Dessus : film textile non lavable.

Dessous : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.

Connexion : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou snap.

| FORMAT | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
|  Snap 50 x 50 mm - (x 4) | 42204 |
|  Snap 50 x 100 mm 1 Snap - (x 2) | 42223 |
|  Snap 50 x 100 mm 2 Snaps - (x 2) | 42203 |
|  Stimgel 50 x 50 mm - (x 4) pour TENS Belt | 199598V |

ÉLECTRODES DURA-STICK® PREMIUM



AVANTAGES

Longévité : plus de 60 séances.

Confort : pour les patients à peaux sensibles présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.



| FORMAT | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
|  Fil ø 32 mm - (x 4) | 42205 |
|  Fil ø 50 mm - (x 4) | 42206 |
|  Fil 40 x 60 mm - (x 4) | 42207 |
|  Fil 80 x 130 mm - (x 2) | 42208 |

CARACTÉRISTIQUES

Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.

Dessous : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.

Connexion : électrodes à fil.

| FORMAT | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
|  Fil 50 x 50 mm - (x 4) | 42209 |
|  Fil 50 x 89 mm - (x 4) | 42210 |
|  Fil 50 x 50 mm (pour peaux sensibles) - (x 4) | 42211 |
|  Fil 40 x 90 mm (pour peaux sensibles) - (x 4) | 42212 |

Commande minimum : 10 sachets sauf références peaux sensibles (42212 et 42211) 5 sachets.