

GUIDE D'UTILISATION DES ÉLECTRODES

En prenant soin de vos électrodes, vous augmenterez leur durée de vie et le confort de stimulation.



1 Assurez-vous que la peau est propre, sèche, sans aucune crème ou lotion.



2 Retirez l'électrode de son support en la saisissant par le bord ou l'onglet prévu à cet effet.




3 Insérer la fiche banane du câble de stimulation dans la connectique de l'électrode en saisissant fermement les coques plastiques.



4 Repositionner toujours l'électrode sur la face ON du support plastifié.



5 Ne jamais plonger l'électrode dans l'eau.

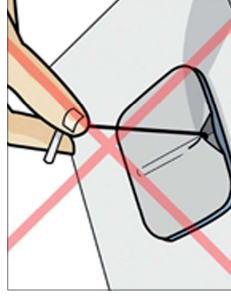

6 Ne jamais décoller l'électrode de son support en saisissant le câble de connectique.



7 Ne jamais déconnecter l'électrode en tirant sur les câbles de connexion.



8 Ne pas repositionner l'électrode sur la face NO du support plastifié.

- L'usage individualisé des électrodes est recommandé.
- Se reporter au manuel d'utilisation du stimulateur pour connaître le format d'électrode adapté à chaque zone anatomique.
- Une légère noisette de gel peut être ajoutée sous l'électrode.
- Toujours repositionner les électrodes dans leur emballage d'origine et les stocker à température ambiante.
- Des électrodes pour peaux sensibles sont recommandées en cas d'allergies.



Pensez aux électrodes
individuelles,
c'est garantir
une hygiène maximale,
mais pas que...

POUR UNE LONGÉVITÉ RECORD
 ranger les électrodes
correctement sur leur
support et les stocker
au frais.

POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE
 1 sachet = 1 patient

POUR UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
 renouveler vos
électrodes
régulièrement



DJO France S.A.S. | Centre Européen de Frêt | 3 rue de Bethar |
64990 Mouguerre | Tél. : 05 59 52 86 90 | Fax : 05 59 52 86 91



© DJO France MKGRSMED356 - Rev A - 10/2020 - Dispositif médical de classe I.
Fabricant : DJO LLC - Lire attentivement les notices et demander conseil à un professionnel de santé.



**TRAITEMENT
EN ÉLECTROTHÉRAPIE**
PENSEZ AUX ÉLECTRODES
INDIVIDUELLES PAR MESURE D'HYGIÈNE

**L'EXPERTISE D'UNE GRANDE MARQUE
AU SERVICE DE LA RÉÉDUCATION**