



JOYCEclinic FF

Masque patient unique



JOYCEclinic FF

La solution parfaite en toutes situations.

Avec notre nouveau masque Full Face patient unique pour ventilation non invasive aiguë, vous retrouverez la qualité LÖWENSTEIN Medical à laquelle vous êtes habitués.

Rapide et simple à ajuster, le masque JOYCEclinic FF assure un maintien sûr et confortable, même à des pressions de l'ordre de 50 hPa.

Le harnais, qui permet le maintien stable du masque même à des pressions élevées, peut être retiré rapidement et simplement en tirant sur la sangle d'ouverture rapide.

Le concept du masque patient unique empêche toute contamination croisée.

Malgré la pression sur les coûts à l'hôpital, vous n'aurez pas à faire de compromis :

- Plus de contamination croisée
- Jupe et harnais stables sous pression
- Sangle d'ouverture rapide

Quatre adaptateurs coudés interchangeables vous permettront de disposer du masque approprié quelle que soit la situation et la combinaison d'appareils de ventilation.

JOYCEclinic FF est disponible en trois tailles dans les variantes non ventilé, non ventilé avec valve anti-asphyxie (VAA) (fuite 1) et ventilé avec VAA (fuite 2). Le gabarit de masque vous aidera à trouver la bonne taille – sans avoir à toucher le masque grâce au conditionnement à deux compartiments.

L'adaptateur endoscopique, disponible en tant qu'accessoire, permet d'effectuer une bronchoscopie sans avoir à interrompre la ventilation. Les raccords coudés NV, NV + VAA et VENTILE sont également disponibles comme pièces de rechange.

Tous les masques sont disponibles par lot de 10 sans sac à deux compartiments. Le lot comprend aussi un mode d'emploi et un gabarit de masque.

- 3 tailles
- 4 adaptateurs coudés interchangeables
- Gabarit de masque
- Conditionnement à deux compartiments
- Masque à l'unité ou lot de 10

Adaptateurs coudés

Le levier sur l'anneau de sécurité permet d'enlever facilement le raccord coudé et de le remplacer rapidement par un autre à tout moment.



NV sans VAA*



NV avec VAA* (fuite 1)



V avec VAA* (fuite 2)



Adaptateur endoscopique

*VAA = Valve Anti-Asphyxie (valve d'expiration d'urgence)

Douille rotative


Avec la douille rotative intégrée dans toutes les variantes ventilées, il est également possible d'utiliser un tuyau CPAP.

Douille rotative




Utilisation des adaptateurs coudés


Raccord NV

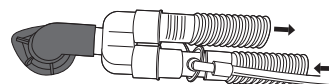

- Circuit patient double branche avec inspiration et expiration séparées et valve d'expiration côté appareil

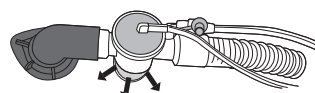


- Circuit patient simple branche avec valve d'expiration proximale

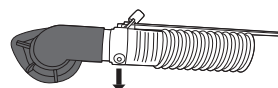

- Circuit patient simple branche avec fuite intentionnelle

Raccord NV + VAA

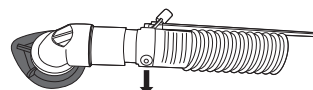

- Circuit patient simple branche avec fuite intentionnelle et sécurité supplémentaire en cas d'arrêt de l'appareil (valve anti-asphyxie)




- Combinaison standard pour ventilateurs avec fuite intentionnelle

- Le circuit patient simple branche avec valve d'expiration proximale ne peut pas être utilisé.

- Le flux n'est pas assez élevé pour maintenir la valve d'expiration d'urgence ouverte.

Raccord ventilé

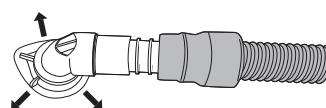

- Douille rotative et tuyau CPAP pour l'utilisation de prisma VENT ou ventilateurs similaires

- Valve d'expiration externe (par ex. Silentflow 2) au lieu de la douille rotative pour une évacuation plus efficace du CO₂.

Références	
Articles, Conditionnement à l'unité	Référence
JOYCEclinic FF NV • Taille S • Taille M • Taille L	WM 26805 WM 26815 WM 26825
JOYCEclinic FF NV + VAA (fuite 1) • Taille S • Taille M • Taille L	WM 26845 WM 26855 WM 26865
JOYCEclinic FF ventilé (fuite 2) • Taille S • Taille M • Taille L	WM 26903 WM 26913 WM 26923
Articles, Conditionnement par 10	Référence
JOYCEclinic FF NV • Taille S • Taille M • Taille L	WM 26857 WM 26858 WM 26859
JOYCEclinic FF NV + VAA (fuite 1) • Taille S • Taille M • Taille L	WM 26869 WM 26870 WM 26871
JOYCEclinic FF ventilé (fuite 2) • Taille S • Taille M • Taille L	WM 26866 WM 26867 WM 26868

Accessoires	
Adaptateur endoscopique	WM 15864

Pièces de rechange	
Raccord NV	WM 25269
Raccord NV + AAV	WM 26834
Raccord ventilé	WM 26833
Harnais JOYCEclinic FF (5 unités)	WM 26835
Douille rotative	WM 26916

Caractéristiques techniques	
Classe de produit selon 93 / 42 / CEE	Ila
Raccord conique selon EN ISO 5356-I	Ø 22 mm (femelle)
Plage de pression thérapeutique	4 hPa - 50 hPa
Espace mort géométrique • Taille S • Taille M • Taille L	225 ml 255 ml 305 ml

© Tous droits réservés.
Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Löwenstein Medical Technology.



CE 0197



medical technology
made in germany

Mentions légales

Dénomination :
Indications :
Classe du dispositif médical :
Organisme notificateur :
Bon usage :
Remboursement :

Fabricant :
Distributeur :

JOYCEclinic Full Face - JOYCEclinic Full Face Non-Vented
Masque Bucco-nasal à usage unique. Utilisation en milieu hospitalier.
TUV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg-Germany
Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif.
Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.amel.fr
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG
Löwenstein Médical France.

LÖWENSTEIN medical
6 rue de l'Aulnay Dracourt
91300 MASSY - France
T : +33 (0)1 69 35 53 20
france@loewensteinmedical.com
www.loewensteinmedical.com

