


Guide de référence rapide de l'électrocardiographe PageWriter TC10

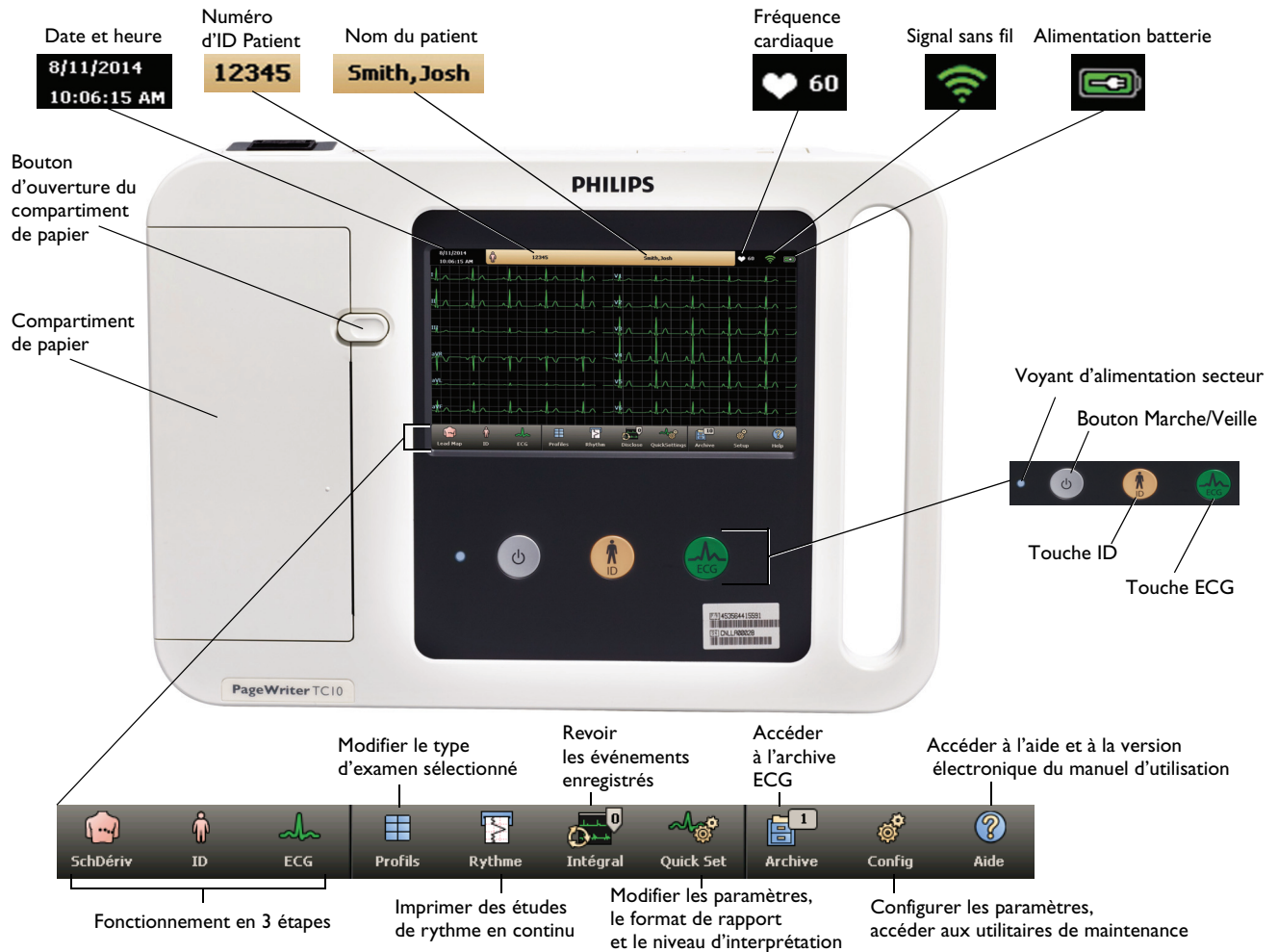

Enregistrement d'un ECG de routine



1 Appuyez sur la touche **SchDériv** sur l'écran principal pour afficher l'emplacement des électrodes ou des fils d'électrodes qui pourraient être mal connectés. Une électrode ou un fil mal connecté est signalé par une croix rouge.



2 Une fois le câble patient correctement connecté, la touche **ID** s'allume. Appuyez sur la touche **ID** de l'électrocardiographe. Entrez les informations patient manuellement ou téléchargez-les à partir d'une liste de travail.



3 Lorsque toutes les informations patient requises ont été saisies, tous les fils correctement connectés et le signal de bonne qualité, la touche **ECG** s'allume. Appuyez une fois sur la touche **ECG** de l'électrocardiographe pour lancer l'acquisition de l'ECG. L'ECG s'affiche sur l'écran de prévisualisation.

Enregistrement d'un ECG STAT ou Urgent




1 Appuyez sur la touche **SchDériv** sur l'écran principal pour afficher l'emplacement des électrodes ou des fils d'électrodes qui pourraient être mal connectés. Une électrode ou un fil mal connecté est signalé par une croix rouge.



2 Appliquez deux brèves pressions rapides sur la touche **ECG** de l'électrocardiographe pour lancer l'acquisition de l'ECG. L'ECG s'affiche sur l'écran de prévisualisation et est automatiquement imprimé.

PHILIPS

Ecran de prévisualisation

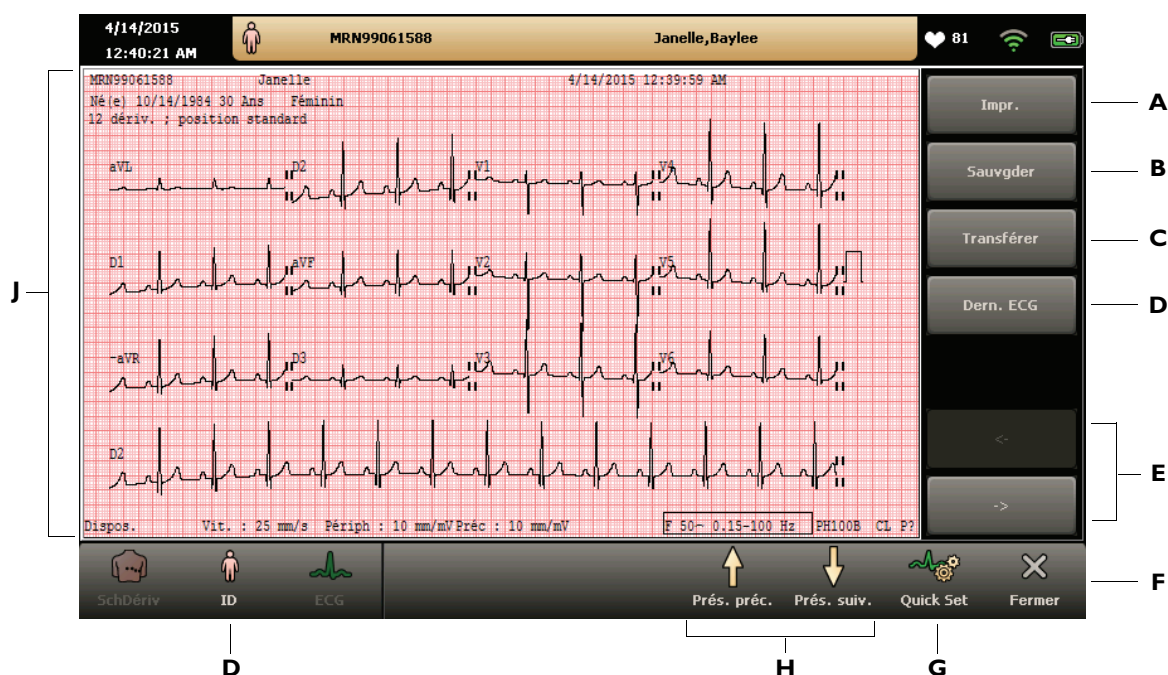

Fonctionnalité	Description*
A Impr.	Appuyez sur cette touche pour imprimer l'ECG affiché.
B Sauvgder	Appuyez sur cette touche pour sauvegarder l'ECG affiché.
C Transférer	Appuyez sur cette touche pour envoyer l'ECG affiché vers un système de gestion des ECG Philips ou un autre système de gestion des ECG.
D Dern. ECG	Appuyez sur cette touche pour revoir l'écran de prévisualisation et imprimer l'ECG le plus récent du même patient à partir de l'électrocardiographe. L'utilisation de cette fonction nécessite une connexion réseau active au serveur du système de gestion des ECG Philips spécifié.
E Page précédente/ suivante	Appuyez sur cette touche pour voir des pages supplémentaires du rapport ECG affiché.
F Fermer	Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran de prévisualisation et revenir à l'écran principal.
G Quick Set	Appuyez sur cette touche pour modifier les réglages des filtres optionnels (Artefact, Dérive ligne base), les réglages de détection de la stimulation, les réglages de vitesse ou d'échelle des courbes et les réglages des filtres passe-haut et passe-bas. Les nouveaux paramètres sont alors appliqués immédiatement.
H Prés. préc./ Prés. suiv.	Appuyez sur cette touche pour modifier la présentation/le format du rapport ECG affiché à l'écran et l'étude de rythme. Les nouveaux paramètres sont alors appliqués immédiatement.
I ID	Appuyez sur cette touche pour saisir les informations patient manquantes pour l'ECG affiché (non disponible avec la fonction Dern. ECG).
J Rapport ECG	Affiche le rapport ECG. Appuyez sur la touche Impr. pour imprimer le rapport ECG en appliquant le nouveau format. Modifier le niveau d'interprétation affiché sur l'aperçu de l'ECG dans Quick Set > Analyse . Appuyez sur la touche Impr. pour imprimer le rapport ECG en appliquant la nouvelle interprétation.

*Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'utilisation de l'électrocardiographe PageWriter TC10*.

