

# Notice d'utilisation

PROTECTION DE LA PERSONNE

## Surblouse enduction

Articles concernés: 53100

### 1- Utilisateurs:



Personnel



Patients



Visiteurs

### 2- Conditionnement:



10 unités par sachet



10 sachets par carton

### 3- Stockage:

A conserver dans un local sec à l'abri de la chaleur et de l'humidité.



### 4- Gestion des déchets:

a) Blouse usagée:



Déchets  
ménagers

Déchets  
cliniques

b) Sachet plastique:



Déchets  
ménagers

c) Carton:



Déchets  
ménagers

Déchets  
recyclables

### 5- Utilisation:

Etape 1



Enfiler la blouse  
par devant

Etape 2



Fermeture dorsale  
Lanières col

Etape 3



Fermeture dorsale  
Lanières taille