

Instruction d'utilisation Ceinture de transducteur fœtal à patient unique

Utilisation conforme :

- Ce produit fonctionne en fonction de la position de la boucle sur la ceinture pour fixer le transducteur fœtal.

Présentation du produit :

- Nom du produit : ceinture de transducteur fœtal à patient unique.
- Structure du produit : Il est composé d'une ceinture élastique et de boutons pour la fixation.

Gamme de produits :

- Il est utilisé avec un transducteur fœtal pendant la grossesse en surveillance fœtale, pour fixer le transducteur fœtal.

Condition d'utilisation :

- Température : 0 °C ~ 40 °C
- Humidité relative : 15% ~ 95%
- Pression atmosphérique : 70kpa ~ 106kpa


Emballage et stockage :

- La ceinture fœtale à patient unique doit être emballée individuellement dans son sachet, le produit emballé doit être stocké dans une bonne pièce de ventilation.
- Environnement de stockage comme ci-dessous :

- 1, Température : -10 °C ~ + 40 °C
- 2, Humidité relative : ≤80%
- 3, Pression atmosphérique : 70kpa ~ 106kpa

Installation / utilisation :

- Fixez une extrémité de la ceinture au transducteur en engageant l'un des trous de la ceinture sur le bouton sur le dessus du transducteur.
- Maintenez le transducteur en position, tendez l'autre extrémité de la ceinture et engagez la ceinture sur le bouton, en veillant à une tension suffisante pour maintenir le transducteur en contact ferme avec l'abdomen.
- Évitez de trop serrer car cela causera un inconfort inutile au patient.

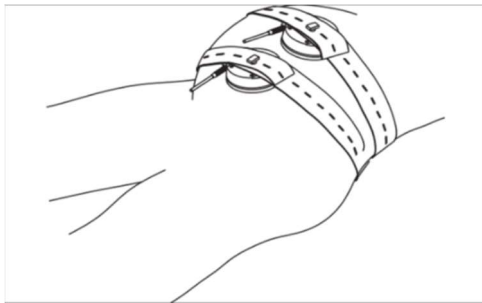

Garantie / période de validité :

- Période de garantie : N/A (patient unique)
- Période de validité : 2 ans.


Remplacer et abandonner :

- Remplacer : dans ces situations telles que fracture, dommage élastique, veuillez changer la nouvelle ceinture fœtale à utiliser.
- Abandon : la ceinture abandonnée peut être traitée comme un déchet normal.

Contre-indications, précautions, avertissements et mises en garde :

- Contre-indications : Les ceintures ne doivent pas être fixées sur le site de la blessure.
- Les allergies / arrêter d'utilisation.
- Mises en garde : veuillez lire les instructions avant utilisation.

Marque :

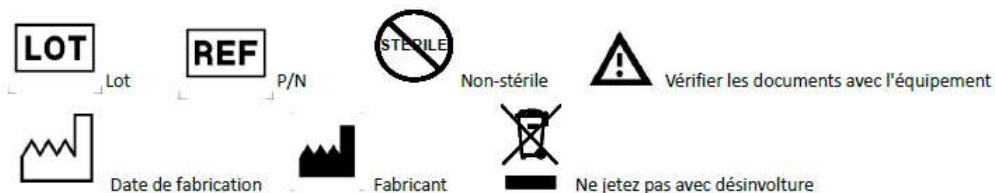

Manufacturer: Shenzhen Belcare Technology Co., Ltd.

Address: 402, 21# Huimin 2nd Road, Guihua community, Longhua District, Shenzhen, China 518110

Web.: www.szbelcare.com Email: joe@szbelcare.com