




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr

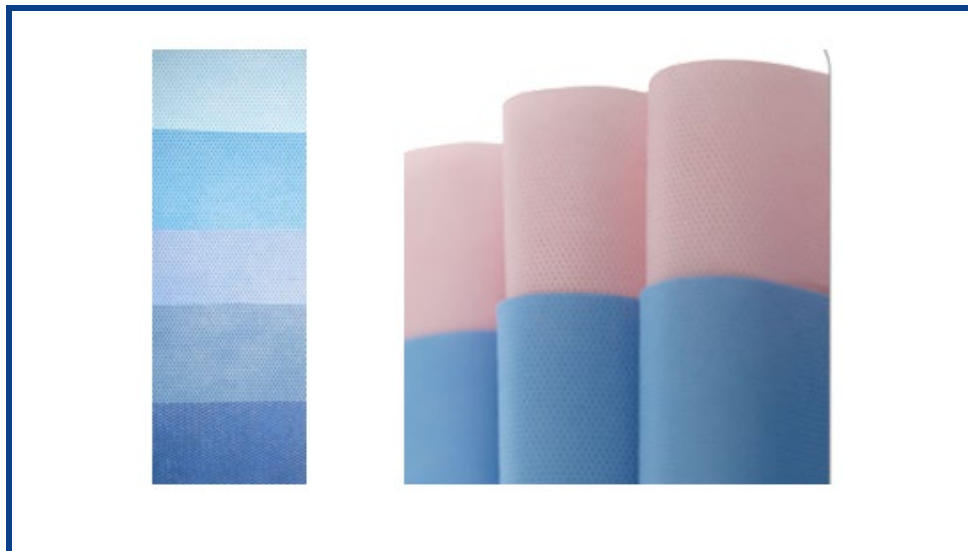

Fiche technique

FEUILLES EMBALLAGE DE STÉRILISATION GEMINI «INTERFOLIAGE» GRAMMAGE MEDIUM

Référence(s)

Réf #	Dimensions (cm)	Qté / sachet	Qté / carton	Couleur
Grammage Medium: 61 g/m ²				
GEM3124INT-EU	61 x 61	50	250	Bleu et Rose
GEM3130INT-EU	76 x 76	50	200	Bleu et Rose
GEM3136INT-EU	91 x 91	50	150	Bleu et Rose
GEM3140INT-EU	102 x 102	50	150	Bleu et Rose
GEM3148INT-EU	122 x 122	50	50	Bleu et Rose
GEM3154INT-EU	137 X 137	50	50	Bleu et Rose
GEM3172INT-EU	137 x 183	50	50	Bleu et Rose

Description

Les feuilles d'emballage de stérilisation interfoliage GEMINI sont conçues pour emballer les dispositifs médicaux afin d'être stérilisés par un professionnel de santé en utilisant des méthodes de stérilisation recommandées suivantes:

- Vapeur d'eau saturée sous pression
134° C pendant 3 à 18 minutes
- Vapeur d'eau saturée
121°C pendant 15 à 30 minutes
- Oxyde d'éthylène (ETO)
Exposition de 60 minutes à 725mg/L à 100% ETO à 55°C et 40-80% d'humidité relative, suivie d'un temps d'aération de 12 heures
- Produits de stérilisation avancée STERRAD® Système de stérilisation
STERRAD® 50, 100S, et 200S
STERRAD® NX™, (Cycle standard, Cycle avancé)
STERRAD® 100NX™, (Cycle standard, Cycle Flex, Cycle EXPRESS, Cycle DUO)
STERIS V-PRO® Systèmes de stérilisations à faible température
STERIS V-PRO® 60 (Cycle Lumen, Cycle Non Lumen et Cycles Flexible)
STERIS V-PRO® 1 (Cycle Lumen)
STERIS V-PRO® 1 Plus (Cycle Lumen and Cycle Non Lumen)
STERIS V-PRO® maX (Cycle Lumen, Cycle Non Lumen, and Cycle Flexible)
STERIZONE® VP4 Stérilisateur cycle de stérilisation simple pré-configuration

Les feuilles d'emballage de stérilisation interfoliage GEMINI sont conçues pour permettre la stérilisation des dispositifs médicaux emballés et aussi pour maintenir la stérilité du contenu suite au procédé de stérilisation dans les conditions environnementales contrôlées suivantes:

Pré-vide et vapeur d'eau saturée 2 ans
Oxyde d'éthylène (ETO) 365 jours
Cycles STERRAD® 50, 100S, 200S, NX™, et 100NX™: 1 an
STERIS V-PRO® 1, 1Plus, maX, et 60: 1 an
STERIZONE® VP4: 1 an

Les établissements de santé doivent suivre les protocoles établis conformément aux pratiques normalisées afin de surveiller le maintien de la stérilité des paniers emballés

Révision : 4

Titre de document: FINT.441 - Technical

Numéro de document: EU1-00004-F-

Les feuilles d'emballage de stérilisation interfoliages GEMINI peuvent être utilisés pour l'emballage séquentiel ainsi que pour toutes les méthodes d'emballage

Matière(s)

SSMMS polypropylène. Bleu et rose
61 g/m²

Conditionnement

Voir «Références»

Emballage

Sachet en PE - Carton - Qté par carton: Voir «Références»
Doit être stocké dans un endroit sec et propre

Fabricant

Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield Illinois, États-Unis 60093
EN ISO 13485

Fabriqué dans une usine certifiée WRAP Medline contribue au respect du droit humain et au droit du travail.

**Réglementation**

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745 - Classe du dispositif: I non stérile

Conforme à la norme EN ISO 11607, «emballages pour des dispositifs médicaux prêts à être stérilisés» - en utilisant les tests de EN 868 partie 2, «matériaux d'emballage pour les dispositifs médicaux prêts à être stérilisés - enveloppe de stérilisation - exigences et méthodes d'essai».

Les feuilles de stérilisation simple GEMINI offrent un système de barrière stérile. Tel que défini par EN ISO 11607, «le système de barrière stérile est l'emballage minimum requis pour prévenir l'introduction de micro-organismes afin d'assurer une présentation aseptique du produit (dispositif médical) jusqu'au point d'utilisation»

(Tests disponibles sur demande)

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Sans latex

© 2021 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.

TDS_GEM31XXINT-EU_FR05