



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43

www.medline.eu/fr/



Fiche technique

Plateau de transfert de stérilisation

Référence(s)

GEMTRAY3CE, GEMTRAY4CE

Description

Code	Description
GEMTRAY3CE	Plateau de transfert de stérilisation 30x56 cm (12"x22")
GEMTRAY4CE	Plateau de transfert de stérilisation 43x68.6 cm (17"x27")

Matière(s)

Plastique rigide 100% polypropylène avec perforations et un fond strié permettant la circulation d'air.

Conditionnement

GEMTRAY3CE	10 unités par carton
GEMTRAY4CE	8 unités par carton

Emballage

Les plateaux de transfert sont conditionnés dans un carton

Fabricant

Medline Industries Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (EU) 2017/745
Classe du dispositif: I non stérile

- Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Mode d'emploi

GEMTRAY est un plateau de transfert utilisé avec des paniers ou des sets d'instruments emballés. Enveloppez les paniers ou les sets d'instruments en fonction de votre procédure habituelle.

Une fois emballé, placez le panier ou le set sur le plateau de transfert jusqu'à son ouverture au bloc opératoire.

L'utilisation du plateau de transfert permet de déplacer avec précaution les paniers et les sets d'instruments une fois emballés et stérilisés selon les procédures de votre établissement.

Les plateaux de transfert sont compatibles avec l'autoclave à vapeur.

Après refroidissement, déplacez le plateau de transfert avec le panier emballé dans la zone de stockage stérile en attendant son ouverture au bloc opératoire.

Le plateau doit être inspecté et doit être éliminé s'il est endommagé ou craquelé.

Nettoyez et désinfectez le plateau de transfert conformément aux protocoles de votre établissement et aux normes en vigueur.

Éliminez le produit conformément à la politique de votre établissement.

Révision: 3

Numéro de document: EU1-00004-F- Titre de document: FINT.441 - Technical