


SONDE CO2 IRMA MONNAL

Code produit ALMS : KB020400

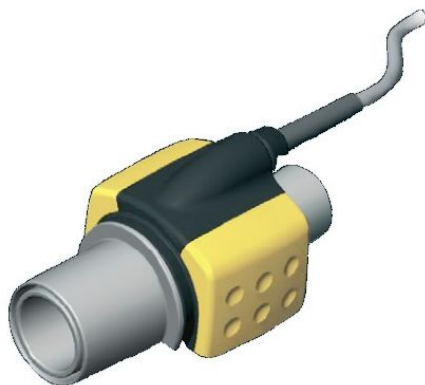

Destinée à être connectée sur un circuit patient pour assurer le monitoring des gaz inspirés-expirés. La sonde CO2 IRMA doit être connectée sur un adaptateur avant d'être raccordée à la machine puis au patient.

La sonde se raccorde à la prise de connexion etCO2.

La sonde CO2 IRMA ne doit pas être utilisée en parallèle de l'administration de médicaments en spray, sous peine de dégrader la transmission infrarouge, ou avec des agents anesthésiants inflammables.

Ne pas brancher la sonde CO2 IRMA en sortie d'un coude pour éviter l'accumulation de sécrétions ou d'humidité dans l'adaptateur.

Sonde CO2 IRMA fournie après achat de l'option logicielle etCO2.

Nettoyage de la sonde CO2 IRMA : utiliser un chiffon humidifié à l'alcool (70% éthanol ou isopropanol maximum). Ne jamais stériliser ou plonger dans un liquide la sonde.

La sonde IRMA comporte une LED qui indique son état.

Etat de la LED	Description
Vert continu	OK
Vert clignotant	En cours de calibration
Rouge continu	Erreur sur la sonde
Rouge clignotant	Vérifier l'adaptateur