


# Notice technique d'utilisation du D.S.A Fred Easy Life

## Description du D.S.A FRED EASY LIFE

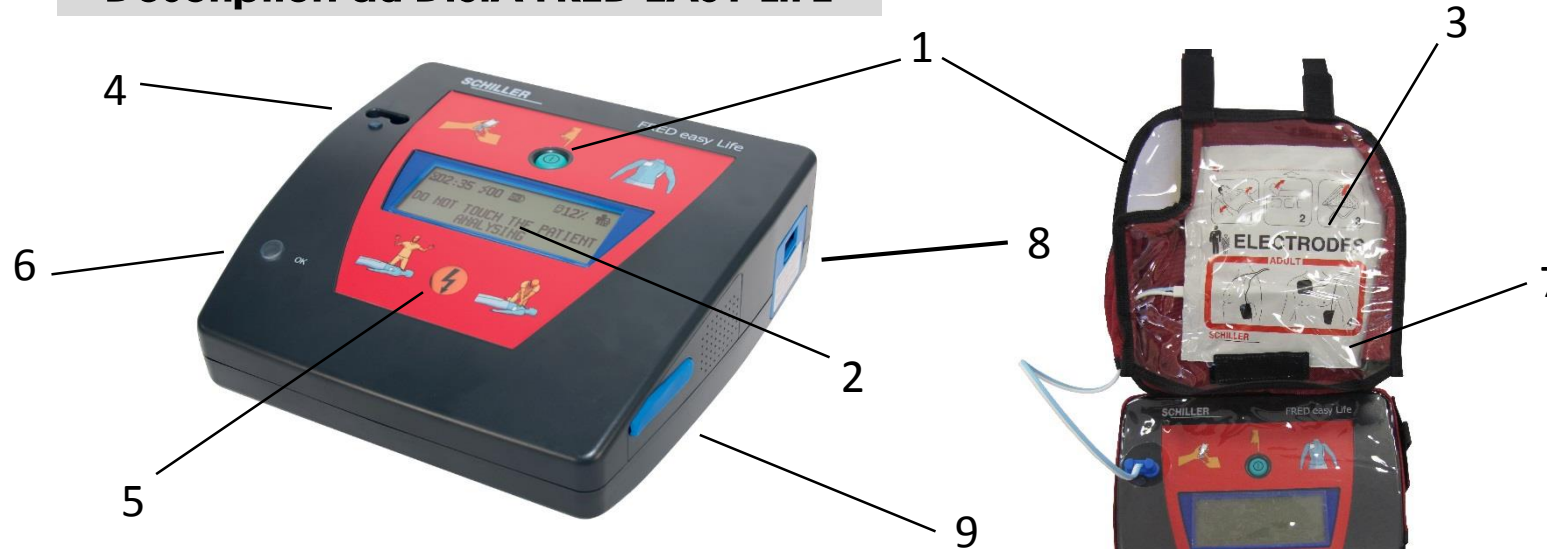

1. Ouvrir la sacoche et appuyer sur le bouton vert pour allumer le D.S.A
2. Indication des numéro d'urgence à composer (112), (15) et (18)
3. Electrodes de défibrillations pré-connectées
4. Connecteur du câble des électrodes pré-connectées
5. Indicateur lumineux de délivrance du choc électrique (pour version entièrement automatique)
6. Indicateur lumineux de fonctionnement général de l'appareil (clignote en vert appareil en veille)
7. Emplacement 2<sup>e</sup> paires d'électrodes de défibrillation (pour enfants)
8. Pile lithium
9. Emplacement carte mémoire



SAMU



Pompiers



Toutes  
urgences

- ☐ **1. Appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112**
- ☐ **2. Ouvrir** la sacoche de l'appareil et appuyez sur le bouton vert pour l'allumer.
- ☐ **3. Ouvrir** le sachet d'électrodes, les **coller** sur la poitrine de la victime et **brancher** le connecteur dans le DSA (si nécessaire)

**Continuer de suivre les instructions vocales (ou texte) du défibrillateur**

*Le choc électrique ne sera proposé que si l'appareil l'autorise : Dans ce cas, le DSA réalise un décompte de 3 secondes et demande de délivrer le choc en appuyant sur le bouton orange prévu à cet effet.*

- ☐ **4. Continuer à suivre les instructions du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secours.**



**SCHILLER**

FRANCE S.A.S