

LIFE-BASE


Unité de transport

LIFE-BASE light XS
LIFE-BASE light
LIFE-BASE 1 NG XS

LIFE-BASE 1 NG
LIFE-BASE 1 NG XL
LIFE-BASE Mini II

LIFE-BASE III
LIFE-BASE 3 NG
LIFE-BASE 4 NG

Notice d'utilisation

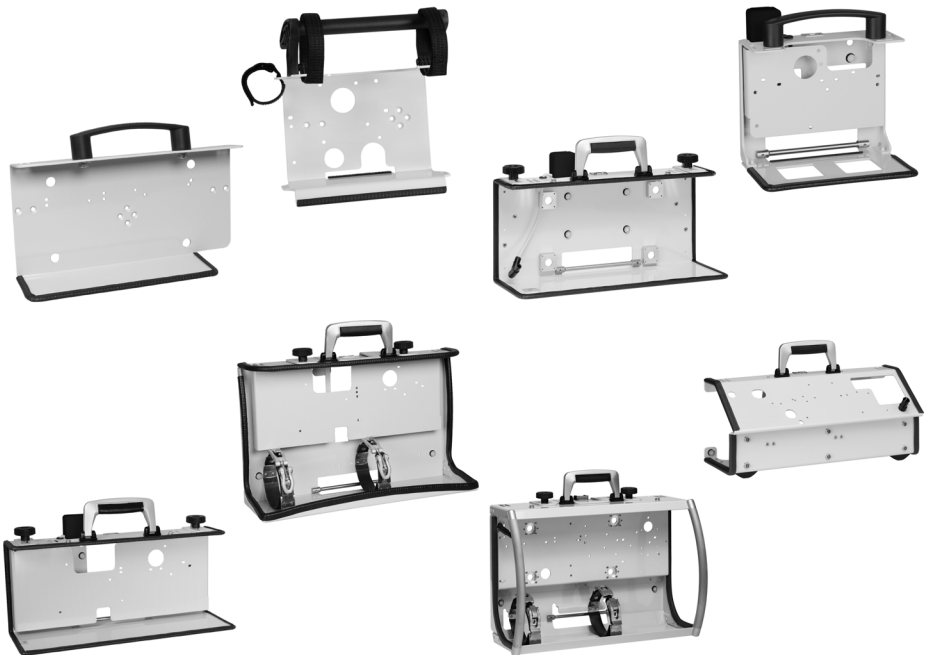

Lire la présente notice d'utilisation avant d'utiliser le dispositif.
Le non-respect de la notice d'utilisation peut être à l'origine de
blessures graves voire mortelles.

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	À propos de ce document	5
1.2	Signification des mises en garde	5
2	Sécurité	7
2.1	Destination	7
2.2	Domaines d'application prévus	8
2.3	Effets secondaires et complications possibles	8
2.4	Exclusions et limites de la destination	9
2.5	Bénéfice clinique du dispositif	9
2.6	Critères exigés de l'utilisateur	9
2.7	Prévention des pannes de l'appareil	10
2.8	Respect des règles d'hygiène	11
2.9	Utilisation sans risques de l'unité de transport et de ses accessoires	11
3	Description	13
3.1	Vue d'ensemble	13
3.2	Accessoires et autres pièces	21
4	Montage	26
4.1	Montage du sac de protection sur l'unité de transport	26
4.2	Montage du sac d'accessoires sur l'unité de transport ou sur le sac de protection	33
4.3	Montage de la sangle sur l'unité de transport	38
4.4	Montage de la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport	40
4.5	Montage de l'appareil sur l'unité de transport	45
5	Contrôle du fonctionnement	83
5.1	Périodicités	84
5.2	Contrôle visuel de l'unité de transport	84
5.3	Contrôle des colliers de serrage	85

5.4	Vérification du verrouillage du support mural ou du support plafond	85
5.5	Vérification du verrouillage des pinces de fixation	86
5.6	Vérification des vis sur le support mural	87
5.7	Vérification de la fixation sur barres	87
5.8	Vérification des sacs	88
5.9	Vérification de l'étanchéité du système	89
5.10	Élimination des fuites du système	91
6	Utilisation de l'appareil	92
6.1	Fixation de l'unité de transport sur un support mural ou sur un support plafond	92
6.2	Retrait de l'unité de transport d'un support mural ou d'un support plafond	94
6.3	Fixation de l'unité de transport sur une barre ou sur un rail d'appareillage	97
6.4	Retrait de l'unité de transport d'une barre ou d'un rail d'appareillage	105
6.5	Rangement des accessoires de l'appareil	111
7	Démontage	112
7.1	Démontage du sac de protection de l'unité de transport	112
7.2	Démontage du sac d'accessoires de l'unité de transport ou du sac de protection	118
7.3	Démontage de la sangle de l'unité de transport	121
7.4	Démontage de la bouteille d'oxygène de l'unité de transport	123
7.5	Démontage de l'appareil de l'unité de transport	126
8	Retraitement hygiénique	151
8.1	Périodicités	153
8.2	Préparation du retraitement hygiénique	153
8.3	Nettoyage manuel des pièces	154
8.4	Désinfection par essuyage des pièces	155
8.5	Retraitement des pièces en machine	157
8.6	Préparation de pièces pour réutilisation	158
8.7	Plan de nettoyage et de désinfection	159

9	Maintenance	162
9.1	Périodicités	162
10	Stockage	163
11	Transport	164
12	Élimination	165
12.1	Unités de transport et accessoires sans interface de charge	165
12.2	Unités de transport et accessoires avec interface de charge	165
12.3	Pièces contaminées	165
13	Étendue de la livraison	166
13.1	Accessoires et autres pièces	166
14	Caractéristiques techniques	178
15	Marquages	181
16	Garantie	183
17	Déclaration de conformité	184

1 Introduction





1.1 À propos de ce document

Le présent document décrit tous les différents modèles possibles de l'unité de transport.

Les fonctions, accessoires et autres pièces décrits ou illustrés dans ce document dépendent du modèle acquis et ne sont donc pas toujours disponibles dans tous les cas.

Les illustrations dans la présente notice d'utilisation ont pour but de rendre les explications plus compréhensibles et sont susceptibles de différer de votre modèle. D'éventuelles divergences ne justifient en aucun cas une revendication quelconque.

1.2 Signification des mises en garde

 DANGER	Danger ! DANGER attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
 AVERTISSEMENT	Avertissement ! AVERTISSEMENT attire l'attention sur une situation dangereuse risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
 ATTENTION	Attention ! ATTENTION attire l'attention sur une situation dangereuse risquant d'entraîner des blessures légères si elle n'est pas évitée.
AVIS	Avis ! AVIS caractérise des dangers susceptibles de provoquer des dommages matériels ou écologiques.
	Désigne des conseils utiles pendant les manipulations.

Mises en garde dans les manipulations

Des mises en garde peuvent porter sur des manipulations individuelles. Ces mises en garde sont alors intégrées dans la description de la démarche correspondante afin de ne pas entraver le flux de la lecture. Elles utilisent les symboles et termes de signalisation décrits plus haut.

Exemple d'une mise en garde intégrée :

1. Suspendre l'unité de transport sur la barre avec la fixation sur barres.
2. **▲ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**
Serrer la vis de blocage jusqu'à ce que l'unité de transport ne puisse plus bouger.

2 Sécurité

La notice d'utilisation fait partie de l'unité de transport. Ne pas respecter entièrement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité suivantes peut compromettre le traitement, ou entraîner sa défaillance, et risque de provoquer des blessures graves, voire potentiellement mortelles pour le patient et l'utilisateur.

- ⇒ Se conformer entièrement aux instructions de la notice d'utilisation.
- ⇒ Conserver la notice d'utilisation à proximité de l'unité de transport, toujours à disposition des utilisateurs.
- ⇒ N'utiliser l'unité de transport que conformément à sa destination (voir « 2.1 Destination », page 7).
- ⇒ **Ne pas** utiliser l'unité de transport en présence des contre-indications définies.
- ⇒ Se conformer aux notices d'utilisation des appareils montés et de leurs accessoires.
- ⇒ Se conformer aux instructions de montage des accessoires et autres éléments.

Veuillez signaler au fabricant et aux autorités compétentes tous les incidents graves survenus avec le dispositif.

2.1 Destination

2.1.1 Indications

L'unité de transport LIFE-BASE sert à loger, protéger et transporter :

- différents dispositifs médicaux des séries MEDUMAT, MEDUVENT, MEDUCORE, MODUL et OXYWAY,
- un assemblage composé de ces dispositifs médicaux et des composants accessoires indispensables pour leur emploi.

2.1.2 Groupe(s) cible(s) de patients

Aucune restriction.

2.1.3 Utilisateurs auxquels le dispositif est destiné

Les utilisateurs dans le cadre de la destination médicale sont un personnel médical ou paramédical possédant une formation en médecine d'urgence. Par exemple :

- Urgentistes
- Médecins de soins intensifs
- Ambulanciers/secouristes
- Autres professionnels apparentés

2.1.4 Contre-indications

Aucune contre-indication n'est connue à ce jour pour l'utilisation du dispositif.

2.2 Domaines d'application prévus

- Intervention mobile en médecine d'urgence pour la prise en charge lors d'une intervention d'urgence extra-hospitalière
- Pendant les transferts inter services dans l'hôpital ou les cliniques
- Pendant les transferts entre un hôpital et d'autres lieux en véhicule de secours, bateau, avion ou hélicoptère

2.3 Effets secondaires et complications possibles

Aucun effet secondaire n'est connu à ce jour pour l'utilisation du dispositif.

2.4 Exclusions et limites de la destination

L'appareil **n'est pas** autorisé pour les applications suivantes :

- Utilisation en combinaison avec des tomographes à résonance magnétique (TRM, RMN, IMN)
- Utilisation en environnement toxique
- Utilisation par un utilisateur non habilité/un personnel non médical ou paramédical
- Utilisation avec des appareils et accessoires non validés

2.5 Bénéfice clinique du dispositif

L'unité de transport LIFE-BASE et ses accessoires ne comportent en eux-mêmes aucun bénéfice clinique propre, mais, en mettant rapidement et aisément à la disposition de l'utilisateur les accessoires médicaux nécessaires à l'utilisation des appareils, elle augmente le bénéfice médical des dispositifs médicaux des séries MEDUMAT, MEDUVENT, MEDUCORE, MODUL et OXYWAY qu'elle supporte, ainsi que celui d'un assemblage associant ces dispositifs médicaux.

2.6 Critères exigés de l'utilisateur

L'utilisateur doit satisfaire aux exigences suivantes :

- L'utilisateur doit posséder une formation médicale ou paramédicale ainsi que les connaissances professionnelles requises et l'expérience nécessaire pour l'assistance médicale d'urgence de patients.
- L'utilisateur doit, grâce à ces connaissances professionnelles et cette expérience, être en mesure d'exécuter en toute sécurité les tâches qui lui sont confiées et de déceler, évaluer et éviter de lui-même d'éventuels risques encourus par lui-même ou par le patient.

- L'utilisateur doit avoir été formé et initié au travail avec l'unité de transport.
- L'utilisateur doit avoir été formé à la mise en pratique des mesures requises en matière d'hygiène.

2.7 Prévention des pannes de l'appareil

2.7.1 Respect des conditions d'environnement requises

L'emploi dans un environnement autre que celui spécifié de l'unité de transport et des appareils montés dessus peut être à l'origine de dysfonctionnements, eux-mêmes susceptibles de compromettre le traitement.

⇒ **Ne pas** utiliser l'unité de transport et les appareils montés dessus en dehors des conditions d'environnement spécifiées pour les appareils.

2.7.2 Garantie d'une réparation correcte

Une réparation incorrecte risque de nuire au bon fonctionnement de l'unité de transport et de compromettre le traitement.

⇒ Ne confier les travaux de réparation et les interventions de maintenance qu'à WEINMANN Emergency.

2.7.3 Modification interdite de la construction de l'unité de transport et de ses accessoires

Une modification dans la construction de l'unité de transport ou de ses accessoires peut être à l'origine de dysfonctionnements, eux-mêmes susceptibles de compromettre le traitement.

⇒ Ne pas modifier la construction de l'unité de transport et de ses accessoires.

⇒ Ne confier des modifications de l'unité de transport qu'à WEINMANN Emergency.

2.8 Respect des règles d'hygiène

2.8.1 Retraitement hygiénique de l'unité de transport et de ses accessoires

Une hygiène insuffisante comporte les risques suivants :

- Des unités de transport ou des accessoires qui n'ont pas été soumis à un retraitement hygiénique peuvent infecter l'utilisateur ou le patient par l'intermédiaire de la peau et des voies respiratoires.
 - L'emploi de nettoyeurs et de désinfectants non appropriés peut endommager l'unité de transport, entraîner des dysfonctionnements et empêcher un nettoyage et une désinfection complets de l'unité de transport.
- ⇒ Effectuer après chaque utilisation un retraitement hygiénique de l'unité de transport et de ses accessoires conformément au plan de nettoyage et de désinfection ([voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159](#)).
- ⇒ Porter un équipement de protection approprié pendant le retraitement hygiénique, par ex. des gants.
- ⇒ Utiliser uniquement les nettoyeurs et désinfectants stipulés.

2.9 Utilisation sans risques de l'unité de transport et de ses accessoires

2.9.1 Utilisation de l'unité de transport selon les règles

L'unité de transport, si elle est exposée à une surcharge, peut être endommagée ou endommager l'appareil.

- ⇒ Ne pas exposer l'unité de transport à une charge supplémentaire, par ex. en s'appuyant, montant ou s'asseyant dessus, en l'utilisant comme tabouret afin de fermer des fenêtres ou des portes.

2.9.2 Utilisation interdite de l'unité de transport dans des tomographes à résonance magnétique

L'emploi de l'unité de transport dans des tomographes à résonance magnétique peut provoquer des pannes de l'appareil et compromettre le traitement.

⇒ Ne jamais utiliser l'unité de transport avec des tomographes à résonance magnétique (TRM, RMN, IMN).

2.9.3 Utilisation de dispositifs médicaux et d'accessoires homologués


Le montage et le branchement de dispositifs médicaux et accessoires non homologués peuvent nuire à la résistance mécanique, entraînant la perte de la conformité du dispositif. Les exigences en matière de biocompatibilité risquent de ne pas être remplies, et l'aptitude à l'emploi limitée.

⇒ N'utiliser que des dispositifs médicaux et accessoires homologués par WEINMANN Emergency.

3 Description


3.1 Vue d'ensemble

3.1.1 LIFE-BASE light XS

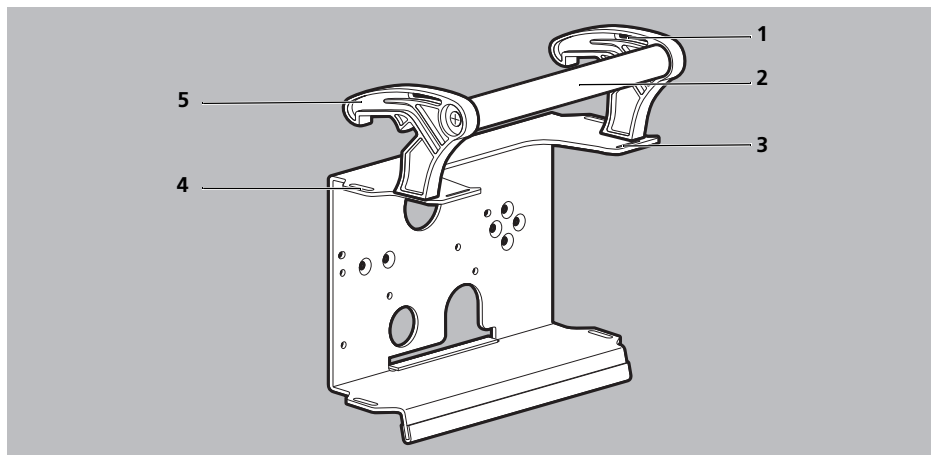


N°	Désignation	Description
1	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.
2	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.
3	Passant pour sangle (longue)	<ul style="list-style-type: none"> Sert à fixer le circuit patient du ventilateur. Sert à arrimer l'unité de transport lorsqu'elle est fixée avec les griffes sur une barre ou un rail d'appareillage.
4	Passant pour sangle (courte)	<ul style="list-style-type: none"> Sert à fixer le tuyau basse pression du ventilateur. Sert à arrimer l'unité de transport lorsqu'elle est fixée avec les griffes sur une barre ou sur un rail d'appareillage.
5	Griffe	Sert à suspendre l'unité de transport à des rails d'appareillage ou des barres.

3.1.2 LIFE-BASE light

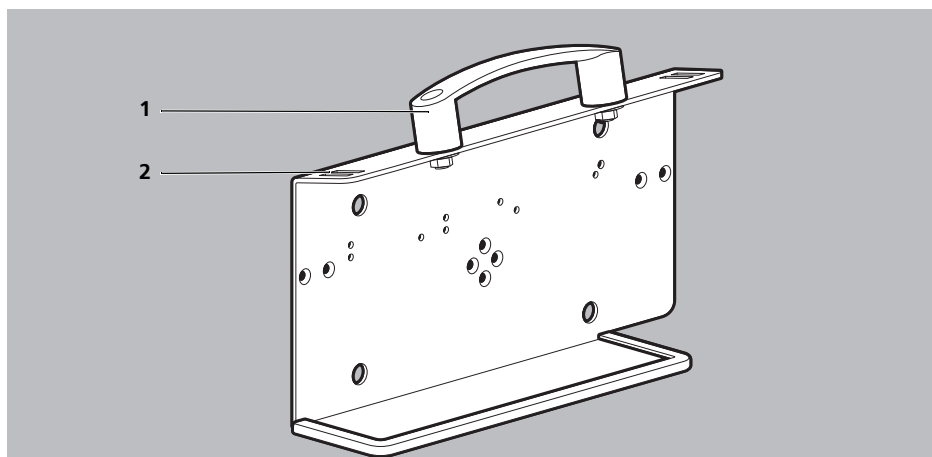


N°	Désignation	Description
1	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.
2	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.

3.1.3 LIFE-BASE 1 NG XS

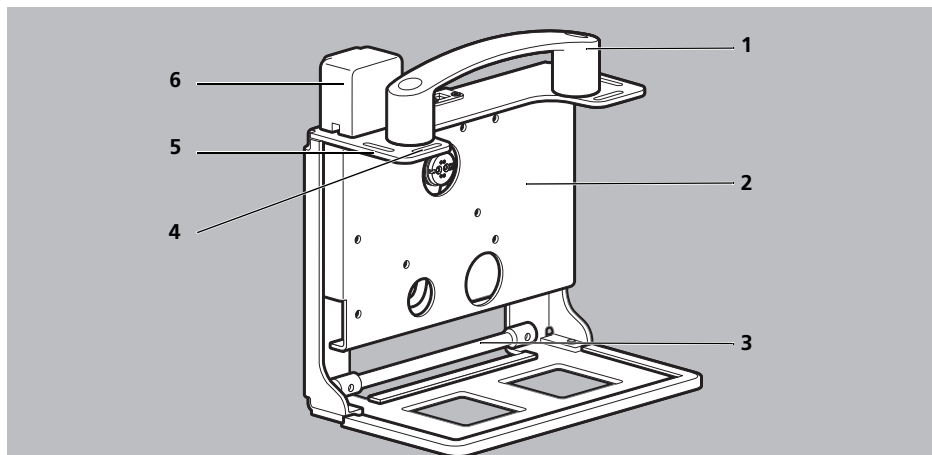


N°	Désignation	Description
1	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.
2	Plaque d'écartement	Sert à fixer les appareils sur l'unité de transport.
3	Barre transversale	Sert à fixer l'unité de transport sur le support mural.
4	Passant pour sangle (longue)	Sert à fixer le tuyau basse pression du ventilateur en l'absence de sac de protection.
5	Passant pour sangle (courte)	Sert à fixer le circuit patient du ventilateur en l'absence de sac de protection.
6	Interface de charge	Sert à recharger l'appareil sur l'unité de transport.

3.1.4 LIFE-BASE 1 NG

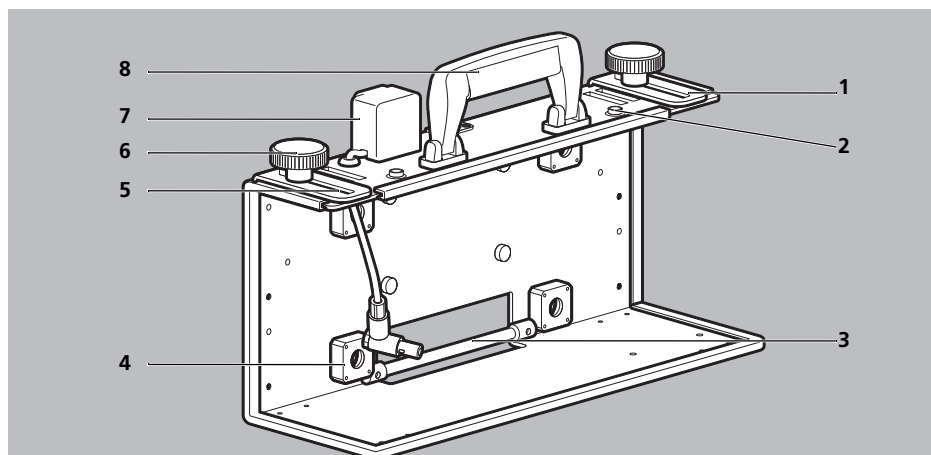


N°	Désignation	Description
1	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.
2	Bouton-pression	Sert à fixer le sac de protection sur l'unité de transport.
3	Barre transversale	Sert à fixer l'unité de transport sur le support mural.
4	Amortisseur de vibrations (uniquement avec MEDUMAT Transport)	Réduit les vibrations et les chocs afin de protéger l'appareil.
5	Équerre support	Sert à suspendre l'unité de transport à une barre.
6	Bouton molette	Sert à fixer l'équerre support.
7	Interface de charge	Sert à recharger l'appareil sur l'unité de transport.
8	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.

3.1.5 LIFE-BASE 1 NG XL

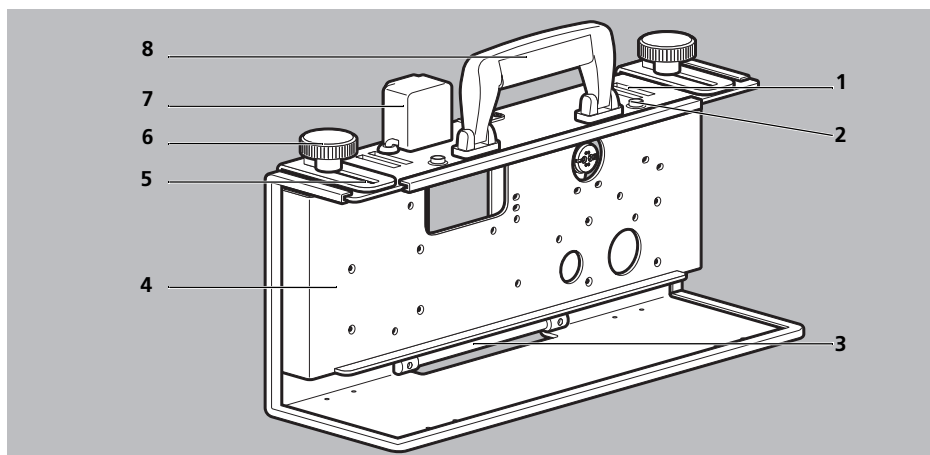


N°	Désignation	Description
1	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.
2	Bouton-pression	Sert à fixer le sac de protection sur l'unité de transport.
3	Barre transversale	Sert à fixer l'unité de transport sur le support mural.
4	Plaque d'écartement	Sert à fixer les appareils sur l'unité de transport.
5	Équerre support	Sert à suspendre l'unité de transport à une barre.
6	Bouton molette	Sert à fixer l'équerre support.
7	Interface de charge	Sert à recharger les appareils sur l'unité de transport.
8	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.

3.1.6 LIFE-BASE Mini II

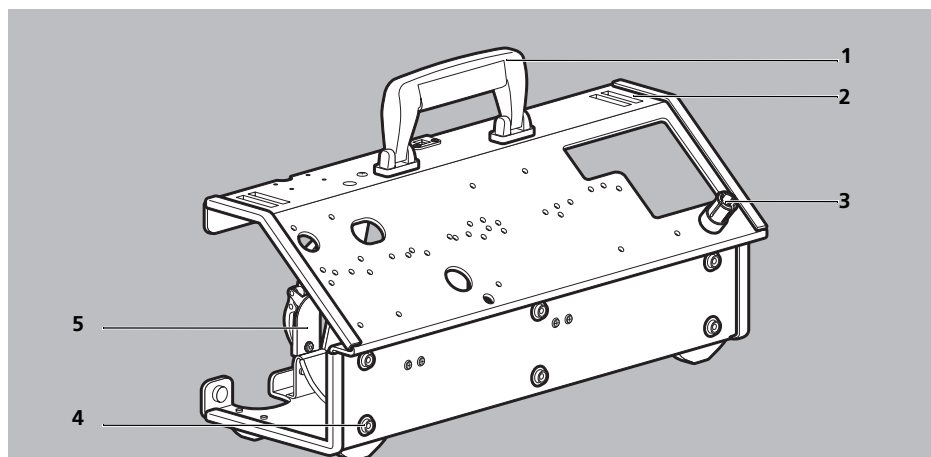


N°	Désignation	Description
1	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.
2	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.
3	Support de valve patient	Sert à maintenir la valve patient sur l'unité de transport.
4	Bouton-pression	Sert à fixer le sac d'accessoires sur l'unité de transport.
5	Collier de serrage	Sert à fixer la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport.

3.1.7 LIFE-BASE III et LIFE-BASE 3 NG

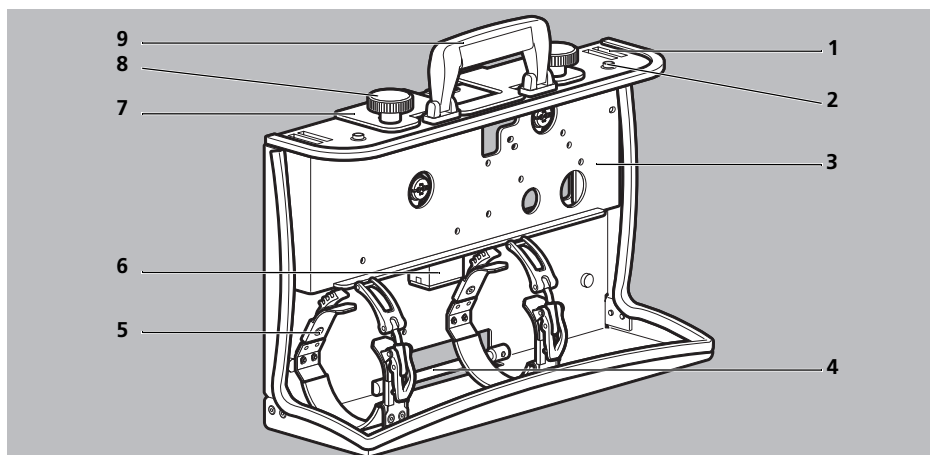

N°	Désignation	Description
1	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.
2	Bouton-pression	Sert à fixer le sac de protection sur l'unité de transport.
3	Plaque d'écartement (uniquement avec LIFE-BASE 3 NG)	Sert à fixer les appareils sur l'unité de transport.
4	Barre transversale	Sert à fixer l'unité de transport sur le support mural.
5	Collier de serrage	Sert à fixer la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport.
6	Interface de charge (uniquement avec LIFE-BASE 3 NG)	Sert à recharger les appareils sur l'unité de transport.
7	Équerre support	Sert à suspendre l'unité de transport à une barre.
8	Bouton molette	Sert à fixer l'équerre support.
9	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.



3.1.8 LIFE-BASE 4 NG


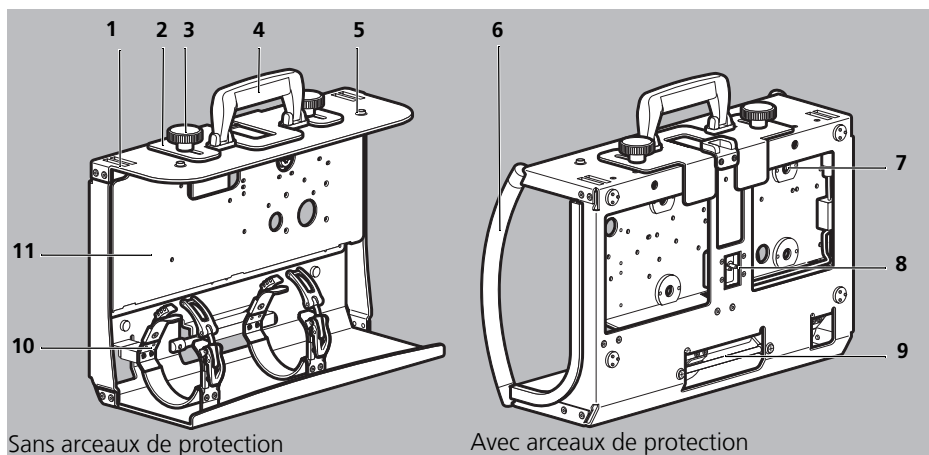


N°	Désignation	Description
1	Passant pour sangle de transport	Sert à fixer la sangle de transport sur l'unité de transport.
2	Équerre support	Sert à suspendre l'unité de transport à une barre.
3	Bouton molette	Sert à fixer l'équerre support.
4	Poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.
5	Bouton-pression	Sert à fixer le sac de protection sur l'unité de transport.
6	Arceaux de protection	Protègent les appareils et accessoires des détériorations.
7	Amortisseur de vibrations (uniquement avec MEDUMAT Transport)	Réduit les vibrations et les chocs afin de protéger l'appareil.
8	Interface de charge	Sert à recharger les appareils sur l'unité de transport.
9	Barre transversale	Sert à fixer l'unité de transport sur le support mural.
10	Collier de serrage	Sert à fixer la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport.
11	Plaque d'écartement	Sert à fixer les appareils sur l'unité de transport.



3.2 Accessoires et autres pièces

3.2.1 Sangles

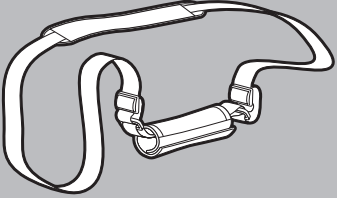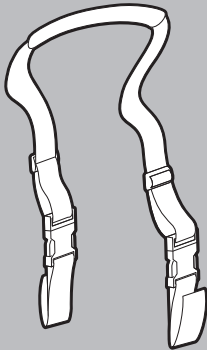Sangle	Désignation	Description
	Sangle de transport pour fixation sur la poignée	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.
	Sangle de transport pour fixation dans les passants	Sert à soulever et à porter l'unité de transport.


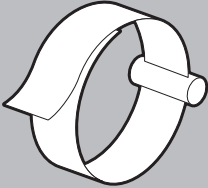
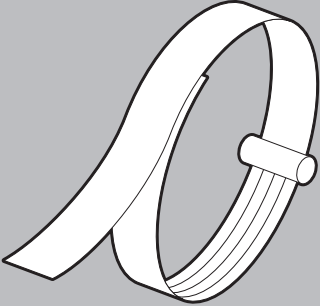
Sangle	Désignation	Description
	Sangle (courte)	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à fixer le tuyau basse pression du ventilateur. • Sert à arrimer l'unité de transport lorsqu'elle est fixée avec les griffes sur une barre ou sur un rail d'appareillage.
	Sangle (longue)	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à fixer le circuit patient du ventilateur. • Sert à arrimer l'unité de transport lorsqu'elle est fixée avec les griffes sur une barre ou un rail d'appareillage.




3.2.2 Sacs

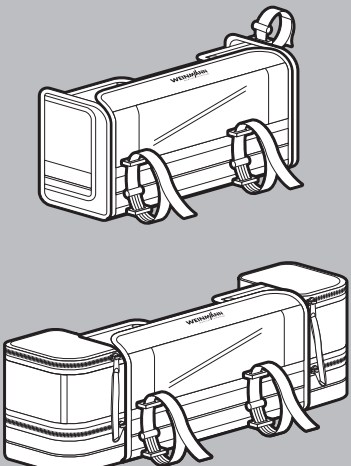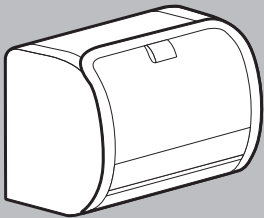Sac	Désignation	Description
	<p>Sac de protection avec ou sans sacs d'accessoires</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protège l'unité de transport et les appareils montés de la saleté. • Sert à loger des accessoires.
	<p>Sac d'accessoires intérieur pour sacs de protection</p>	<p>Sert à loger des accessoires.</p>

D'autres sacs de protection et sacs d'accessoires dans Étendue de la livraison (voir « 13.1 Accessoires et autres pièces », page 166).

3.2.3 Supports

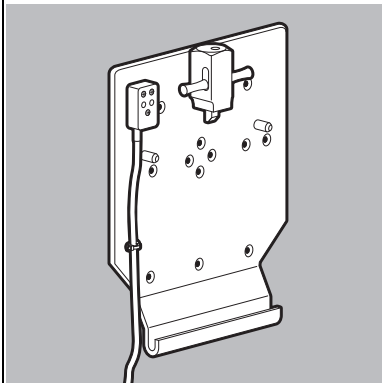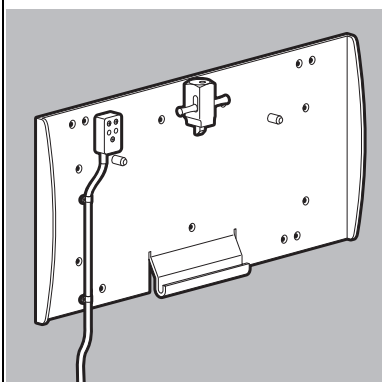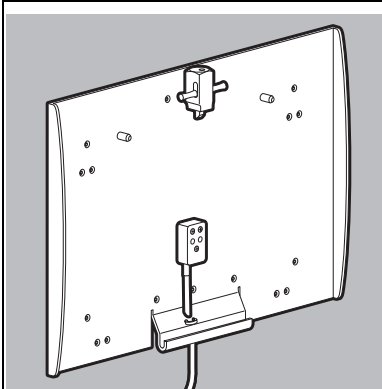Support	Désignation	Description
	Support mural BASE-STATION 1 NG	Sert à loger l'unité de transport dans un véhicule de secours.
	Support mural BASE-STATION Mini II	Sert à loger l'unité de transport dans un véhicule de secours.
	Support mural BASE-STATION 3 NG	Sert à loger l'unité de transport dans un véhicule de secours.

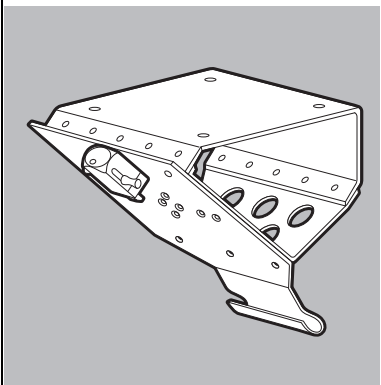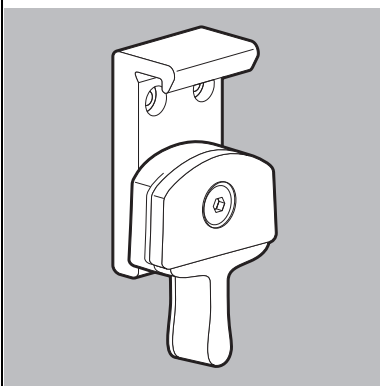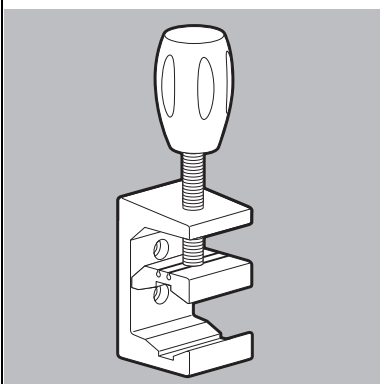Support	Désignation	Description
	Support plafond BASE-STATION 1 NG	Sert à loger l'unité de transport dans une ambulance.
	Pince de fixation	Sert à fixer l'unité de transport ou le support mural sur un rail d'appareillage.
	Fixation sur barres	Sert à fixer l'unité de transport sur une barre.


4 Montage

Le présent chapitre explique le montage de tous les différents modèles de l'unité de transport et de ses accessoires. Si le montage présente des différences importantes entre les modèles, elles seront explicitement signalées. Dans le cas contraire, le montage est le même pour tous les modèles.


4.1 Montage du sac de protection sur l'unité de transport

4.1.1 Montage du sac de protection pour LIFE-BASE light

1. Poser le sac de protection sur une surface plane solide.

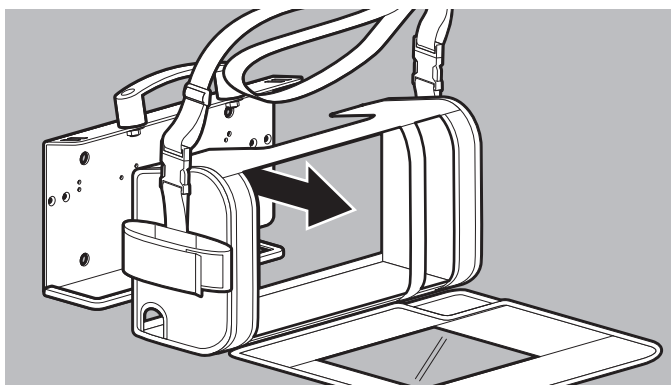

2. Placer l'unité de transport par l'arrière dans le fond du sac de protection.
3. Faire passer le sac de protection par-dessus l'unité de transport.
4. Fermer la fermeture auto-agrippante au dos du sac de protection.

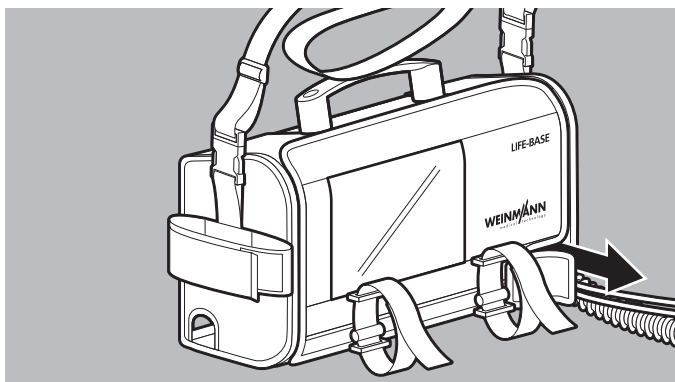


5. Le cas échéant : faire passer le circuit patient à l'avant par l'ouverture aménagée dans le sac de protection.
6. Fermer les fermetures auto-agrippantes sur le devant du sac de protection.

Résultat Le sac de protection est monté sur l'unité de transport.

4.1.2 Montage du sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG XS


1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.

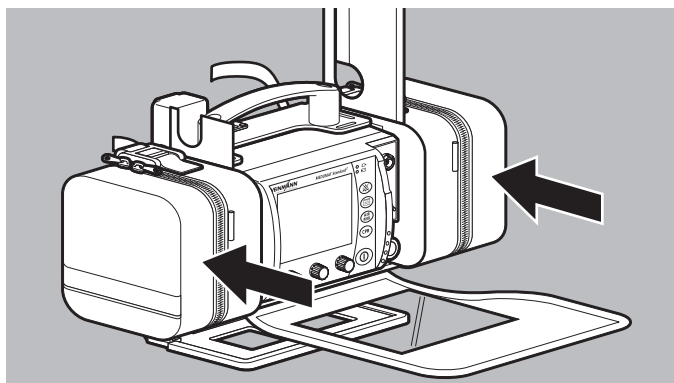

2. Pour le ventilateur :
 - Glisser le dessous du sac de protection de par devant dans l'espace séparant l'unité de transport et le ventilateur.


- Tirer le dessus du sac de protection par-dessus l'unité de transport jusqu'à la poignée

ou

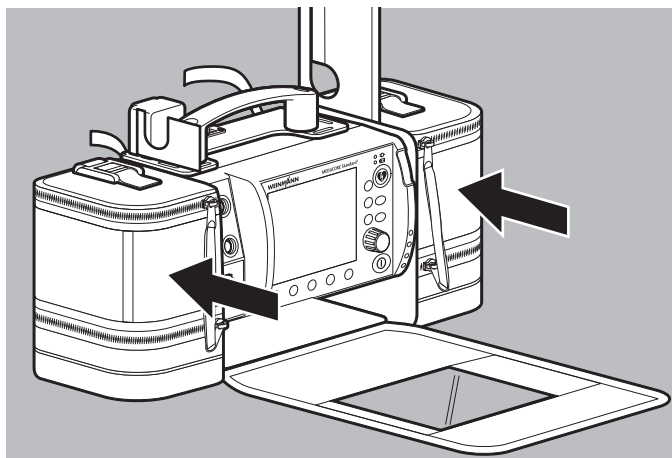


pour le moniteur défibrillateur :
faire passer le logement aménagé dans le sac de protection
de par l'avant sur le fond de l'unité de transport.

3. Fermer la fermeture auto-agrippante au dos de l'unité de transport.

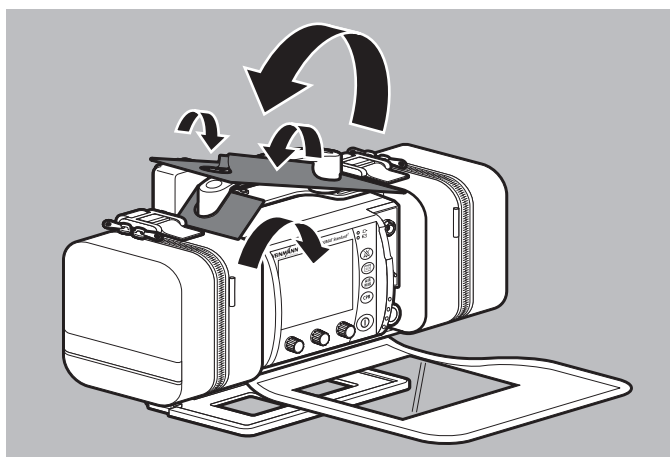

4. Placer le sac de protection autour de la poignée.

5. Fermer les fermetures auto-agrippantes sous et à côté de la poignée.
6. Brancher les accessoires sur l'appareil.

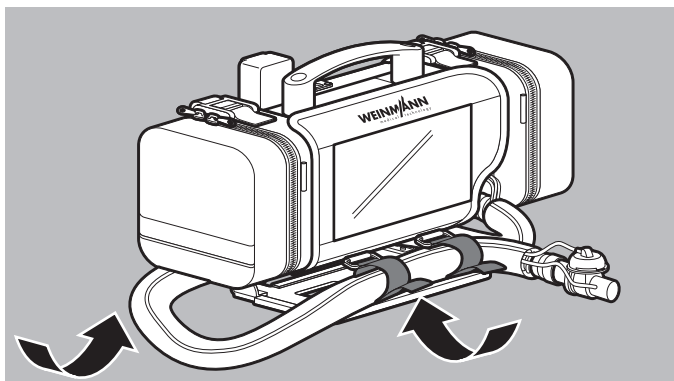

7. Pour le ventilateur :

- Fermer la fenêtre du sac de protection.
- Serrer le circuit patient dans l'espace séparant l'unité de transport et le ventilateur.
- Fixer le circuit patient avec les sangles sur le sac de protection.

ou


pour le moniteur défibrillateur :

- Ranger les câbles et les tuyaux sous le moniteur défibrillateur.
- Fermer la fenêtre du sac de protection.

Résultat Le sac de protection est monté sur l'unité de transport.


4.1.3 Montage du sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG et LIFE-BASE 1 NG XL

1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.

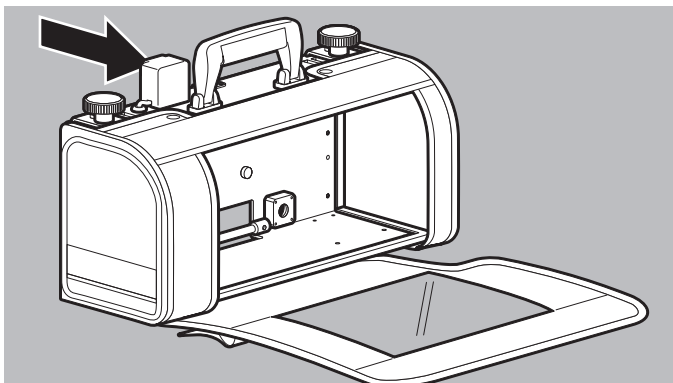

2. Pour LIFE-BASE 1 NG :
placer l'unité de transport par l'arrière dans le fond du sac de protection

ou
pour LIFE-BASE 1 NG XL :
faire passer le fond de l'unité de transport par l'arrière dans le logement prévu à cet effet dans le sac de protection.
3. Fixer le sac de protection sur l'unité de transport avec les boutons-pression.

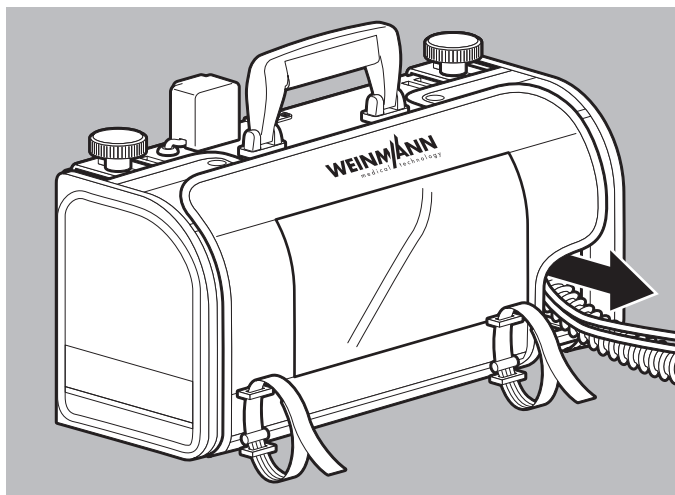


4. Le cas échéant : faire passer le circuit patient par l'ouverture aménagée dans le sac de protection.
5. Fermer les fermetures magnétiques ou les fermetures auto-agrippantes à l'avant et au dos du sac de protection.


Résultat Le sac de protection est monté sur l'unité de transport.

4.1.4 Montage du sac de protection pour LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG et LIFE-BASE 4 NG


1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.

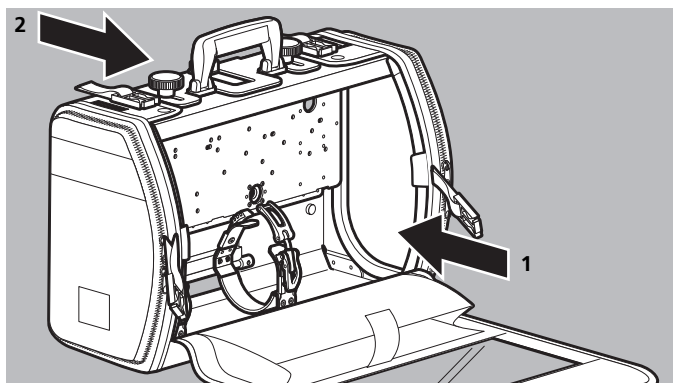

2. Déposer l'unité de transport avec le dos en premier dans le sac de protection (1).
3. Tirer le sac de protection par l'arrière pour le faire passer par-dessus l'unité de transport (2).
4. Fermer les boutons-pression sur l'unité de transport.

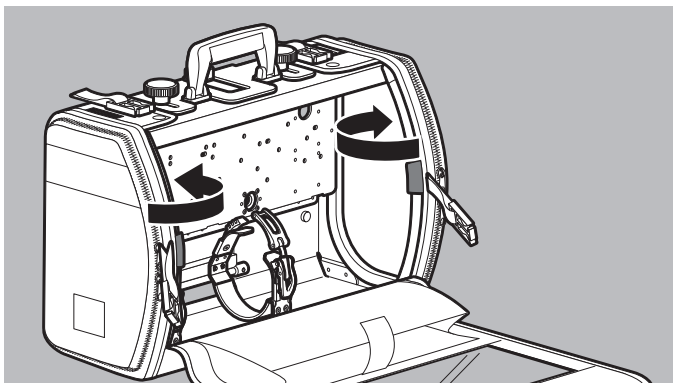

5. Pour LIFE-BASE 4 NG avec arceaux : fixer les bandes auto-agrippantes sur les arceaux de protection.

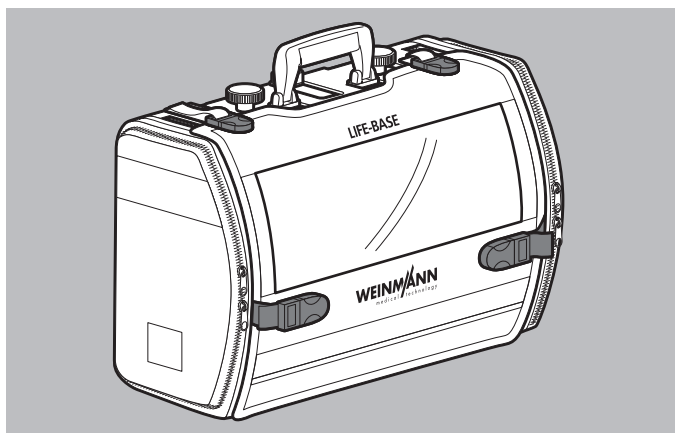


6. Fermer les clips de fermeture ou les fermetures magnétiques du sac de protection.

Résultat Le sac de protection est monté sur l'unité de transport.

4.2 Montage du sac d'accessoires sur l'unité de transport ou sur le sac de protection

4.2.1 Montage du sac d'accessoires latéral

Valable pour Sacs de protection avec sacs d'accessoires adaptables

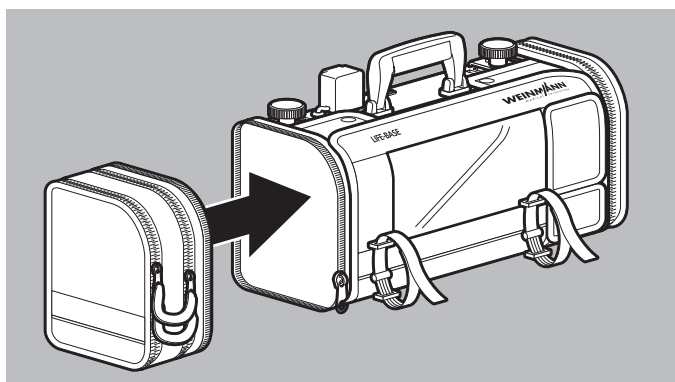

1. Accrocher la fermeture éclair du sac d'accessoires à la fermeture éclair du sac de protection.


2. Fermer la fermeture éclair du sac de protection.

Résultat Le sac d'accessoires est monté sur le sac de protection.


4.2.2 Montage du sac d'accessoires intérieur

Nettoyant requis Solution d'alcool isopropylique à 90 %

1. Dégraisser l'unité de transport avec une solution d'alcool isopropylique.

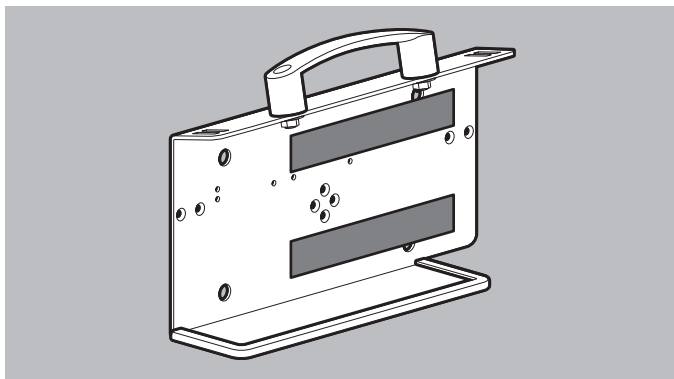

2. Déterminer la position de la fermeture auto-agrippante sur l'unité de transport.
3. Coller les bandes crochets de la fermeture auto-agrippante sur l'unité de transport.
4. Presser les bandes crochets de la fermeture auto-agrippante contre l'unité de transport.

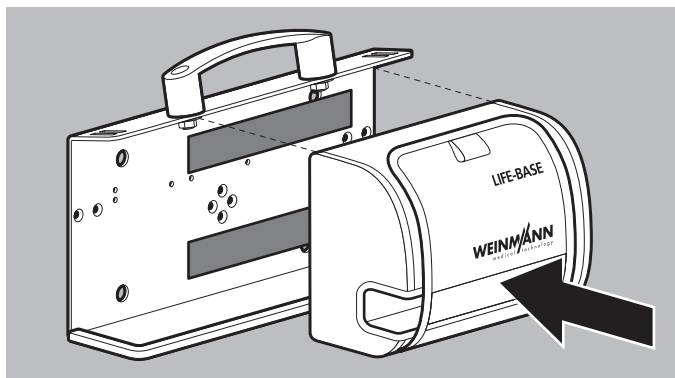


5. Appuyer les bandes à boucles du sac d'accessoires intérieur contre les bandes crochets de l'unité de transport.

Résultat Le sac d'accessoires intérieur est monté sur l'unité de transport.

4.2.3 Montage du sac d'accessoires pour LIFE-BASE 1 NG

1. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes au dos du sac d'accessoires.

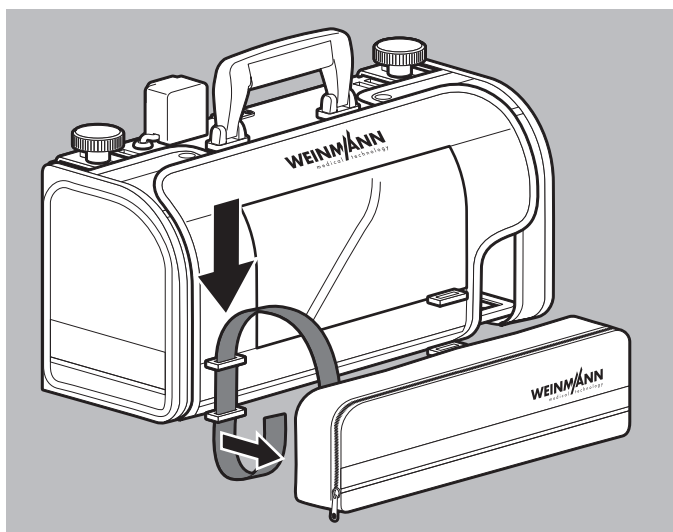


2. Faire passer les bandes auto-agrippantes par les passants du sac de protection.

3. Fermer les fermetures auto-agrippantes au dos du sac d'accessoires.

Résultat Le sac d'accessoires est monté sur l'unité de transport.


4.2.4 Montage du sac d'accessoires pour LIFE-BASE Mini II

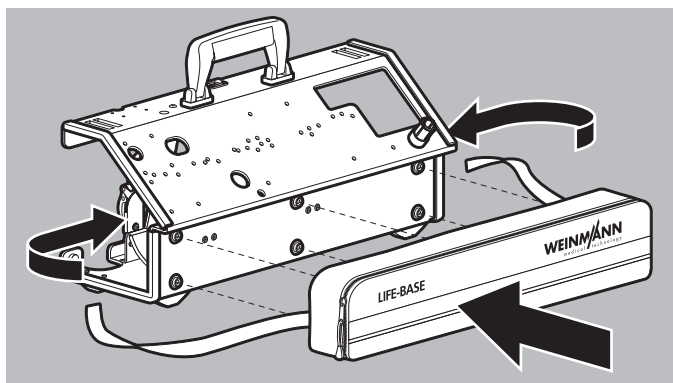

1. Fixer le sac d'accessoires sur l'unité de transport avec les boutons-pression.
2. Fermer la fermeture auto-agrippante au dos de l'unité de transport.

Résultat Le sac d'accessoires est monté sur l'unité de transport.

4.2.5 Montage du sac d'accessoires pour LIFE-BASE 4 NG

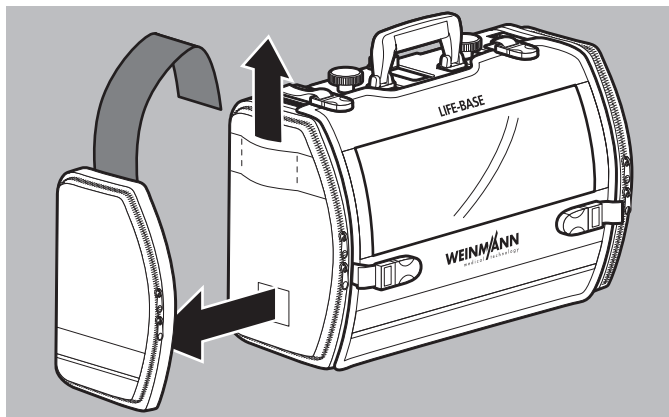


1. Faire passer la sangle par la boucle située sur le côté du sac de protection.
2. Fixer la sangle sur le sac d'accessoires avec la fermeture auto-agrippante.

Résultat Le sac d'accessoires est monté sur le sac de protection.

4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport

4.3.1 Montage de la sangle de transport sur la poignée

Valable pour LIFE-BASE 1 NG XS

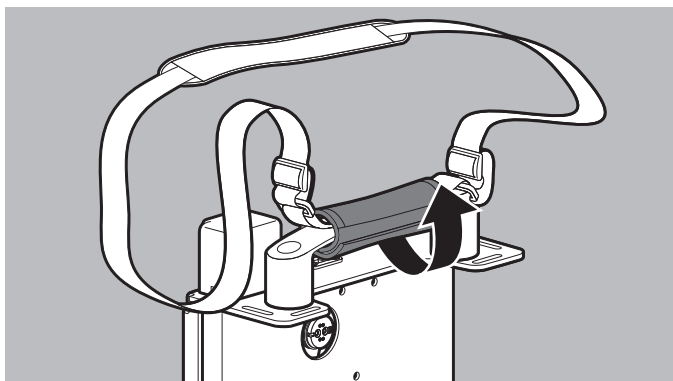


1. Enrouler la fermeture auto-agrippante de la sangle de transport autour de la poignée.
2. Fermer la fermeture auto-agrippante de la sangle de transport.

Résultat La sangle de transport est montée sur la poignée.

4.3.2 Montage de la sangle de transport sur l'unité de transport

- Valable pour*
- LIFE-BASE 1 NG
 - LIFE-BASE 1 NG XL
 - LIFE-BASE Mini II
 - LIFE-BASE III
 - LIFE-BASE 3 NG
 - LIFE-BASE 4 NG

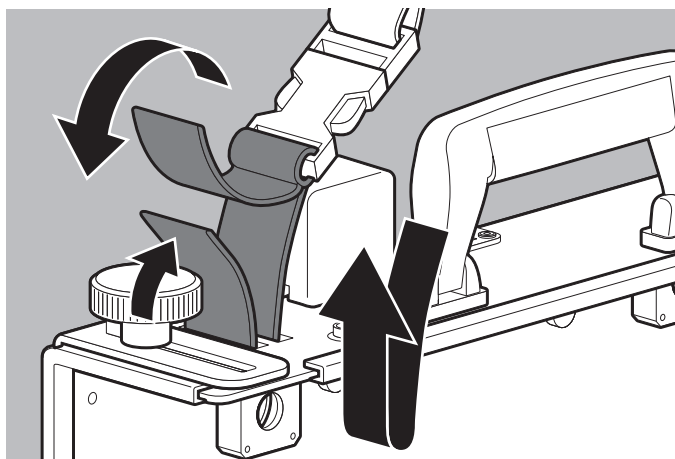


1. Glisser les extrémités de la sangle de transport à travers les passants de l'unité de transport.
2. Fermer les fermetures auto-agrippantes de la sangle de transport.

Résultat La sangle de transport est montée sur l'unité de transport.

4.3.3 Montage des sangles sur l'unité de transport

Valable pour

- LIFE-BASE light XS
- LIFE-BASE 1 NG XS

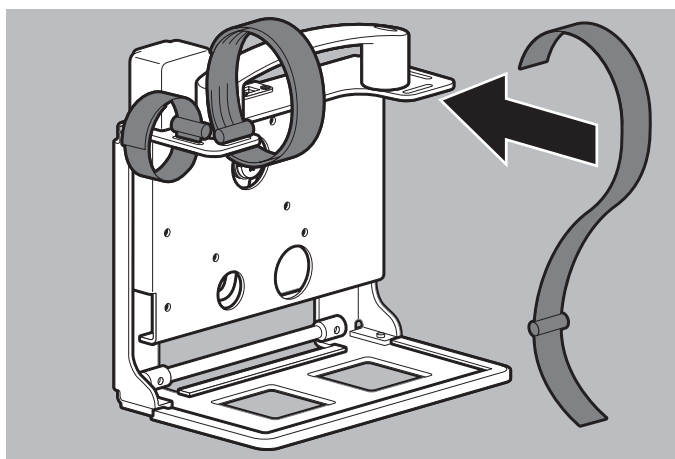

1. Faire passer les sangles par les passants de l'unité de transport.

2. Fermer les fermetures auto-agrippantes des sangles.

Résultat Les sangles sont montées sur l'unité de transport.

4.4 Montage de la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport

AVIS

Risque d'endommagement des colliers de serrage.

Il est possible de régler différentes forces de serrage pour les colliers de serrage. Les colliers de serrage peuvent être distendus ou endommagés s'il faut forcer pour les fermer.


⇒ Choisir une force de serrage permettant de fixer la bouteille d'oxygène correctement sans exercer de force excessive sur les colliers de serrage et sans instruments.

⇒ Ajuster les colliers de serrage avec précision au diamètre de la bouteille d'oxygène en s'aidant d'un dispositif de réglage précis.


4.4.1 Montage de la bouteille d'oxygène Ø 105 mm

Valable pour


- LIFE-BASE Mini II
- LIFE-BASE III
- LIFE-BASE 3 NG
- LIFE-BASE 4 NG

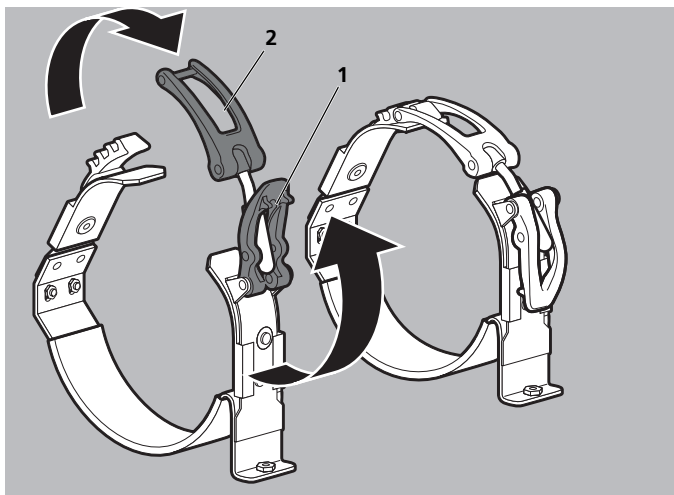

1. Ouvrir l'étrier de fermeture (1) des colliers de serrage.
2. Dégager l'étrier de serrage (2) du crantage des colliers de serrage.
3. Placer la bouteille d'oxygène par l'avant ou par le côté dans l'unité de transport.

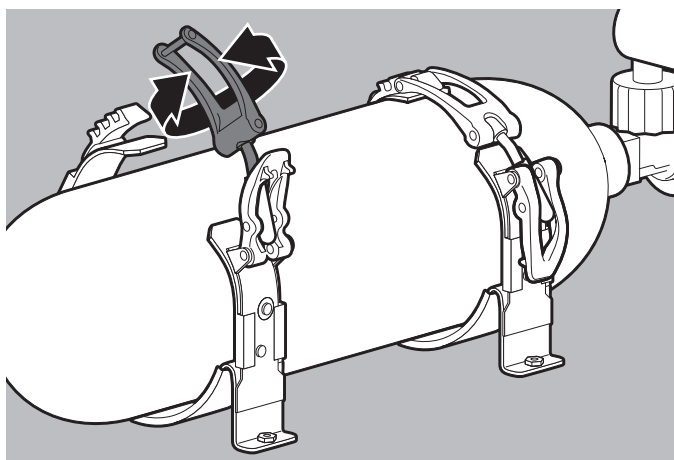

4. **⚠ Avis ! Risque d'endommagement des colliers de serrage.**
Tourner l'étrier de serrage pour adapter avec exactitude la longueur des colliers de serrage à la bouteille d'oxygène.

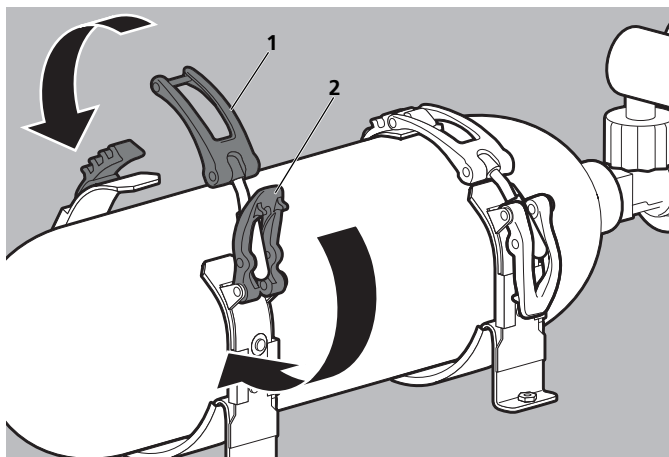


5. Accrocher l'étrier de serrage (1) dans le crantage des colliers de serrage.
6. Fermer l'étrier de fermeture des colliers de serrage (2).
7. Vérifier si la bouteille d'oxygène est correctement installée.
À noter :
 - Les étriers de fermeture des colliers de serrage ne doivent pas pouvoir s'ouvrir.
 - La bouteille d'oxygène ne doit pas pouvoir bouger.
8. Si la bouteille d'oxygène bouge : régler la longueur des colliers de serrage en fonction de la bouteille d'oxygène.


Résultat La bouteille d'oxygène est montée sur l'unité de transport.

4.4.2 Montage de la bouteille d'oxygène Ø 115 mm-120 mm


Valable pour LIFE-BASE 4 NG

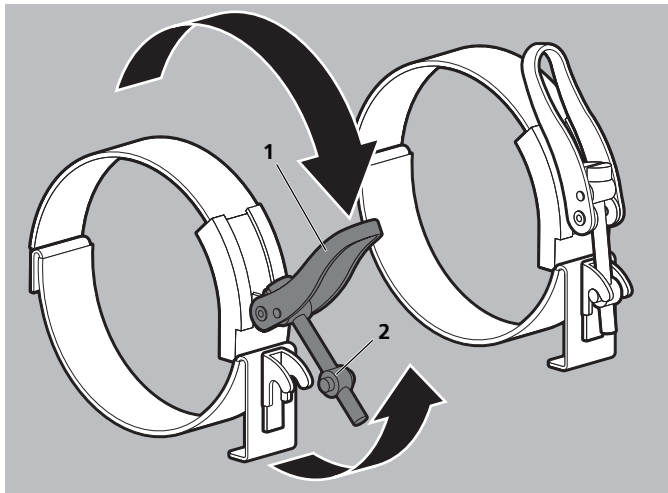

1. Ouvrir l'étrier de fermeture des colliers de serrage (1).
2. Décrocher la goupille de retenue (2).
3. Placer la bouteille d'oxygène par le côté dans l'unité de transport.

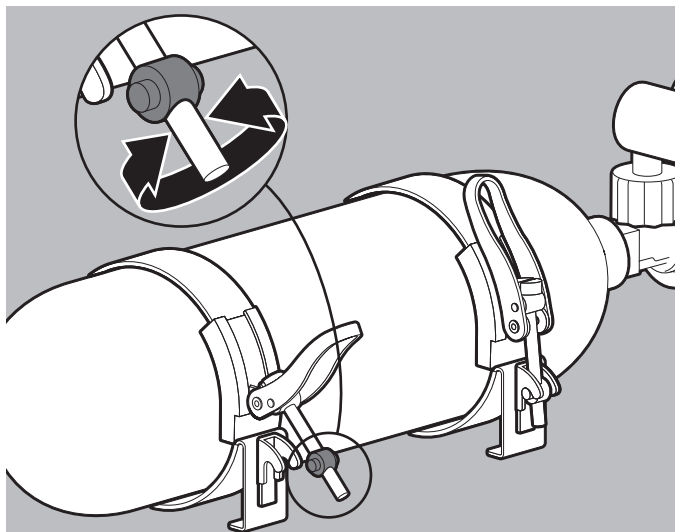

4. **⚠ Avis ! Risque d'endommagement des colliers de serrage.**
Tourner la goupille de retenue pour adapter avec exactitude la force de serrage des colliers de serrage à la bouteille d'oxygène.

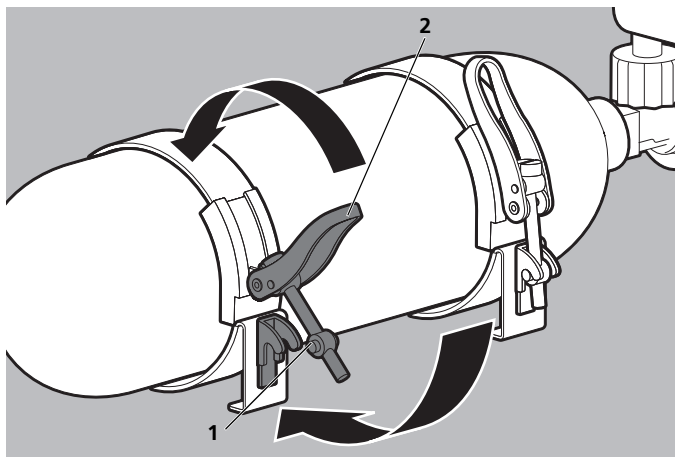

5. Accrocher la goupille de retenue (1).
6. Fermer l'étrier de fermeture (2) des colliers de serrage.

7. Vérifier si la bouteille d'oxygène est correctement installée.
À noter :
 - Les étriers de fermeture des colliers de serrage ne doivent pas pouvoir s'ouvrir.
 - La bouteille d'oxygène ne doit pas pouvoir bouger.
8. Si la bouteille d'oxygène bouge : régler la force de serrage des colliers de serrage en fonction de la bouteille d'oxygène.

Résultat La bouteille d'oxygène est montée sur l'unité de transport.

4.5 Montage de l'appareil sur l'unité de transport

4.5.1 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE light XS


Valable pour

- MEDUMAT Standard²
- MEDUVENT Standard

*Instruments
nécessaires*


Tournevis cruciforme PH1

1. Positionner l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

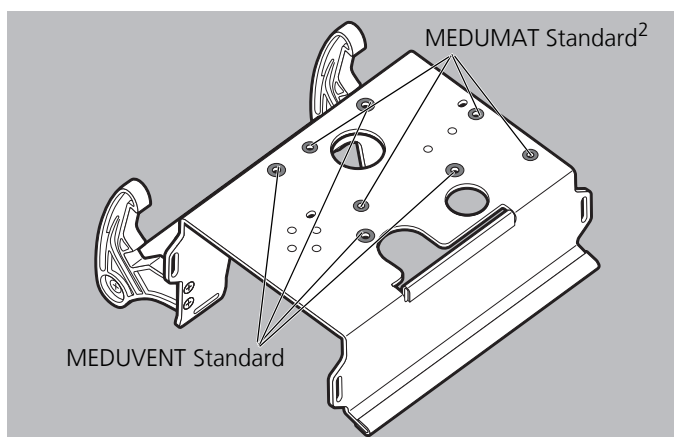

2. Déterminer les trous devant servir à monter l'appareil sur l'unité de transport.

3. Poser l'unité de transport sur l'appareil.
À noter : les trous prévus sur l'appareil et sur l'unité de transport doivent impérativement coïncider.

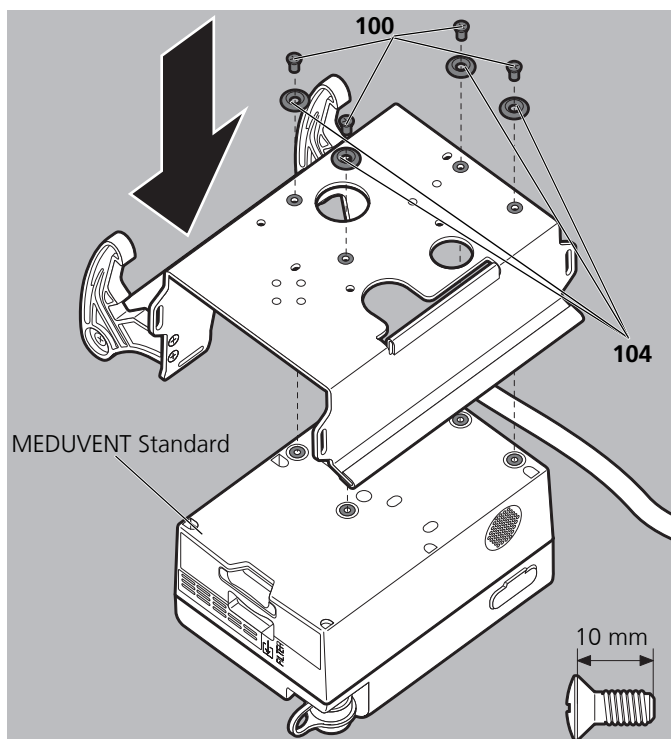

4. Visser l'unité de transport sur l'appareil avec 4 vis **100** et 4 rondelles de protection **104**.
5. Brancher l'appareil sur l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.
6. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport (voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).

Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.


4.5.2 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE light et LIFE-BASE III

- Valable pour*
- MEDUMAT Standard^a
 - MEDUMAT Easy^{CPR}
 - MODUL

Un chapitre particulier est consacré au montage de MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE light (voir « 4.5.4 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE 1 NG et LIFE-BASE 4 NG (avec arceaux de protection) », page 53).


Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

1. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).
2. Positionner l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

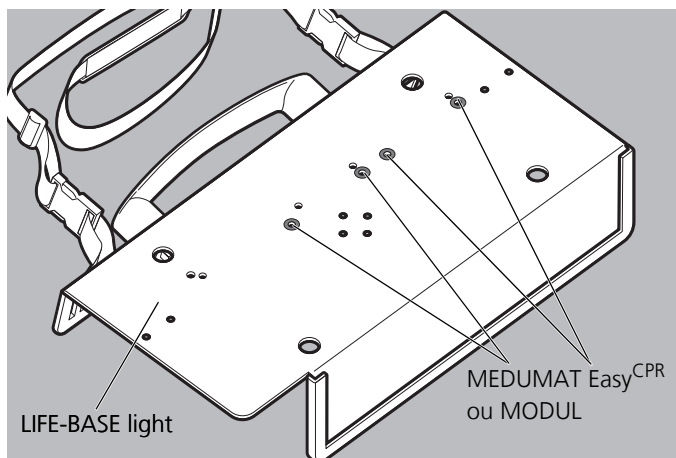

3. Déterminer les trous devant servir à monter l'appareil sur l'unité de transport.
4. Poser l'unité de transport sur l'appareil.
À noter :
 - MEDUMAT Easy^{CPR} peut être monté à 2 emplacements différents sur l'unité de transport.

- MEDUMAT Easy^{CPR} peut être monté sur l'unité de transport seul ou avec MODUL.
- Les trous prévus sur l'appareil et sur l'unité de transport doivent impérativement coïncider.

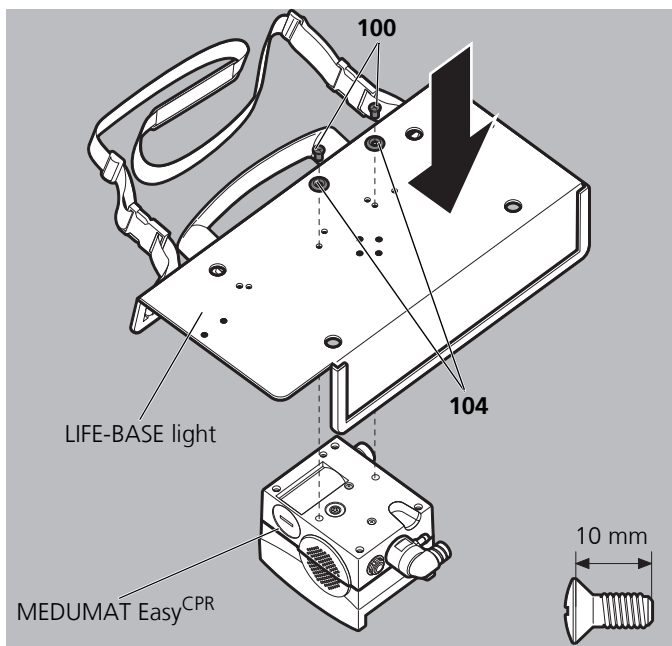

5. Visser l'unité de transport sur l'appareil avec 2 vis **100** et 2 rondelles de protection **104**.
6. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport (voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).

Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.

4.5.3 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE 1 NG XS


Valable pour

- MEDUMAT Standard²
- MEDUVENT Standard
- MEDUCORE Standard²
- MEDUCORE Standard


*Instruments
nécessaires*

Tournevis cruciforme PH1

1. Positionner l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

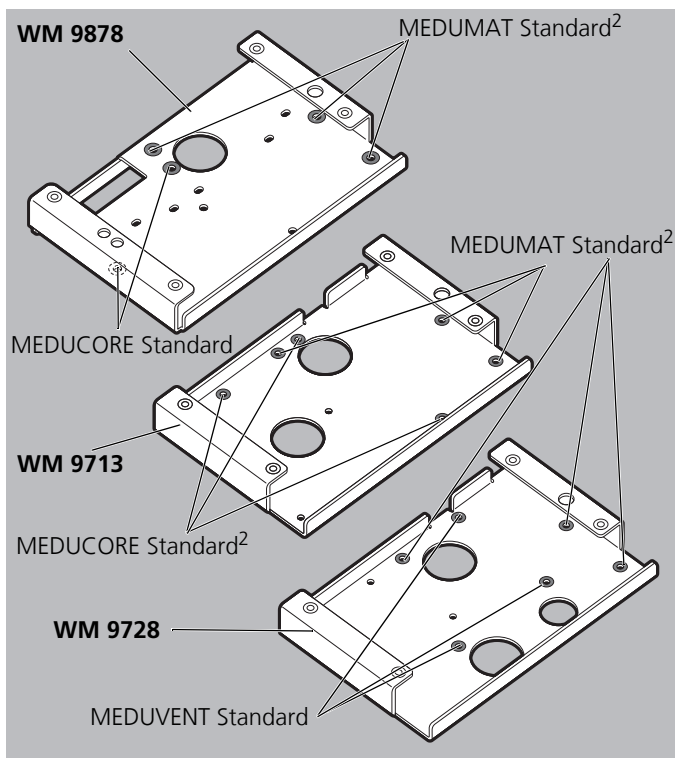


2. Déterminer les trous devant servir à monter l'appareil sur la plaque d'écartement.
3. Poser la plaque d'écartement sur l'appareil.
À noter : les trous prévus sur l'appareil et sur la plaque d'écartement doivent impérativement coïncider.

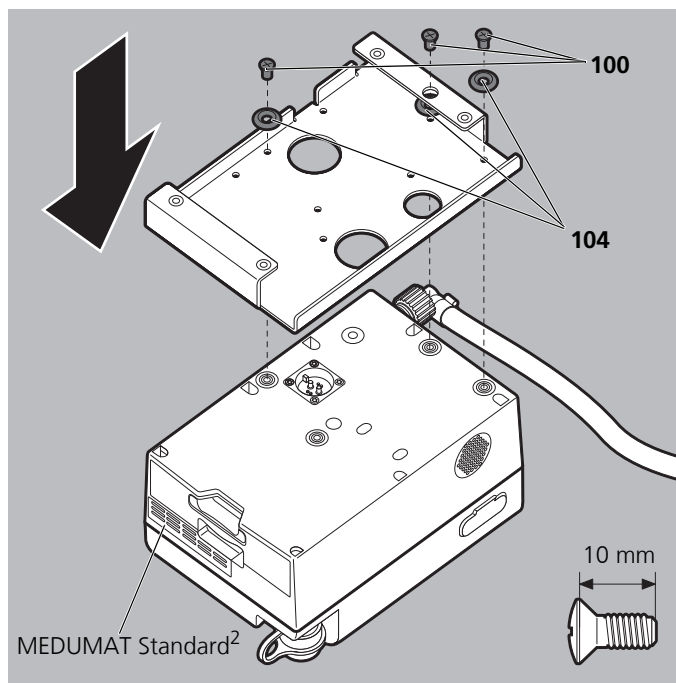


4. Visser la plaque d'écartement sur l'appareil avec des vis **100** et des rondelles de protection **104**.

Appareil	Pièce	Nombre
MEDUMAT Standard ²	100	3
	104	3
MEDUVENT Standard	100	3
	104	3
MEDUCORE Standard ²	100	3
	104	3
MEDUCORE Standard	100	2
	104	2


5. Brancher l'appareil sur l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

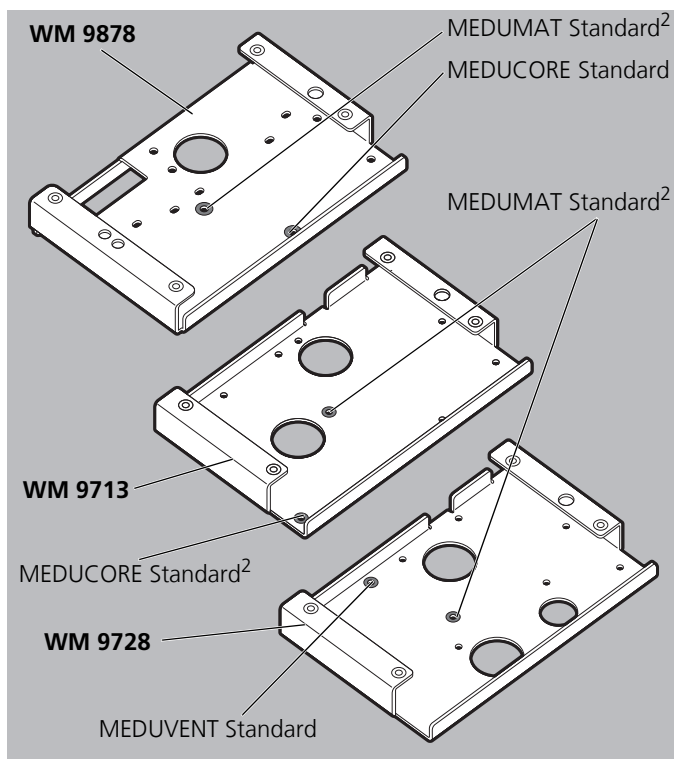

6. Déterminer le trou devant servir pour le serre-câble sur la plaque d'écartement.
7. Placer le câble d'alimentation électrique dans le serre-câble **105**.

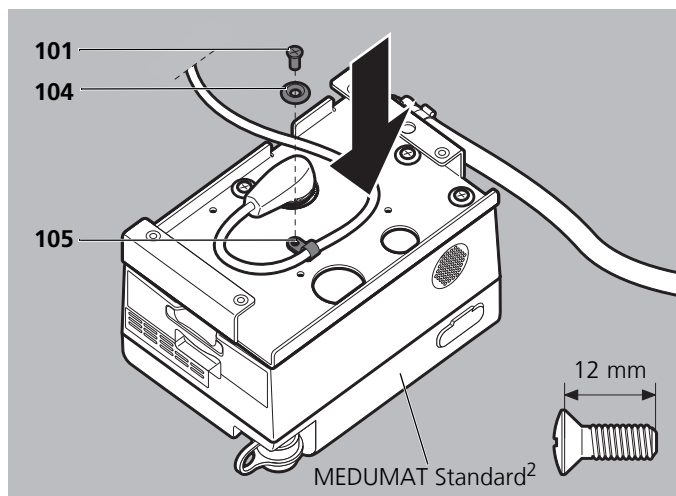

8. Visser 1 serre-câble **105** et 1 rondelle de protection **104** avec 1 vis **101** sur la plaque d'écartement.
- À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

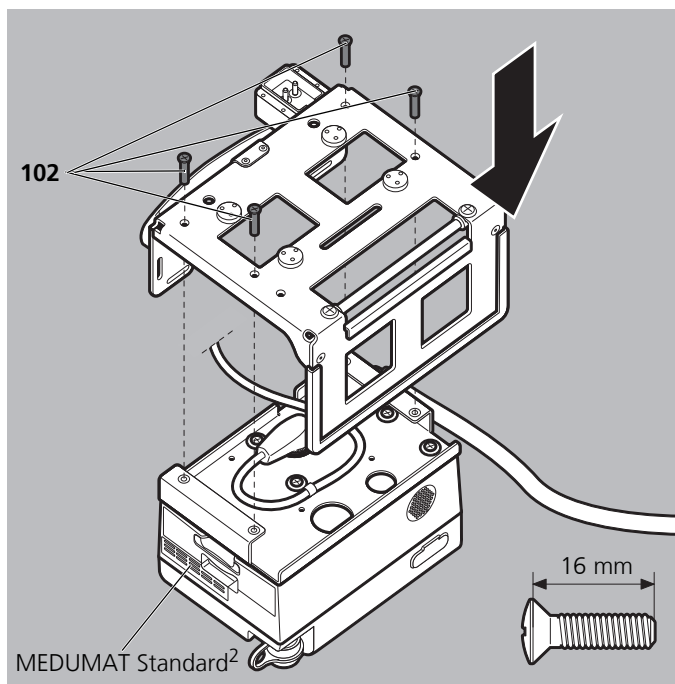

9. Visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102**.

À noter : les trous prévus sur l'unité de transport et sur la plaque d'écartement doivent impérativement coïncider.

10. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport (voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).


Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.

4.5.4 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE 1 NG et LIFE-BASE 4 NG (avec arceaux de protection)


Valable pour MEDUMAT Transport

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.
2. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).

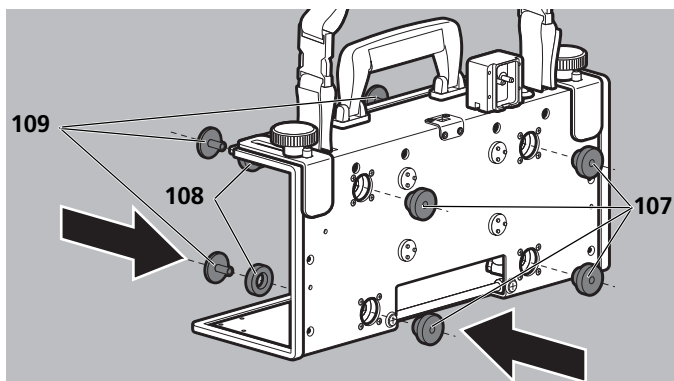

3. Placer 4 rondelles **108**, 4 douilles **109** et 4 éléments de base **107** dans les trous de l'unité de transport.

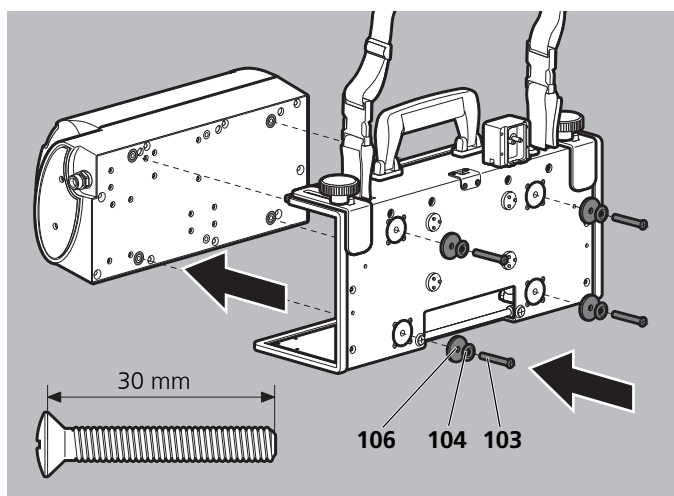

4. Visser l'unité de transport sur l'appareil avec 4 vis **103**, 4 rondelles de protection **104** et 4 rondelles **106**.
À noter : les trous prévus sur l'unité de transport et sur l'appareil doivent impérativement coïncider.
5. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport (voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).

Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.

4.5.5 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG et LIFE-BASE 4 NG (sans arceaux de protection)

Montage du ventilateur


Valable pour

- MEDUMAT Standard²
- MEDUVENT Standard
- MEDUMAT Easy^{CPR}


*Instruments
nécessaires*

Tournevis cruciforme PH1


1. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).

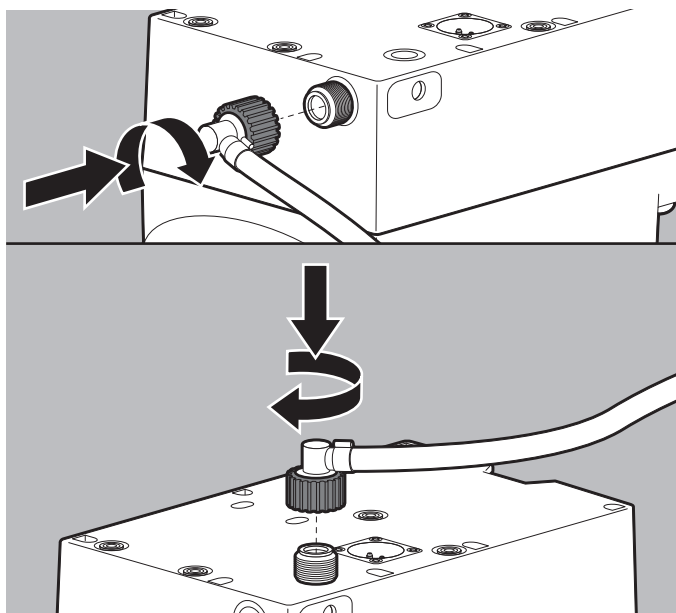

2. Pour MEDUMAT Standard² et MEDUMAT Easy^{CPR} : brancher le tuyau basse pression sur le raccord de gaz comprimé sur le côté ou au dos du ventilateur.
3. Pour MEDUMAT Standard² : positionner l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

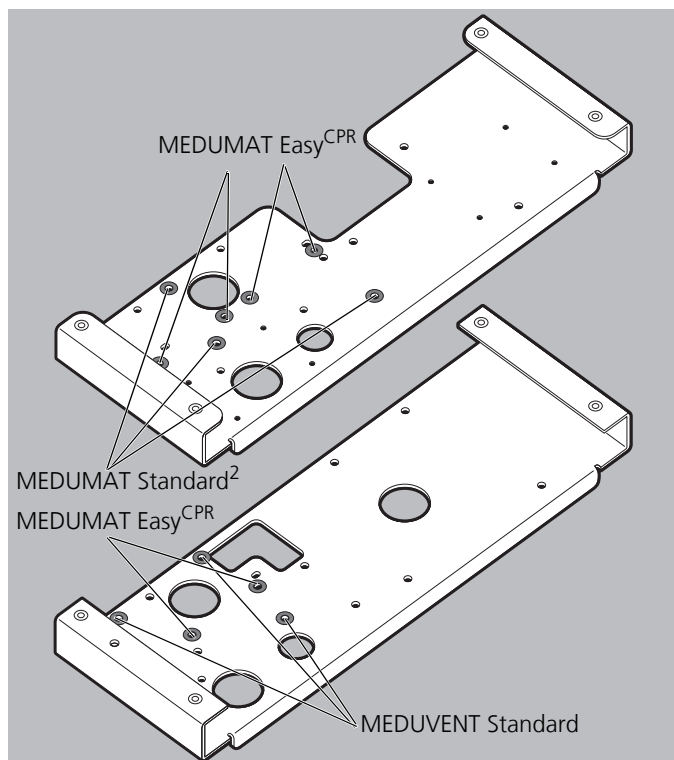


4. Déterminer les trous devant servir à monter l'appareil sur la plaque d'écartement.
5. Poser la plaque d'écartement sur l'appareil.
À noter :
 - Chaque appareil a une position définie.
 - MEDUMAT Easy^{CPR} peut être monté à 2 emplacements différents sur la plaque d'écartement.
 - Les trous prévus sur l'appareil et sur la plaque d'écartement doivent impérativement coïncider.

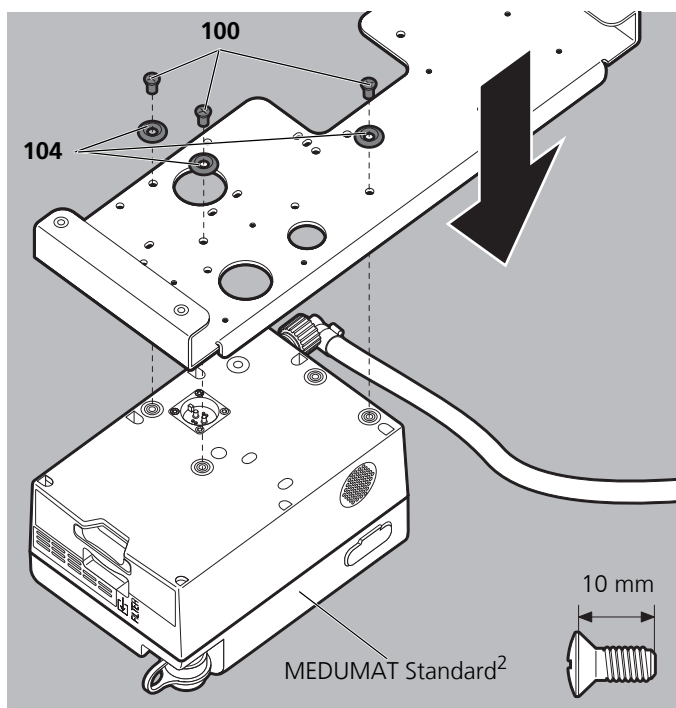

6. Visser la plaque d'écartement sur l'appareil avec des vis **100** et des rondelles de protection **104**.


Appareil	Pièce	Nombre
MEDUMAT Standard ²	100	3
	104	3
MEDUVENT Standard	100	3
	104	3
MEDUMAT Easy ^{CPR}	100	2
	104	2

7. Le cas échéant : brancher l'appareil sur l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.
8. Pour MEDUMAT Standard² et MEDUVENT Standard : placer le câble d'alimentation électrique dans le serre-câble **105**.

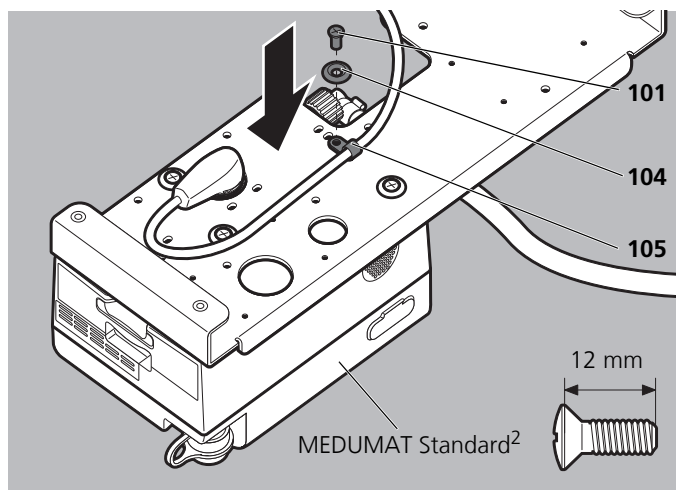


9. Pour MEDUMAT Standard² : visser 1 serre-câble **105** et 1 rondelle de protection **104** avec 1 vis **101** sur la plaque d'écartement.

À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

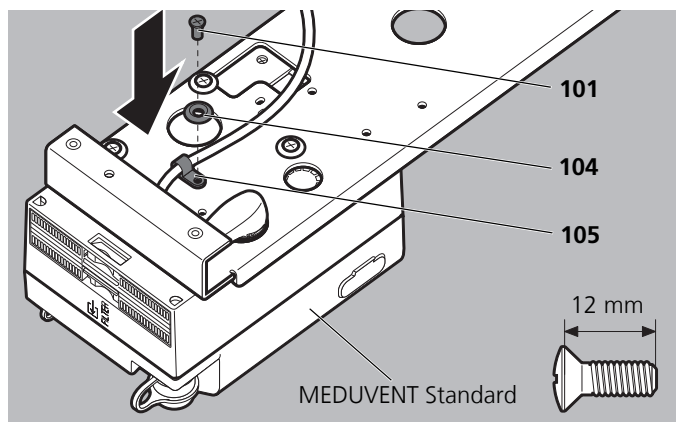


10. Pour MEDUVENT Standard : visser 1 serre-câble **105** et 1 rondelle de protection **104** avec 1 vis **101** sur la plaque d'écartement.

À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

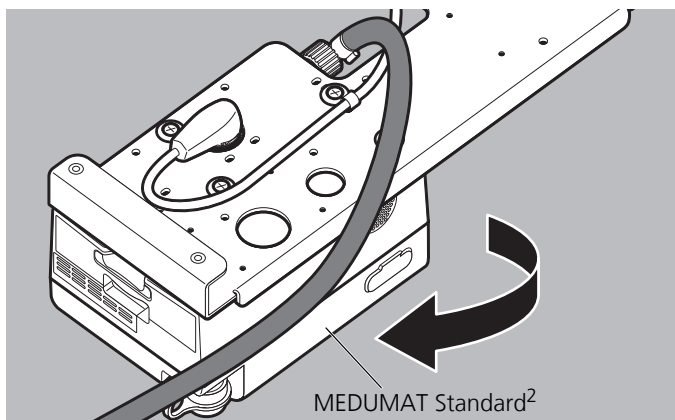


11. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : faire passer le tuyau basse pression vers la gauche.

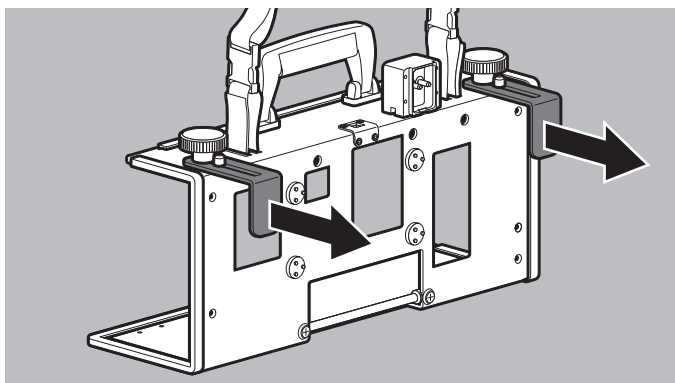

12. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :

- Desserrer les boutons molette.
- Tirer les équerres supports pour les écarter.
- Resserrer les boutons molette.

13. Placer l'unité de transport sur la plaque d'écartement, les trous devant coïncider.

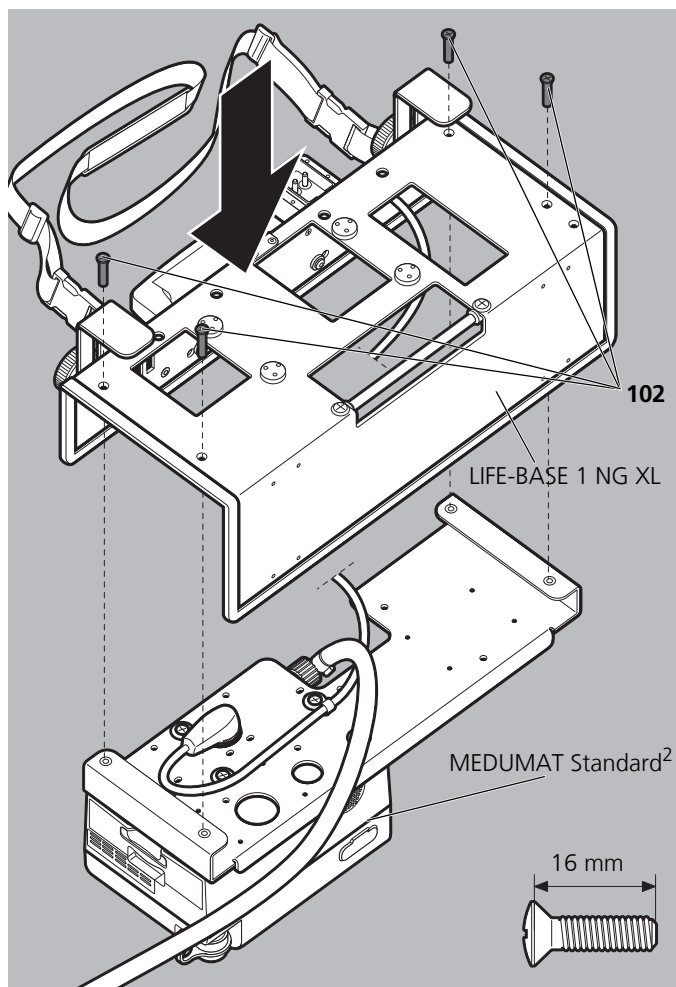

14. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102**.

ou

pour LIFE-BASE 3 NG : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104**.

15. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport
(voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).


Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.

Montage du moniteur défibrillateur

- Valable pour*
- MEDUCORE Standard²
 - MEDUCORE Standard

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

1. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).
2. Positionner l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

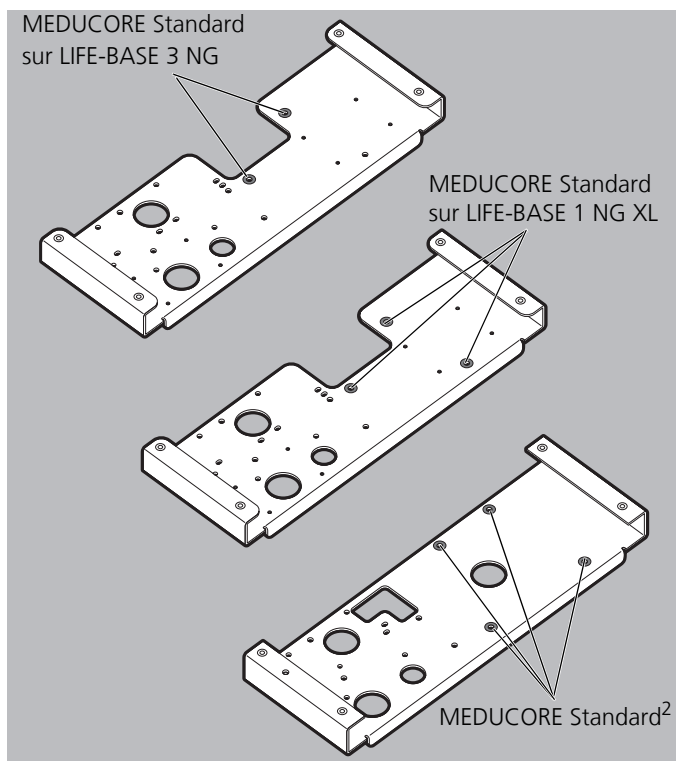


3. Déterminer les trous devant servir à monter l'appareil sur la plaque d'écartement.

4. Poser la plaque d'écartement sur l'appareil.


À noter :

- Chaque appareil a une position définie.
- Les trous prévus sur l'appareil et sur la plaque d'écartement doivent impérativement coïncider.

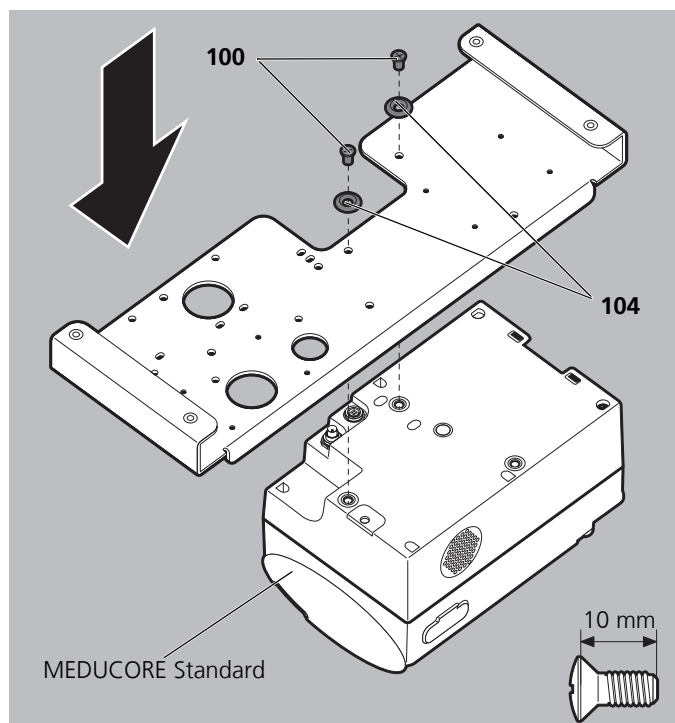
5. Visser la plaque d'écartement sur l'appareil avec des vis **100** et des rondelles de protection **104**.

Appareil	Pièce	Nombre
MEDUCORE Standard ²	100	4
	104	4
MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 1 NG XL	100	3
	104	3
MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 3 NG	100	2
	104	2

6. Brancher l'appareil sur l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.
7. Pour MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 3 NG :
placer le câble d'alimentation dans le serre-câble **105**.

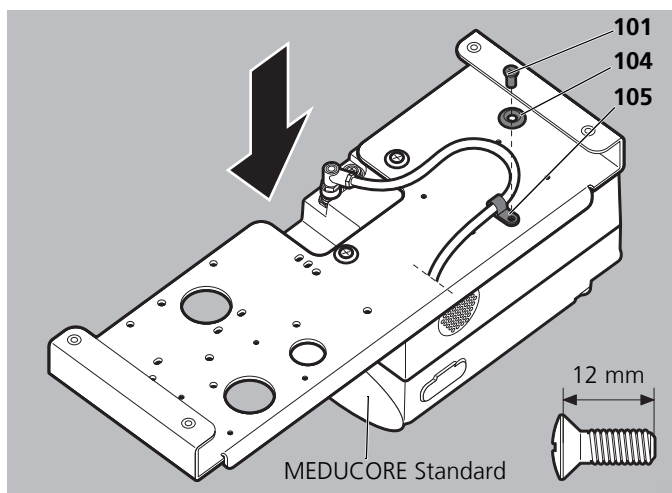


8. Pour MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 3 NG :
visser 1 serre-câble **105** et 1 rondelle de protection **104** avec
1 vis **101** sur la plaque d'écartement.
À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

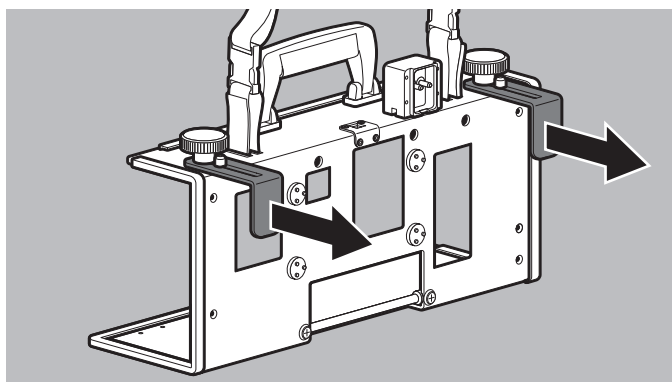

9. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :
 - Desserrer les boutons molette.

- Tirer les équerres supports pour les écarter.
- Resserrer les boutons molette.

10. Placer l'unité de transport sur la plaque d'écartement, les trous devant coïncider.

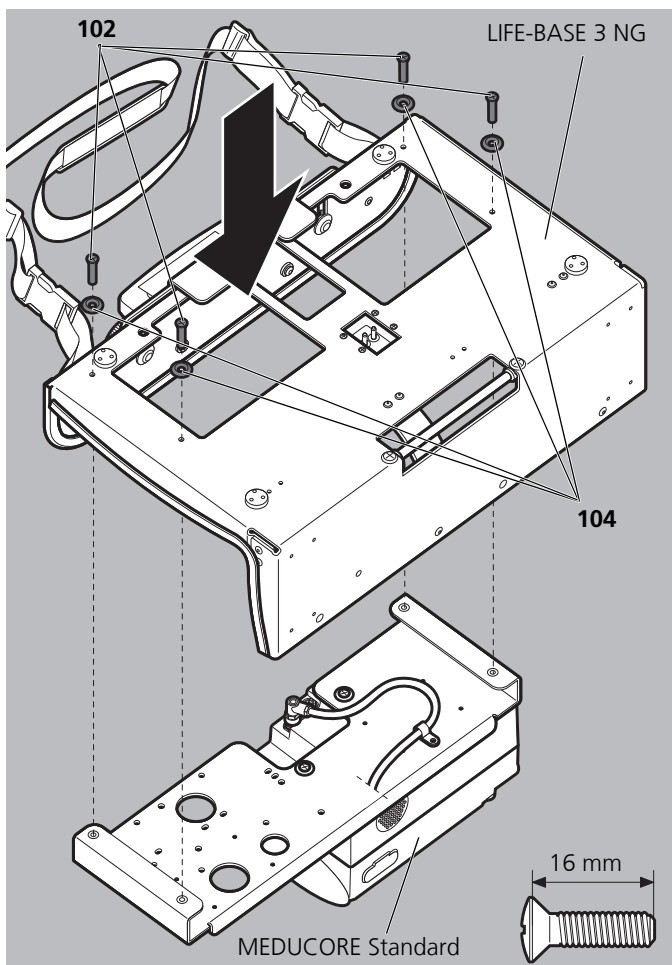

11. Pour LIFE-BASE 3 NG : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104**

ou

pour LIFE-BASE 1 NG XL : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102**.

12. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport
(voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).


Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.

Montage du ventilateur et de MEDUCORE Standard²

- Valable pour*
- MEDUMAT Standard²
 - MEDUVENT Standard
 - MEDUMAT Easy^{CPR}
 - MEDUCORE Standard²


Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

1. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).

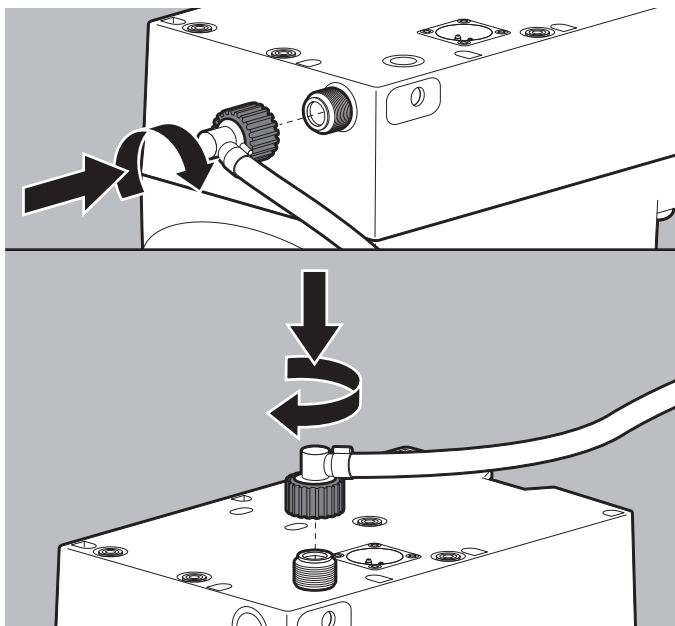


2. Pour MEDUMAT Standard² et MEDUMAT Easy^{CPR} : brancher le tuyau basse pression sur le raccord de gaz comprimé sur le côté ou au dos du ventilateur.


- Positionner les appareils de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

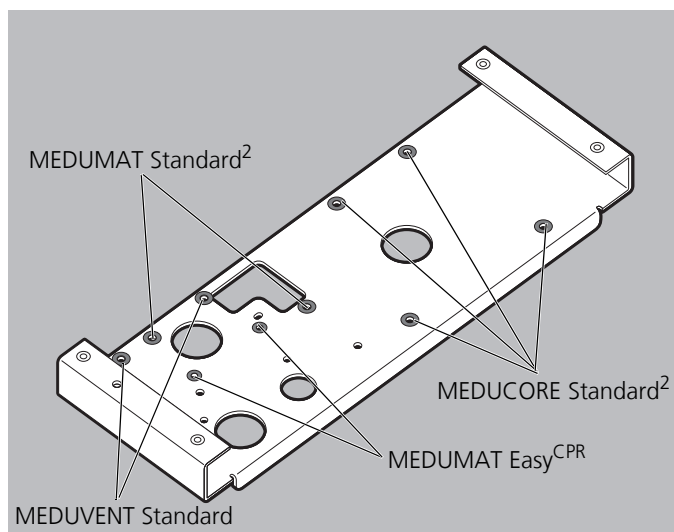


- Déterminer les trous devant servir à monter les appareils sur la plaque d'écartement.
- Poser la plaque d'écartement sur les appareils.
À noter :
 - Chaque appareil a une position définie.
 - Les trous prévus sur l'appareil et sur la plaque d'écartement doivent impérativement coïncider.

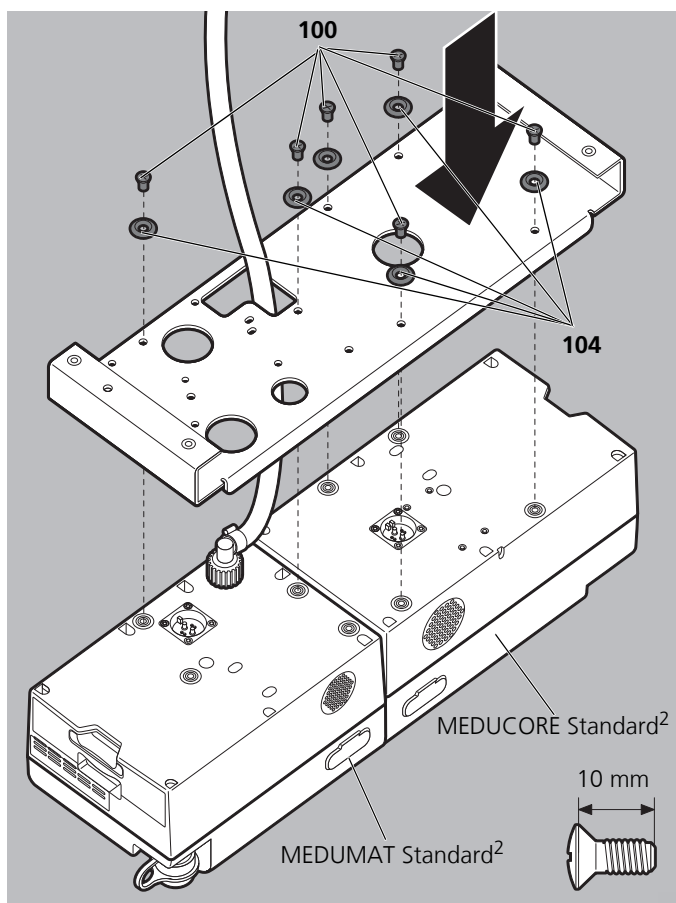

6. Visser la plaque d'écartement sur les appareils avec 6 vis **100** et 6 rondelles de protection **104**.
7. Le cas échéant : brancher les appareils sur l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.
8. Pour MEDUMAT Standard² et MEDUVENT Standard : placer le câble d'alimentation électrique dans le serre-câble **105**.

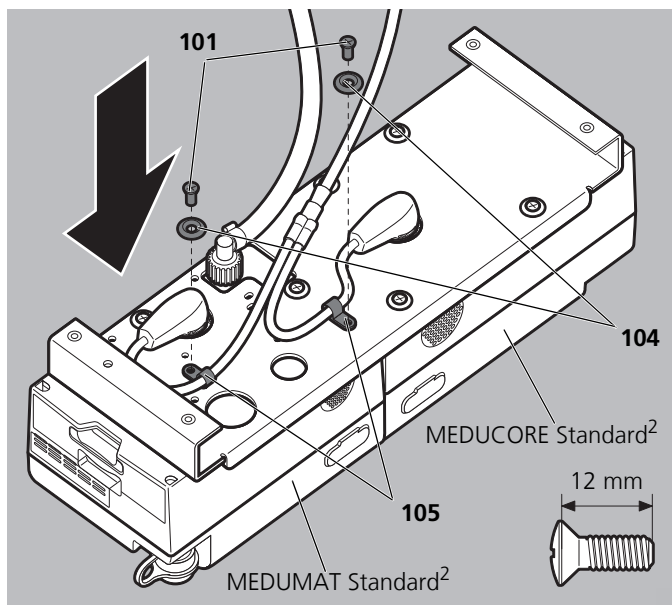


9. Pour MEDUMAT Standard² : visser 2 serre-câbles **105** et 2 rondelles de protection **104** avec 2 vis **101** sur la plaque d'écartement.
 À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

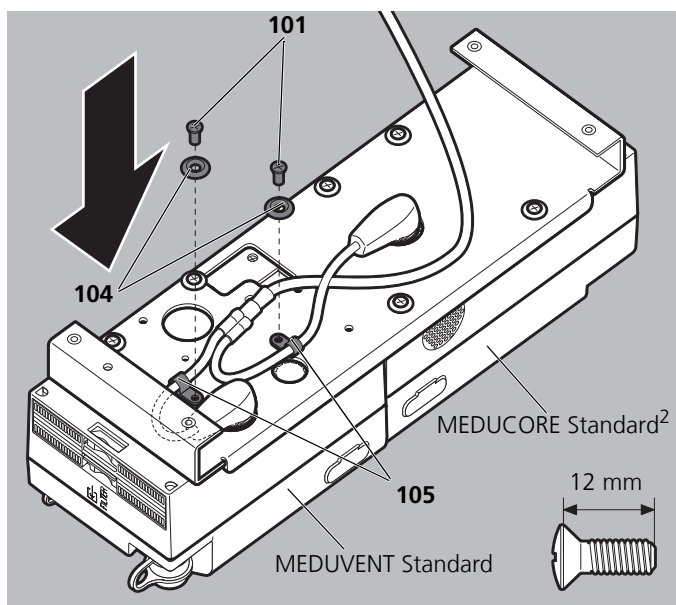


10. Pour MEDUVENT Standard : visser 2 serre-câbles **105** et 2 rondelles de protection **104** avec 2 vis **101** sur la plaque d'écartement.

À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

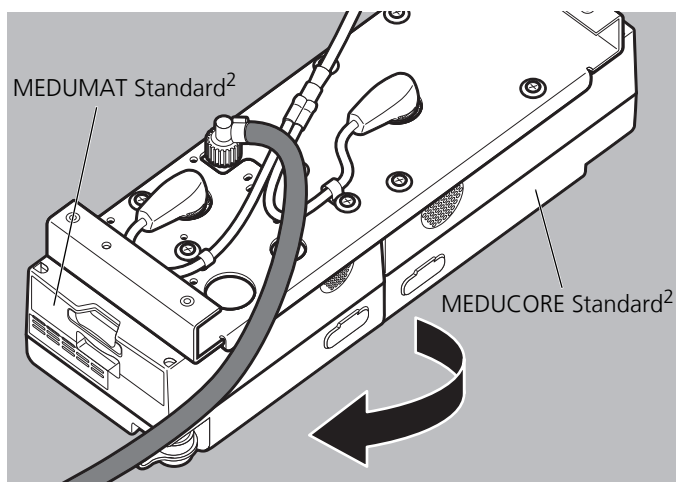


11. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : faire passer le tuyau basse pression vers la gauche.

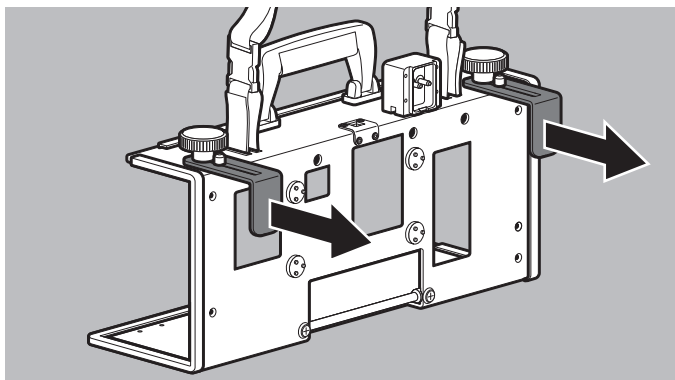

12. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :

- Desserrer les boutons molette.
- Tirer les équerres supports pour les écarter.
- Resserrer les boutons molette.

13. Placer l'unité de transport sur la plaque d'écartement, les trous devant coïncider.

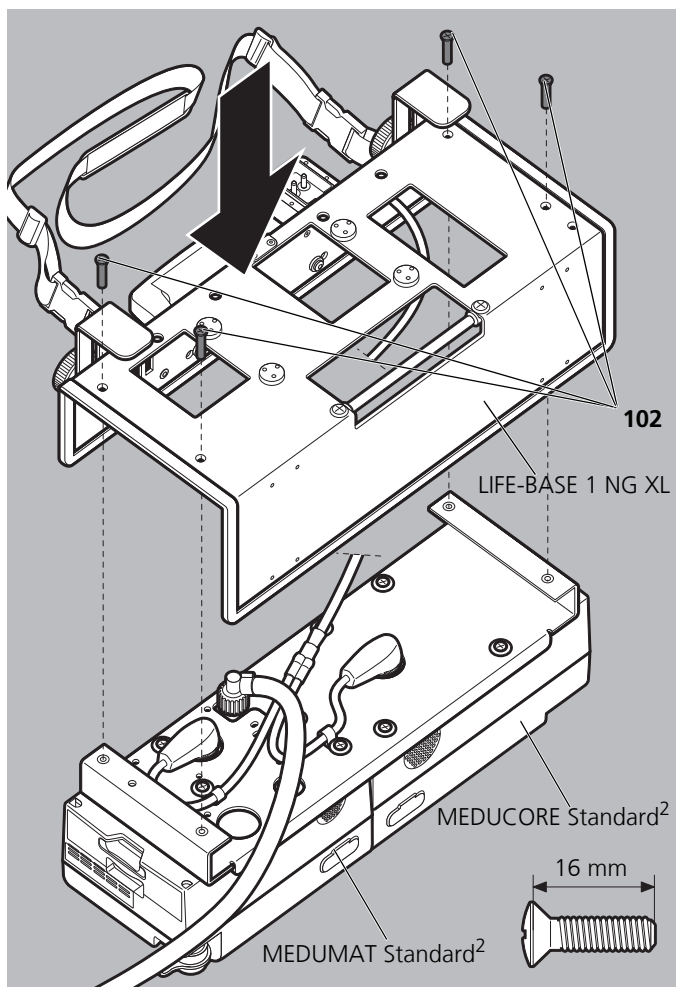

14. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102**.

ou

pour LIFE-BASE 3 NG : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104**.

15. Terminer le montage des appareils sur l'unité de transport ([voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82](#)).


Résultat Les appareils sont montés sur l'unité de transport.

Montage du ventilateur et de MEDUCORE Standard


- Valable pour*
- MEDUMAT Standard²
 - MEDUMAT Easy^{CPR}
 - MEDUCORE Standard

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1


1. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).

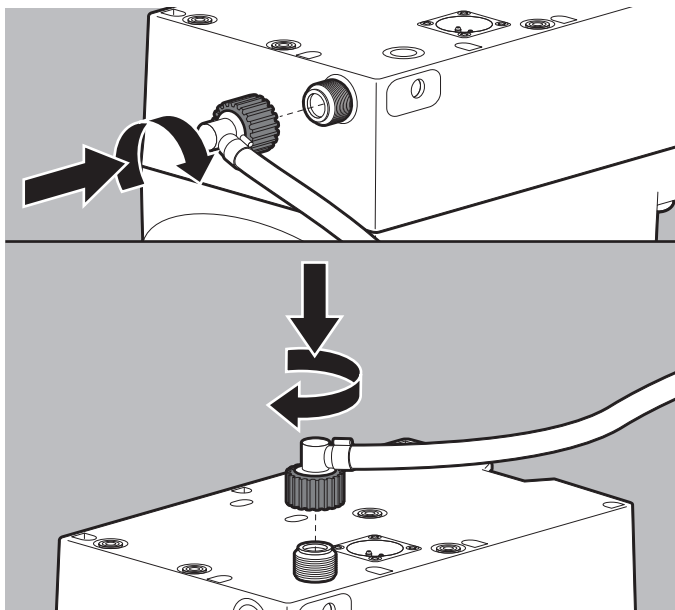

2. Pour MEDUMAT Standard² et MEDUMAT Easy^{CPR} : brancher le tuyau basse pression sur le raccord de gaz comprimé sur le côté ou au dos du ventilateur.
3. Positionner les appareils de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

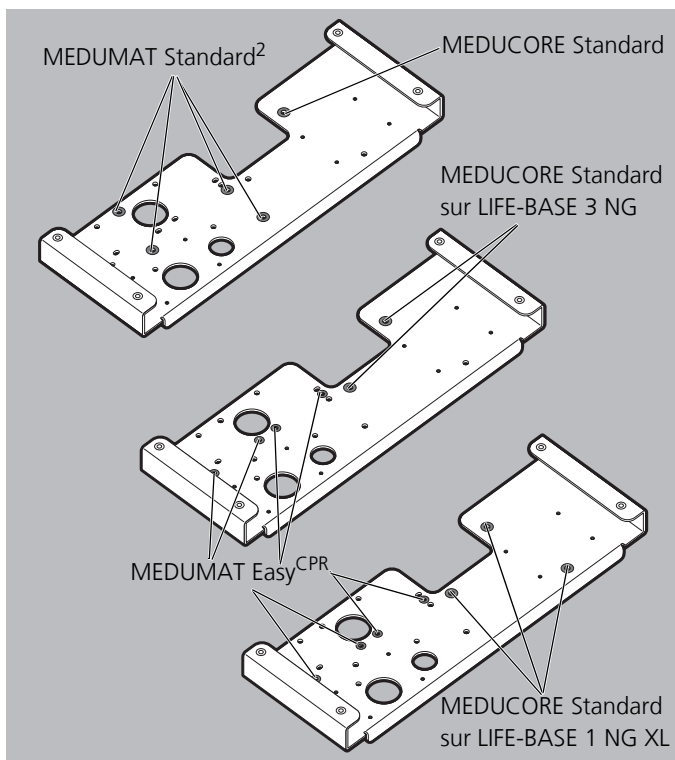

4. Déterminer les trous devant servir à monter les appareils sur la plaque d'écartement.
5. Poser la plaque d'écartement sur les appareils.
À noter :
 - Chaque appareil a une position définie.
 - MEDUMAT Easy^{CPR} peut être monté à 2 emplacements différents sur la plaque d'écartement.
 - Les trous prévus sur l'appareil et sur la plaque d'écartement doivent impérativement coïncider.

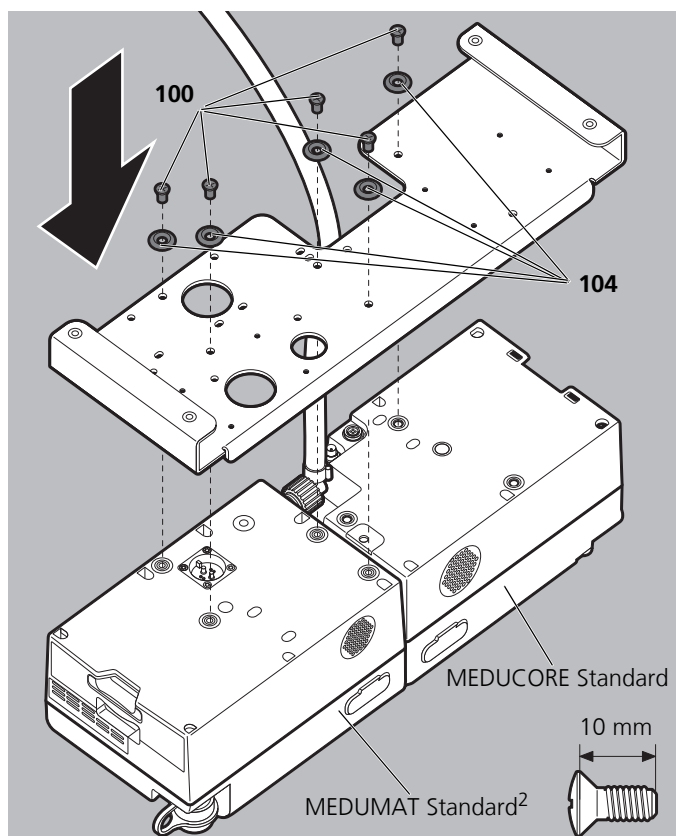


6. Visser la plaque d'écartement sur les appareils avec des vis **100** et des rondelles de protection **104**.


Appareil	Pièce	Nombre
MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Standard²	100	5
	104	5
MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Easy ^{CPR} sur LIFE-BASE 1 NG XL	100	5
	104	5
MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Easy ^{CPR} sur LIFE-BASE 3 NG	100	4
	104	4

7. Le cas échéant : brancher l'appareil sur l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.


8. Le cas échéant : placer le câble d'alimentation électrique dans le serre-câble **105**.

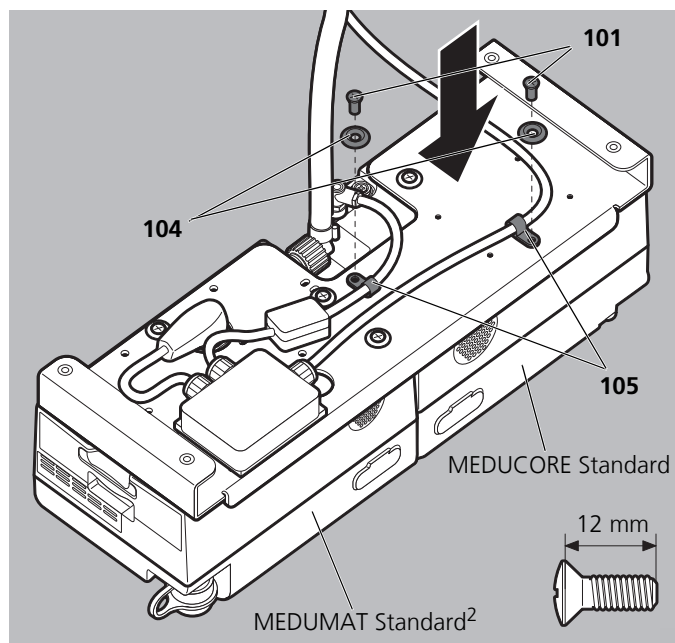


9. Pour MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Standard² : visser 2 serre-câbles **105** et 2 rondelles de protection **104** avec 2 vis **101** sur la plaque d'écartement.
À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

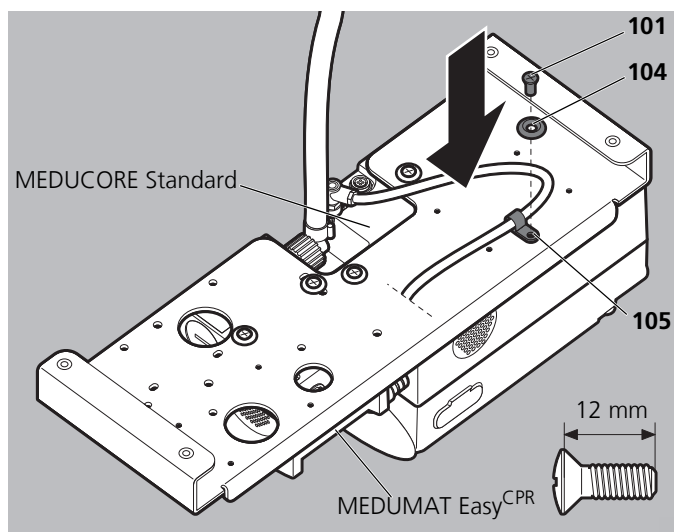

10. Pour MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Easy^{CPR} sur LIFE-BASE 3 NG : visser 1 serre-câble **105** et 1 rondelle de protection **104** avec 1 vis **101** sur la plaque d'écartement. À noter : la surface plane du serre-câble se trouve en bas.

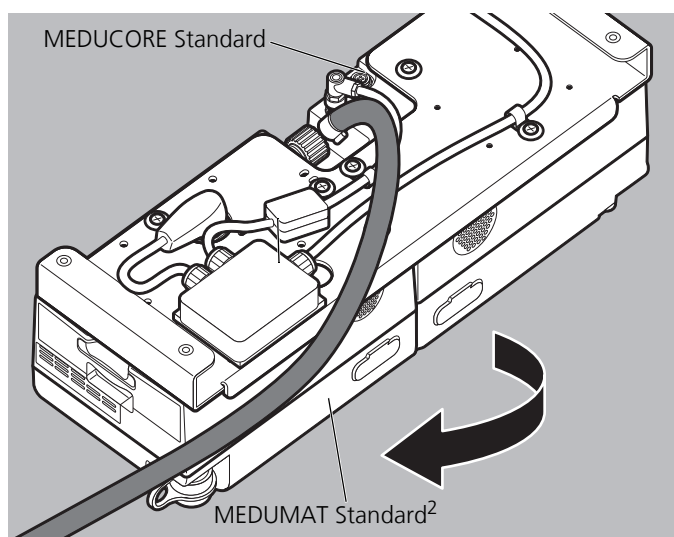


11. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : faire passer le tuyau basse pression vers la gauche.

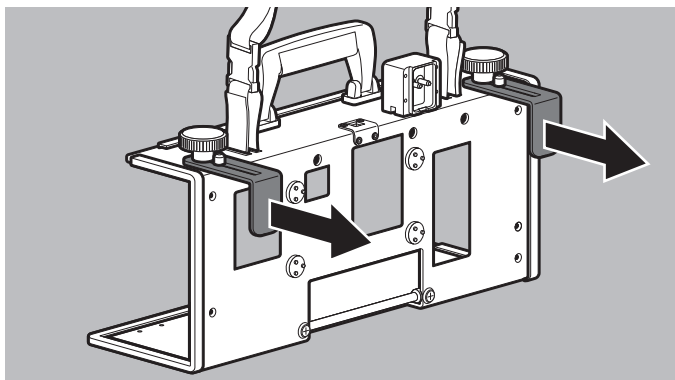

12. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :

- Desserrer les boutons molette.
- Tirer les équerres supports pour les écarter.
- Resserrer les boutons molette.

13. Placer l'unité de transport sur la plaque d'écartement, les trous devant coïncider.

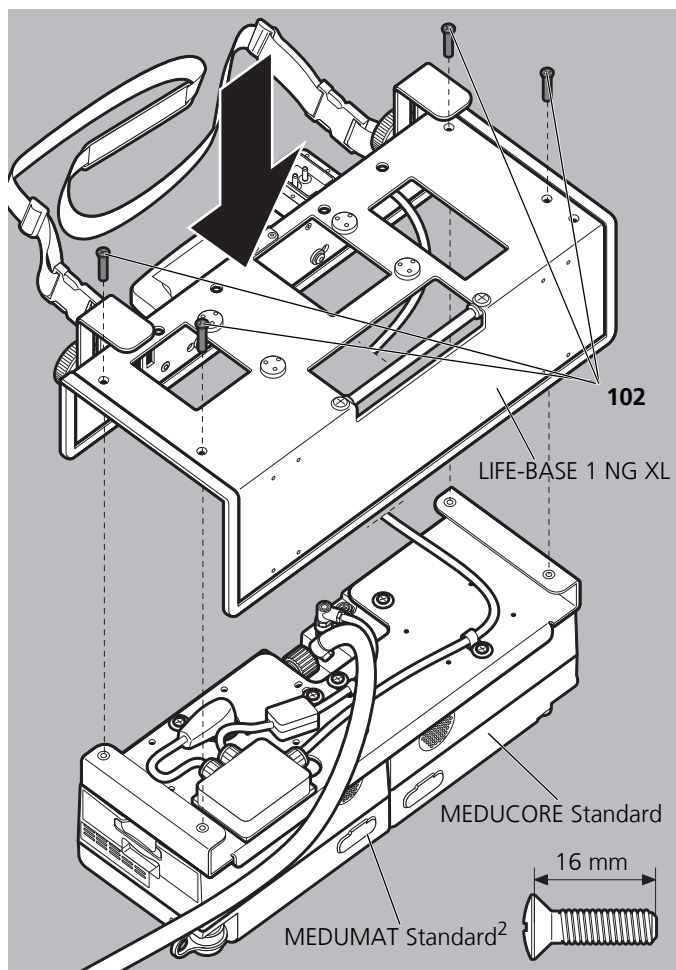

14. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102**.

ou

pour LIFE-BASE 3 NG : visser l'unité de transport sur la plaque d'écartement avec 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104**.

15. Terminer le montage des appareils sur l'unité de transport (voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).

Résultat Les appareils sont montés sur l'unité de transport.

4.5.6 Montage de l'appareil sur LIFE-BASE Mini II


Valable pour

- MEDUMAT Standard^a
- MEDUMAT Easy^{CPR}
- MODUL


*Instruments
nécessaires*

Tournevis cruciforme PH1


1. Le cas échéant : fixer la sangle de transport sur l'unité de transport ([voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38](#)).

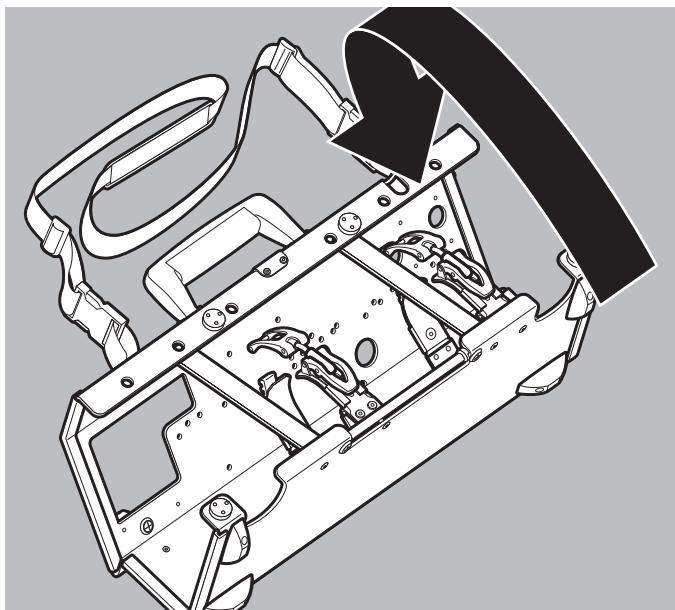

2. Poser l'unité de transport sur le côté fermé étroit.

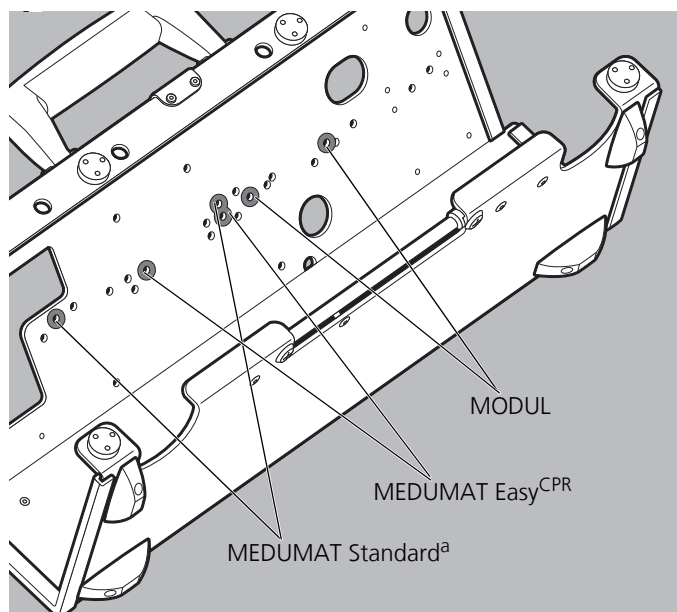

3. Déterminer les trous devant servir à monter l'appareil sur l'unité de transport.

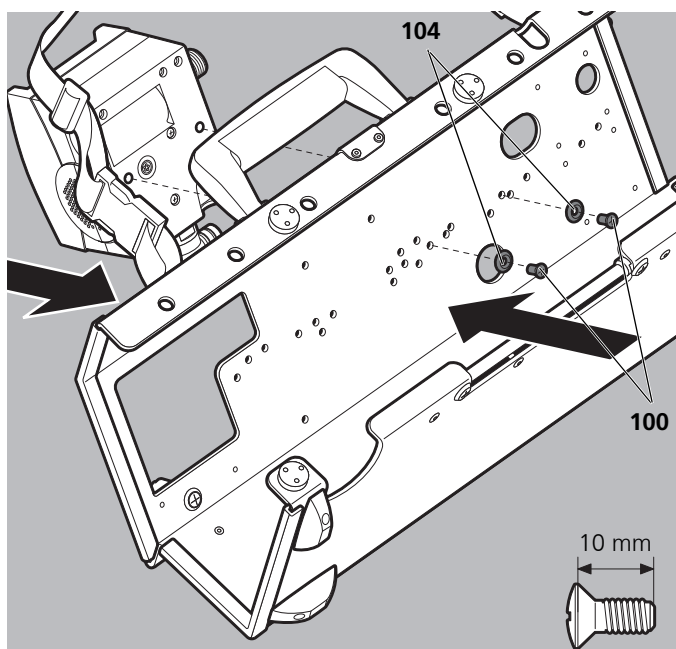

4. Visser l'unité de transport sur l'appareil avec 2 vis **100** et 2 rondelles de protection **104**.

À noter :

- MEDUMAT Easy^{CPR} peut être monté sur l'unité de transport seul ou avec MODUL.
- Les trous prévus sur l'appareil et sur l'unité de transport doivent impérativement coïncider.

5. Terminer le montage de l'appareil sur l'unité de transport (voir « 4.5.7 Fin du montage », page 82).

Résultat L'appareil est monté sur l'unité de transport.

4.5.7 Fin du montage

Condition requise L'appareil est monté sur l'unité de transport.

1. Le cas échéant : monter le sac de protection sur l'unité de transport (voir « 4.1 Montage du sac de protection sur l'unité de transport », page 26).
2. Le cas échéant : monter le sac d'accessoires sur l'unité de transport ou sur le sac de protection (voir « 4.2 Montage du sac d'accessoires sur l'unité de transport ou sur le sac de protection », page 33).
3. Le cas échéant : monter la sangle de transport sur la poignée (voir « 4.3.1 Montage de la sangle de transport sur la poignée », page 38).
4. Le cas échéant : monter les sangles sur l'unité de transport (voir « 4.3.3 Montage des sangles sur l'unité de transport », page 39).
5. Le cas échéant : monter la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport (voir « 4.4 Montage de la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport », page 40).
6. Le cas échéant : brancher les accessoires sur l'appareil.
7. Le cas échéant : fixer l'unité de transport sur un support mural ou sur un support plafond (voir « 6.1 Fixation de l'unité de transport sur un support mural ou sur un support plafond », page 92)

ou

fixer l'unité de transport sur une barre ou sur un rail d'appareillage (voir « 6.3 Fixation de l'unité de transport sur une barre ou sur un rail d'appareillage », page 97).

8. Réaliser un contrôle du fonctionnement (voir « 5 Contrôle du fonctionnement », page 83).

Résultat Le montage des appareils sur l'unité de transport est terminé.

5 Contrôle du fonctionnement



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et d'explosion dus à l'oxygène.

De l'oxygène comprimé peut rapidement enrichir l'environnement en oxygène et provoquer un embrasement ou l'explosion de substances combustibles.

- ⇒ Assurer une aération suffisante.
- ⇒ **Ne jamais** fumer à proximité de robinetteries d'alimentation en oxygène.
- ⇒ Maintenir l'alimentation en oxygène à l'écart de flammes nues ou de toute autre source d'inflammation.
- ⇒ Ne pas laisser de traces d'huile ou de graisse sur l'appareil et ses raccords vissés.
- ⇒ Se laver les mains avant d'effectuer des travaux sur l'alimentation en oxygène afin d'éliminer toute trace d'huile ou de graisse.
- ⇒ Bien bloquer la bouteille d'oxygène pour l'empêcher de tomber.
- ⇒ Ne toujours serrer ou desserrer qu'à la main tous les raccords vissés sur la bouteille d'oxygène ou sur le manodétendeur.
- ⇒ Utiliser au besoin une clé adaptée aux bouteilles d'oxygène de type Pin Index.



AVERTISSEMENT

Perturbation ou défaillance du traitement en cas d'unité de transport ou d'accessoires défectueux ou non opérationnels.

L'emploi d'unités de transport ou d'accessoires défectueux peut provoquer des dysfonctionnements de l'unité de transport. Il peut en résulter des blessures graves, voire potentiellement mortelles, pour le patient et l'utilisateur.

- ⇒ Effectuer un contrôle du fonctionnement complet avant chaque emploi.
- ⇒ N'utiliser que des unités de transport et des accessoires dont le contrôle du fonctionnement s'est déroulé correctement.

AVIS

Domages matériels suite à des coups de bélier sur les robinetteries.

Une ouverture trop rapide du robinet peut provoquer de forts coups de bélier et endommager la bouteille d'oxygène ou la robinetterie.

- ⇒ Toujours ouvrir lentement le robinet de la bouteille d'oxygène.

5.1 Périodicités

Pièce	Périodicité
Unité de transport avec tous les appareils montés	<ul style="list-style-type: none"> • Avant chaque utilisation • Après chaque montage • Après chaque retraitement hygiénique • Au moins tous les 6 mois

5.2 Contrôle visuel de l'unité de transport

1. Vérifier le parfait état extérieur de l'unité de transport.
2. Le cas échéant : s'assurer que l'interface de charge et le câble de raccordement ne présentent pas
 - de détériorations,
 - d'usure,
 - de fils dénudés,
 - de coudes dans les zones de connexion.
3. Le cas échéant : alimenter l'unité de transport en électricité par l'intermédiaire de l'interface de charge.
À noter :
 - La LED pour l'alimentation électrique externe doit être allumée.
 - Le témoin d'état de batterie doit être allumé ou clignoter.
4. Si des pièces sont endommagées : faire réparer l'unité de transport par WEINMANN Emergency ou la remplacer.

Résultat L'unité de transport a été contrôlée visuellement.

5.3 Contrôle des colliers de serrage

1. Vérifier si la bouteille d'oxygène est correctement installée.
À noter :
 - Les étriers de fermeture des colliers de serrage ne doivent pas pouvoir s'ouvrir.
 - La bouteille d'oxygène ne doit pas pouvoir bouger.
2. Si la bouteille d'oxygène bouge : régler la force de serrage des colliers de serrage en fonction de la bouteille d'oxygène (voir « 4.4 Montage de la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport », page 40).
3. Si les étriers de fermeture s'ouvrent ou ne peuvent pas être fermés : régler la force de serrage des colliers de serrage en fonction de la bouteille d'oxygène (voir « 4.4 Montage de la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport », page 40).
4. S'assurer que les colliers de serrage ne présentent pas de traces de corrosion.
5. Si les colliers de serrage présentent des traces de corrosion : faire remplacer les colliers de serrage par WEINMANN Emergency.

Résultat Les colliers de serrage ont été contrôlés.

5.4 Vérification du verrouillage du support mural ou du support plafond

1. Fixer l'unité de transport sur un support mural ou sur un support plafond (voir « 6.1 Fixation de l'unité de transport sur un support mural ou sur un support plafond », page 92).
À noter :
 - L'unité de transport doit impérativement être fermement fixée sur le support mural ou sur le support plafond.
 - La goupille de contrôle rouge de la broche de verrouillage ne doit pas dépasser de la partie supérieure du boîtier de verrouillage.

2. Saisir la poignée d'une main.
3. Appuyer vers le haut sur la broche de verrouillage.
À noter :
 - La broche de verrouillage ne doit pas résister lorsqu'on la pousse vers le haut.
 - L'unité de transport ne doit pas rester coincée lorsqu'elle doit être retirée.
4. Si le verrouillage du support mural ou du support plafond ne fonctionne pas parfaitement : faire remplacer le verrouillage par WEINMANN Emergency.


Résultat Le verrouillage du support mural ou du support plafond a été vérifié.

5.5 Vérification du verrouillage des pinces de fixation

1. Fixer l'unité de transport ou le support mural sur un rail d'appareillage ([voir « 6.3.6 Fixation de l'unité de transport avec des pinces de fixation », page 103](#)).
À noter :
 - L'unité de transport ou le support mural ne doit pas pouvoir bouger sur le rail d'appareillage.
 - Les leviers de blocage doivent être parallèles au rail d'appareillage.
2. Pousser les leviers de blocage vers le bas jusqu'à ce que le verrouillage se débloque.
3. Si les leviers de blocage ne fonctionnent pas parfaitement : remplacer les pinces de fixation.

Résultat Le verrouillage des pinces de fixation a été vérifié.

5.6 Vérification des vis sur le support mural

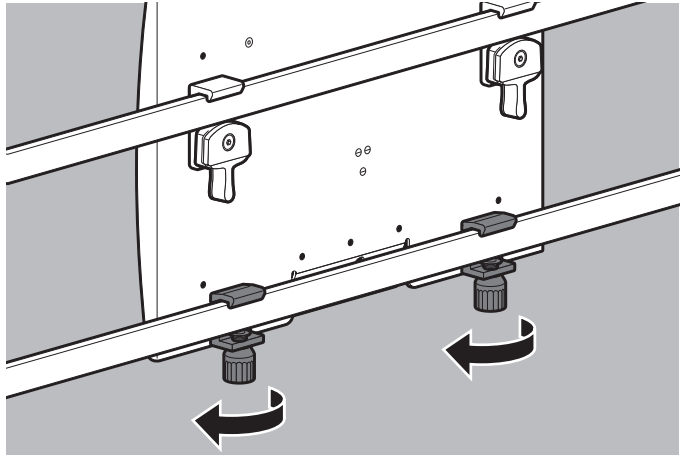

1. Desserrer les vis.
À noter : les filetages doivent pouvoir tourner facilement.
2. Si les vis ne fonctionnent pas parfaitement : les remplacer.

Résultat Les vis sur le support mural ont été vérifiées.

5.7 Vérification de la fixation sur barres

1. Fixer l'unité de transport ou le support mural sur une barre ou sur un rail d'appareillage (voir « 6.3 Fixation de l'unité de transport sur une barre ou sur un rail d'appareillage », page 97).
À noter : L'unité de transport ou le support mural ne doit pas pouvoir bouger.
2. Desserrer la vis de blocage.
À noter : Les vis doivent pouvoir tourner facilement.
3. Si la fixation sur barres ne fonctionne pas parfaitement : remplacer la fixation sur barres.

Résultat La fixation sur barres a été contrôlée.

5.8 Vérification des sacs

Ce chapitre décrit le contrôle du fonctionnement de tous les sacs pouvant être utilisés avec l'unité de transport. Il est possible que, en fonction du modèle acquis, certaines pièces décrites dans ce chapitre pour le contrôle manquent.


1. Ouvrir entièrement les fermetures éclair des deux côtés.
À noter : les fermetures éclair ne doivent pas coincer.
2. Ouvrir les boutons-pression.
3. Fermer les boutons-pression.
À noter : les boutons-pression ne doivent pas se rouvrir.
4. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes.
À noter :
 - Les fermetures auto-agrippantes ne doivent pas présenter de saletés.
 - Les bandes à boucles ne doivent pas être usées.
5. Ouvrir les clips de fermeture.
6. Fermer les clips de fermeture.
À noter :
 - Les clips de fermeture ne doivent pas coincer.
 - Les clips de fermeture ne doivent pas se déformer.
 - Les clips de fermeture doivent bien s'enclencher en se fermant.
7. Ouvrir les fermetures magnétiques.
8. Fermer les fermetures magnétiques.
À noter : les fermetures magnétiques ne doivent pas se rouvrir.
9. Si le sac ne fonctionne pas parfaitement : remplacer le sac.

Résultat Le sac a été contrôlé.


5.9 Vérification de l'étanchéité du système

Condition requise L'appareil est branché à l'alimentation en oxygène.

1. Se conformer à la notice d'utilisation des appareils et des manodétendeurs.
2. Arrêter tous les appareils.
3. S'assurer que tous les raccords de tuyaux sont bien serrés.

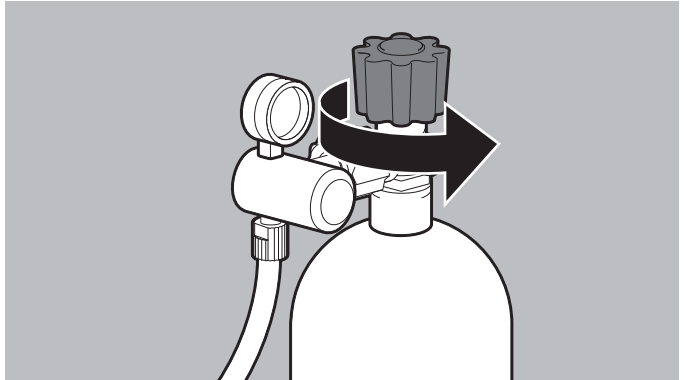

4. Ouvrir lentement la bouteille d'oxygène.
Tourner pour cela lentement la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

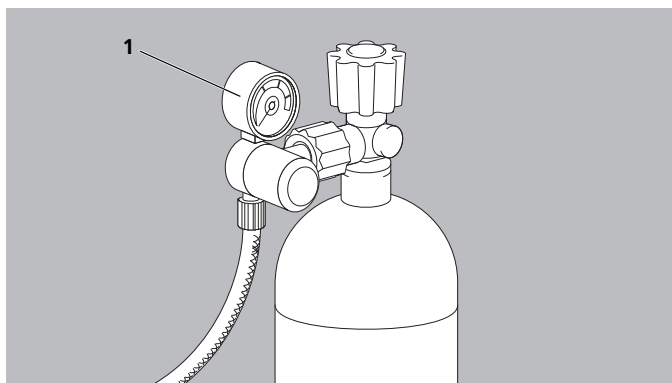

5. Lire la pression à l'intérieur de la bouteille d'oxygène sur l'indicateur (1) du manodétendeur :

Pression	Niveau de remplissage de la bouteille d'oxygène
200 bars	pleine
100 bars	à moitié pleine
< 50 bars	faible

6. Si l'indicateur du manodétendeur affiche < 50 bars :
remplacer la bouteille d'oxygène.
7. Fermer la bouteille d'oxygène à la main.
8. Observer l'aiguille de l'indicateur sur le manodétendeur pendant 1 minute :
- L'aiguille ne change pas de position :
le système est étanche.
 - L'aiguille descend continuellement :
le système n'est pas étanche.
9. Si le système n'est pas étanche : éliminer les fuites du système
(voir « 5.10 Élimination des fuites du système », page 91).

Résultat L'étanchéité du système a été contrôlée.

5.10 Élimination des fuites du système

Condition requise Le robinet de la bouteille d'oxygène est ouvert.

1. Se conformer à la notice d'utilisation des appareils et des manodétendeurs.
2. Préparer une solution d'eau savonneuse avec du savon non parfumé.
3. Appliquer de la solution d'eau savonneuse sur tous les raccords vissés et sur tous les raccords de tuyaux.
À noter : si des petites bulles d'air apparaissent, le système présente une fuite à cet endroit.
4. Fermer la bouteille d'oxygène à la main.
5. Mettre l'appareil en marche jusqu'à ce que l'indicateur de la bouteille d'oxygène affiche « 0 ».
6. Arrêter l'appareil.
7. Se conformer à la notice d'utilisation de l'appareil concerné pour remplacer des pièces défectueuses.
8. Vérifier l'étanchéité du système ([voir « 5.9 Vérification de l'étanchéité du système », page 89](#)).
9. Si le système n'est toujours pas étanche :
faire réparer le système par WEINMANN Emergency.


Résultat Le système est à nouveau étanche.

6 Utilisation de l'appareil

6.1 Fixation de l'unité de transport sur un support mural ou sur un support plafond

Valable pour


Unité de transport	Support mural ou support plafond
LIFE-BASE 1 NG XS	BASE-STATION 1 NG BASE-STATION Mini II
LIFE-BASE 1 NG	
LIFE-BASE 1 NG XL	
LIFE-BASE Mini II	BASE-STATION Mini II
LIFE-BASE III	BASE-STATION 3 NG
LIFE-BASE 3 NG	
LIFE-BASE 4 NG	

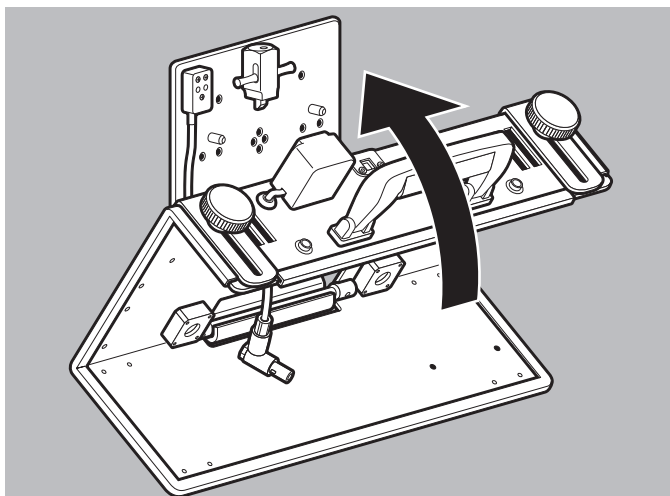

1. Placer l'unité de transport dans le rail du support mural ou du support plafond.

2. **⚠ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**

Faire pivoter l'unité de transport en direction du mur ou du plafond jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche de façon audible et visible dans l'unité de transport.

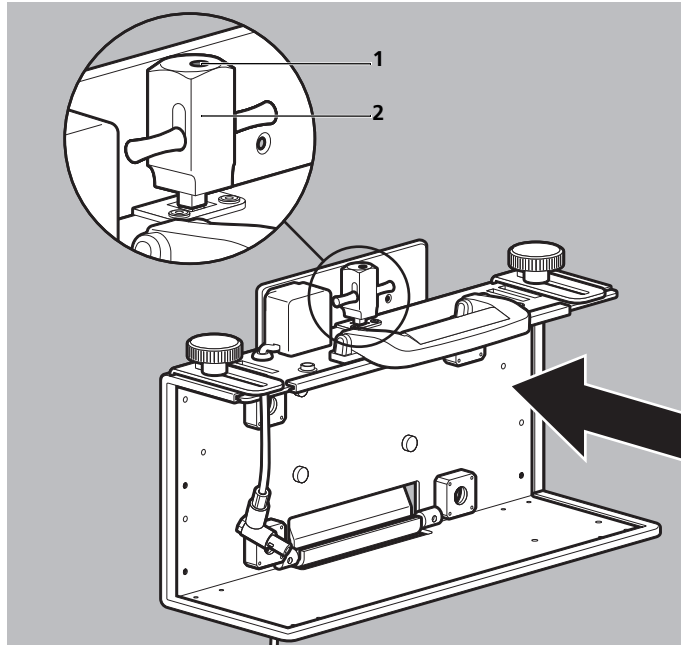

3. **⚠ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**

S'assurer que la goupille de contrôle rouge (1) obture parfaitement la partie supérieure du boîtier de verrouillage (2) et ne dépasse pas.

Résultat L'unité de transport est correctement fixée sur le support mural ou sur le support plafond.

6.2 Retrait de l'unité de transport d'un support mural ou d'un support plafond

AVERTISSEMENT


Risque de blessures en cas de chute d'un objet.

L'unité de transport peut tomber du support mural ou du support plafond et blesser les personnes se trouvant à proximité, ou endommager d'autres appareils.


⇒ Bien maintenir l'unité de transport pour la retirer du support mural ou du support plafond.

Valable pour

- LIFE-BASE 1 NG XS
- LIFE-BASE 1 NG
- LIFE-BASE 1 NG XL
- LIFE-BASE Mini II
- LIFE-BASE III
- LIFE-BASE 3 NG
- LIFE-BASE 4 NG

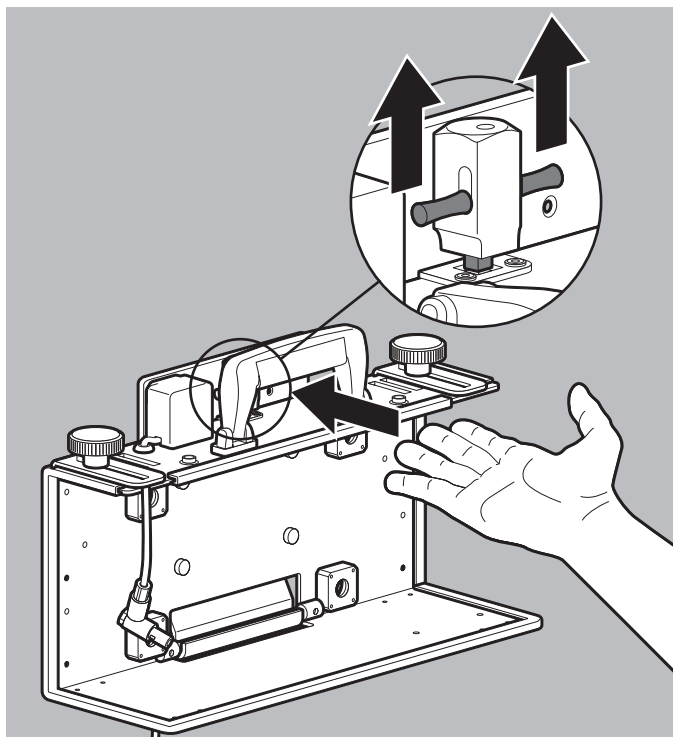

1. Saisir la poignée d'une main.
2. Appuyer vers le haut sur le verrouillage.

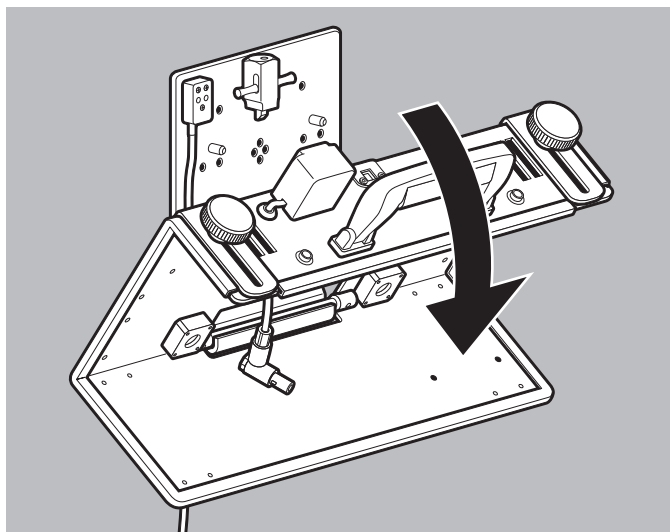

3. Faire pivoter l'unité de transport légèrement vers l'avant.

4. Retirer l'unité de transport du rail.

Résultat L'unité de transport a été retirée du support mural ou du support plafond.

6.3 Fixation de l'unité de transport sur une barre ou sur un rail d'appareillage

AVERTISSEMENT


Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.

Si l'unité de transport est mal fixée ou si elle est simplement suspendue avec des équerres supports ou des griffes, elle risque de tomber ou d'être catapultée à travers le véhicule de secours et de blesser ainsi les personnes se trouvant à proximité. La norme EN 1789 précise qu'une fixation par simple accrochage, par sangles ou avec des barres ne suffit pas pour sécuriser l'unité de transport.

- ⇒ Fixer l'unité de transport pendant le trajet ou le vol sur un support mural, un support plafond ou avec des pinces de fixation sur un rail d'appareillage.
- ⇒ Ne fixer l'unité de transport avec des pinces de fixation que sur un rail d'appareillage conçu pour supporter un poids de 6 kg au moins.

6.3.1 Fixation de LIFE-BASE Mini II

Valable pour LIFE-BASE Mini II

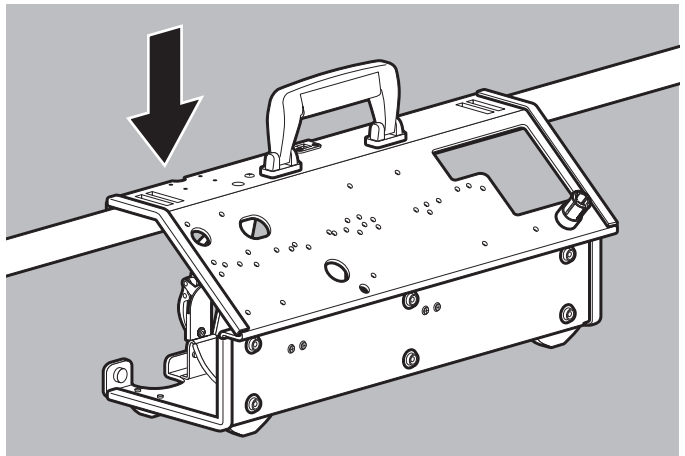

1. Suspendre l'unité de transport par l'arrière sur une barre ou sur un rail d'appareillage.


Résultat LIFE-BASE Mini II est fixée sur une barre ou sur un rail d'appareillage.

6.3.2 Fixation de l'unité de transport avec des équerres supports

Valable pour

- LIFE-BASE 1 NG
- LIFE-BASE 1 NG XL
- LIFE-BASE III
- LIFE-BASE 3 NG
- LIFE-BASE 4 NG


1. Desserrer les boutons molette.

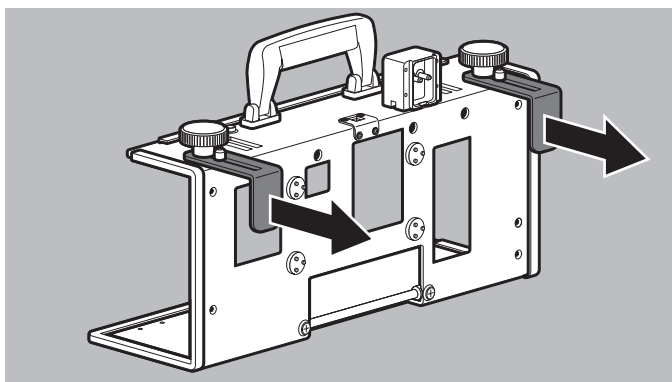

2. Tirer les équerres supports pour les écarter.

3. Adapter les équerres supports au diamètre de la barre ou du rail d'appareillage.

4. Resserrer les boutons molette.

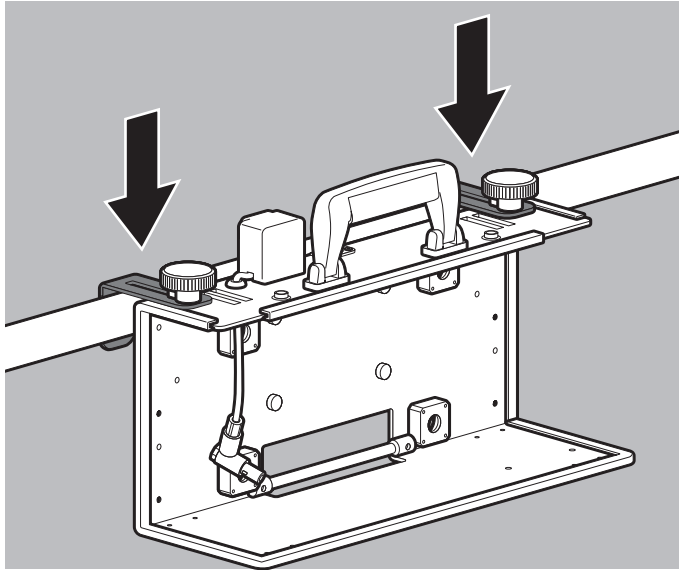

5. Suspendre l'unité de transport sur une barre ou sur un rail d'appareillage.


Résultat L'unité de transport est fixée avec des équerres supports sur une barre ou sur un rail d'appareillage.

6.3.3 Fixation de l'unité de transport avec sac de protection

Valable pour LIFE-BASE 1 NG XS

Condition requise Un sac de protection est fixé sur l'unité de transport.

1. Ouvrir les fermetures magnétiques des sangles au dos du sac de protection.

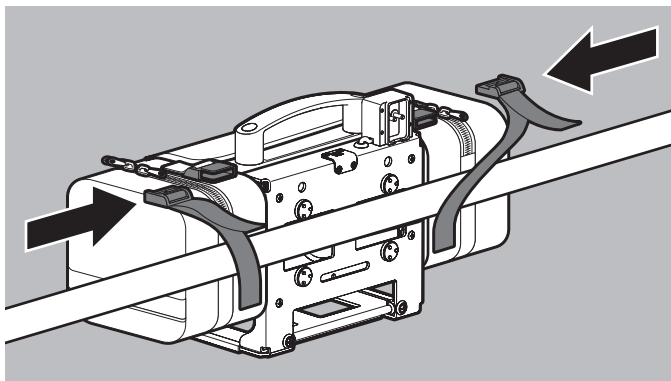


2. Faire passer les sangles autour d'une barre ou d'un rail d'appareillage.
3. Fermer les fermetures magnétiques des sangles.
4. Serrer les sangles.

Résultat L'unité de transport est fixée avec des sangles sur une barre ou sur un rail d'appareillage.

6.3.4 Fixation de l'unité de transport avec des griffes

Valable pour LIFE-BASE light XS

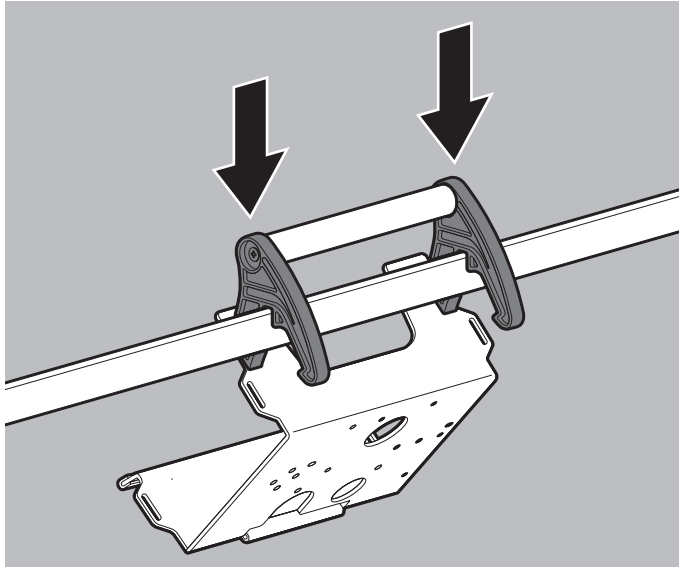

1. Suspendre l'unité de transport sur le rail d'appareillage à l'aide des deux griffes.
2. **⚠ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**
 Fixer 2 sangles sur une barre ou sur un rail d'appareillage.
 À noter : les bandes de caoutchouc doivent se trouver sur la face intérieure des sangles.

Résultat L'unité de transport est fixée avec des griffes sur une barre ou sur un rail d'appareillage.

6.3.5 Fixation de l'unité de transport ou du support mural avec une fixation sur barres

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.

Si l'unité de transport est mal fixée ou si elle est simplement suspendue, elle risque de tomber ou d'être catapultée à travers le véhicule de secours et de blesser ainsi les personnes se trouvant à proximité.

⇒ N'utiliser une fixation sur barres que dans un environnement stationnaire.

⇒ N'utiliser que des barres d'un diamètre de 19 mm à 40 mm pour fixer l'unité de transport.


Valable pour

- LIFE-BASE light XS
- LIFE-BASE light
- BASE-STATION 1 NG

Condition requise

Monter la fixation sur barres à l'horizontale ou à la verticale sur l'unité de transport ou sur le support mural.

1. Suspendre l'unité de transport ou le support mural avec la fixation sur barres sur une barre ou sur un rail d'appareillage.

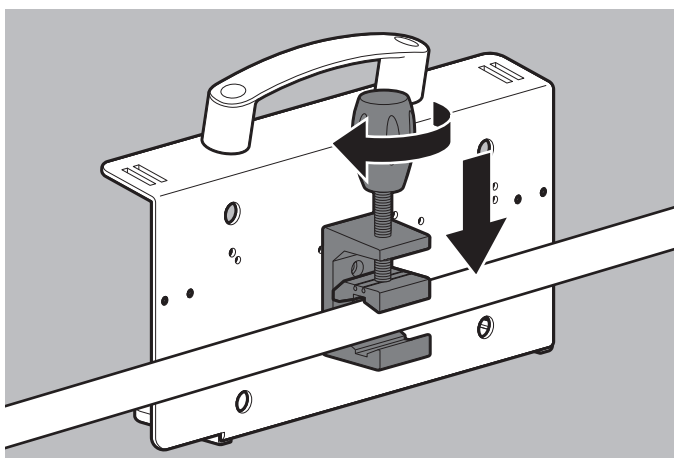

2. **⚠ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**

Serrer la vis de blocage jusqu'à ce que l'unité de transport ou le support mural ne puisse plus bouger.


Résultat L'unité de transport ou le support mural est fixé à l'aide de la fixation sur barres sur une barre ou sur un rail d'appareillage.

6.3.6 Fixation de l'unité de transport avec des pinces de fixation

- Valable pour*
- LIFE-BASE light XS
 - LIFE-BASE light

Condition requise Les pinces de fixation sont montées sur l'unité de transport.

1. Suspendre l'unité de transport sur le rail d'appareillage à l'aide des pinces de fixation.

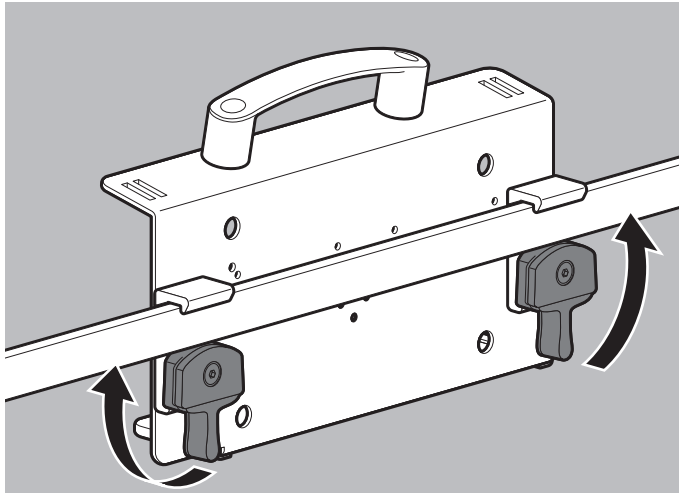

2. **⚠ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**

Pousser les leviers de blocage vers l'extérieur jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche bien.

À noter : les leviers de blocage doivent être parallèles au rail d'appareillage.


Résultat L'unité de transport est fixée avec des pinces de fixation sur un rail d'appareillage.

6.3.7 Fixation d'un support mural avec des pinces de fixation

- Valable pour*
- BASE-STATION 1 NG sans vis
 - BASE-STATION Mini II
 - BASE-STATION 3 NG

Condition requise Les pinces de fixation sont montées sur le support mural.

1. Suspendre le support mural sur le rail d'appareillage à l'aide des pinces de fixation.

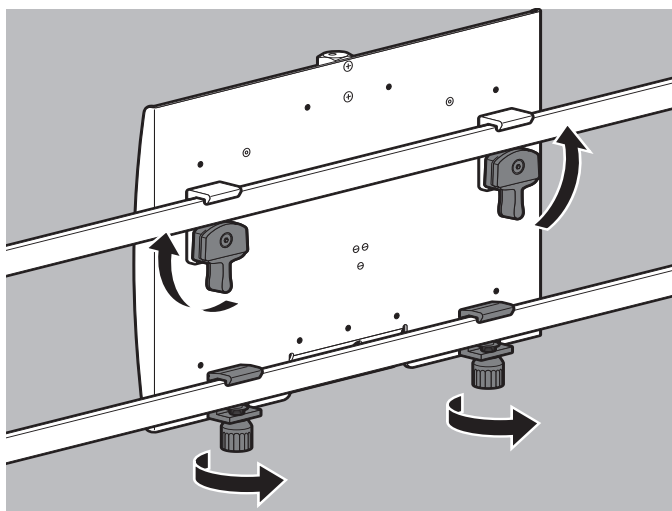

2. **⚠ Avertissement ! Risque de blessures si l'unité de transport est mal fixée.**

Pousser les leviers de blocage vers l'extérieur jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche bien.

À noter : les leviers de blocage doivent être parallèles au rail d'appareillage.


3. Pour BASE-STATION Mini II et BASE-STATION 3 NG : serrer les vis.

Résultat Le support mural est fixé avec des pinces de fixation sur un rail d'appareillage.

6.4 Retrait de l'unité de transport d'une barre ou d'un rail d'appareillage

6.4.1 Retrait de LIFE-BASE Mini II

Valable pour LIFE-BASE Mini II

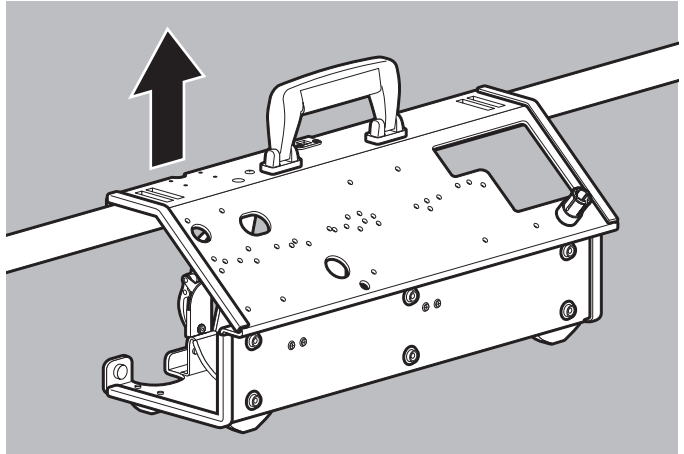


1. Retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage.

Résultat LIFE-BASE Mini II est retirée de la barre ou du rail d'appareillage.


6.4.2 Retrait de l'unité de transport avec des équerres supports

Valable pour

- LIFE-BASE 1 NG
 - LIFE-BASE 1 NG XL
 - LIFE-BASE III
 - LIFE-BASE 3 NG
 - LIFE-BASE 4 NG
1. Desserrer les boutons molette.

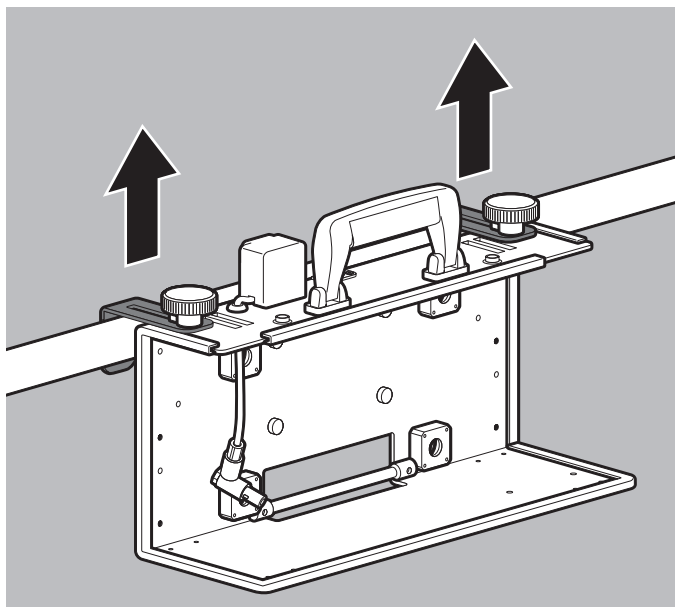

2. Retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage.

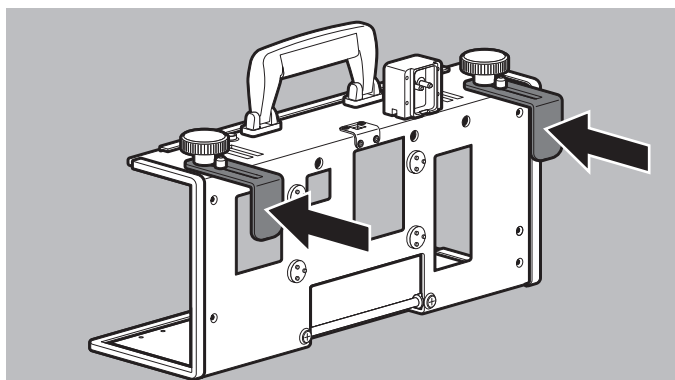

3. Repousser les équerres supports pour les remettre dans leur position initiale.


4. Resserrer les boutons molette.

Résultat L'unité de transport est retirée de la barre ou du rail d'appareillage.

6.4.3 Retrait de l'unité de transport avec sac de protection

Valable pour LIFE-BASE 1 NG XS

1. Desserrer les sangles en soulevant la boucle de la sangle.

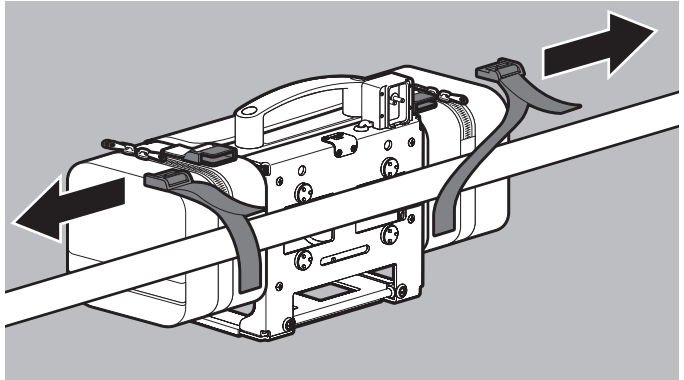


2. Ouvrir les fermetures magnétiques des sangles au dos du sac de protection.
3. Retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage.
4. Fermer les fermetures magnétiques des sangles.

Résultat L'unité de transport est retirée de la barre ou du rail d'appareillage.

6.4.4 Retrait de l'unité de transport avec griffes

Valable pour LIFE-BASE light XS

1. Desserrer les 2 sangles de la barre ou du rail d'appareillage

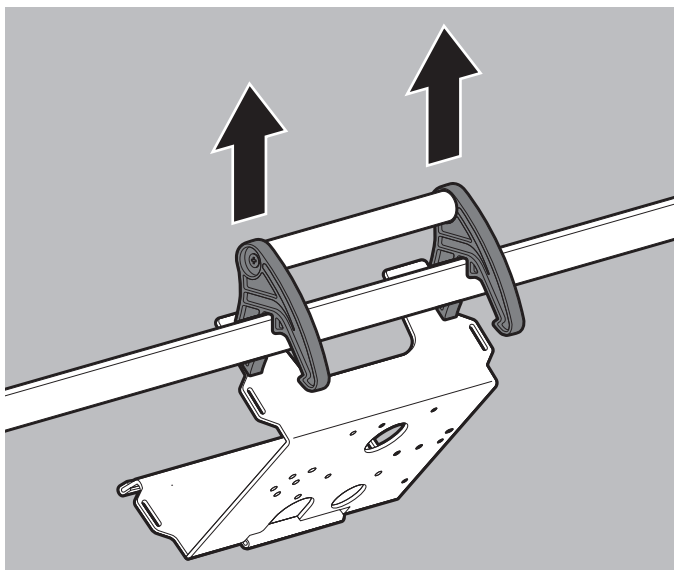

2. Retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage.


Résultat L'unité de transport est retirée de la barre ou du rail d'appareillage.

6.4.5 Retrait de l'unité de transport ou du support mural avec fixation sur barres

Valable pour

- LIFE-BASE light XS
- LIFE-BASE light
- BASE-STATION 1 NG

1. Maintenir l'unité de transport d'une main.

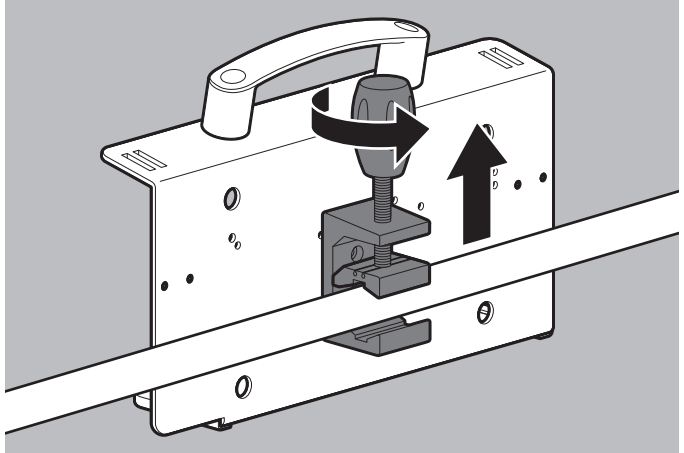

2. Desserrer la vis de blocage.
3. Retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage.


Résultat

L'unité de transport ou le support mural est retiré de la barre ou du rail d'appareillage.

6.4.6 Retrait de l'unité de transport avec pinces de fixation

Valable pour

- LIFE-BASE light XS
- LIFE-BASE light

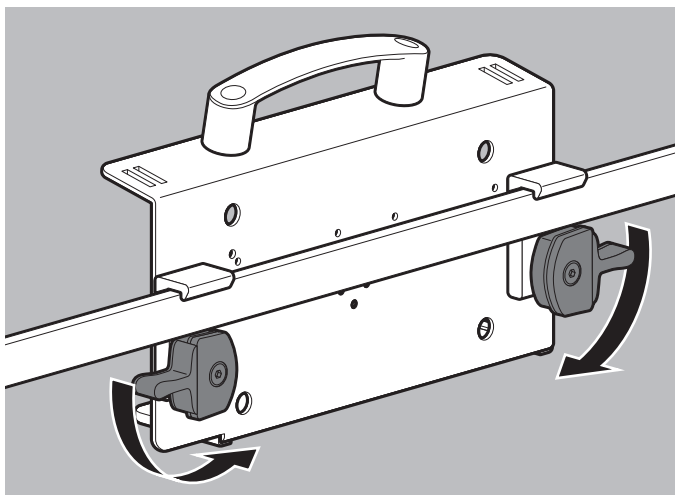

1. Pousser les leviers de blocage vers le bas jusqu'à ce que le verrouillage se débloque.
2. Retirer l'unité de transport du rail d'appareillage.


Résultat

L'unité de transport est retirée du rail d'appareillage.

6.4.7 Retrait du support mural avec pinces de fixation

Valable pour

- BASE-STATION 1 NG sans vis
- BASE-STATION Mini II
- BASE-STATION 3 NG

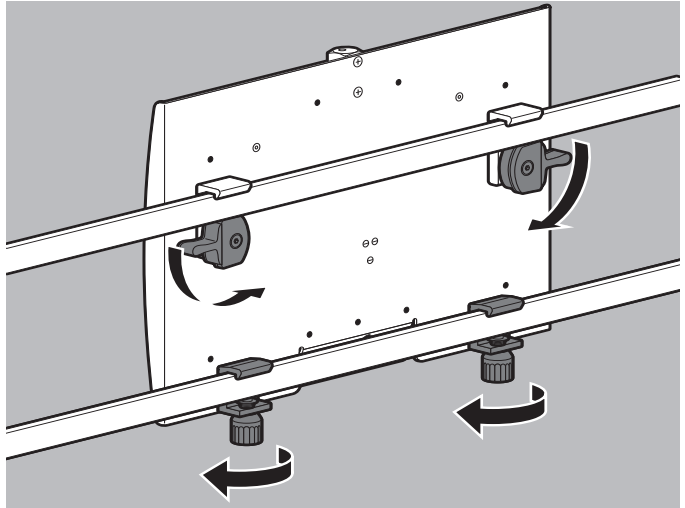

1. Pousser les leviers de blocage vers le bas jusqu'à ce que le verrouillage se débloque.
2. Pour BASE-STATION Mini II et BASE-STATION 3 NG : desserrer les vis.
3. Retirer le support mural du rail d'appareillage.

Résultat Le support mural est retiré du rail d'appareillage.

6.5 Rangement des accessoires de l'appareil

Il est possible de ranger les accessoires de l'appareil dans les sacs de protection et dans les sacs d'accessoires, ou encore de les fixer sur l'unité de transport à l'aide de sangles ou de bandes auto-agrippantes.

Pour LIFE-BASE Mini II, le circuit patient peut être fixé sur l'unité de transport :

1. Enrouler le circuit patient autour de l'appareil.
2. Brancher la valve patient sur le support de valve patient.

Résultat Pour LIFE-BASE Mini II, le circuit patient est fixé sur l'unité de transport.


7 Démontage

Le présent chapitre explique le démontage de tous les différents modèles de l'unité de transport et de ses accessoires. Si le démontage présente des différences importantes entre les modèles, elles seront explicitement signalées. Dans le cas contraire, le démontage est le même pour tous les modèles.

7.1 Démontage du sac de protection de l'unité de transport

7.1.1 Démontage du sac de protection pour LIFE-BASE light

1. Poser le sac de protection sur une surface plane solide.
2. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes à l'avant et au dos du sac de protection.
3. Le cas échéant : ressortir le circuit patient à l'avant par l'ouverture aménagée dans le sac de protection.

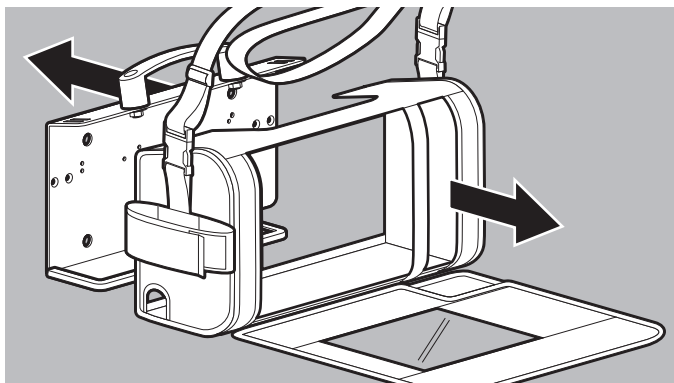


4. Retirer l'unité de transport du sac de protection.

Résultat Le sac de protection est démonté de l'unité de transport.

7.1.2 Démontage du sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG XS

1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.

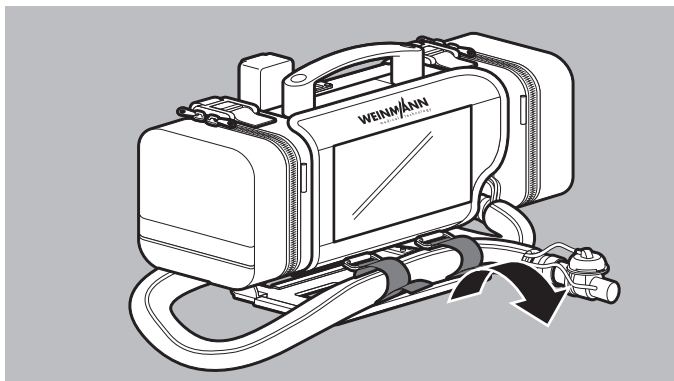


2. Pour le ventilateur :
 - Ouvrir les fermetures auto-agrippantes des sangles.
 - Retirer le circuit patient de l'unité de transport.


ou

pour le moniteur défibrillateur :

- Ouvrir la fenêtre du sac de protection.
 - Débrancher les câbles et les tuyaux de l'appareil.
3. Ouvrir la fermeture auto-agrippante au dos de l'unité de transport.

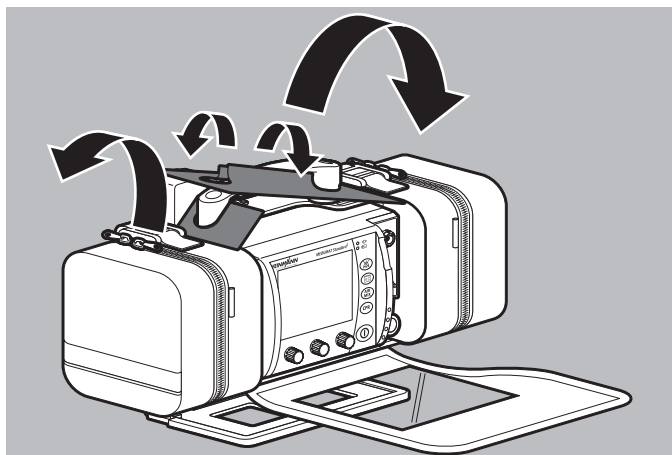

4. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes sous et à côté de la poignée.
5. Retirer le sac de protection de la poignée.

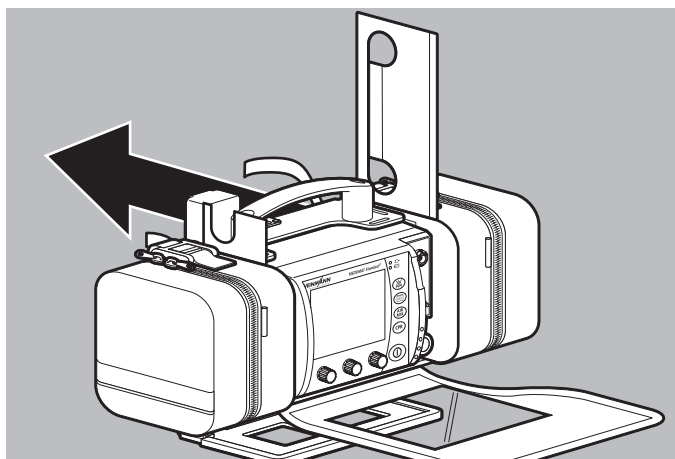


6. Sortir l'unité de transport du sac de protection de par l'arrière.

Résultat Le sac de protection est démonté de l'unité de transport.

7.1.3 Démontage du sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG et LIFE-BASE 1 NG XL

1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.
2. Ouvrir les fermetures magnétiques ou les fermetures auto-agrippantes à l'avant et au dos du sac de protection.
3. Le cas échéant : ressortir le circuit patient par l'ouverture aménagée dans le sac de protection.
4. Ouvrir les boutons-pression sur l'unité de transport.

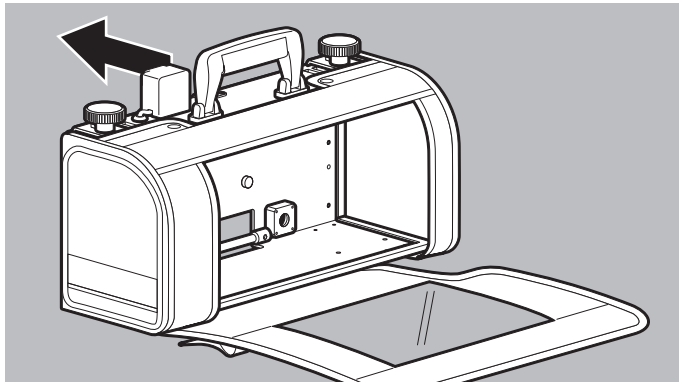


5. Sortir l'unité de transport du sac de protection de par l'arrière.


Résultat Le sac de protection est démonté de l'unité de transport.

7.1.4 Démontage du sac de protection pour LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG et LIFE-BASE 4 NG


1. Poser l'unité de transport sur une surface plane solide.

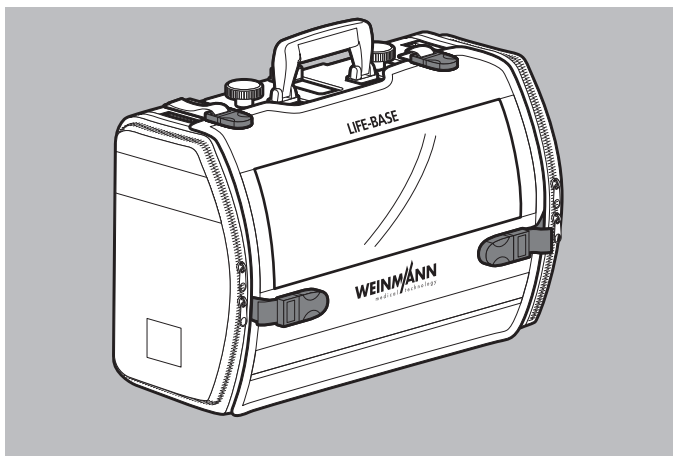

2. Ouvrir les clips de fermeture ou les fermetures magnétiques du sac de protection.

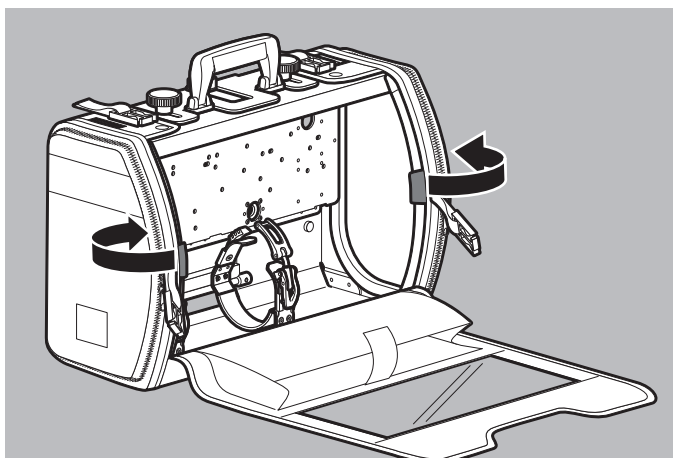

3. Pour LIFE-BASE 4 NG avec arceaux : détacher les bandes auto-agrippantes des arceaux de protection.
4. Ouvrir les boutons-pression sur l'unité de transport.

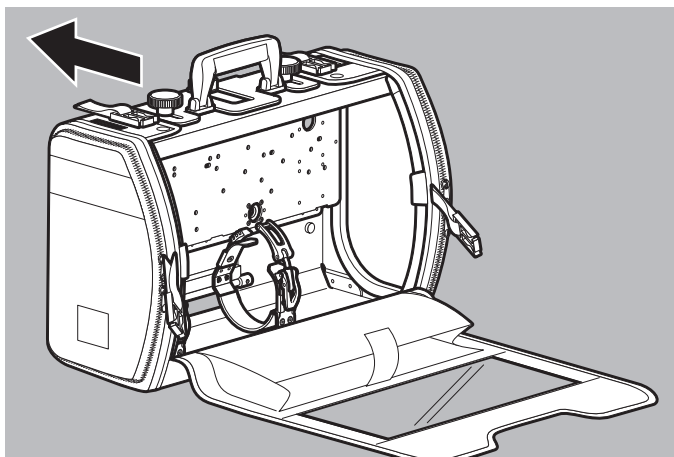

5. Détacher le sac de protection de l'unité de transport en le tirant vers l'arrière.
6. Retirer l'unité de transport du sac de protection.


Résultat Le sac de protection est démonté de l'unité de transport.

7.2 Démontage du sac d'accessoires de l'unité de transport ou du sac de protection

7.2.1 Démontage du sac d'accessoires latéral

Valable pour Sacs de protection avec sacs d'accessoires adaptables


1. Ouvrir la fermeture éclair du sac de protection.

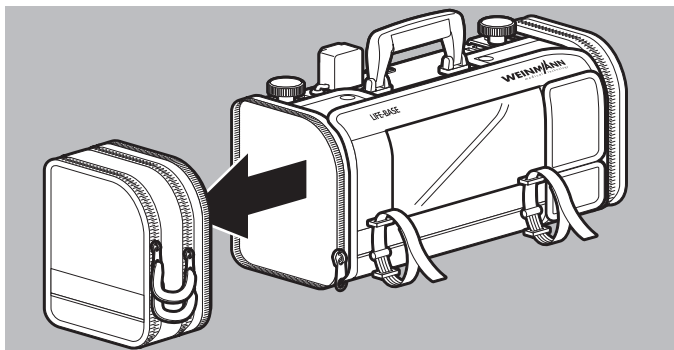

2. Retirer le sac d'accessoires du sac de protection.

Résultat Le sac d'accessoires est démonté du sac de protection.

7.2.2 Démontage du sac d'accessoires intérieur

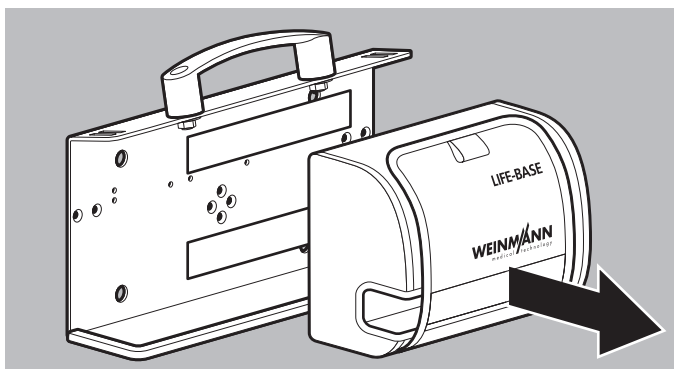


1. Retirer le sac d'accessoires intérieur de l'unité de transport.

Résultat Le sac d'accessoires intérieur est démonté de l'unité de transport.

7.2.3 Démontage du sac d'accessoires pour LIFE-BASE 1 NG


1. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes au dos du sac d'accessoires.

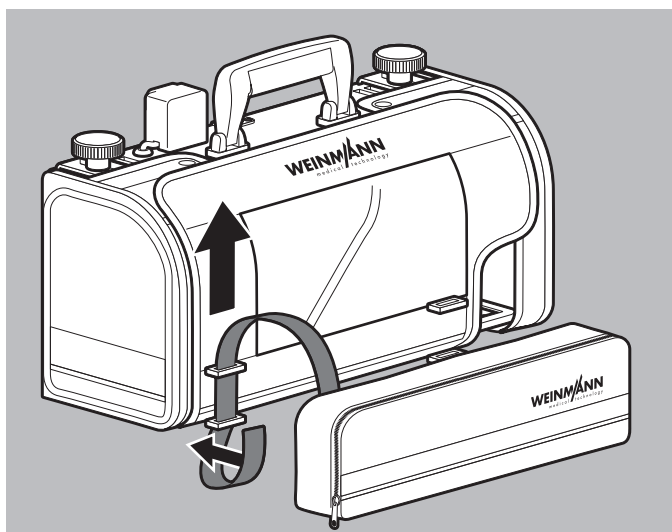

2. Faire sortir les bandes auto-agrippantes par les passants du sac de protection pour les dégager.
3. Retirer le sac d'accessoires du sac de protection.

Résultat Le sac d'accessoires est démonté du sac de protection.


7.2.4 Démontage du sac d'accessoires pour LIFE-BASE Mini II

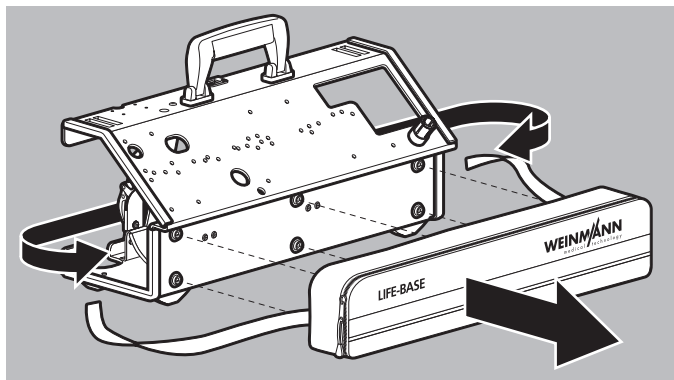

1. Ouvrir la fermeture auto-agrippante au dos de l'unité de transport.
2. Ouvrir les boutons-pression du sac d'accessoires.
3. Retirer le sac d'accessoires de l'unité de transport.

Résultat Le sac d'accessoires est démonté de l'unité de transport.

7.2.5 Démontage du sac d'accessoires pour LIFE-BASE 4 NG

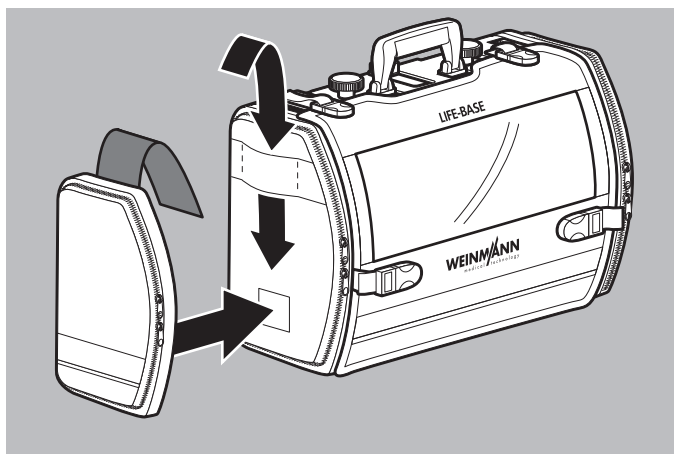

1. Ouvrir la fermeture auto-agrippante de la sangle.


2. Faire passer la sangle par la boucle située sur le coté du sac de protection pour la dégager.
3. Retirer le sac d'accessoires du sac de protection.

Résultat Le sac d'accessoires est démonté du sac de protection.

7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport

7.3.1 Démontage de la sangle de transport de la poignée

Valable pour LIFE-BASE 1 NG XS

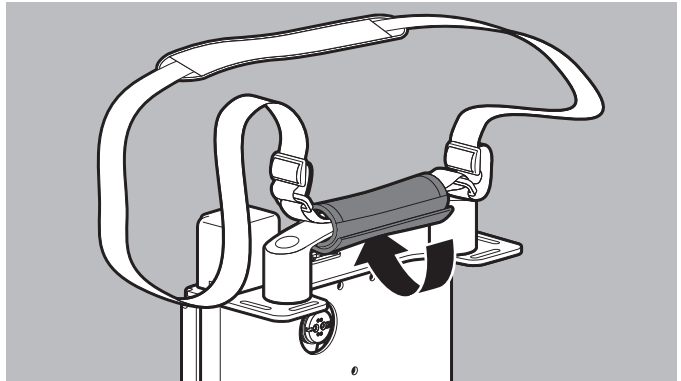

1. Ouvrir la fermeture auto-agrippante de la sangle de transport.
2. Retirer la sangle de transport de la poignée.


Résultat La sangle de transport est démontée de la poignée.

7.3.2 Démontage de la sangle de transport de l'unité de transport

Valable pour

- LIFE-BASE 1 NG
- LIFE-BASE 1 NG XL
- LIFE-BASE Mini II
- LIFE-BASE III

- LIFE-BASE 3 NG
- LIFE-BASE 4 NG

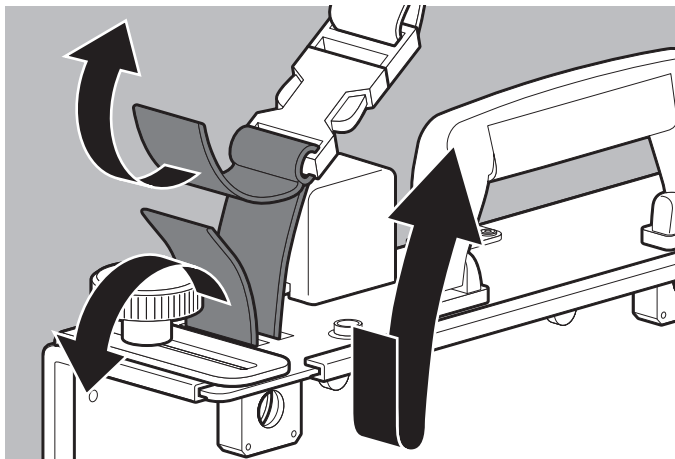


1. Ouvrir les fermetures auto-agrippantes de la sangle de transport.
2. Retirer la sangle de transport de l'unité de transport.

Résultat La sangle de transport est démontée de l'unité de transport.

7.3.3 Démontage des sangles

Valable pour

- LIFE-BASE light XS
- LIFE-BASE 1 NG XS

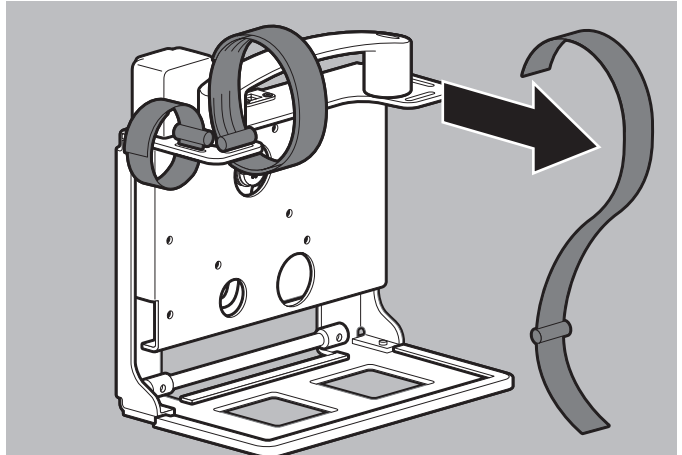

1. Ouvrir la fermeture auto-agrippante des sangles.
2. Retirer les sangles de l'unité de transport.

Résultat


Les sangles sont démontées de l'unité de transport.

7.4 Démontage de la bouteille d'oxygène de l'unité de transport


7.4.1 Démontage de la bouteille d'oxygène Ø 105 mm

Valable pour

- LIFE-BASE Mini II
- LIFE-BASE III
- LIFE-BASE 3 NG
- LIFE-BASE 4 NG

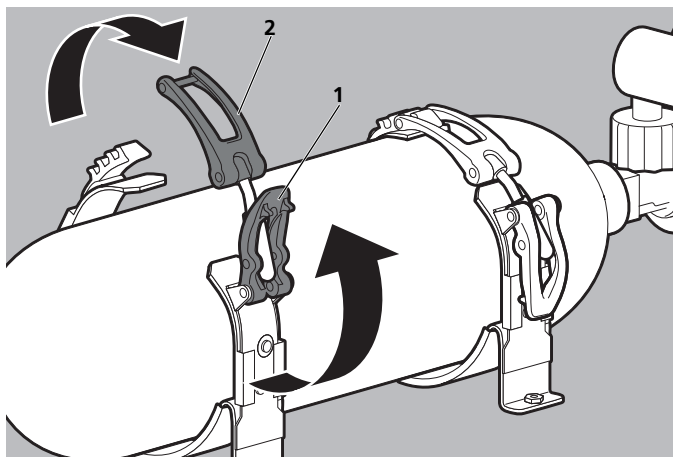

1. Ouvrir l'étrier de fermeture (1) des colliers de serrage.
2. Dégager l'étrier de serrage (2) du crantage des colliers de serrage.

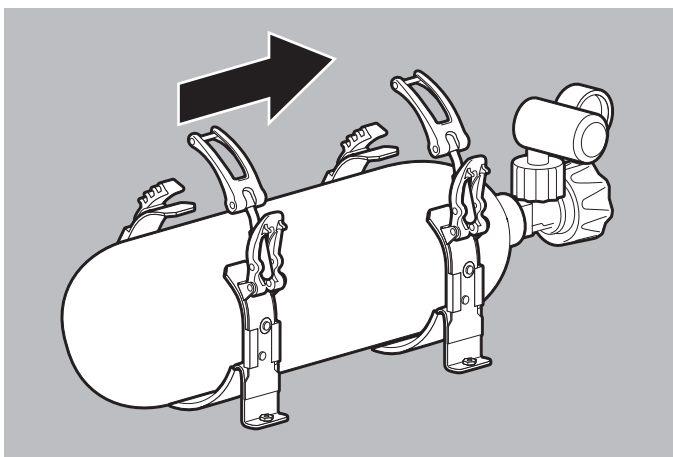


3. Retirer la bouteille d'oxygène des colliers de serrage.


Résultat La bouteille d'oxygène est démontée de l'unité de transport.

7.4.2 Démontage de la bouteille d'oxygène Ø 115 mm-120 mm

Valable pour LIFE-BASE 4 NG

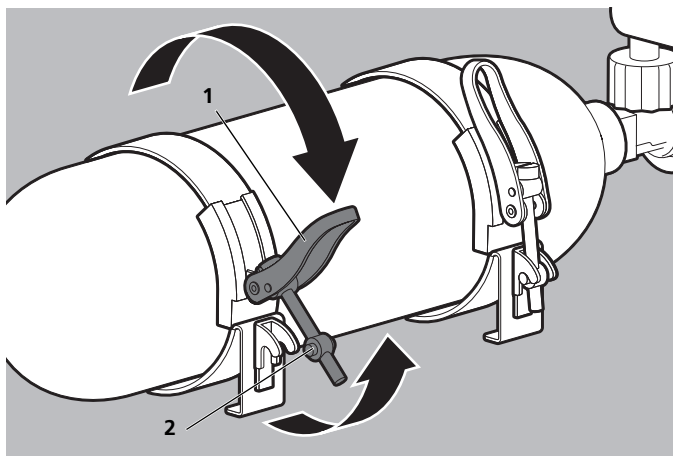

1. Ouvrir l'étrier de fermeture (1) des colliers de serrage.
2. Décrocher la goupille de retenue (2).

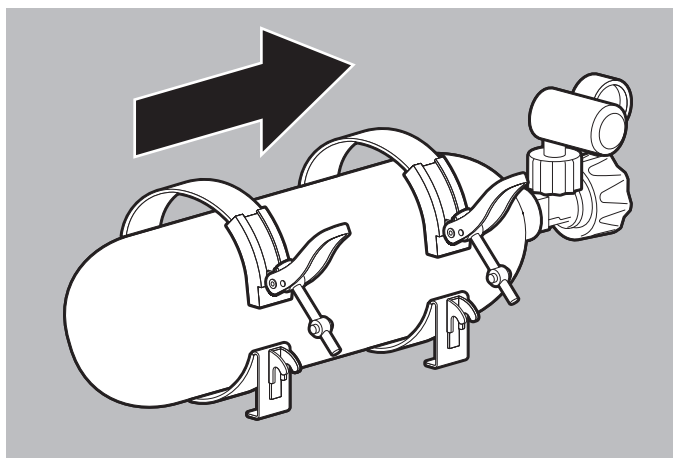

3. Retirer la bouteille d'oxygène des colliers de serrage.

Résultat La bouteille d'oxygène est démontée de l'unité de transport.

7.5 Démontage de l'appareil de l'unité de transport

7.5.1 Préparation du démontage

1. Le cas échéant : retirer l'unité de transport du support mural ou du support plafond (voir « 6.2 Retrait de l'unité de transport d'un support mural ou d'un support plafond », page 94)

ou

retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage (voir « 6.4 Retrait de l'unité de transport d'une barre ou d'un rail d'appareillage », page 105).

2. Le cas échéant : retirer les accessoires de l'appareil.
3. Le cas échéant : démonter la bouteille d'oxygène de l'unité de transport (voir « 7.4 Démontage de la bouteille d'oxygène de l'unité de transport », page 123).
4. Le cas échéant : démonter le sac de protection de l'unité de transport (voir « 7.1 Démontage du sac de protection de l'unité de transport », page 112).
5. Le cas échéant : démonter le sac d'accessoires de l'unité de transport ou du sac de protection (voir « 7.2 Démontage du sac d'accessoires de l'unité de transport ou du sac de protection », page 118).

Résultat L'unité de transport est prête pour le démontage de l'appareil.

7.5.2 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE light XS

Valable pour


- MEDUMAT Standard²
- MEDUVENT Standard

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

1. Positionner l'unité de transport et l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

2. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

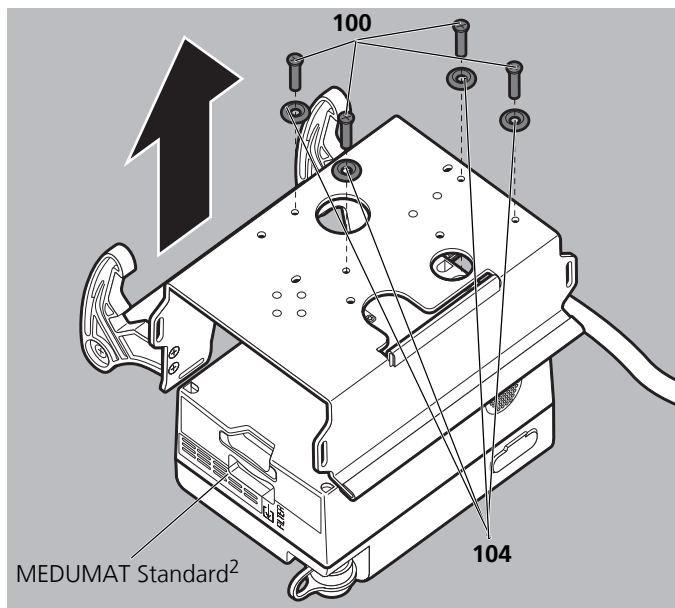

3. Retirer 4 vis **100** et 4 rondelles de protection **104** de l'unité de transport.
4. Retirer l'unité de transport de l'appareil.

Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.

7.5.3 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE light et LIFE-BASE III

Valable pour


- MEDUMAT Standard^a
- MEDUMAT Easy^{CPR}
- MODUL

Un chapitre particulier est consacré au démontage de MEDUMAT Transport de LIFE-BASE light (voir « 7.5.5 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE 1 NG et LIFE-BASE 4 NG (avec arceaux de protection) », page 131).

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

1. Positionner l'unité de transport et l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

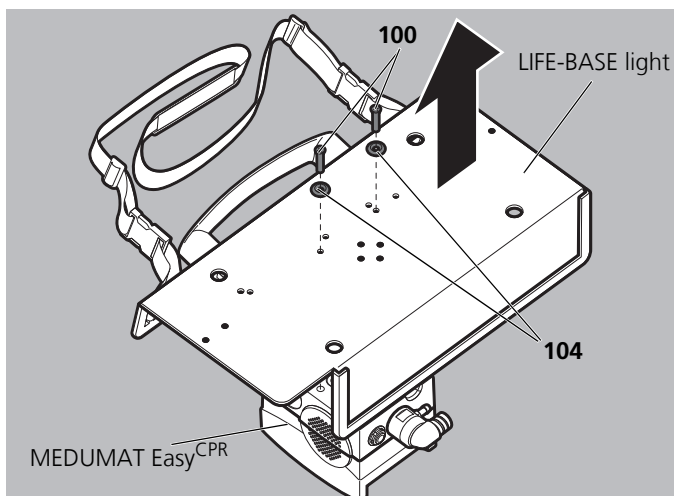

2. Retirer 2 vis **100** et 2 rondelles de protection **104** de l'unité de transport.
3. Retirer l'unité de transport de l'appareil.
4. Démontez la sangle de transport de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).

Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.


7.5.4 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE 1 NG XS

- Valable pour*
- MEDUMAT Standard²
 - MEDUVENT Standard
 - MEDUCORE Standard²
 - MEDUCORE Standard


Instruments Tournevis cruciforme PH1
nécessaires

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

1. Positionner l'unité de transport et l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

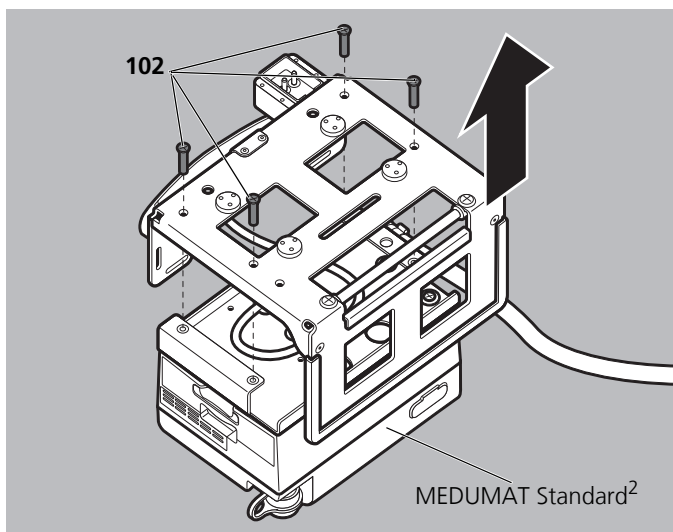

2. Retirer 4 vis **102** de l'unité de transport.
3. Retirer l'unité de transport de la plaque d'écartement.

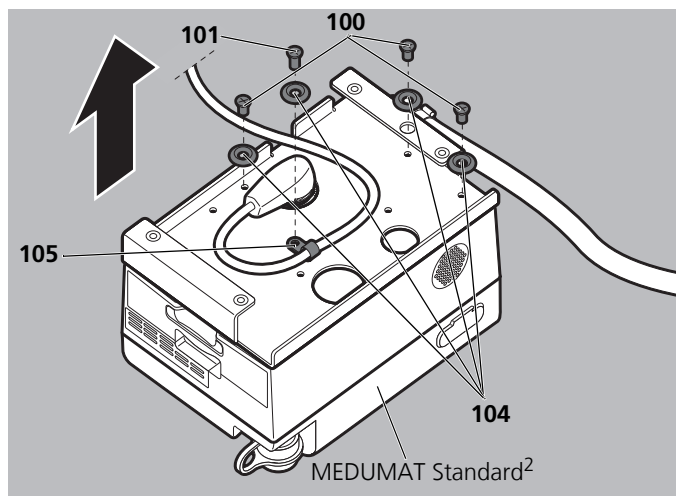

4. Retirer les vis **100**, les rondelles de protection **104**, le serre-câble **105** et la vis **101** de la plaque d'écartement.

Appareil	Pièce	Nombre
MEDUMAT Standard ²	100	3
	101	1
	104	4
	105	1
MEDUVENT Standard	100	3
	101	1
	104	4
	105	1
MEDUCORE Standard ²	100	3
	101	1
	104	4
	105	1
MEDUCORE Standard	100	2
	101	1
	104	3
	105	1

5. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

6. Retirer la plaque d'écartement de l'appareil.

Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.


7.5.5 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE 1 NG et LIFE-BASE 4 NG (avec arceaux de protection)

Valable pour MEDUMAT Transport


*Instruments
nécessaires* Tournevis cruciforme PH1

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

1. Poser l'unité de transport et l'appareil sur une surface plane solide.

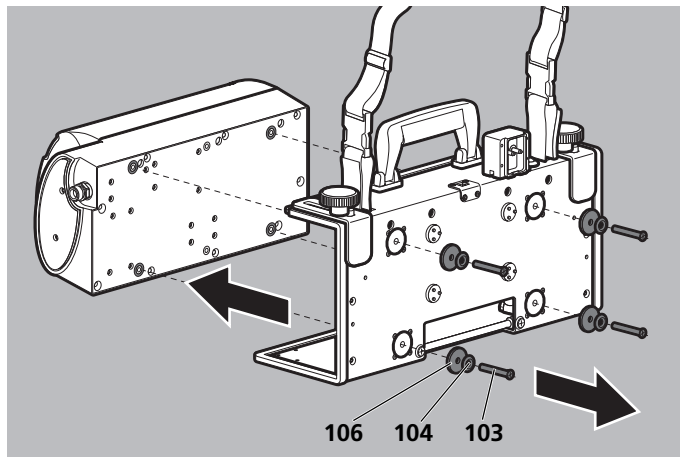

2. Retirer 4 vis **103**, 4 rondelles de protection **104** et 4 rondelles **106** de l'unité de transport.
3. Retirer l'appareil de l'unité de transport.

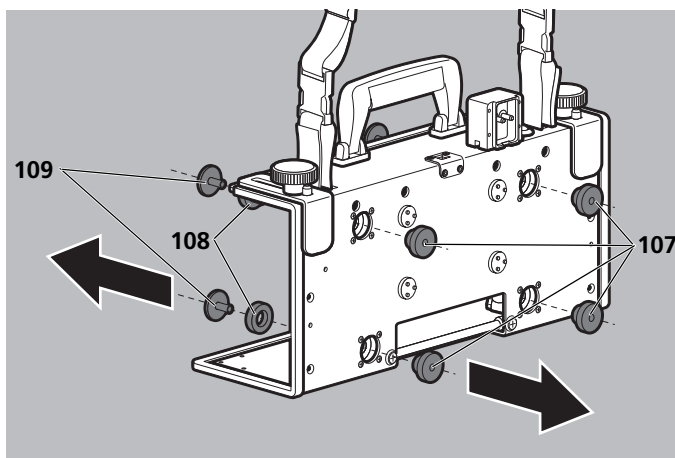

4. Retirer 4 rondelles **108**, 4 douilles **109** et 4 éléments de base **107** de l'unité de transport.
5. Le cas échéant : démonter la sangle de transport de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).

Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.

7.5.6 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG et LIFE-BASE 4 NG (sans arceaux de protection)

Démontage du ventilateur

Valable pour


- MEDUMAT Standard²
- MEDUVENT Standard
- MEDUMAT Easy^{CPR}

Instruments nécessaires


Tournevis cruciforme PH1

Condition requise

Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

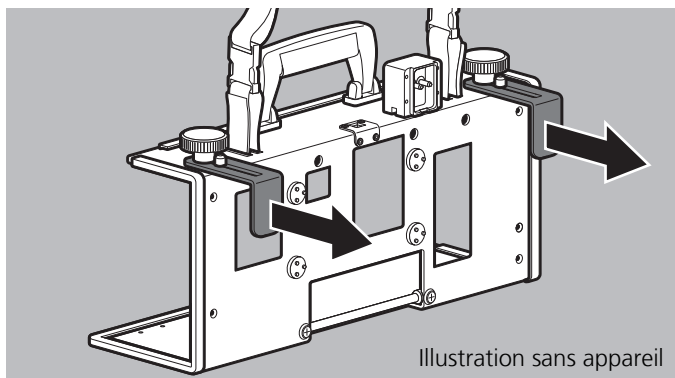

1. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :
 - Desserrer les boutons molette.
 - Tirer les équerres supports pour les écarter.
 - Resserrer les boutons molette.
2. Positionner l'unité de transport et l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

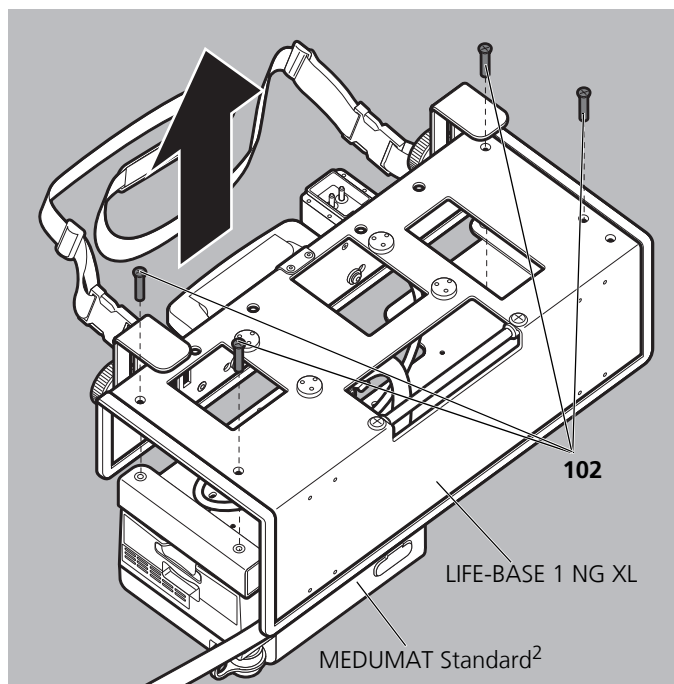


3. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : retirer 4 vis **102** de l'unité de transport


ou

pour LIFE-BASE 3 NG : retirer 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104** de l'unité de transport.


4. Retirer l'unité de transport de la plaque d'écartement.

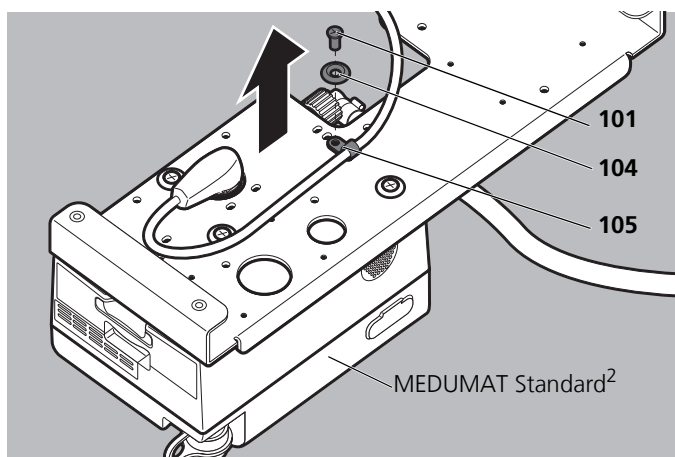

5. Pour MEDUMAT Standard² : retirer 1 serre-câble **105**, 1 rondelle de protection **104** et 1 vis **101** de la plaque d'écartement.

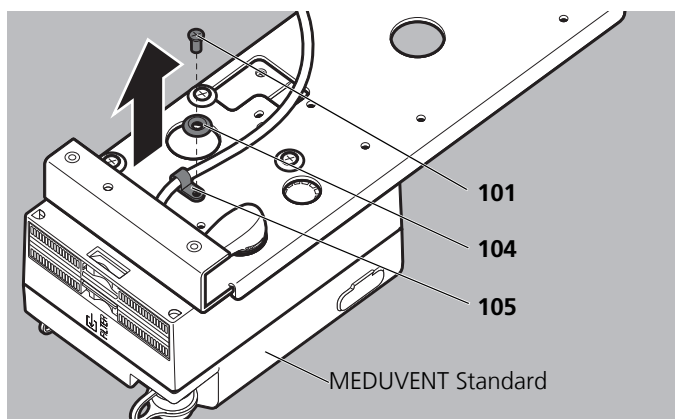

6. Pour MEDUVENT Standard : retirer 1 serre-câble **105**, 1 rondelle de protection **104** et 1 vis **101** de la plaque d'écartement.
7. Le cas échéant : débrancher l'appareil de l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

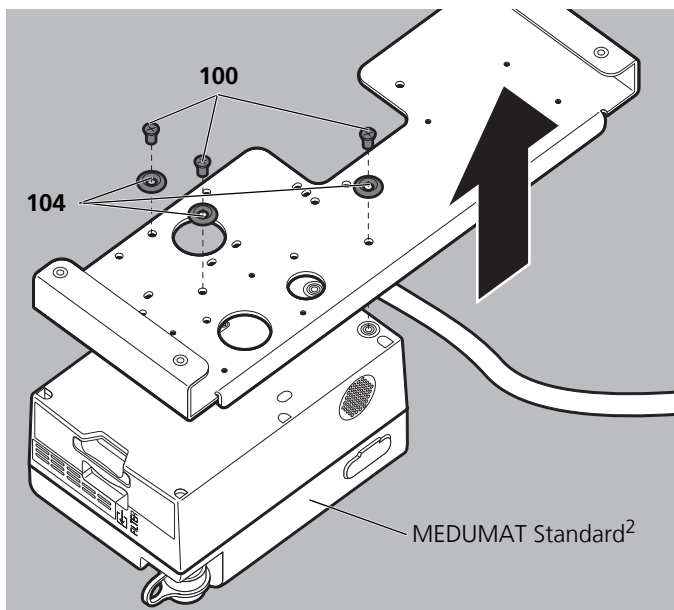

8. Retirer les vis **100** et les rondelles de protection **104** de la plaque d'écartement.

Appareil	Pièce	Nombre
MEDUMAT Standard ²	100	3
	104	3
MEDUVENT Standard	100	3
	104	3
MEDUMAT Easy ^{CPR}	100	2
	104	2

9. Retirer la plaque d'écartement de l'appareil.
10. Le cas échéant : démonter la sangle de transport de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).

Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.

Démontage du moniteur défibrillateur

- Valable pour*
- MEDUCORE Standard²
 - MEDUCORE Standard

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).


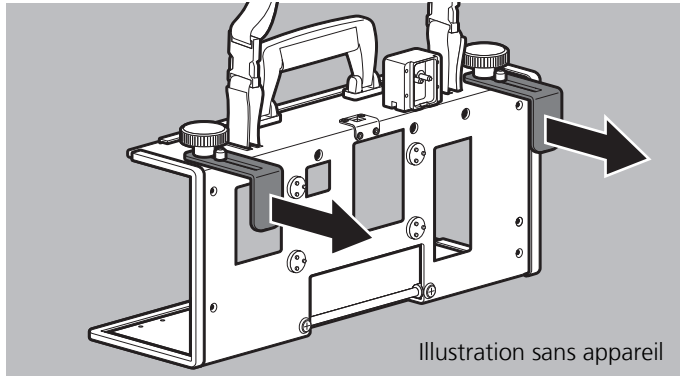


Illustration sans appareil

1. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :
 - Desserrer les boutons molette.
 - Tirer les équerres supports pour les écarter.
 - Resserrer les boutons molette.
2. Positionner l'unité de transport et l'appareil de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

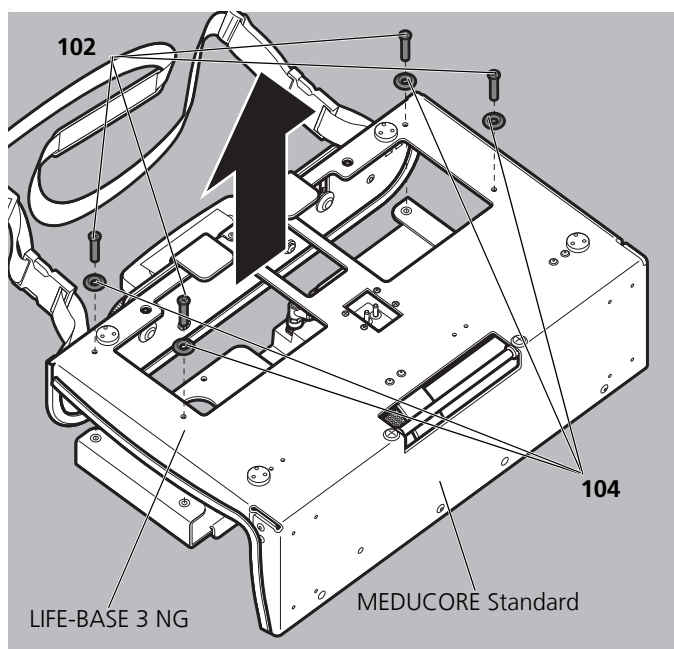


3. Pour LIFE-BASE 3 NG : retirer 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104** de l'unité de transport


ou

pour LIFE-BASE 1 NG XL : retirer 4 vis **102** de l'unité de transport.

4. Retirer l'unité de transport de la plaque d'écartement.

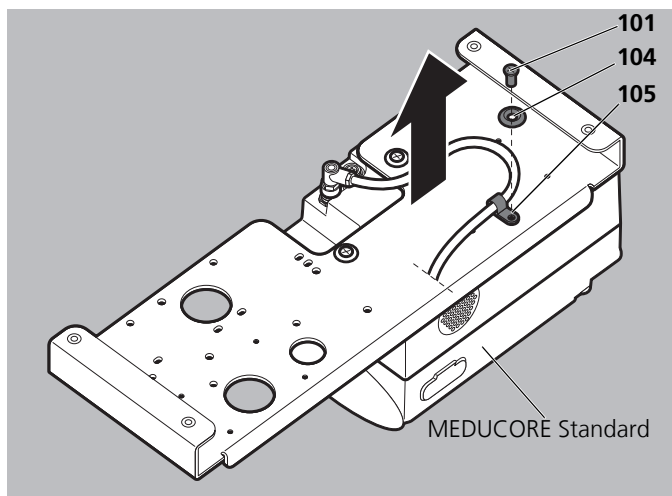

5. Pour MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 3 NG : retirer 1 serre-câble **105**, 1 rondelle de protection **104** et 1 vis **101** de la plaque d'écartement.
6. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

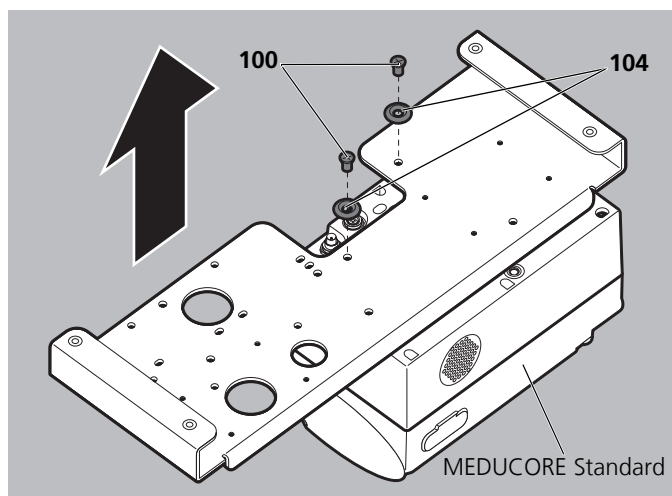

7. Retirer les vis **100** et les rondelles de protection **104** de la plaque d'écartement.

Appareil	Pièce	Nombre
MEDUCORE Standard ²	100	4
	104	4
MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 1 NG XL	100	3
	104	3
MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 3 NG	100	2
	104	2

8. Retirer la plaque d'écartement de l'appareil.
9. Le cas échéant : démonter la sangle de transport de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).


Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.

Démontage du ventilateur et de MEDUCORE Standard²


- Valable pour*
- MEDUMAT Standard²
 - MEDUVENT Standard
 - MEDUMAT Easy^{CPR}
 - MEDUCORE Standard²

*Instruments
nécessaires* Tournevis cruciforme PH1

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

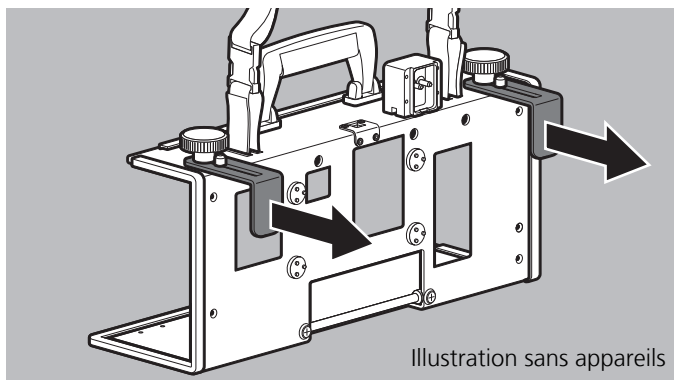

1. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :
 - Desserrer les boutons molette.
 - Tirer les équerres supports pour les écarter.
 - Resserrer les boutons molette.
2. Positionner l'unité de transport et les appareils de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

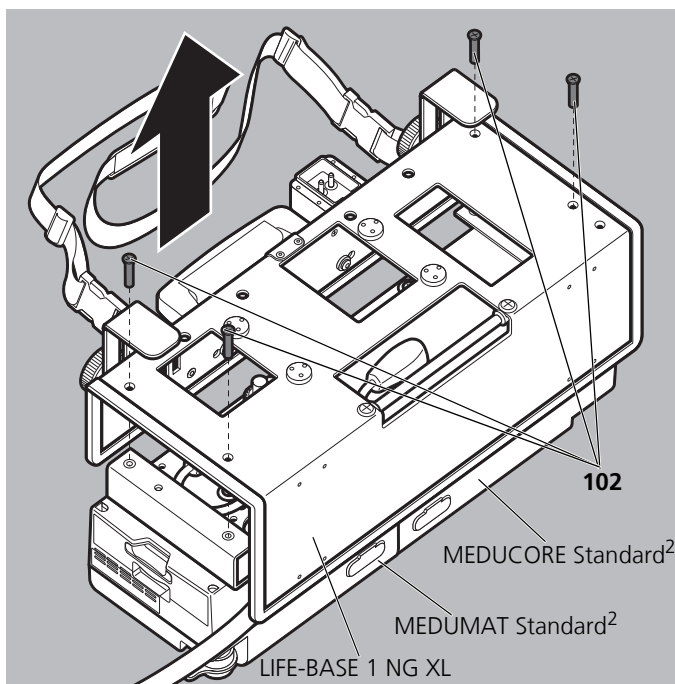


3. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : retirer 4 vis **102** de l'unité de transport


ou

pour LIFE-BASE 3 NG : retirer 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104** de l'unité de transport.

4. Retirer l'unité de transport de la plaque d'écartement.

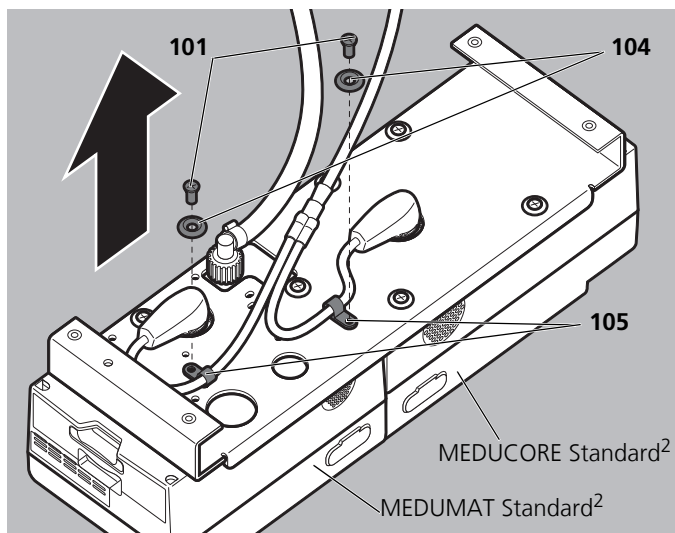


5. Pour MEDUCORE Standard² avec MEDUMAT Standard² : retirer 2 serre-câbles **105**, 2 rondelles de protection **104** et 2 vis **101** de la plaque d'écartement.

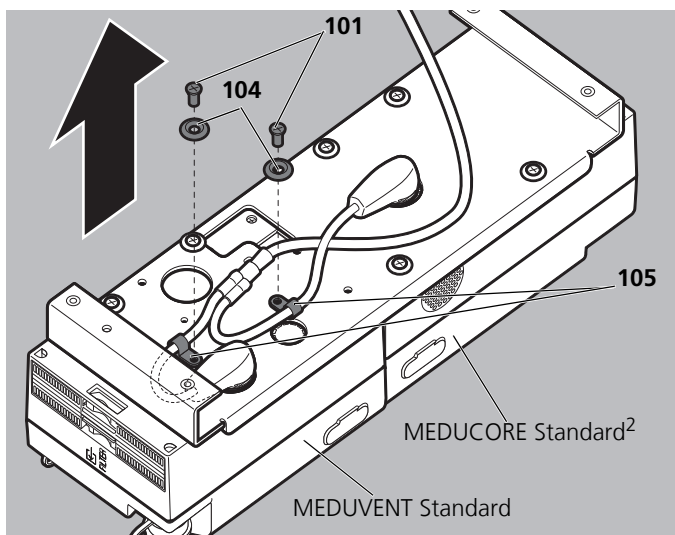

6. Pour MEDUCORE Standard² avec MEDUVENT Standard : retirer 2 serre-câbles **105**, 2 rondelles de protection **104** et 2 vis **101** de la plaque d'écartement.

7. Le cas échéant : débrancher les appareils de l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

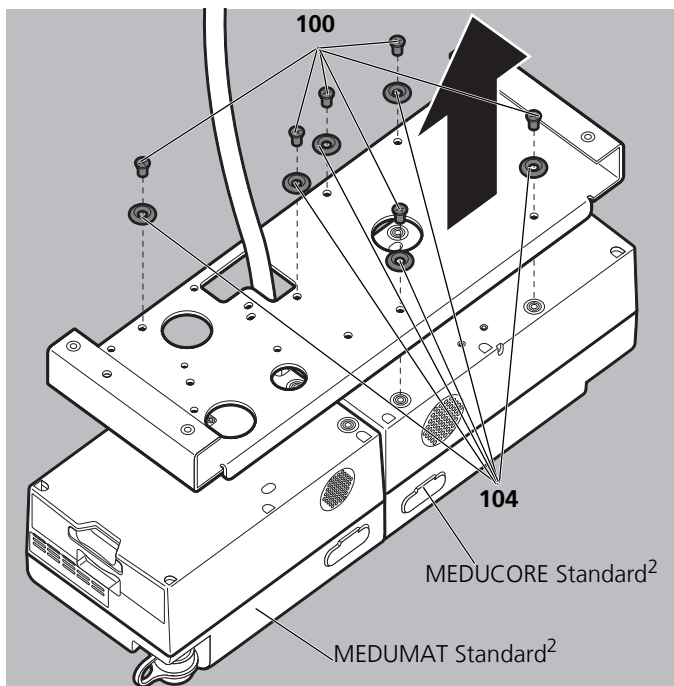

8. Retirer 6 vis **100** et 6 rondelles de protection **104** de la plaque d'écartement.
9. Retirer la plaque d'écartement des appareils.
10. Le cas échéant : démonter la sangle de transport de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).


Résultat Les appareils sont démontés de l'unité de transport.

Démontage du ventilateur et de MEDUCORE Standard


- Valable pour*
- MEDUMAT Standard²
 - MEDUMAT Easy^{CPR}
 - MEDUCORE Standard

Instruments nécessaires Tournevis cruciforme PH1

Condition requise Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

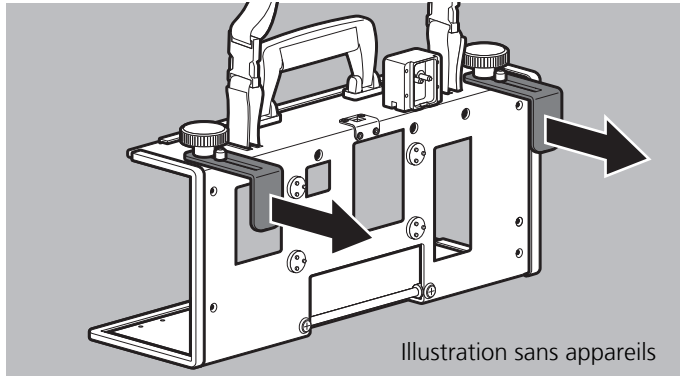

1. Pour LIFE-BASE 1 NG XL :
 - Desserrer les boutons molette.
 - Tirer les équerres supports pour les écarter.
 - Resserrer les boutons molette.
2. Positionner l'unité de transport et les appareils de manière à ce que le panneau de commande soit orienté vers le bas.

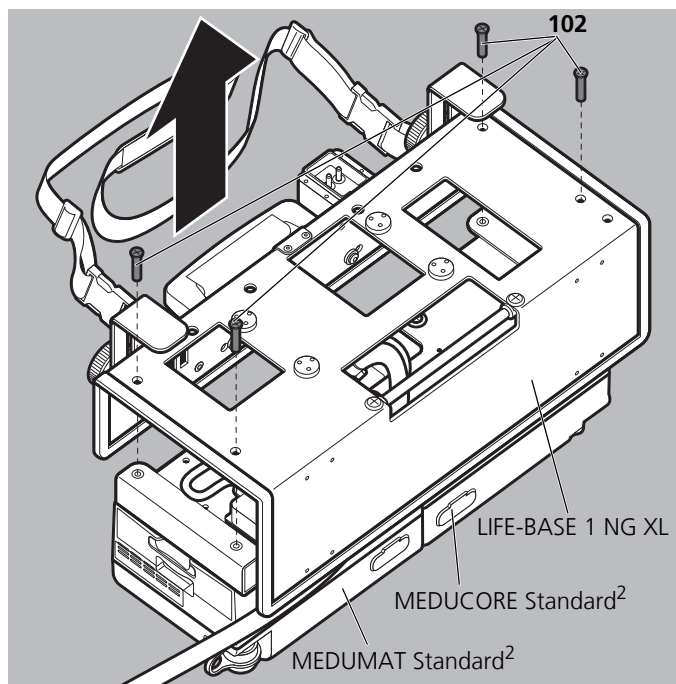


3. Pour LIFE-BASE 1 NG XL : retirer 4 vis **102** de l'unité de transport


ou

pour LIFE-BASE 3 NG : retirer 4 vis **102** et 4 rondelles de protection **104** de l'unité de transport.

4. Retirer l'unité de transport de la plaque d'écartement.

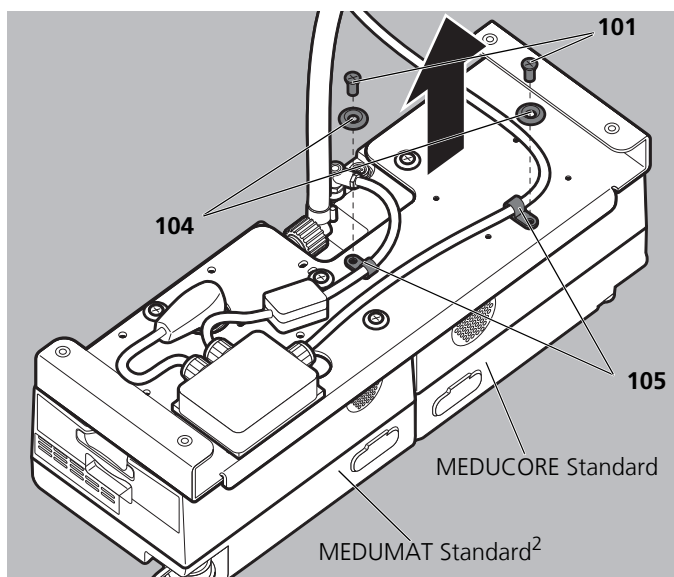


5. Pour MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Standard² : retirer 2 serre-câbles **105**, 2 rondelles de protection **104** et 2 vis **101** de la plaque d'écartement.

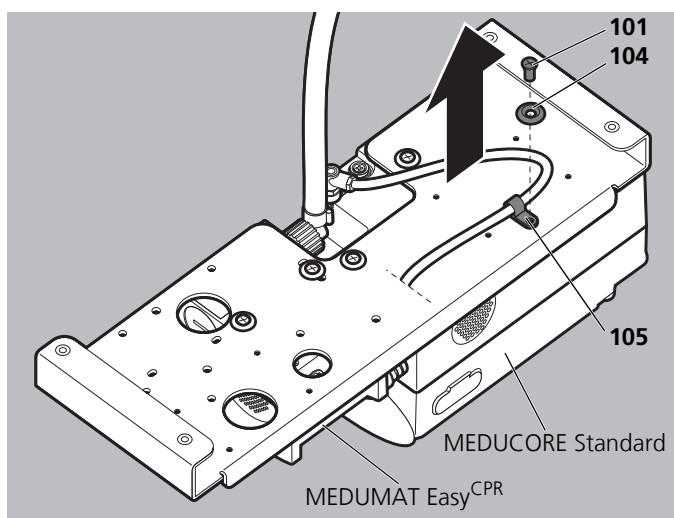

6. Pour MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Easy^{CPR} sur LIFE-BASE 3 NG : retirer 1 serre-câble **105**, 1 rondelle de protection **104** et 1 vis **101** de la plaque d'écartement.

7. Le cas échéant : débrancher les appareils de l'alimentation électrique conformément à la notice d'utilisation.

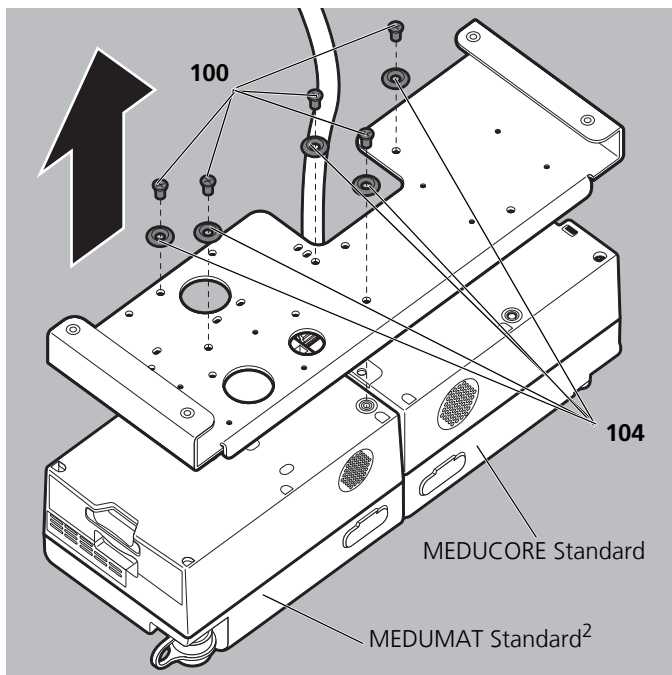

8. Retirer les vis **100** et les rondelles de protection **104** de la plaque d'écartement.

Appareil	Pièce	Nombre
MEDUCORE Standard Avec MEDUMAT Standard ²	100	5
	104	5
MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Easy ^{CPR} sur LIFE-BASE 1 NG XL	100	5
	104	5
MEDUCORE Standard avec MEDUMAT Easy ^{CPR} sur LIFE-BASE 3 NG	100	4
	104	4

9. Retirer la plaque d'écartement des appareils.
10. Le cas échéant : démonter la sangle de transport de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).

Résultat Les appareils sont démontés de l'unité de transport.

7.5.7 Démontage de l'appareil de LIFE-BASE Mini II

Valable pour


- MEDUMAT Standard^a
- MEDUMAT Easy^{CPR}
- MODUL

*Instruments
nécessaires*


Tournevis cruciforme PH1

Condition requise

Tout est prêt pour le démontage (voir « 7.5.1 Préparation du démontage », page 126).

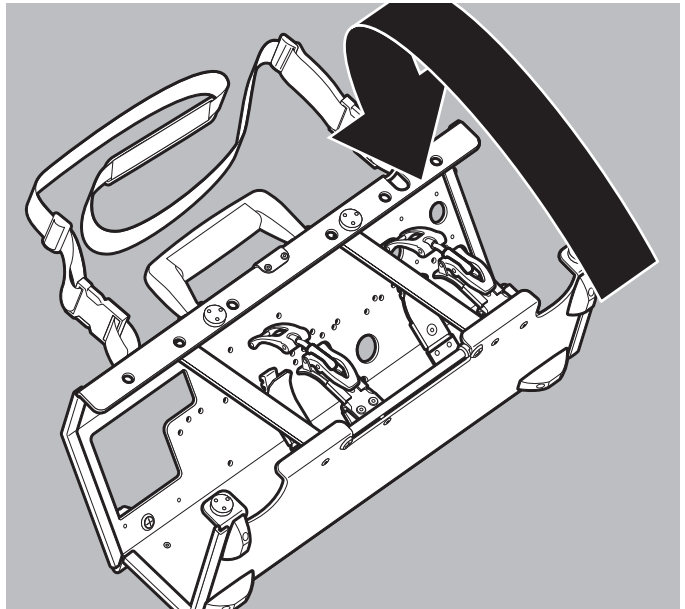

1. Poser l'unité de transport sur le côté fermé étroit.

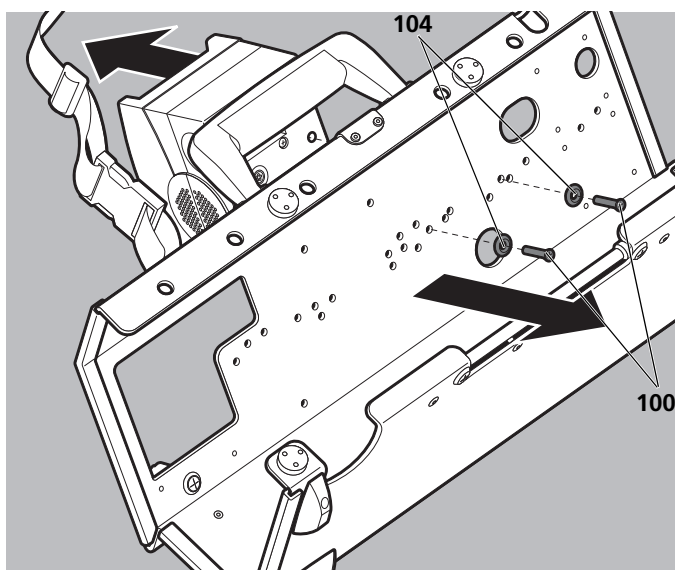

2. Retirer 2 vis **100** et 2 rondelles de protection **104** de l'unité de transport.
3. Retirer l'appareil de l'unité de transport.
4. Démontez la sangle de transport de l'unité de transport ([voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121](#)).

Résultat L'appareil est démonté de l'unité de transport.

8 Retraitement hygiénique

Les passages suivants décrivent des opérations indispensables pour un retraitement hygiénique. Lire l'intégralité de ce chapitre avant de commencer le retraitement hygiénique. Pour toute question sur le retraitement hygiénique, s'adresser au fabricant WEINMANN Emergency.



AVERTISSEMENT

Risque d'infection en cas de retraitement hygiénique incorrect.

L'utilisation d'une unité de transport avec des appareils et des accessoires sans retraitement hygiénique préalable peut provoquer des infections en cas de contact avec la peau du patient ou de l'utilisateur, ou avec les voies respiratoires du patient. Il peut en résulter des blessures graves, voire potentiellement mortelles, pour le patient et l'utilisateur.

- ⇒ Procéder au retraitement hygiénique de l'unité de transport et de ses accessoires après chaque usage.
- ⇒ Réaliser le retraitement hygiénique de l'unité de transport et de ses accessoires conformément au plan de nettoyage et de désinfection (voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159).
- ⇒ Ne réutiliser l'unité de transport, ses accessoires et autres pièces qu'après un retraitement hygiénique réalisé conformément au plan de nettoyage et de désinfection.
- ⇒ Pour le retraitement hygiénique des appareils raccordés et des accessoires, se conformer aux notices d'utilisation correspondantes.
- ⇒ Pour le retraitement hygiénique de l'unité de transport et de ses accessoires, utiliser uniquement les nettoyants et désinfectants recommandés.
- ⇒ Respecter la notice d'utilisation du nettoyant et du désinfectant utilisés.
- ⇒ Respecter la notice d'utilisation des accessoires.
- ⇒ Porter un équipement de protection approprié, comme des gants par exemple.
- ⇒ Confier le retraitement de l'unité de transport et des accessoires uniquement à des personnes ayant une formation médicale ou paramédicale et qualifiées pour l'assistance médicale d'urgence de patients.

⚠ AVERTISSEMENT**Sécurité mécanique ou électrique compromise en cas de retraitement de l'appareil et de ses accessoires avec des nettoyeurs ou désinfectants inappropriés.**

L'utilisation de nettoyeurs ou de désinfectants inappropriés peut endommager la surface de l'appareil et de ses accessoires, compromettre ses caractéristiques électriques et provoquer une dégradation de l'isolation. Il peut en résulter des blessures graves, voire potentiellement mortelles, pour l'utilisateur et le patient.

⇒ Utiliser uniquement les nettoyeurs et désinfectants recommandés dans la présente notice d'utilisation (voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159).

⚠ AVERTISSEMENT**Risque de blessures et de dommages matériels en cas de résidus de désinfectant ou de nettoyeur sur l'unité de transport et ses accessoires.**

Des résidus de désinfectants ou nettoyeurs peuvent perturber le bon fonctionnement de l'appareil, ce qui peut entraîner des blessures pour le patient et l'utilisateur et des dommages matériels.

⇒ Après le retraitement hygiénique, effectuer un contrôle visuel de l'appareil et de ses accessoires pour s'assurer de l'absence de résidus de nettoyeur ou de désinfectant. Le cas échéant, éliminer les éventuels résidus.

⇒ Effectuer un contrôle du fonctionnement complet après chaque retraitement hygiénique.

⇒ Ne pas immerger l'appareil dans des liquides.

⚠ AVERTISSEMENT**Risque d'explosion en cas d'infiltration de liquides associée à de l'oxygène.**

L'infiltration de liquides peut provoquer une explosion et causer des blessures graves, voire potentiellement mortelles pour le patient, l'utilisateur ou des tierces personnes se trouvant à proximité.

⇒ Ne jamais immerger des pièces comme des manodétendeurs, des valves/robinets ou des flexibles basse pression dans des désinfectants ni dans d'autres liquides.

⇒ Ne pas détacher le tuyau basse pression du raccord de gaz comprimé pendant le retraitement hygiénique pour ne pas que des liquides puissent s'infiltrer dans l'appareil.

8.1 Périodicités

Pièce	Périodicité		
	Après chaque usage*	Au moins 1 fois par semaine	Au moins 1 fois par mois
Unité de transport avec accessoires	✓	✓	–
Sacs de protection	✓	–	✓

*En cas de salissures visibles ou de suspicion de contamination.

8.2 Préparation du retraitement hygiénique

Condition requise

- Les appareils montés sur l'unité de transport sont arrêtés.
 - Le patient n'est pas raccordé aux appareils.
1. Débrancher l'unité de transport de l'alimentation électrique.
 2. Le cas échéant :
 - Retirer l'unité de transport du support mural ou du support plafond (voir « 6.2 Retrait de l'unité de transport d'un support mural ou d'un support plafond », page 94)
 - ou**
 - retirer l'unité de transport de la barre ou du rail d'appareillage (voir « 6.4 Retrait de l'unité de transport d'une barre ou d'un rail d'appareillage », page 105).
 3. Retirer les accessoires des appareils.
 4. Le cas échéant : démonter la bouteille d'oxygène de l'unité de transport (voir « 7.4 Démontage de la bouteille d'oxygène de l'unité de transport », page 123).
 5. Le cas échéant : démonter les sangles de l'unité de transport (voir « 7.3 Démontage de la sangle de l'unité de transport », page 121).

WM 68332 05/2021

6. Le cas échéant : démonter les sacs de protection et les sacs d'accessoires de l'unité de transport (voir « 7 Démontage », page 112).
7. Démonter les appareils de l'unité de transport (voir « 7.5 Démontage de l'appareil de l'unité de transport », page 126).


Résultat Les pièces sont prêtes pour le retraitement hygiénique.

8.3 Nettoyage manuel des pièces

Condition requise

- Les pièces présentent des saletés visibles.
 - Le retraitement hygiénique est préparé (voir « 8.2 Préparation du retraitement hygiénique », page 153).
1. Le plan de nettoyage et de désinfection indique les pièces et les produits autorisés ainsi que leur dosage (voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159).
 2. Se conformer aux instructions du fabricant des produits nettoyants pour préparer la solution de nettoyage.
 3. Pour éliminer toutes les saletés visibles : broser soigneusement les pièces à l'aide d'une brosse douce courante dans le commerce, utilisable pour le plastique et trempée dans le produit nettoyant.
À noter : broser avec un soin particulier les surfaces inégales et les rainures (par ex. fermetures auto-agrippantes, fermetures éclair, boucles de sangles).
 4. Essuyer les pièces avec un chiffon à usage unique propre, non pelucheux et humidifié de solution de nettoyage.
À noter :
 - Utiliser un chiffon à usage unique neuf pour chaque opération de nettoyage.
 - Essuyer absolument toutes les surfaces avec soin.
 - Toutes les surfaces doivent être recouvertes de solution de nettoyage.

- Respecter les cycles de nettoyage spécifiés dans le plan de nettoyage et de désinfection.
- Pour finir, essuyer une nouvelle fois les surfaces inégales et les rainures avec un soin particulier.

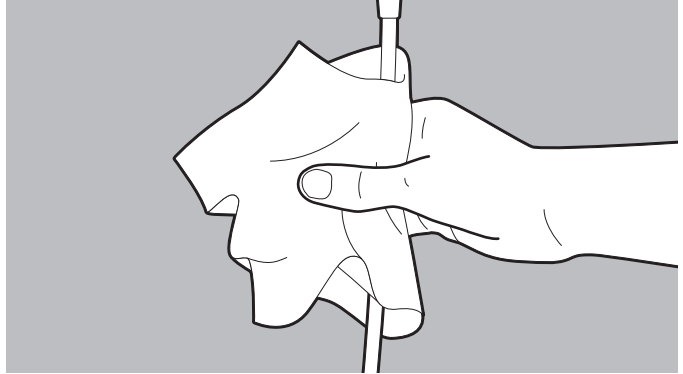

5. Pour les câbles : envelopper les câbles dans un chiffon à usage unique et les tirer pour les essuyer.
6. En cas de salissures encore visibles : répéter le nettoyage manuel.
7. Essuyer les pièces avec un chiffon humide afin d'éliminer les résidus de produit nettoyant.
8. Laisser sécher entièrement les pièces à température ambiante.

Résultat Toutes les pièces ont été nettoyées à la main.

8.4 Désinfection par essuyage des pièces


Condition requise

- Le retraitement hygiénique est préparé (voir « 8.2 Préparation du retraitement hygiénique », page 153).
 - Les pièces ont été nettoyées manuellement et ne présentent plus de salissures visibles (voir « 8.3 Nettoyage manuel des pièces », page 154).
1. Le plan de nettoyage et de désinfection indique les pièces et les produits autorisés ainsi que leur dosage (voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159).

2. Désinfecter les pièces par essuyage (voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159).

À noter :

- Toutes les surfaces doivent être recouvertes de solution désinfectante.
- Mouiller suffisamment les surfaces inégales et les rainures (par ex. fermetures auto-agrippantes, fermetures éclair, boucles de sangles) avec le désinfectant.
- Respecter la durée d'action stipulée par le fabricant du désinfectant.

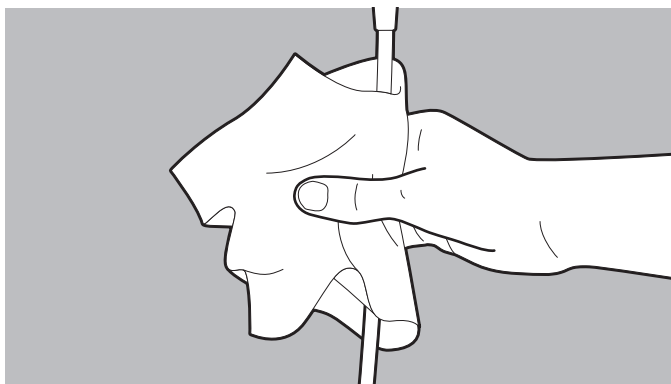

3. Pour les câbles : envelopper les câbles dans un chiffon à usage unique et les tirer pour les essuyer.
4. Laisser sécher entièrement les pièces.

Résultat Les pièces ont été désinfectées par essuyage.

8.5 Retraitement des pièces en machine



Le retraitement en machine peut être à l'origine de décolorations sur certains matériaux. Ces décolorations ne nuisent toutefois en rien au parfait fonctionnement du dispositif.

Condition requise

- Les pièces sont probablement contaminées ou très sales.
 - Le retraitement hygiénique est préparé ([voir « 8.2 Préparation du retraitement hygiénique », page 153](#)).
1. Les produits, le dosage et la durée d'action correspondant aux pièces sont indiqués dans le plan de nettoyage et de désinfection ([voir « 8.7 Plan de nettoyage et de désinfection », page 159](#)).
 2. Laisser les pièces tremper au moins 10 min dans de l'eau du robinet.
 3. Brosser les zones sales pendant au moins 2 min sous l'eau courante avec une brosse de nettoyage jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus de saletés visibles.
 4. Rincer les zones nettoyées pendant 2 min sous l'eau courante.
 5. Le cas échéant : ouvrir les sacs.
 6. Laver les pièces avec un nettoyant et un désinfectant en lave-linge sans essorage :
 - Lavage préalable : 5 min à 20 °C
 - Lavage : 30 min à 30 °C

Résultat

Les pièces ont été retraitées en machine.

8.6 Préparation de pièces pour réutilisation

- Condition requise* Les pièces ont fait l'objet d'un retraitement hygiénique conformément au plan de nettoyage et de désinfection.
1. Contrôler toutes les pièces pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de dommages liés à l'usure, par ex. ruptures de câbles.
 2. Remplacer les pièces endommagées.
 3. Le cas échéant : monter les sangles sur l'unité de transport (voir « 4.3 Montage de la sangle sur l'unité de transport », page 38).
 4. Monter les appareils sur l'unité de transport (voir « 4.5 Montage de l'appareil sur l'unité de transport », page 45).
 5. Le cas échéant : monter les sacs de protection et les sacs d'accessoires sur l'unité de transport (voir « 4 Montage », page 26).
 6. Le cas échéant : monter la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport (voir « 4.4 Montage de la bouteille d'oxygène sur l'unité de transport », page 40).
 7. Brancher les accessoires sur l'appareil.
 8. Réaliser un contrôle du fonctionnement (voir « 5 Contrôle du fonctionnement », page 83).
 9. En cas de stockage prolongé : stocker les pièces conformément aux conditions de stockage (voir « 10 Stockage », page 163).
- Résultat* Les pièces sont de nouveau prêtes à être utilisées.

8.7 Plan de nettoyage et de désinfection

Niveau de désinfection	Description
Désinfection de haut niveau	Procédure germicide utilisant un produit stérilisant dans des conditions non stériles. Cette procédure tue toutes les formes de vie microbienne en dehors d'un grand nombre de spores bactériennes.
Désinfection de niveau intermédiaire	Procédure germicide utilisant un désinfectant qui tue les virus, les mycobactéries, les champignons et les bactéries végétatives, mais pas les spores bactériennes.
Désinfection de bas niveau	Procédure germicide utilisant un désinfectant qui tue quelques champignons, les bactéries végétatives et les virus lipidiques.

Effectuer un retraitement hygiénique après chaque emploi conformément au tableau ci-après :

Pièce	Niveau de désinfection	Nettoyage manuel	Désinfection par essuyage	Désinfection par immersion	Retraitement en machine	Stérilisation
Unité de transport et support mural						
Unité de transport LIFE-BASE	Désinfection de niveau intermédiaire	Essuyer avec neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert). Dosage : 10 ml/l. Au moins 2 fois toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus de saletés visibles	Essuyage une fois de toutes les surfaces avec Incidin™ OxyWipe S (Ecolab). Durée d'action : 5 min	Non autorisée	Non autorisé	Non autorisée
Support mural BASE-STATION						

WM 68332 05/2021

Pièce	Niveau de désinfection	Nettoyage manuel	Désinfection par essuyage	Désinfection par immersion	Retraitement en machine	Stérilisation
Alimentation électrique						
Interface de charge	Désinfection de niveau intermédiaire	Essuyer avec neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert). Dosage : 10 ml/l. Au moins 2 fois toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus de saletés visibles	Essuyage une fois de toutes les surfaces avec Incidin™ OxyWipe S (Ecolab). Durée d'action : 5 min	Non autorisée	Non autorisé	Non autorisée
Sacs et sangles						
Sacs de protection	Désinfection de niveau intermédiaire	Essuyer les surfaces lisses avec neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert). Dosage : 10 ml/l. Au moins 2 fois toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus de saletés visibles	Non autorisée	Non autorisée	Laver en lave-linge sans essorage. Lavage préalable 5 min à 20 °C, lavage 30 min à 30 °C. Nettoyant : Turbo Usona (Ecolab), désinfectant : Turbo Oxyzan	Non autorisée
Sacs d'accessoires						
Sangles de transport						
Sangles						
Appareils et accessoires						
Se conformer à la notice d'utilisation des appareils et des accessoires.						

Respecter impérativement les instructions stipulées dans les notices d'utilisation jointes par les fabricants aux différents composants ou autres pièces. Se conformer à ces notices d'utilisation.

9 Maintenance

9.1 Périodicités

Pièce	Périodicité	Exécutant
Unité de transport	Sans entretien	—
Support mural et support plafond		
Accessoires		
Appareil	Les appareils ont des périodicités spécifiques. Respecter les notices d'utilisation des appareils utilisés.	Fabricant ou personnel spécialisé dûment autorisé par celui-ci

10 Stockage

AVIS

Dommages matériels en cas de stockage incorrect !

Un stockage incorrect peut fragiliser les pièces en silicone et en caoutchouc et les rendre cassantes, entraînant des dommages matériels.

- ⇒ Protéger les pièces en silicone et en caoutchouc des rayons UV et des rayons directs du soleil.
- ⇒ Stocker l'unité de transport et ses accessoires dans un endroit sec.

1. Se conformer à la notice d'utilisation des appareils.
2. Si l'unité de transport ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée : procéder au retraitement hygiénique de l'unité de transport ([voir « 8 Retraitement hygiénique », page 151](#)).
3. Sécher l'unité de transport et, le cas échéant, la ranger dans le sac de protection.
4. Respecter les périodicités de maintenance même si les appareils ne servent pas. Les appareils ne peuvent, dans le cas contraire, pas être utilisés une fois retirés du stock.

Résultat L'unité de transport est stockée.

11 Transport

Il est possible de transporter l'unité de transport de la manière suivante :


- Dans le sac de protection de WEINMANN Emergency
- Par la poignée de transport
- Avec une sangle de transport.

12 Élimination

12.1 Unités de transport et accessoires sans interface de charge

Ne pas jeter l'unité de transport avec les ordures ménagères.
Pour l'élimination appropriée de l'unité de transport, s'adresser à une entreprise d'élimination des déchets certifiée et autorisée.

12.2 Unités de transport et accessoires avec interface de charge

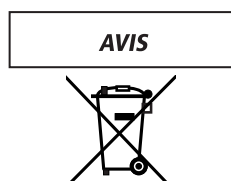

Déchets électroniques dangereux pour l'environnement.

Les déchets électroniques sont dangereux pour l'environnement et doivent être éliminés de manière appropriée.

⇒ Ne pas jeter les déchets électroniques avec les ordures ménagères.

⇒ Pour une élimination appropriée, prendre contact avec une entreprise d'élimination des déchets électroniques certifiée et autorisée.

12.3 Pièces contaminées

Ne pas jeter des pièces contaminées avec les ordures ménagères.
Pour l'élimination appropriée de pièces contaminées, s'adresser à une entreprise d'élimination des déchets dangereux certifiée et autorisée.

13 Étendue de la livraison

13.1 Accessoires et autres pièces

Le présent sous-chapitre décrit les accessoires et autres pièces en conformité avec le Règlement relatif aux dispositifs médicaux (RDM). Les accessoires sont désignés par un IUD-ID. Les autres pièces n'ont pas d'IUD-ID. Pour les pièces d'autres fabricants (dispositifs tiers), demander l'IUD-ID auprès de leur fabricant.

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Unités de transport			
LIFE-BASE light	Pour MEDUMAT Transport	04054685132347	WM 28370
LIFE-BASE light XS	Pour : MEDUMAT Standard ² ou MEDUVENT Standard	04054685000288	WM 9890
LIFE-BASE 1 NG XS avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² ou MEDUCORE Standard ²	04054685006174	WM 9871
LIFE-BASE 1 NG XS	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUVENT Standard, MEDUCORE Standard ² ou MEDUCORE Standard	04054685271800	WM 9897
LIFE-BASE 1 NG XS avec interface de charge	Pour MEDUCORE Standard	04054685006181	WM 9881
LIFE-BASE 1 NG avec interface de charge	Pour MEDUMAT Transport	04054685057305	WM 9661
LIFE-BASE 1 NG	Pour MEDUMAT Transport	04054685057312	WM 9662
LIFE-BASE 1 NG pour support plafond avec interface de charge	Pour MEDUMAT Transport	04054685057688	WM 9701
LIFE-BASE 1 NG XL avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard ²	04054685270414	WM 9916

WM 68332 05/2021

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
LIFE-BASE 1 NG XL avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² ou MEDUCORE Standard ²	04054685000820	WM 8277
LIFE-BASE 1 NG XL avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard	04054685000844	WM 8278
LIFE-BASE 1 NG XL avec interface de charge	Pour MEDUCORE Standard	04054685057435	WM 9674
LIFE-BASE Mini II	Pour : MEDUMAT Standard ^a , MODUL CPAP, MODUL Oxygen	04054685050269	WM 8123
LIFE-BASE III	Pour : MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MODUL CPAP, MODUL Oxygen	04054685050665	WM 8173
LIFE-BASE III	Pour : MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MODUL CPAP, MODUL Oxygen	04054685004231	WM 9173
LIFE-BASE III	Pour : MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MODUL CPAP, MODUL Oxygen	04054685010720	WM 9473
LIFE-BASE 3 NG avec interface de charge	Pour MEDUMAT Standard ²	04054685000660	WM 8266
LIFE-BASE 3 NG avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard ²	04054685270445	WM 9936
LIFE-BASE 3 NG avec interface de charge	Pour MEDUCORE Standard ²	04054685270452	WM 9937
LIFE-BASE 3 NG avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard	04054685000752	WM 8276
LIFE-BASE 3 NG avec interface de charge	Pour MEDUCORE Standard	04054685000851	WM 8281

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
LIFE-BASE 4 NG avec interface de charge, pour bouteilles d'oxygène avec manodétendeur intégré	Pour MEDUMAT Standard ²	04054685276249	WM 9758
LIFE-BASE 4 NG pour bouteilles d'oxygène avec manodétendeur intégré	Pour MEDUMAT Easy ^{CPR}	04054685276904	WM 9751
LIFE-BASE 4 NG avec interface de charge	Pour MEDUMAT Transport	04054685057008	WM 9631
LIFE-BASE 4 NG avec interface de charge	Pour MEDUCORE Standard	04054685057664	WM 9698
LIFE-BASE 4 NG (Ø 115 mm) avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard,	04054685003630	WM 9707
LIFE-BASE 4 NG avec interface de charge	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard	04054685003920	WM 9708
Supports muraux et supports plafond			
BASE-STATION 1 NG avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule)	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685057091	WM 9640
BASE-STATION 1 NG	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685057145	WM 9645
BASE-STATION 1 NG avec interface de charge (fiche 12 V pour bloc d'alimentation/chargeur)	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685057244	WM 9655

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
BASE-STATION 1 NG, support plafond avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule)	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685057299	WM 9660
BASE-STATION 1 NG, support plafond	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685057497	WM 9680
BASE-STATION 1 NG, support plafond avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule)	Pour LIFE-BASE 1 NG XS	04054685271084	WM 9795
BASE-STATION 1 NG, support plafond	Pour LIFE-BASE 1 NG XS	04054685271091	WM 9798
BASE-STATION Mini II	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685050573	WM 8160
BASE-STATION Mini II avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule)	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685050603	WM 8164
BASE-STATION Mini II avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule)	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685051006	WM 8214
BASE-STATION Mini II pour fixation sur rails d'appareillage	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II	04054685051457	WM 8263

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
BASE-STATION Mini II avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule) pour fixation sur rails d'appareillage	Pour LIFE-BASE Mini II	04054685051464	WM 8264
BASE-STATION 3 NG	Pour : LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	04054685050795	WM 8190
BASE-STATION 3 NG avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule)	Pour : LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	04054685050832	WM 8195
BASE-STATION 3 NG avec interface de charge (fiche 12 V pour bloc d'alimentation/chargeur)	Pour : LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	04054685051211	WM 8237
BASE-STATION 3 NG avec interface de charge (fiche combinée 12 V pour véhicule) pour fixation sur rails d'appareillage	Pour : LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	04054685051440	WM 8262
Sacs de protection			
Sac de protection pour MEDUMAT Standard ² sur LIFE-BASE 1 NG XS	–	–	WM 9876
Sac de protection pour MEDUCORE Standard ² sur LIFE-BASE 1 NG XS	–	–	WM 9726
Sac de protection pour MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE 1 NG	–	–	WM 9615
Sac de protection pour MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE 1 NG pour support plafond	–	–	WM 9621

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Sac de protection avec sac d'accessoires pour LIFE-BASE 1 NG XL	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	—	WM 9716
Sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG XL	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	—	WM 9717
Sac de protection pour MEDUMAT Standard ² et MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 1 NG XL	—	—	WM 9692
Sac de protection avec sac d'accessoires pour LIFE-BASE 3 NG	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	—	WM 9721
Sac de protection pour LIFE-BASE 3 NG	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	—	WM 9722
Sac de protection pour MEDUMAT Standard ² et MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 3 NG	—	—	WM 8267
Sac de protection pour MEDUMAT Standard ² et MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9685

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Sac de protection avec sac d'accessoires pour LIFE-BASE 4 NG pour bouteilles d'oxygène avec manodétendeur intégré	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUVENT Standard, MODUL, MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	–	WM 9753
Sac de protection pour LIFE-BASE 4 NG pour bouteilles d'oxygène avec manodétendeur intégré	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUVENT Standard, MODUL, MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	–	WM 9754
Sac de protection pour MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE light	–	–	WM 8023
Sac de protection (étroit) pour MEDUMAT Standard ² sur LIFE-BASE 1 NG XS	–	–	WM 9889
Sac de protection pour MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 1 NG XS	–	–	WM 9886
Sac de protection pour MEDUCORE Standard ² sur LIFE-BASE 1 NG XS	–	–	WM 9726
Sac de protection avec poche extérieure pour LIFE-BASE III	–	–	WM 8291
Sac de protection pour LIFE-BASE III	–	–	WM 8293
Sac de protection avec sac d'accessoires pour LIFE-BASE 4 NG pour bouteilles d'oxygène avec manodétendeur intégré	Pour : MEDUCORE Standard ² , MEDUVENT Standard, MODUL, MEDUCORE Standard ² , MEDUCORE Standard	–	WM 9753

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Sac de protection avec sacs d'accessoires (grands) pour MEDUCORE Standard ² ou MEDUCORE Standard sur LIFE-BASE 1 NG XS	—	—	WM 9826
Sac de protection avec sacs d'accessoires (grands) pour LIFE-BASE 1 NG XL	—	—	WM 9816
Insert pour ranger les palettes dans un sac de protection pour MEDUCORE Standard ²	Pour : LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG XL	—	WM 45202
Sacs d'accessoires			
Sac d'accessoires pour sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG	—	—	WM 9670
Sac d'accessoires pour sac de protection pour MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE 1 NG pour support plafond	—	—	WM 9622
Sac d'accessoires pour MEDUMAT (à droite) sur LIFE-BASE 3 NG	—	—	WM 8273
Sac d'accessoires pour MEDUCORE Standard (à gauche) sur LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9679
Sac d'accessoires pour MEDUCORE Standard (à gauche) sur LIFE-BASE 1 NG XL	—	—	WM 9689

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Sac d'accessoires pour MEDUCORE Standard (à gauche) sur LIFE-BASE 3 NG	—	—	WM 8272
Sac d'accessoires pour sac de protection pour MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9665
Sac d'accessoires pour MEDUMAT Transport sur LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9669
Sac d'accessoires pour MEDUMAT (à droite) sur LIFE-BASE 1 NG XL	—	—	WM 9691
Sac d'accessoires pour MEDUMAT (à droite) sur LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9681
Sac d'accessoires pour MEDUMAT Easy ^{CPR} et MODUL sur LIFE-BASE light	—	—	WM 8022
Sac d'accessoires intérieur pour LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 8274
Sangles, bandes auto-agrippantes et clips de fermeture			
Sangle de transport pour LIFE-BASE 1 NG XS	—	—	WM 9879
Sangle de transport avec boucles de fixation	Pour : LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	—	WM 8298

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Sangle de transport pour sac de protection avec clip de fermeture pour LIFE-BASE III	—	—	WM 15395
Lot de 2, sangle pour fixation du circuit patient au sac de protection	Pour LIFE-BASE 1 NG XS	—	WM 15973
Sangle pour fixation du tuyau basse pression pour LIFE-BASE light XS, LIFE-BASE 1 NG XS	—	—	WM 9894
Sangle pour fixation du circuit patient au sac de protection	Pour : LIFE-BASE light XS, LIFE-BASE 1 NG XS, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL	—	WM 9668
Bande auto-agrippante avec bouton-pression pour fixation du circuit patient	Pour : LIFE-BASE light, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE 1 NG XL	—	WM 9616
Clip de fermeture pour sac de protection pour LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9649
Kit, support valve patient	Pour : LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III	—	WM 15209
Plaques d'écartement			
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 1 NG XS	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard ²	—	WM 9713
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 1 NG XS	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUCORE Standard	—	WM 9878
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUVENT Standard, MEDUMAT Easy ^{CPR} , MEDUCORE Standard ² , MODUL	—	WM 9711

Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3 NG	Pour : MEDUMAT Standard ² , MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MEDUCORE Standard, MODUL	—	WM 9682
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 1 NG	Pour : MEDUMAT Standard ^a , MEDUMAT Easy ^{CPR} , MODUL	—	WM 9606
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 1 NG XS	Pour : MEDUVENT Standard, MEDUMAT Standard ²	—	WM 9728
Plaque d'écartement pour LIFE-BASE 4 NG	—	—	WM 9683
Pinces de fixation et fixations sur barres			
Kit, pince de fixation pour fixation sur rails d'appareillage	Pour : BASE-STATION, LIFE-BASE light XS, LIFE-BASE light	—	WM 15795
Kit, pince de fixation avec vis de blocage pour fixation sur rails d'appareillage	Pour : BASE-STATION Mini II, BASE-STATION 3 NG	—	WM 15881
Lot de 2, pince de fixation pour fixation sur rails d'appareillage	Pour : BASE-STATION, LIFE-BASE light XS, LIFE-BASE light	—	WM 15805
Kit, fixation sur barres Ø 19-40 mm	Pour : BASE-STATION 1 NG, LIFE-BASE light XS, LIFE-BASE light	—	WM 15806

13.1.1 Autres pièces des unités de transport

N°	Désignation	Informations complémentaires	IUD-ID	Référence
100	Vis à tête conique bombée M4 × 10	—	—	WM 51399
101	Vis à tête conique bombée M4 × 12	—	—	WM 51402
102	Vis à tête conique bombée M4 × 16	—	—	WM 51406
103	Vis à tête conique bombée M4 × 30	—	—	WM 51430
104	Rondelle de protection Ø 4 mm	—	—	WM 3566
105	Serre-câble Ø 5 mm	—	—	WM 10787
	Lot de 4, amortisseur de vibrations	Pour MEDUMAT Transport	—	WM 15730
	comprenant :			
106	Rondelle pour amortisseur de vibrations	—	—	—
107	Élément de base pour amortisseur de vibrations	—	—	—
108	Bague pour amortisseur de vibrations	—	—	—
109	Douille pour amortisseur de vibrations	—	—	—

14 Caractéristiques techniques
















	LIFE-BASE light XS	LIFE-BASE light	LIFE-BASE 1 NG XS	LIFE-BASE 1 NG
Classification selon le règlement (UE) 2017/745	I			
Normes appliquées	EN 1789 EN 60601-1 EN 60601-1-12 RTCA DO-160G			
Dimensions l x H x P	218 mm x 244 mm x 125 mm	345 mm x 225 mm x 80 mm	220 mm x 230 mm x 136 mm	415 mm x 240 mm x 140 mm
Dimensions utiles l x H x P	260 mm x 280 mm x 280 mm	365 mm x 250 mm x 180 mm	460 mm x 315 mm x 250 mm	460 mm x 315 mm x 250 mm
Poids – vide – avec équipement	0,8 kg 4,0 kg max.	1,1 kg 7,7 kg max.	0,9 kg 6,0 kg max.	2,0 kg 9,3 kg max.
Plage de température* – Fonctionnement – Stockage – Humidité de l'air	de -20 °C à +60 °C de -40 °C à +70 °C jusqu'à 95 % (humidité relative), sans condensation			
Raccordement électrique pour l'interface de charge	–	–	12 V CC, I _{max.} = 8 A	
Résistance aux chocs et vibrations	<ul style="list-style-type: none">• EN 1789• EN 60601-1-12 (catégories : fixation dans un véhicule de secours, fixation dans un avion, fixation dans un hélicoptère, implantation mobile sur le lieu de l'intervention en urgence)• EUROCAE ED-14G (RTCA DO-160G) (Section 8 - Vibrations, aéronefs à voilure fixe Cat. S et hélicoptères Cat. U2)			
Nature du véhicule de secours	Fixation dans un véhicule de secours, un avion ou un hélicoptère et implantation mobile sur le lieu de l'intervention en urgence			
Durée de vie	10 ans			







	LIFE-BASE 1 NG XL	LIFE-BASE Mini II	LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE III	LIFE-BASE 4 NG
Classification selon le règlement (UE) 2017/745				
Normes appliquées	EN 1789 EN 60601-1 EN 60601-1-12 RTCA DO-160G			
Dimensions l x H x P	427 mm x 240 mm x 140 mm	464 mm x 265 mm x 215 mm	465 mm x 295 mm x 145 mm	465 mm x 325 mm x 145 mm
Dimensions utiles l x H x P	670 mm x 315 mm x 250 mm	520 mm x 340 mm x 300 mm	760 mm x 440 mm x 300 mm	760 mm x 520 mm x 300 mm
Poids – vide – avec équipement	2,2 kg 11,6 kg max.	2,5 kg 11,2 kg max.	2,9 kg 14,6 kg max.	4,4 kg 18,2 kg max.
Plage de température* – Fonctionnement – Stockage – Humidité de l'air	de -20 °C à +60 °C de -40 °C à +70 °C jusqu'à 95 % (humidité relative), sans condensation			
Raccordement électrique pour l'interface de charge	12 V CC, $I_{\max.} = 8 \text{ A}$			
Résistance aux chocs et vibrations	<ul style="list-style-type: none"> • EN 1789 • EN 60601-1-12 (catégories : fixation dans un véhicule de secours, fixation dans un avion, fixation dans un hélicoptère, implantation mobile sur le lieu de l'intervention en urgence) • EUROCAE ED-14G (RTCA DO-160G) (Section 8 - Vibrations, aéronefs à voilure fixe Cat. S et hélicoptères Cat. U2) 			
Nature du véhicule de secours	Fixation dans un véhicule de secours, un avion ou un hélicoptère et implantation mobile sur le lieu de l'intervention en urgence			
Durée de vie	10 ans			

*La plage de température de l'unité de transport peut varier de celle des appareils montés. La plage de température des appareils montés est déterminante.

CE Sous réserve de modifications de la conception de l'appareil.

15 Marquages

Symbole	Description
	Référence catalogue
	Numéro de série
	Fabricant
	Date de fabrication
	Marquage CE (atteste que le dispositif est conforme aux règlements européens en vigueur)
	Identifiant unique des dispositifs (IUD) : Permet l'identification formelle de dispositifs donnés sur le marché
	Dispositif médical
	Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères
	Consulter les instructions d'utilisation
	Suivre les instructions d'utilisation
	Attention : consulter les mises en garde et les mesures préventives indiquées dans la notice d'utilisation
	Interdiction de s'asseoir
	Interdiction de marcher sur la surface
	Limites de la plage de température de stockage
	Limites de la plage d'humidité de l'air de stockage

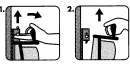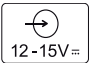Symbole	Description
	Charge maximale
	Ne pas repasser
	Laver à 30 °C
	Ne pas sécher au sèche-linge
	Indique comment débloquer le verrouillage et retirer l'unité de transport du support mural
	Tension à l'entrée 12 V à 15 V

16 Garantie

WEINMANN Emergency accorde aux clients d'un nouveau dispositif WEINMANN Emergency original et d'une pièce de rechange intégrée par WEINMANN Emergency une garantie fabricant limitée, conformément aux conditions de garantie valables pour le dispositif concerné et aux durées de garantie indiquées ci-après à compter de la date d'achat.

Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse www.weinmann-emergency.com. Elles peuvent également être envoyées sur demande.

Pour faire valoir la garantie, contacter le distributeur agréé.

Dispositif	Durées de garantie
Appareils WEINMANN Emergency avec accessoires (exception : masques) pour l'oxygénothérapie et la médecine d'urgence	2 ans
Masques avec accessoires, batteries, piles (sauf indication contraire dans la documentation technique), capteurs, circuits patient	6 mois
Dispositifs à usage unique	Aucune

17 Déclaration de conformité

La société WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG déclare par la présente que le produit est conforme aux dispositions respectives du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.weinmann-emergency.com.

Fabricant

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12
22525 Hamburg
GERMANY
T: +49 40 88 18 96-120
E: customerservice@weinmann-emt.de

**Centre de production, de logistique et de
service après-vente**

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Siebenstücken 14
24558 Henstedt-Ulzburg
GERMANY

