

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

MARCHE/ARRÊT

AJUSTEMENT

AJUSTEMENT

PAUSE

MARCHE

Placer manuellement la ventouse

Sauveteur 1 (utilisateur LUCAS)	Sauveteur 2
1. Mise sous tension du LUCAS.	
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur MARCHE/ARRÊT pour lancer l'autotest et mettre le dispositif LUCAS sous tension Le dispositif sera prêt, en mode AJUSTEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> Pratiquer une RCP manuelle
2. Positionnement de la PLANCHE DORSALE	
<ul style="list-style-type: none"> Interrompre brièvement la RCP manuelle Positionner la PLANCHE DORSALE sous le patient, juste sous les aisselles 	<ul style="list-style-type: none"> Aider au placement de la PLANCHE DORSALE Reprendre la RCP manuelle
3. Fixer la PARTIE SUPÉRIEURE	
<ul style="list-style-type: none"> Tirer une fois sur les ANNEAUX DE DÉVERROUILLAGES pour ouvrir les CLIPS DE FIXATION. Puis relâcher les anneaux Interrompre brièvement la RCP manuelle pour fixer la PARTIE SUPÉRIEURE à la PLANCHE DORSALE. Entendre un clic Tirer une fois vers le haut pour vérifier la fixation 	<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre la RCP manuelle aussi longtemps que possible Aider à la fixation de la PARTIE SUPÉRIEURE
4. Pousser la VENTOUSE vers le bas. Ajuster la position si nécessaire.	
<ul style="list-style-type: none"> Pousser la VENTOUSE vers le bas Le bord inférieur de la VENTOUSE doit se trouver immédiatement au-dessus de l'extrémité du sternum Ajuster si nécessaire (rester en mode AJUSTEMENT) 	<ul style="list-style-type: none"> Assister
5. Verrouiller la position. Débuter les compressions.	
<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur PAUSE pour VERROUILLER LA POSITION DE DÉPART Appuyer sur MARCHE (en continu) ou MARCHE (30:2) pour commencer les compressions 	<ul style="list-style-type: none"> Assister
<p>Fixer la sangle de stabilisation.</p> <p>Suivre les protocoles de RCP.</p>	