


Positionnement des palettes/électrodes

1. Placez l'électrode BD ou la palette Sternum sur le thorax du patient, en haut à droite, en position latéro-sternale et en dessous de la clavicule, comme illustré ci-dessous.
2. Placez l'électrode JG ou la palette Apex sur le mamelon gauche du patient, sur la ligne mi-axillaire, en positionnant le centre de l'électrode sur la ligne mi-axillaire, si possible. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

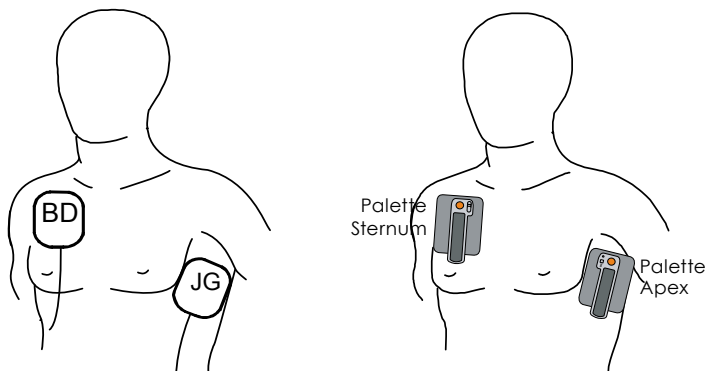

REMARQUE :

- ☐ Utilisez uniquement le positionnement antéro-latéral pour les palettes.
- ☐ Placez les électrodes de façon antéro-latérale ou antéro-postérieure. Pour le positionnement antéro-postérieur, reportez-vous aux instructions d'utilisation indiquées sur l'emballage des électrodes.
- ☐ Utilisez uniquement le positionnement antéro-latéral pour la surveillance ECG avec électrodes.
- ☐ Utilisez uniquement le positionnement antéro-latéral pour la surveillance DAE. L'algorithme DAE de l'appareil n'a pas été validé pour un positionnement antéro-postérieur.