


RD SET™




SofTouch™ Replacement Wraps

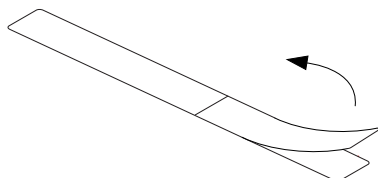

Images	2
en English	3
fr French	4
de German	5
it Italian	6
es Spanish (International)	7
sv Swedish	8
nl Dutch	9
da Danish	10
pt Portuguese (Portugal)	11
zh Chinese (Simplified)	12
ja Japanese	13
fi Finnish	14
no Norwegian	15
cs Czech	16
hu Hungarian	17
pl Polish	18
ro Romanian	19
sk Slovak	20
tr Turkish	21
el Greek	22
ru Russian	23
ar Arabic	24
fa Farsi	25

RD SET™

SofTouch™ Replacement Wraps

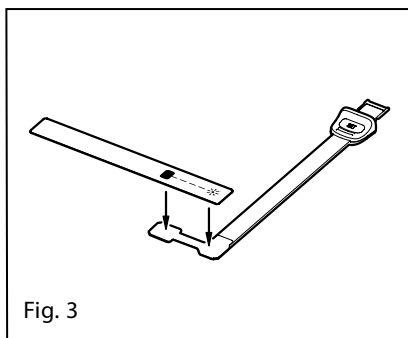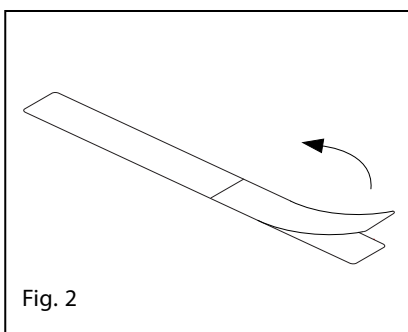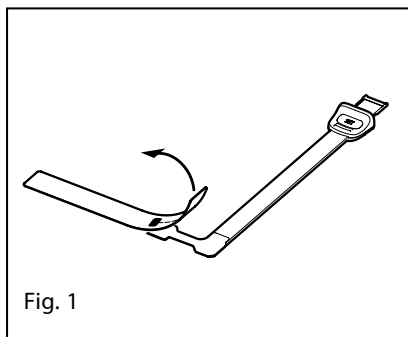



RD SET™

Bandes de rechange SofTouch™

fr

Mode D'EMPLOI

 utilisation sur un seul patient

 Ne contient pas de latex naturel

 Non stérile
















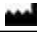



DESCRIPTION

Les bandes de rechange RD SET™ SofTouch™ sont conçues pour remplacer les bandes de fixation des capteurs à usage unique RD SET si ces dernières étaient salies ou déchirées pendant la durée de vie du capteur.

INSTRUCTIONS

1. Retirer et jeter la bande de fixation existante (Fig. 1).
2. Retirer la feuille protectrice de la bande de fixation (Fig. 2).
3. Positionner la bande de rechange sur le capteur, en alignant le composant de l'émetteur sur le câble du capteur. (Fig. 3).

Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou son étiquette :

SYMBOLE	DÉFINITION	SYMBOLE	DÉFINITION
	Consulter le mode d'emploi		Marque de conformité à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
 (fond bleu)	Suivre les instructions d'utilisation		Représentant agréé dans l'Union européenne
	Fabricant		Code de lot
	Date de péremption AAAA-MM-JJ		Référence du catalogue (référence du modèle)
	Ne pas réutiliser/Produit à usage unique/utilisation sur un seul patient		Patient pédiatrique
	Non stérile		Limite d'humidité de stockage
	Ne contient pas de latex naturel		Plage de température de stockage
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Conserver au sec
Rx ONLY	Mise en garde : la loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de cet appareil par ou sur prescription d'un médecin.		Les instructions/modes d'emploi/manuels sont disponibles en format électronique à l'adresse http://www.Masimo.com/TechDocs Remarque : elFU n'est pas disponible pour les pays où le marquage CE est ou doit être utilisé.
	Numéro de référence Masimo		Pression atmosphérique (limite)

RD SET est une marque de commerce de Masimo Corporation.



© 2017 Masimo Corporation

 **Manufacturer:**
Masimo Corporation
52 Discovery
Irvine, CA 92618
USA

www.masimo.com

Authorized representative
in the European community:



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



9018D-eIFU-0417