

FICHE TECHNIQUE

Générateur Infant Flow® LP et ses accessoires associés pour PPC(CPAP) nasale

Référence(s)

Référence	Désignation	Cdt
7772021	Générateur et circuit de PCC(CPAP) nasale Infant Flow LP	20 / bte
777000XS	Embouts nasaux taille XS Vert	10 / bte
777000S	Embouts nasaux taille S Rose	10 / bte
777000M	Embouts nasaux taille M Bleu	10 / bte
777000L	Embouts nasaux taille L Violet	10 / bte
777000XL	Embouts nasaux taille XL Transparent	10 / bte
777002XS	Masques nasaux taille XS Vert	10 / bte
777002S	Masques nasaux taille S Rose	10 / bte
777002M	Masques nasaux taille M Bleu	10 / bte
777002L	Masques nasaux taille L Violet	10 / bte
777002XL	Masques nasaux taille XL Transparent	10 / bte
777040XS	Harnais fixation taille XS 17-21cm pour IF LP	10 / bte
777040S	Harnais fixation taille S 21-26cm pour IF LP	10 / bte
777040SM	Harnais fixation taille SM 24-28cm pour IF LP	10 / bte
777040M	Harnais fixation taille M 26-32cm pour IF LP	10 / bte
777040L	Harnais fixation taille L 32-37cm pour IF LP	10 / bte
777040XL	Harnais fixation taille XL 37-42cm pour IF LP	10 / bte
777010	Bonnets Taille 000 Blanc 18-20 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777012	Bonnets Taille 00 Gris 20-22 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777014	Bonnets Taille 0 Rose 22-24 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777016	Bonnets Taille 1 Brun 24-26 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777018	Bonnets Taille 2 Jaune 26-28 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777020	Bonnets Taille 3 Bleu 28-30 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777022	Bonnets Taille 4 Or 30-32 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777024	Bonnets Taille 5 Vert 32-34 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777026	Bonnets Taille 6 Marron 34-36 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
777028	Bonnets Taille 7 Orange 36-38 cm, 1 paire de liens incluse	10 / bte
1901/NS	Filtre silencieux antibactérien pour Infant Flow	20 / bte
VX010	Capteurs abdominaux UU LP	50 / bte

Dispositif jetable à usage unique. Générateur de CPAP nasale avec circuit chauffant et ses accessoires : masques, embouts, harnais, bonnets (nouveau-nés, enfants poids max 5 kg).

Description

Ce système de CPAP nasale a été conçu pour fonctionner avec les Drivers de ventilation PPCN (nCPAP) (Infant Flow® SiPAP et les respirateurs Fabian équipés de l'option PPCN/Duopap) utilisés par les professionnels de santé qualifiés pour délivrer de la PPCN ou de la ventilation nasale BiPhasic à l'hôpital et transport intra-hospitalier.

Toujours consulter la notice d'utilisation avant usage.

Matière(s)

Générateur	Matières
Corps	Acrylique
Colle	Sans latex
Valve de surpression	
Corps	Acrylique
Valve de sécurité	Silicone Elastomère Classe VI
Disque en mousse	Mousse médicale en Polyuréthane
Tubulure	
Tubulure en accordéon, 35 cm	Polypropylène Colypomère & Polyoléfine Elastomère
Tubulure d'extension, 25 cm	Polyoléfine Elastomère
Connecteur 10mm/10mm	Polypropylène
Ligne d'arrivée pression/de mesure de pression	PVC sans phtalate
Pièce en T	
Base en T	Elastomère Thermoplastique
Support auto-agrippant	Nylon
Bande de fixation auto-agrippante	Nylon naturel

Autres composants du kit	
Guide de taille	Acétate de cellulose transparent
Plateau thermoformé	PET médical

Embouts & masques nasaux	
Embouts 1 masques nasaux, toutes tailles	Silicone & Colorants médicaux
Petit étui thermoformé	PET médical

Bonnets	
Bonnets	Jersey Coton
Support pour pièce en T	Nylon & Mousse
Bandes	Nylon & Mousse

Harnais	
Harnais	Jersey Coton
Support pour pièce en T	Nylon & Mousse

Circuit chauffant RT 132	
Matériaux	SANS LATEX Polyéthylène, polypropylène, fil chauffant en cuivre, polyester
Longueur du circuit inspiratoire	1,10 m
Longueur de l'extension pour incubateur fermé	0,30 m
Longueur du circuit de liaison entre le respirateur et l'humidificateur chauffant	0,60 m
Fil chauffant	23Ω, 21 W, fil chauffant en spirale
Caractéristiques	Ligne de pression de 1,8 m

Conditionnement

Cf. Tableau « Référence(s) »

CDT : 20/carton

UCD : 1 CDT

Emballage

Bonnets, harnais, paire de liens : Sachet pelable

Masques et générateurs : Boitier en plastique thermoformé

Fabricant

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045 USA
1-833-327-3284
customersupport@vyaire.com
www.vyaire.com

Distributeur

The Surgical Company fr

26 rue de la Montée

68720 Flaxlanden

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE & 2007/47 CE

Classe du dispositif : IIa

Numéro de l'organisme notifié : 0086

A réserver à l'enfant en détresse respiratoire mais ayant une ventilation spontanée. A utiliser sur prescription médicale et par un personnel formé. A utiliser après avoir réalisé les contrôles de performance de l'appareil et du circuit indiqués dans le manuel du Driver Infant Flow SIPAP révision M ou plus récente et dans les respirateurs Fabian.



Elimination

Déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), à éliminer selon les protocoles de l'établissement.

