


FICHE TECHNIQUE

Réf. MVIIHH

Ligne d'échantillonnage pour patients intubés Microstream™ Advance Filter Line néonatal-nourrisson, humidité élevée

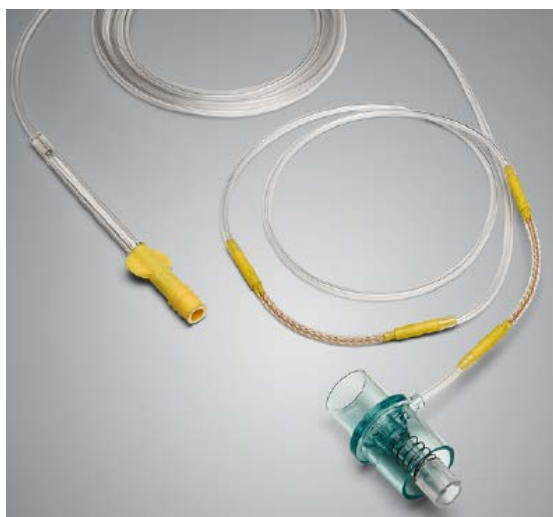

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : 25 04 2021 Date d'édition : 25 04 2021
1.1	Nom : MEDTRONIC France SAS	
1.2	Adresse complète : Medtronic France SAS 9, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Tél. : 01 55 38 17 00 Fax : 01 55 38 18 00	Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00 Site internet : www.medtronic.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériorigilance : Service Affaires Réglementaires /Matériorigilance Medtronic France SAS	Tel : ++33 (0) 1 55 38 17 00 e-mail : affaires.reglementaires@medtronic.com

2. Informations sur dispositif ou équipement		
2.1	Dénomination commune : Ligne de capnographie ETCO2	
2.2	Dénomination commerciale : Ligne d'échantillonnage pour patients intubés Microstream™ Advance Filter Line, Advance Filter Line néonatal-nourrisson, humidité élevée	
2.5	Classe du DM : Directive de l'UE applicable : Numéro de l'organisme notifié : Date de première mise sur le marché dans l'UE : Fabricant du DM :	Class IIa, 93/42/EEC de l'Annexe IX CE 644823 Oridion Medical 1987 Ltd. P.O. Box 45025, Jérusalem 91450 Israel

2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...):



Caractéristiques

- Technologie Oridion Microstream®
- Technologie de 3^e génération
- Patient non intubé
- Faible volume prélevé - 50 ml/min
- Application pour patient néonatal-nourrisson
- Lignes de prélèvement pas obstruées par l'humidité.
- Lignes longues pour les Examens (IRM)

Précision de mesures

TECHNOLOGIE MICROSTREAM®

GAMME COMPLETE DE SOLUTIONS

- Applications pour patients **intubés (adulte, pédiatrique, et néonatale)**
- Longueur différentes (**2 ou 4 mètres**)
- Extension pour examen **IRM**
- Courte et **longue durée (6 à 72 heures)**
- Technologie **Nafion®** - élimination d'humidité
- Filtre hydrophobique 0.2 micron – pas de piège à eau



Medtronic

FABRICANT	ORIDION MEDICAL Ltd
Type ou référence	MVIIIHL
Marquage CE sur le sachet	OUI
Classe CE	I selon les critères de l'Annexe IX de la Directive 93/42
Présence de Latex	NON
Longueur	2 m
Indication	néonatal-nourrisson, humidité élevée
Usage	72 heures
Application	Patient intubé
Tube en Nafion	Non
Filtre Hydrophobique 45 µ	Oui
Apport en O ₂	Non
Mesure CO ₂	Oui
Moniteurs utilisant la technologie Microstream®	Tous moniteurs équipés d'un module Microstream
Conditionnement	NON STERILE Boite de 25 unités

2.7

Références Catalogue :

REFERENCE :

LIGNES LONGUE DURÉE POUR PATIENTS INTUBÉS				
Ancienne référence	Nouvelle référence	Ancienne désignation	Nouvelle désignation	Description
010807	MVIIIH	Kit de ligne d'échantillonnage VitaLine™ H	Ligne d'échantillonnage pour patients intubés Microstream™ Advance Filter Line	néonatal-nourrisson, humidité élevée

Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) :

CDT (Multiple de l'UCD) :

QML (Quantité minimale de livraison) :

25	Unités
25	Unités
25	Unités

Descriptif de la référence :

Ligne d'échantillonnage pour patients intubés Microstream™ Advance Filter Line, Advance Filter Line néonatal-nourrisson, humidité élevée

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

ELEMENTS	MATERIAUX
Lignes de Capnographie	PVC


Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- ✓ Ne contient pas de phtalates

Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment)

2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) :

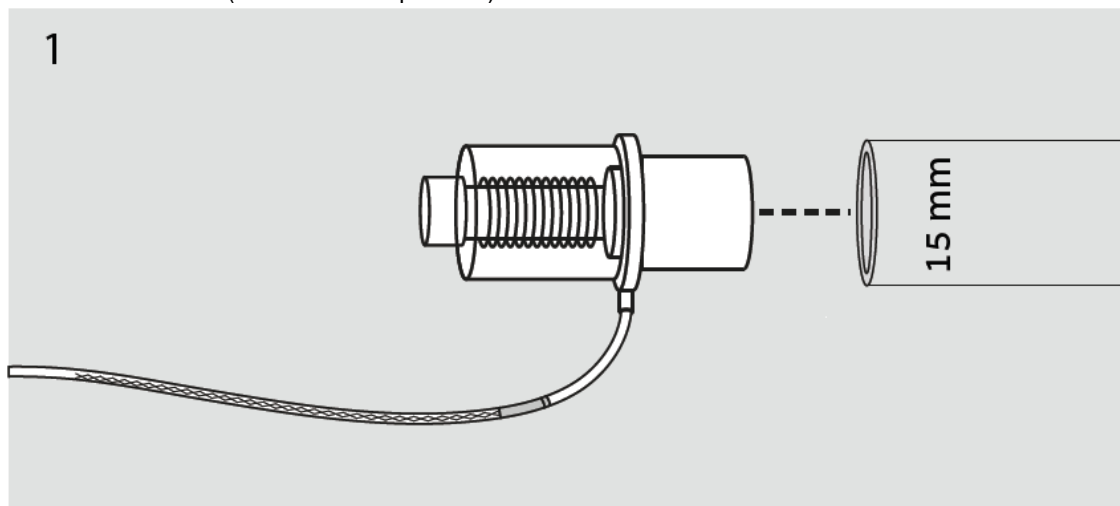

Indications (selon liste Europharmat) :

Indication	néonatal-nourrisson
Usage	Suivi ETCO2
Application	Patient intubé

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »

3. Procédé de stérilisation :

DM stérile : NON
Mode de stérilisation du dispositif :

4. Conditions de conservation et de stockage


Conditions normales de conservation & de stockage	Vérifier l'intégrité de l'emballage avant emploi. Ne pas stériliser.
Précautions particulières	Ne pas exposer à des températures supérieures à 49°C
Durée de la validité du produit	

	Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu.	Non
--	--	------------

5. Sécurité d'utilisation

5.1	Sécurité technique :
-----	-----------------------------

6. Conseils d'utilisation

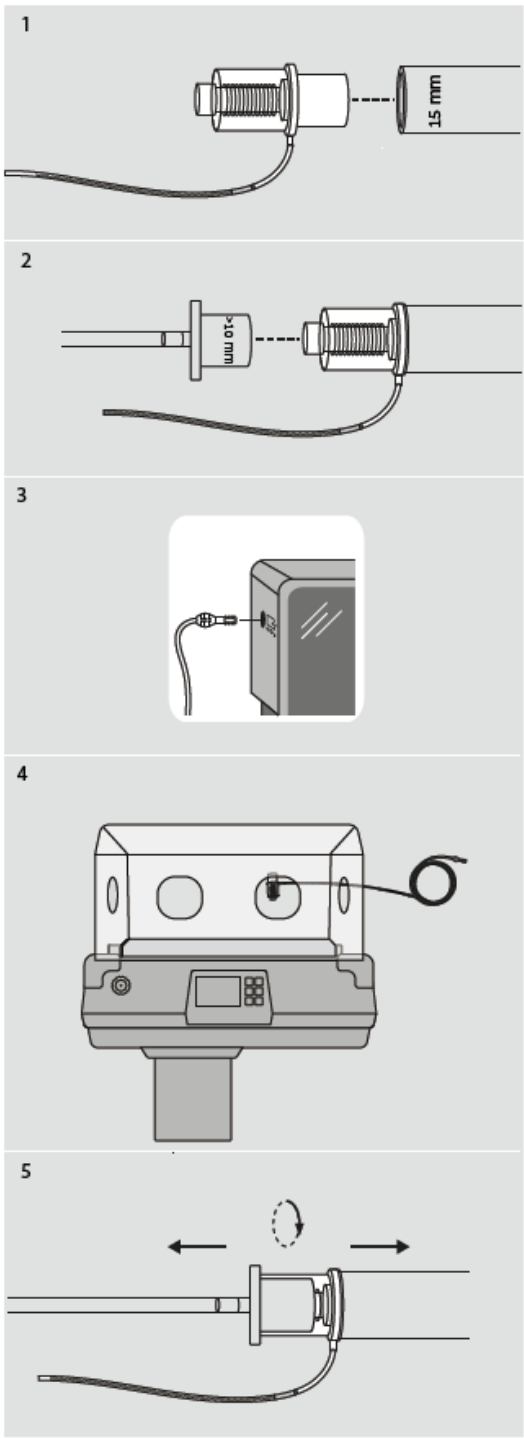6.1	<p><u>Mode d'emploi :</u></p> <p>Voir Notice d'utilisation</p>  <p>The diagram consists of five numbered steps illustrating the setup and use of the CO2 sampling device:</p> <ol style="list-style-type: none"> Step 1: A close-up of the device's sampling port. A dashed line indicates the insertion of a tube with an inner diameter of 1.5 mm. Step 2: The device is shown connected to a tube. A label on the device indicates a minimum length of >10 mm for the tube segment before the device. Step 3: The device is connected to a power source, represented by a battery pack. Step 4: The device is connected to a patient's airway, which is part of a ventilator or anesthesia machine. A coiled tube connects the device to the machine's airway. Step 5: A detailed view of the device's sampling port showing the internal mechanism and the direction of airflow (indicated by arrows) and the sampling tube's position.
6.2	<p><u>Indications</u></p> <p>Destinée à acheminer un échantillon d'air du patient depuis un ventilateur ou un appareil d'anesthésie vers un appareil de mesure des gaz afin de mesurer le pourcentage de CO2 dans l'air expiré du patient. L'ensemble est destiné uniquement à un usage pour un seul patient. Population visée : nourrissons/nouveau-nés intubés</p>

6.3	<p><u>Précautions d'emploi :</u></p> <p>Utilisation avec tous les moniteurs compatibles Microstream™ Adaptateurs pour voies aériennes des nourrissons et nouveau-nés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espace mort ajouté < 0,5 cc. • À utiliser avec une sonde de tube endotrachéal ≤ 4,5 mm. <p>AVERTISSEMENTS</p> <p>••</p> <p>Des connexions lâches ou endommagées risquent de compromettre la ventilation ou de provoquer une mesure imprécise des gaz respiratoires. Connecter tous les composants de manière sécurisée et visser le connecteur de la ligne d'échantillonnage sur le port CO2 du moniteur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords conformément aux procédures cliniques standard, et que les valeurs de CO2 apparaissent.</p> <p>••</p> <p>Ne tentez pas de nettoyer, de désinfecter, de stériliser ou de rincer un élément de la ligne d'échantillonnage. La réutilisation d'accessoires à usage unique peut créer un risque de contamination croisée pour le patient ou endommager les fonctions du moniteur.</p> <p>••</p> <p>Lors de l'utilisation avec un cathéter d'aspiration, ne pas placer l'adaptateur pour voies aériennes entre le cathéter d'aspiration et le tube endotrachéal. Cela permet de garantir que l'adaptateur pour voies aériennes n'interfère pas avec le fonctionnement du cathéter d'aspiration et que le processus d'aspiration n'endommage pas l'adaptateur pour voies respiratoires. Si l'adaptateur pour voies respiratoires est endommagé, cela peut avoir des conséquences néfastes pour le patient.</p> <p>••</p> <p>Vérifier l'absence de pliure au niveau des tubulures de CO2, car une tubulure pliée peut entraîner des erreurs d'échantillonnage du CO2.</p> <p>••</p> <p>Ne pas utiliser les références MVIIH, MVIIHH, MVIIHL ou ZMVIIH avec des produits comportant des pièces de connecteur interne saillantes (p. ex., le capteur de débit Hamilton), ce qui pourrait provoquer une rupture de l'adaptateur des voies aériennes.</p> <p>Remarques</p> <p>••</p> <p>Lors de l'installation, vérifiez que l'adaptateur pour voies aériennes peut facilement être branché et débranché du circuit respiratoire avant de continuer.</p> <p>••</p> <p>Pour éviter l'accumulation d'humidité et l'occlusion de la ligne d'échantillonnage pendant la nébulisation, le lavage ou l'aspiration, respecter les instructions d'utilisation du moniteur pour interrompre le fonctionnement de la pompe à CO2. De plus, en particulier si l'on ne parvient pas à arrêter la pompe à CO2, débrancher le connecteur de la ligne d'échantillonnage du port de CO2 du moniteur.</p> <p>••</p>

