

HeartSine vTrainer™

Le HeartSine vTrainer™ est un dispositif dédié à la formation à l'utilisation d'un Défibrillateur automatique externe (DAE) HeartSine® Samaritan® PAD, et vous permet de simuler l'utilisation de ce dispositif.

Pour accéder à la formation :

- Téléchargez l'application « SAM Trainer » sur votre smartphone en :
 - o Inscrivant le nom de l'application dans votre App Store (iPhone) ou dans Google Play (autres systèmes d'exploitation)

OU

- o Scannant le QR code présent sur l'emballage à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone
- Ouvrez le boîtier en carton afin de découvrir le torse de la victime et le DAE
- Placez votre smartphone au centre du défibrillateur, pour représenter le tableau de bord du dispositif
- Une fois l'application téléchargée :
 - o Ouvrez l'application
 - o Choisissez la langue souhaitée
 - o Sélectionnez le DAE à utiliser
 - o Appuyez sur le bouton vert pour lancer la simulation
 - o Suivez les instructions visuelles et vocales du DAE
- Une fois arrivé à la RCP (Réanimation cardio-pulmonaire), le métronome est en continu. Pour l'arrêter :
 - o Touchez la flèche en haut à gauche de l'écran de votre smartphone,
 - o A la question « Redémarrer ? » répondre la flèche orange, Vous reviendrez alors au menu.

Bravo, vous êtes prêt à contribuer à sauver des vies !!

