



Iris Diagnostics France

Micropark D - Paris Nord II

33 rue des Chardonnerets

BP 88052 - Tremblay en France

95933 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

Tél. : +33 (0)1 82 71 30 10- Fax : +33 (0)1 82 71 30 11

N° de SIRET : 453 496 952 00038. Code APE : 4618 Z

Iris System Cleanser™

REF: 800-3203  FR

Mode d'emploi à lire avant d'utiliser ce produit

Vérifier que le conditionnement est en bon état avant d'utiliser ce produit.

UTILISATION PREVUE

Iris System Cleanser™ est une solution d'hypochlorite pour la décontamination journalière des automates de microscopie urinaire l'iQ® Series. Ce réactif est conçu pour un usage de diagnostic in vitro uniquement (IVD).

PRINCIPES ET COMPOSITIONS CHIMIQUES

Iris System Cleanser™ est une solution prête à l'emploi spécifiquement développée comme solution de lavage pour les systèmes de microscopie urinaire iQ® Series. Un cycle de lavage doit être exécuté au début de chaque jour de travail pour empêcher l'accumulation de résidus dans le système hydraulique. Iris System Cleanser™ (référence 475-0003) doit être utilisé pour nettoyer le système fluidique et la cellule de lecture (Flowcell)

Composition : Solution d'hypochlorite de sodium à ~4.2% - pH ≥ 12

PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'Iris System Cleanser est défini comme réactif corrosif selon les critères définis dans les documents :

- OSHA - 29 CFR 1910. 1200(d).
- R31 Au contact d'un acide dégage un gaz toxique.
- R34 Provoque des brûlures.



Ce réactif est dangereux pour les yeux, la peau et les vêtements : Des précautions appropriées dans la collecte, la manipulation, le stockage et l'élimination de l'Iris System Cleanser™ doivent être prises en conséquence.

CONSERVATION ET STABILITE

- Conserver entre 20 et 28°C (68 à 82°F).
- Ne pas congeler.
- Conserver le réactif dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- Toute solution non utilisée et conservée dans son emballage d'origine scellé est utilisable jusqu'à la date de péremption.
- Ne pas utiliser le réactif après la date d'expiration figurant sur le flacon.

PROCEDURE

1-MATERIEL FOURNI

- 4 bidons de 425 ml de solution de : Iris System Cleanser™.
- 4 becs verseurs.

2-MATERIEL NECESSAIRE MAIS NON FOURNI

- Tubes 10 ml (diamètre 16mm / Hauteur 90mm) pour le passage sur l'automate

3-METHODOLOGIE

- Suivre la procédure décrite dans le Manuel Utilisateur.

**Iris Diagnostics France**

Micropark D - Paris Nord II

33 rue des Chardonnerets

BP 88052 - Tremblay en France

95933 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

Tél. : +33 (0)1 82 71 30 10- Fax : +33 (0)1 82 71 30 11

N° de SIRET : 453 496 952 00038. Code APE : 4618 Z

PRECAUTIONS ET MISE EN GARDE

- Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas ingérer ou inhaler.
- Respecter les bonnes pratiques de laboratoire.
- En cas de contact avec la peau rincer abondamment à l'eau claire.
- En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits : Peut libérer des gaz dangereux (Chlore).
- En cas d'ingestion ne pas faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Si une irritation se développe, consulter un médecin.
- En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer cette notice).
- En cas d'inhalation, placer la personne à l'air frais
- Portez des vêtements adaptés lors de la manipulation.
- Eviter les inhalations et le contact répété avec la peau.
- Un contact avec la peau peut conduire des individus sensibles à une réaction allergique
- L'élimination de l'Iris System Cleanser TM doit être réalisée en accord avec la réglementation en vigueur.

**AVERTISSEMENT**

Utilisez seulement Iris System Cleanser TM pour le cycle de lavage. D'autres solutions semblables d'hypochlorite ne doivent pas être employées en raison du risque de contaminants particuliers, de traces d'huiles ou de libération de composant qui pourraient endommager ou bloquer la cellule optique.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le Support Scientifique d'Iris Diagnostics France au +33 (0)1 82 71 30 10 ou par email iris-france@proiris.com. Si vous résidez en dehors de la France, merci de contacter votre distributeur local.

**IRIS DIAGNOSTICS****UNE DIVISION DE INTERNATIONAL REMOTE IMAGING SYSTEMS, INC.**

9172 Eton Avenue, Chatsworth, CA 91311

Tel: (818) 709-1244 Urgence # (800) 776-4747