

# FRED easy G2

Le défibrillateur tactile, intuitif, instantané



**SCHILLER**  
FRANCE S.A.S.

# FRED easy G2

FRED easy G2 est la dernière innovation issue du centre d'excellence de la défibrillation SCHILLER, située en Alsace (67).

Sa technologie offre une nouvelle avancée dans la prise en charge des victimes d'arrêt cardiaque.



## Le défibrillateur nouvelle génération



FRED easy G2 effectue une analyse du rythme cardiaque avec antériorité afin de réduire significativement le temps de délivrance du choc.



FRED easy G2 adapte sa thérapie de défibrillation aux enfants et nourrissons grâce à un simple bouton.



FRED easy G2 est équipé d'un écran tactile WVGA couleurs de 5 pouces. D'une technologie capacitive très robuste, l'écran guide l'utilisateur à chaque étape de la réanimation.



FRED easy G2 propose deux algorithmes, FreeCPR et ARGUS Lifepoint 2, pour aider le secouriste à réaliser un massage cardiaque efficace.




FRED easy G2 propose en option une sélection de 4 langues au choix. Les 4 langues sont configurables, leurs combinaisons infinies.



FRED easy G2 existe en version communicante afin d'effectuer sereinement la surveillance de son parc à distance.

## Garantir une meilleure continuité des soins

Les électrodes de FRED easy G2 sont compatibles avec tous les modèles récents de défibrillateurs ou moniteurs-défibrillateurs SCHILLER. En conservant les mêmes électrodes, la prise en charge des patients est optimisée sur toute la chaîne de soins.

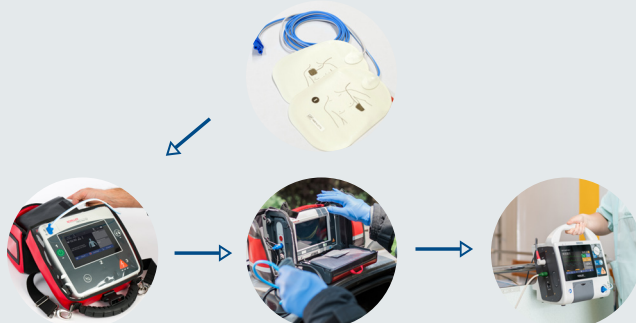





FRED easy G2 existe en mode semi-automatique (DSA) ou entièrement automatique (DEA).

## Mode pédiatrique

Le mode pédiatrique s'utilise avec les électrodes adultes, en appuyant simplement sur le bouton prévu à cet effet. Ce mode activé, un message sonore avertit que l'appareil est passé en «*mode enfant*».



L'utilisation d'électrodes pédiatriques ajuste automatiquement le fonctionnement du défibrillateur à la physiologie des enfants et des nourrissons.

## Aide à la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP)


Grâce à FreeCPR\* (activé de base), FRED easy G2 indique au secouriste comment ajuster la fréquence des compressions lors du massage cardiaque, sans aucun capteur additionnel : «*plus vite*» ; «*moins vite*».

FRED easy G2 est également disponible avec l'option ARGUS Lifepoint 2\*. Ce capteur réutilisable offre une aide à la RCP en temps réel sur la fréquence et la profondeur du massage cardiaque. L'écran indique s'il est correctement réalisé, s'il faut masser plus vite, moins vite, plus fort ou moins fort.

*\*Une seule aide à la RCP peut être activée sur FRED easy G2.*

## Gagner un temps précieux

FRED easy G2 lance l'analyse du rythme cardiaque pendant le massage. Ce temps d'analyse débute jusqu'à 8 secondes avant que le défibrillateur ne demande au secouriste d'arrêter le massage pour préparer le choc électrique. Ainsi, l'analyse effectuée pendant le massage permet une reprise beaucoup plus rapide du massage cardiaque.

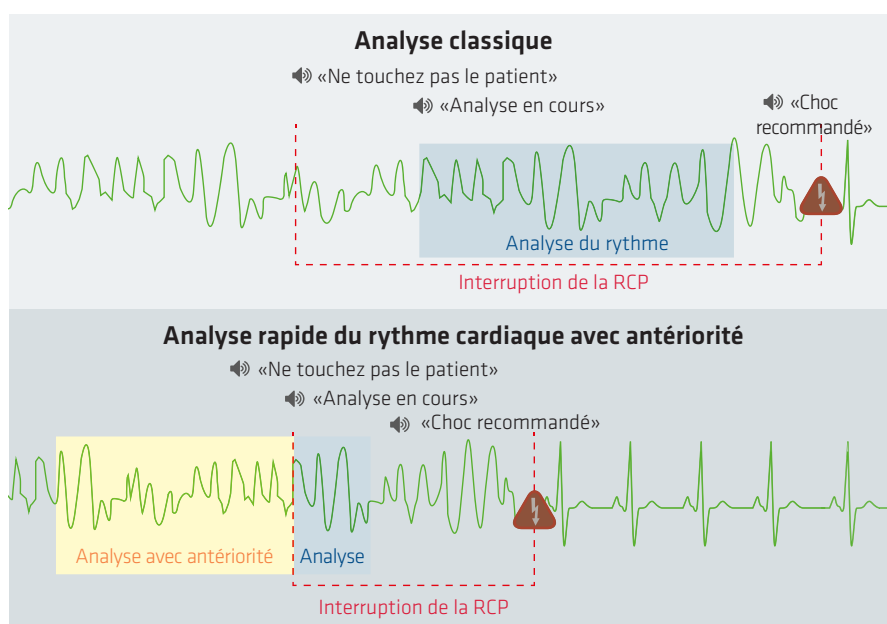

# FRED easy G2, un défibrillateur connecté



FRED easy G2 est un dispositif médical de classe III. De fait, entre deux maintenances, il convient d'effectuer sa surveillance avec la plus grande attention.

*\*Carte SIM non fournie.*

FRED easy G2 peut être connecté au WIFI ou au réseau GSM\* (4G) pour transmettre automatiquement les résultats des autotests hebdomadaires, le niveau de pile, la date de péremption des électrodes, la date de la prochaine maintenance, en cas d'utilisation médicale et les données d'intervention après utilisation sur patient.

De plus, FRED easy G2 Online permet de réaliser à distance :

- les mises à jour logicielles, en cas d'évolution des recommandations internationales

ou de mise à disposition de nouvelles fonctionnalités.

- les mises à jour de sa configuration: protocole de choc, choix des langues, etc.
- l'envoi d'une notification en cas d'événement.

La surveillance s'effectue via le logiciel LifeDataNet G2, où chaque défibrillateur est localisé sur une carte.

Le suivi est géré soit par le Service Client de SCHILLER France, soit directement par le client.

## Spécifications techniques



Défibrillation jusqu'à 200 joules en deux secondes



Autonomie 6 ans



Ajustement automatique de la luminosité en fonction des conditions d'ensoleillement



Électrodes munies d'un badge RFID : assure la traçabilité et informe de la date de remplacement



Autotests réguliers



Récupération des données après une intervention médicale



FRED easy G2 actionne son métronome et FreeCPR pour donner le rythme du massage cardiaque



Visualisation de l'emplacement de chaque appareil



Indication sur l'état de votre parc



Récupération des données médicales en PDF



Données sécurisées (serveur HDS)



WIFI\* (de base)



GSM - 4G\* (en option)

*\*Nécessite un abonnement au serveur LifeDataNet G2.*

### SCHILLER France

01 64 66 50 00

[contact@schillerfrance.fr](mailto:contact@schillerfrance.fr)

Boutique en ligne : [www.mediprostore.com](http://www.mediprostore.com)

Document et photos non contractuels. SCHILLER France 6 rue Raoul Follereau - 77600 Bussy-Saint-Georges. SAS au capital de 1.000.000 € - Siret 501 918 841 00013 - NAF 4646Z - RCS MEAUX. N° Identification TVA : FR24501918841. Document imprimé par OBR.

FRED easy G2 - défibrillateur à destination du grand public. Dispositif médical de Classe III - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE délivré par GMED (0459) - Fabriqué par SCHILLER Medical. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Produit non inscrit sur la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) au titre de l'article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale. 07/2023)

### Suivez SCHILLER France !

