



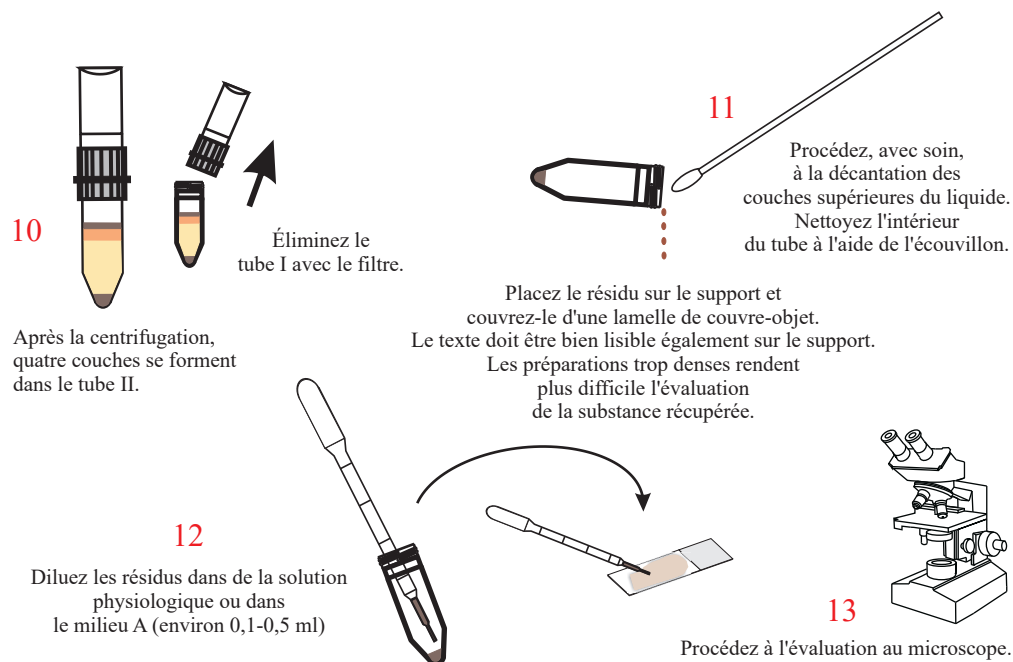

PROCESSUS DE SEDIMENTATION AVEC PARASITRAP AF-/SAF-/ECO-/BAILENGER-SYSTEM

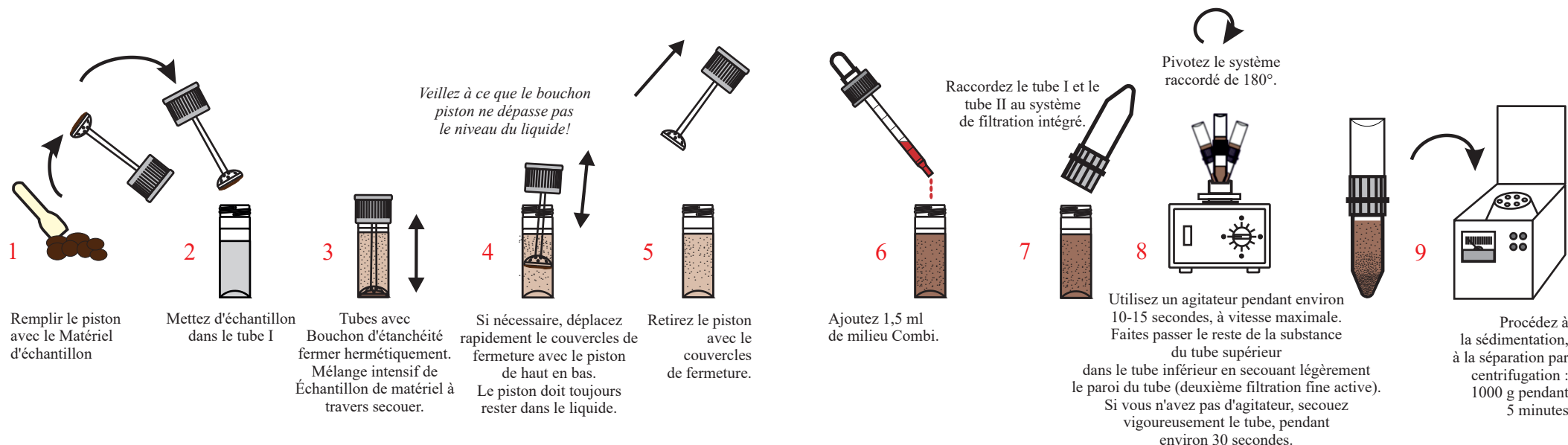

Informations générales

Procédez au traitement à l'aide de petites centrifugeuses et contrôle qualité

Avant la centrifugation, le filtre et le tube I doivent être éliminés et il faut utiliser le couvercle fourni au tube II. Les phases suivantes sont identiques à celles qui sont illustrées sur les figures n° 8 et 10 (voir ci-dessus).

- Un échantillon bien mélangé permet d'obtenir de meilleurs résultats.
- Utilisez des échantillons frais, chaque fois que c'est possible.
- L'analyse des différents morceaux d'échantillon ou des échantillons prélevés à de différentes dates peuvent permettre d'avoir un nombre plus élevé de parasites détectés
- L'analyse effectuée simultanément à la sédimentation peut améliorer les résultats obtenus lors du diagnostic.
- N'utilisez pas des lamelles de couvre-objet, dont les dimensions sont inférieures à 24 x 36 mm (recommandé jusqu'à des dimensions 24 x 60 mm). Le prélèvement d'échantillon doit être systématique et couvrir toute la zone.