




## ***ROUGE SIRIUS***

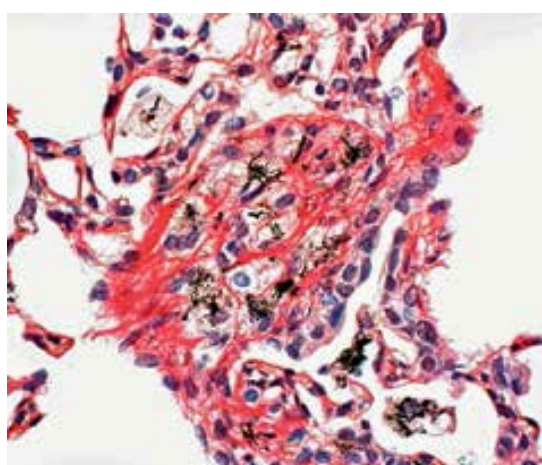

*Substance amyloïde*

CODE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE TEST
04-210923	Rouge Sirius	100 tests



Dispositif médical de diagnostic in vitro  
IVD **Classe A**, Règ. UE 2017/746  
UDI-DI: 08033976231491  
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A.

Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique.  
Méthode servant à mettre en évidence l'amyloïde dans des tissus fixés dans de la formaline et inclus en paraffine.

### MÉTHODE

- 1) Amener la coupe à l'eau distillée.
  - 2) Préparer la chambre humide et y placer la lame avec la coupe tournée vers le haut. Verser sur la coupe 10 gouttes de réactif A, fermer la chambre humide et incuber dans l'étuve à 60 °C. Laisser agir 60-90 minutes.
  - 3) Verser sur la coupe 10 gouttes de réactif B pendant 1 - 2 minutes.
  - 4) Égoutter la lame et verser sur la coupe 10 gouttes de réactif C ; laisser agir pendant 1 - 2 minutes.
  - 5) Verser sur la coupe 10 gouttes de réactif D. Laisser agir pendant 5 minutes.
  - 6) Faire virer dans de l'eau de source courante pendant 5 minutes.
- Déshydrater dans la série ascendante des alcools, xylène et baume.

### Caractéristiques techniques

Spécifications de la méthode	Temps de réalisation	1 heure 15 minutes	
	Équipement supplémentaire	Aucun	
	Résultats	Substance amyloïde :	Rose - rouge
		Noyaux :	Bleu
Réactifs	A) Rouge Sirius en solution	30 ml	
	B) Tampon de lavage en solution 1	30 ml	
	C) Tampon de lavage en solution 2	30 ml	
	D) Hémalum de Mayer	30 ml	
Conservation	Stockage	Conserver la préparation à température ambiante. Les récipients doivent être toujours bien fermés.	
	Température de stockage :	15-25°C	
	Stabilité	Une fois ouvert, le réactif est valable et réutilisable jusqu'à la date de péremption indiquée, pourvu qu'il ait été conservé correctement.	
	Validité	2 ans	
Avertissements et précautions	Classification du produit	Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de la santé. Le produit est classé comme dangereux. Lire attentivement les informations figurant sur l'étiquette (symboles de danger, phrases de risque et de sécurité) et toujours consulter la fiche de sécurité. Ne pas utiliser si le conditionnement primaire a été endommagé. En cas d'accident grave, il est recommandé d'informer immédiatement Bio-Optica Milano spa et les autorités compétentes.	
	Élimination	Déchet dangereux ; confier à des entreprises spécialisées et agréées, selon les lois en vigueur.	

REVISION N°	MOTIVATION	DATE DE PUBLICATION
001	Conformité au règlement 746 IVDR	08/03/2022