

Déchirer ou découper



FRANCE NEIR
Matériel Médical

BRUL'NEIR

PANSEMENT STÉRILE POUR BRÛLURES

20 cm x 20 cm

**REFROIDIT • APAISE • HYDRATE
SOULAGE LES BRÛLURES • NON ADHÉRENT**

CONTENU : Un pansement absorbant doux saturé de gel rafraîchissant pour brûlures

INSTRUCTIONS : déchirer l'emballage, sortir le pansement, appliquer immédiatement sur la région affectée et l'envelopper sans exercer de pression

AVERTISSEMENT : Pour usage externe. Si la condition pour laquelle ce produit est appliqué persiste pendant plus de 7 jours ou si l'irritation, la rougeur, l'enflure ou la douleur persiste, une éruption cutanée ou une infection se développe, cesser l'utilisation et consultez un médecin.



FRANCE NEIR
Matériel Médical

**20 cm x 20 cm
PANSEMENT STÉRILE
POUR BRÛLURES**

D ④ A GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Verpackung aufreißen und Verband entnehmen.
2. Verband unmittelbar auf die Brandwunde legen und bedarfsweise locker verbinden.
3. Den Arzt aufsuchen.

E ④ I INSTRUCCIONES DE EMPLOI:

1. Ouvrir le pack et retirer le pansement.
2. Appliquer le pansement immédiatement sur la brûlure et effectuer un bandage léger si nécessaire.
3. Consulter un médecin.

E INSTRUCCIONES DE USO:

1. Abra el paquete y retire el apósito
2. Aplique el apósito inmediatamente a la quemadura y aplique un vendaje liviano si fuera necesario.
3. Obtenga atención médica.

NL GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Trek de verpakking open en neem het kompres eruit.
2. Bedek de brandwond meteen met het kompres en verbind het losjes indien nodig.
3. Raadpleeg een arts.

Ingrédients :

Eau purifiée (79,3%), humectant, régulateur de viscosité, émulsifiant.

Ce produit est destiné aux premiers soins d'urgence en cas de brûlures avant de consulter un médecin si nécessaire.

Ce produit n'est pas conçu ni recommandé pour une utilisation prolongée.

Ce produit peut conduire l'électricité. En cas d'irritation, cesser l'utilisation.

Ne pas entreposer à des températures extrêmes.



Longbow First Aid Products Manufactory
2/F, Area C, Hantian Industrial Park, Guiping Road,
Guicheng Subdistrict, Nanhai District, 528200
Foshan City, Guangdong Province, China.



Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: 86(757)81220959

E-mail: sales@chinalongbow.com

Fax: 86(757)81019208

Website: www.chinalongbow.com



France NEIR
14, chemin des Margueritois, 59155 Fâches-Thumesnil
Tel : 0320535428 Fax : 0320529209
E-mail : accueil@franceneir.com Site : www.franceneir.com

Ne pas frotter le gel sur la zone affectée. Usage externe. Stopper en cas d'irritation.
Conserver en dessous de 25°C. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
Consulter un médecin en cas de brûlure grave ou si elle s'étend sur une grande zone.

STERILE R **CE** 0123

① ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Strappare e aprire la confezione e rimuovere la medicazione.
2. Applicare immediatamente la medicazione sulla scottatura e, se del caso, fasciare leggermente.
3. Rivolgersi ad un medico.

N BRUKSANVISNING:

1. Riv opp pakningen og ta ut bandasjen.
2. Legg straks bandasjen på skadeområdet og forbind lett om nødvendig.
3. Kontakt lege.

S BRUKSANVISNING:

1. Riv upp förpackningen och ta upp kompressen.
2. Lägg Kompressen rakt över brännskadan; sätt eventuellt på ett bandage som inte trycker.
3. Kontakta läkare.




Déchirer l'emballage et sortir la compresse



Appliquer immédiatement sur la brûlure



Si nécessaire, appliquer un léger bandage pour maintenir

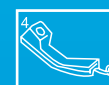

Consulter un médecin en cas de brûlure grave ou étendue.



Le gel est facilement rincé à l'eau si un traitement supplémentaire est nécessaire



MD REF 0811C

00222
811C V1

