

## FICHE TECHNIQUE

réf : 0812C



### I. CARACTERISTIQUES

Pansement stérile pour brûlures

#### Ingrédients :

Eau purifiée (79,3%), humectant, régulateur de viscosité, émulsifiant.

#### Mode d'emploi :

- Déchirer l'emballage et sortir la compresse.
- Appliquer immédiatement sur la brûlure.
- Si nécessaire, appliquer un léger bandage pour maintenir.
- Consulter un médecin en cas de brûlure grave ou étendue.
- Le gel est facilement rincé à l'eau si un traitement supplémentaire est nécessaire.

#### Précautions d'emploi :

Ce produit est destiné aux premiers soins d'urgence en cas de brûlures avant de consulter un médecin si nécessaire.  
Ce produit n'est pas conçu ni recommandé pour une utilisation prolongée.  
Ce produit peut conduire l'électricité. En cas d'irritation, cesser l'utilisation.  
Ne pas entreposer à des températures extrêmes.  
Ne pas frotter le gel sur la zone affectée. Usage externe. Stopper en cas d'irritation.  
Conserver en dessous de 25°C. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.  
Consulter un médecin en cas de brûlure grave ou si elle s'étend sur une grande zone.

#### Avertissement :

Pour usage externe. Si la condition pour laquelle ce produit est appliqué persiste plus de 7 jours ou si l'irritation, la rougeur, l'enflure ou la douleur persiste, ou une éruption cutanée ou une infection se développe, cesser l'utilisation et consulter un médecin.

### II. DIMENSIONS

Longueur : 60 cm. Largeur : 40 cm.

### III. CONDITIONNEMENT

À l'unité

### IV. DÉSIGNATION

Compresse Brul'Neir stérile.

