

Déchirer ou découper



FRANCE NEIR
Matériel Médical

BRUL'NEIR

PANSEMENT STÉRILE POUR BRÛLURES

40 cm x 60 cm

**REFROIDIT • APAISE • HYDRATE
SOULAGE LES BRÛLURES • NON ADHÉRENT**

CONTENU : Un pansement absorbant doux saturé de gel rafraîchissant pour brûlures

INSTRUCTIONS : déchirer l'emballage, sortir le pansement, appliquer immédiatement sur la région affectée et l'envelopper sans exercer de pression

AVERTISSEMENT : Pour usage externe. Si la condition pour laquelle ce produit est appliqué persiste pendant plus de 7 jours ou si l'irritation, la rougeur, l'enflure ou la douleur persiste, une éruption cutanée ou une infection se développe, cesser l'utilisation et consultez un médecin.



FRANCE NEIR
Matériel Médical

**40 cm x 60 cm
PANSEMENT STÉRILE
POUR BRÛLURES**

D ④ A GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Verpackung aufreißen und Verband entnehmen.
2. Verband unmittelbar auf die Brandwunde legen und bedarfsweise locker verbinden.
3. Den Arzt aufsuchen.

E ④ I INSTRUCCIONES DE EMPLO:

1. Ouvrir le pack et retirer le pansement.
2. Appliquer le pansement immédiatement sur la brûlure et effectuer un bandage léger si nécessaire.
3. Consulter un médecin.

E INSTRUCCIONES DE USO:

1. Abra el paquete y retire el apósito
2. Aplique el apósito inmediatamente a la quemadura y aplique un vendaje liviano si fuera necesario.
3. Obtenga atención médica.

NL GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Trek de verpakking open en neem het kompres eruit.
2. Bedek de brandwond meteen met het kompres en verbind het losjes indien nodig.
3. Raadpleeg een arts.

Ingrédients :

Eau purifiée (79,3%), humectant, régulateur de viscosité, émulsifiant.

Ce produit est destiné aux premiers soins d'urgence en cas de brûlures avant de consulter un médecin si nécessaire.

Ce produit n'est pas conçu ni recommandé pour une utilisation prolongée.

Ce produit peut conduire l'électricité. En cas d'irritation, cesser l'utilisation.

Ne pas entreposer à des températures extrêmes.



Longbow First Aid Products Manufactory
2/F, Area C, Hantian Industrial Park, Guiping Road,
Guicheng Subdistrict, Nanhai District, 528200
Foshan City, Guangdong Province, China.



Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: 86(757)81220959

E-mail: sales@chinalongbow.com

Fax: 86(757)81019208

Website: www.chinalongbow.com



France NEIR
14, chemin des Margueritois, 59155 Fâches-Thumesnil
Tel : 0320535428 Fax : 0320529209
E-mail : accueil@franceneir.com Site : www.franceneir.com

Ne pas frotter le gel sur la zone affectée. Usage externe. Stopper en cas d'irritation.
Conserver en dessous de 25°C. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
Consulter un médecin en cas de brûlure grave ou si elle s'étend sur une grande zone.

STERILE R **CE** 0123




Déchirer
l'emballage et
sortir la compresse



Appliquer
immédiatement
sur la brûlure



Si nécessaire,
appliquer un
léger bandage
pour maintenir

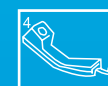

Consulter un
médecin en cas
de brûlure grave
ou étendue.



Le gel est facilement
rincé à l'eau si un
traitement
supplémentaire
est nécessaire



MD **REF**