

FICHE TECHNIQUE

réf : 739879C



I. CARACTERISTIQUES

Sac vomitoire

Présentation :

Le sac vomitoire absorbant est idéal pour les interventions d'urgence (pompiers, SAMU, ambulance...), et lors de tout transport : sanitaire, scolaire, voyage. Il est adapté à l'adulte et à l'enfant.

Mode d'emploi :

1. Ouvrir le pack et extraire un sac
2. Déplier le sac
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Tenir le sac avec les mains
5. Vomir dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.

Précautions d'emploi :

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants

Composition :

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

Efficacité :

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

Avantages :

Particulièrement recommandé pour les services d'oncologie, de dialyse, la salle de réveil postopératoire ainsi que tous les services d'urgence tels que les SAMU, pompiers, ambulances.
Remplace avantageusement le « haricot » ou le sac papier.
Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

Identification :



14, chemin des Margueritois
CS 90 119 - 59155 FÂCHES-THUMESNIL
Tél. : 03 20 53 54 28 - Fax : 03 20 52 92 09

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).

Conformité :

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.
Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

Dangers/sécurité :

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.
Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.
A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

Elimination :

Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle.
Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).

II. DIMENSIONS

Sac : Longueur : 25 cm, Largeur : 25 cm
Tampon : Longueur : 24 cm, Largeur : 13 cm

III. CONDITIONNEMENT

Sachet de 20 sacs.

IV. DÉSIGNATION

Sac vomitoire.

