

FICHE TECHNIQUE

réf : 71151P



I. CARACTERISTIQUES

Protège bassin lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 500 ml saline 0.9%, équivalence fluides biologiques), destiné au recueil des excréta

Composition :

Sac : PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus.
Tampon super-absorbant : Support à base de cellulose et de polyacrylate de sodium,

Mode d'emploi :

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protège-bassins.
2. Dérouler le 1er protège-bassin et tirer en séparant le long des marques de perforation.
3. Ouvrir le sac et le positionner sur le bassin.
4. Le tampon doit être au fond du protège-bassin.
5. Utiliser le bassin garni du protège-bassin.
6. Attendre que le contenu (± 500 ml max) soit transformé en gel.
7. Fermer le sac avec un noeud.

Élimination :

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

Précaution d'emploi :

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants.

Réglementaire :

Conformité : Marquage CE - Conforme à la Règlementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur.
Identification : Chaque produit est identifié par un numéro de lot.
Sécurité : Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

II. DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions utiles sac : 56 x 38 cm, 32 µm.
Dimensions tampon absorbant : 24 x 13 cm.

III. CONDITIONNEMENT

Boîte de 20

IV. DÉSIGNATION

Protège bassin lit.

