

## FICHE TECHNIQUE

réf : 739939C



### I. CARACTERISTIQUES

Urinal masculin

#### Présentation :

L'urinal masculin s'utilise en remplacement de l'urinal plastique, il évite son nettoyage tout en permettant la diurèse et les analyses. Il est optimal en cas de difficulté d'accès aux toilettes : travailleurs isolés (routiers, grutiers...), personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, MAD...).  
Egalement recommandé à l'hôpital : aux urgences, patients en isolement...

#### Mode d'emploi :

1. Ouvrir le pack et en extraire un sac
2. Déplier le sac
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Tenir le sac avec les mains
5. Faire les besoins dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.

#### Précautions d'emploi :

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants

#### Composition :

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

#### Efficacité :

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

#### Bénéfices :

Recommandé en collectivité, chez les urgentistes (Samu, pompiers, services d'urgence, ambulances), pour toute personne en manque d'autonomie.  
Remplace l'urinal plastique ou « pistolet ».  
Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

Soins  
Instrumentation



Diagnostic



Urgences  
Secours  
Formation secourisme



Protection  
Hygiène  
Mobilité  
Confort au travail



14, chemin des Margueritois  
CS 90 119 - 59155 FÂCHES-THUMESNIL  
Tél. : 03 20 53 54 28 - Fax : 03 20 52 92 09

**Identification :**

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).

**Conformité :**

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.

Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

**Dangers/sécurité :**

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.

A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

**Elimination :**

Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle.

Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).

**II. DIMENSIONS**

Sac : Longueur : 38 cm, Largeur : 16 cm

Tampon : Longueur : 24 cm, Largeur : 13 cm

**III. CONDITIONNEMENT**

Sachet de 20 sacs.

**IV. DÉSIGNATION**

Sac urinal masculin.

