

FICHE TECHNIQUE

réf : 1882P-C25

I. CARACTERISTIQUES

Poche de froid instantané EUROGLAS®

Catégorie et classe du produit :

Dispositif médical de classe IIa,
répondant à la règle 9 de la Directive Européenne 93/42 consolidée.
Année d'obtention du marquage CE : Fev 2004. N° Organisme Notifié : 0546
Production sous-traitée par DISPOTECH Ltd



Indications :

Dispositif de froid instantané à usage externe.
Le dispositif peut être utilisé pour atténuer une douleur, une crampe, une foulure, une migraine, une brûlure du premier degré, etc.
Il peut également contribuer à la conservation d'un membre sectionné ou d'un produit thermosensible à condition d'ajuster le nombre de poches aux proportions du produit à conserver et d'envelopper le tout dans un emballage isotherme.

Principe de fonctionnement :

Production de froid par une réaction chimique endothermique. Le froid commence à se faire sentir dès l'éclatement, par une pression manuelle, de la poche de liquide interne.
Il atteindra - 5° après quelques secondes pour revenir à 0° aux environs de 30 minutes.

Composition :

Une poche externe avec le mode et les précautions d'emploi.
En interne : une poche de liquide et d'un mélange de sels azotés
(Urée CAS 57-13-6 et Chlorure d'ammonium Cas 12125-02-9)

Mode d'emploi :

Presser fortement le sachet externe jusqu'à éclatement de la poche interne de liquide.
Agiter le tout pendant 10 secondes pour amorcer la réaction endothermique.
Si utilisation pour soulager une douleur : appliquer le dispositif sur la zone à traiter, fixer l'ensemble à l'aide d'une bande élastique ou d'une maille extensible

Précautions et recommandations :

Usage externe, Dispositif à usage unique, Ne pas percer la poche, En cas de rupture de la poche, éviter le contact du liquide avec les yeux ou les muqueuses, si contact accidentel, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas ingérer, Ne pas laisser à la portée des enfants,

Toxicité :

Voir FDS correspondante
Produit légèrement irritant sur les muqueuses.
En cas de réaction cutanée rincer abondamment la zone sensible à l'eau claire.



14, chemin des Margueritois
CS 90 119 - 59155 FÂCHES-THUMESNIL
Tél. : 03 20 53 54 28 - Fax : 03 20 52 92 09

FICHE TECHNIQUE

Validité du produit :
5 ans

Conditions de stockage :
A conserver dans une température ambiante comprise entre 10 et 30°C.
En dessous de 0°, risque de gel de la poche liquide.
Au dessus de 35° C, risque d'évaporation du liquide de la poche.
Pour conserver le produit dans des températures extrêmes,
utiliser de préférence, un contenant isotherme.

Avertir :
En cas de réaction cutanée persistante,
prévenir un médecin et informer le service qualité du Laboratoire France-Neir
En cas d'ingestion accidentelle ou volontaire prévenir les centres anti-poisons.

II. DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale : 18 cm. Largeur totale : 14 cm.

III. CONDITIONNEMENT

Carton de 25.

IV. DÉSIGNATION

Poche de froid euroglas

Document validé par le pilote processus et le Responsable Qualité le 04/07/2012



accueil@franceneir.fr - www.franceneir.com

SAS France NEIR au capital de 332 640€ - SIRET 78826433100042 - RC 788264331B - TVA Intra FR32788264331 NAF 4646Z