

FICHE TECHNIQUE

réf : 5010H



I. CARACTÉRISTIQUES :

Coussin hémostatique HEMOPLAIE®

Catégorie et classe du produit :

Dispositif médical de classe I

Selon la règle 4 de l'annexe VIII du règlement du dispositif médical RDM 2017-745

Année d'obtention du marquage CE :

2012

N° Organisme Notifié :

Auto certification

Indications :

Principale :

Kit de pansement compressif à utiliser pour une plaie hémorragique en substitution de la compression manuelle selon les recommandations en vigueur. Elle n'est mise en place que sur les membres (supérieurs et inférieurs).

Secondaire :

La bande extensible seule peut être utilisée en cas de morsure de vipère pour limiter la diffusion du venin.

Composition :

Kit pansement composée de :

Un bloc tampon absorbant / mousse indépendant permettant son positionnement quelle que soit l'orientation de la plaie à couvrir,

Une bande élastique large de 10 cm et de 1.40 m de longueur

Une paire de gants à usage unique

Une étiquette de traçabilité

Soins
Instrumentation



Diagnostic



Urgences
Secours
Formation secourisme



Protection
Hygiène
Mobiliier
Confort au travail



FICHE TECHNIQUE

Mode d'emploi :

Mettre les gants de protection,
Déchirer l'emballage et prendre le bloc tampon-compresse,
Substituer le plus rapidement possible la compression manuelle par le tampon en appuyant fortement,
Positionner la bande, côté velours sur le velcro du tampon et l'enrouler autour du membre en veillant à ce que les tours successifs recouvrent toute la surface du tampon puis fixer la bande sur elle-même,
Vérifier l'arrêt de l'hémorragie, renseigner l'étiquette (date et heure de pose) et la fixer à la bande.

Précautions et recommandations :

Dispositif à usage unique, ne pas utiliser si le sachet d'emballage est ouvert ou endommagé,
Afin d'éviter une éventuelle contamination voire une exposition au sang, se préserver avec des gants.
Lorsque cela est possible, vérifier régulièrement le pouls en aval du pansement afin d'éviter un effet de garrot.
Une fois positionné et stabilisé sur la blessure, ne jamais desserrer brutalement et totalement la bande élastique.
Déchet de soin, à éliminer suivant les consignes DASRI en vigueur.

Validité du produit :

Conservation 5 ans dans un emballage intact.

Conditions de stockage :

Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Avertir :

Renseigner une fiche de traçabilité sur l'heure de pose du pansement compressif.

II. DIMENSIONS

Tampon absorbant non-tissé : 25 x 10 x 0,8 cm
Bloc de mousse : 15 x 10 x 3 cm
Bande élastique : 140 x 10 cm

III. CONDITIONNEMENT

À l'unité

IV. DÉSIGNATION

Coussin hémostatique Hémoplaie®

