

# MEDSPRAY

## Stericid

### Détergent Désinfectant.

**Solution nettoyante et désinfectante sans parfum, étudiée pour les surfaces non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public, et les dispositifs médicaux non critiques, dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement.**



#### Formule

Formule sans alcool et sans parfum.

Substance active : Didecyldimethylammonium chloride (n° CAS : 71 73-51-5) : 0.29% m/m.

Contient moins de 5% d'agents de surfaces non-ioniques.



#### Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté (sauf \*), 5 minutes, 20°C

- BACTERICIDE : EN1276\*, EN13727, EN13697, EN16115.
- LEVURICIDE : EN1650\*, EN13624, 13697, EN16615.
- Virucide EN14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV (HBV), BVDV (HCV), Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus,
- Virucide EN16777 sur Adenovirus, Norovirus, Vaccinia.



#### Précautions d'emploi

Produit biocide TP2.

Aucun pictogramme de danger.

Se laver soigneusement les mains après utilisation.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Stocker à l'abri du gel et ne pas dépasser 40°C.

Eviter le rejet dans

l'environnement(sachet/capot/étiquette) : jeter dans la poubelle de tri.



#### Conditionnement

**REF : MEDSPRAY**

Spray 750ml.

Carton de 6 sprays.

Palette de 100 cartons



#### Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface. Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m<sup>2</sup> soit 22 pulvérisations). Laisser agir 5 minutes.

Ne pas rincer. Produit destiné aux professionnels.

Produit fabriqué en France.