

SERIE 400

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 440 CF 4 RP VINTAGE




UTAC
GROUPE UTAC CERAM

CONFORME À LA NORME NF EN 1865-1
TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789
§4.5.9: P.V. N°14/03604

Photo non contractuelle




NOMENCLATURE

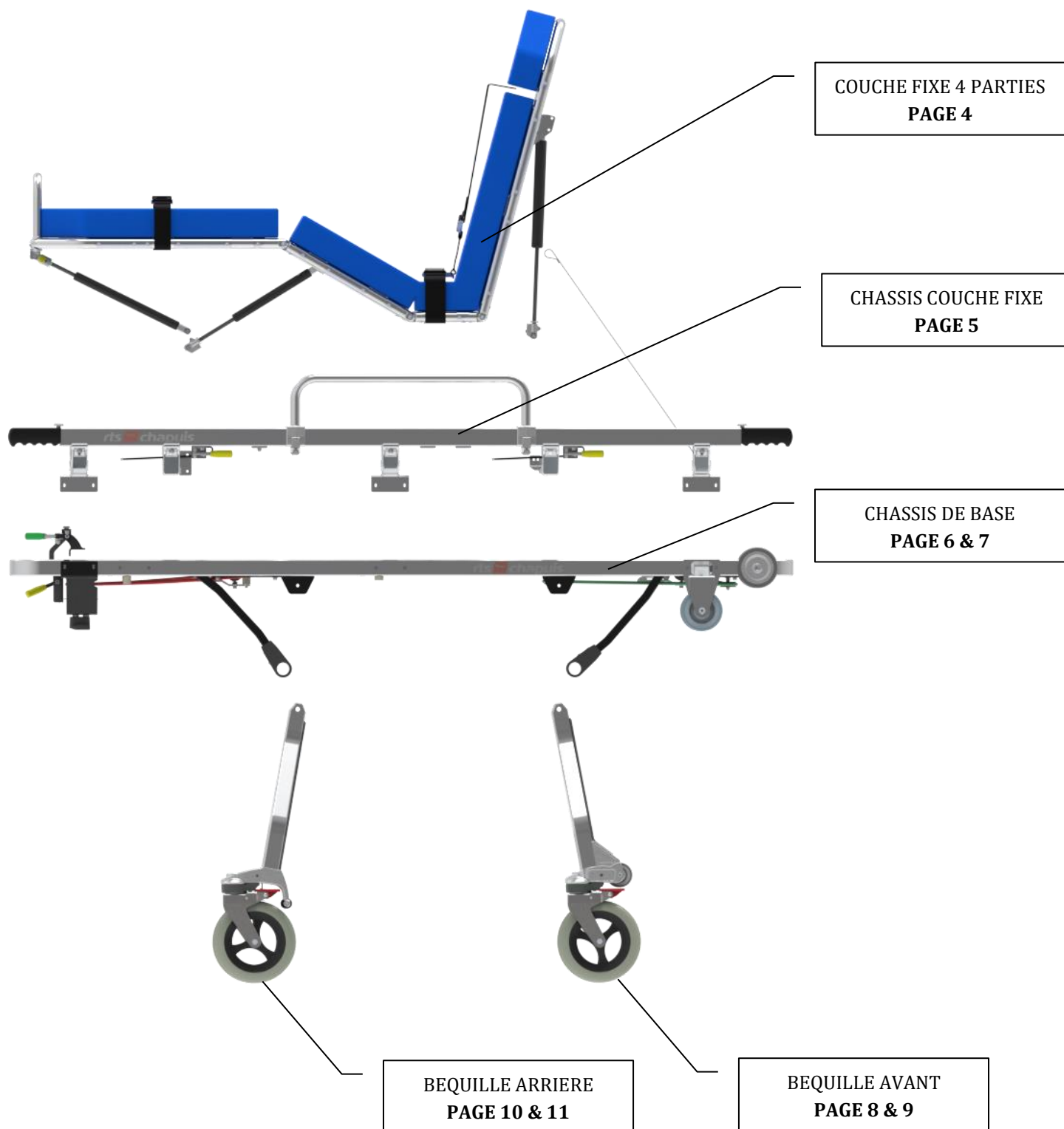


NOMENCLATURE COUCHE 4 PARTIES

REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION
1	S23.217	Matelas éco 5 parties étanché bleu
2	D05.071	Plan dur d'Appui tête
3	S12.010	Vérin de dossier + déclencheur
4	D05.072	Plan dur de Dossier
5	S20.053	Cadre de couche 4 parties
6	D05.073	Plan dur d'Assise
7	D05.074	Plan dur de Relevé de Jambes
8	S12.011	Vérin relevé de jambes + déclencheur
9	D05.005	Plan dur de Relevé de pieds
10	S12.007	Vérin relevé de pieds + commande
11	S10.001	Barrière de Pieds
12	S24.006	Sangle 10 g
13	S24.007	Harnais de maintien 10G

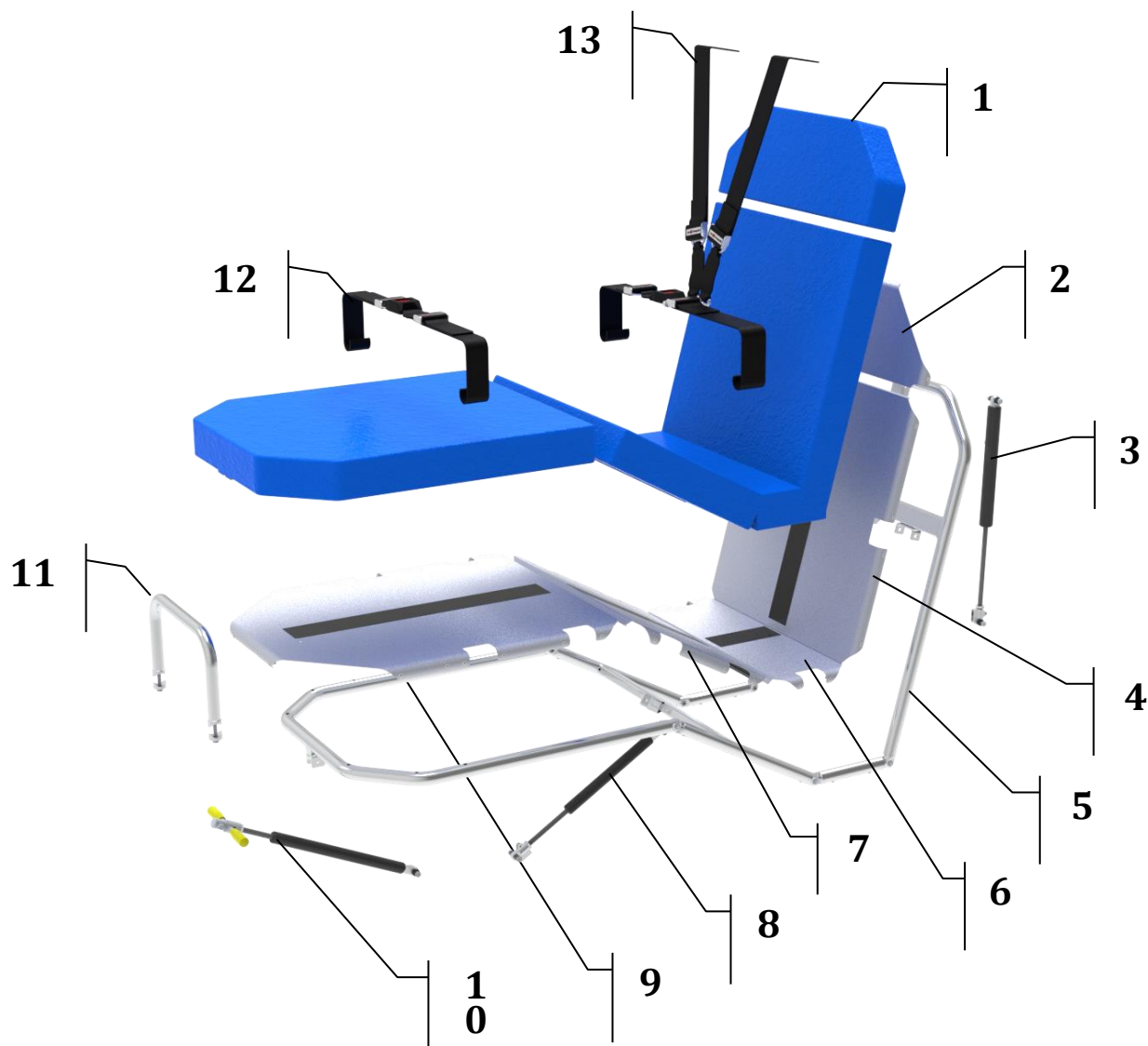


NOMENCLATURE CHASSIS COUCHE FIXE

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
14	S10.025	Barrière latérale horizontale hauteur 160
15	S24.021	Sangle dossier 420 vintage
16	S09.002	Poignée télescopique
17	S04.028	Traverse monobloc
18	S04.005	Traverse Vérin avant châssis
19	S18.001	Bride d'appui
20	S04.009	Traverse arrière couche articulée
21	S13.011	Commande de vérin
22	D02.002	Longeron de châssis

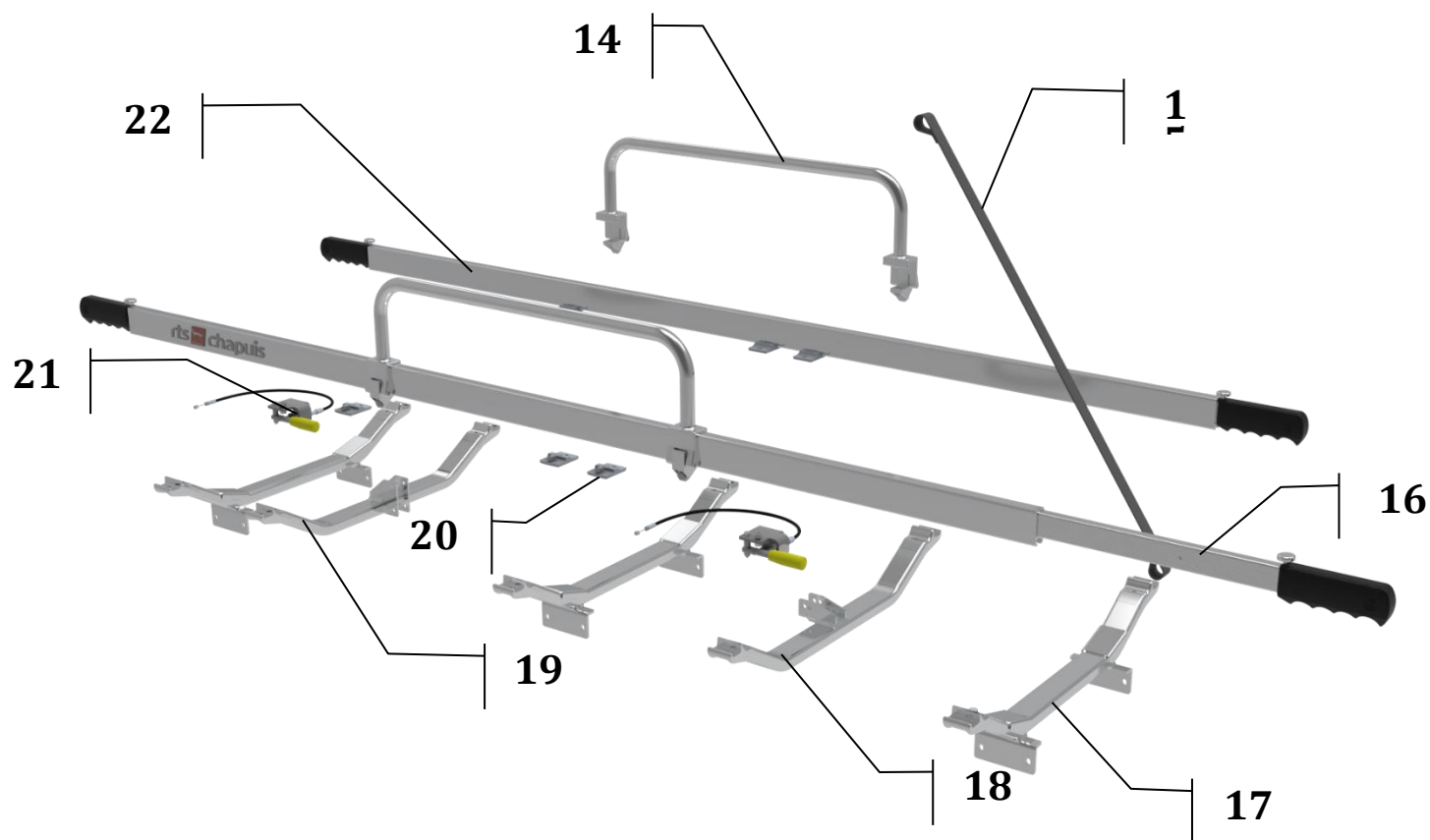

NOMENCLATURE CHASSIS DE BASE



REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION
23	S25.056	Plaque de protection arrière de châssis "400"
24	S25.055	Plaque de protection arrière de châssis "400"
25	D02.007	Rail de guidage
26	S13.033	Commande position intermédiaire avant
27	D09.004	Roue de chargement Ø 100 (moyeu lisse)
28	S16.022	Support roue de chargement monté
29	D09.086	Roue de chargement Ø 100 (moyeu a roulement)
30	D09.246	Sandow avant "Vert"
31	S11.045	Tirant relie
32	D07.069	Articulation
33	D06.117	Collier inox
34	D09.111	Sandow Arrière "Rouge"
35	D07.059	Té de verrouillage
36	D05.100	Support de Té série 400
37	S11.021	Tirant arrière
38	S13.030	Commande arrière de position intermédiaire (Complète)
39	S16.029	Support commande position intermédiaire arrière
40	S05.005	Châssis poutre "400" complet
41	S25.089	Ensemble manette de commande "400" (Complet)
42	D05.099	Butée en z Lg 170
43	S16.034	Chariot support tirant arrière
44	S16.032	Chariot support de béquille arrière
45	S16.035	Chariot support tirant avant
46	D05.098	Butée en z Lg 150
47	S16.033	Chariot support de béquille avant
48	S16.037	Patin de guidage
49	S11.020	Tirant avant

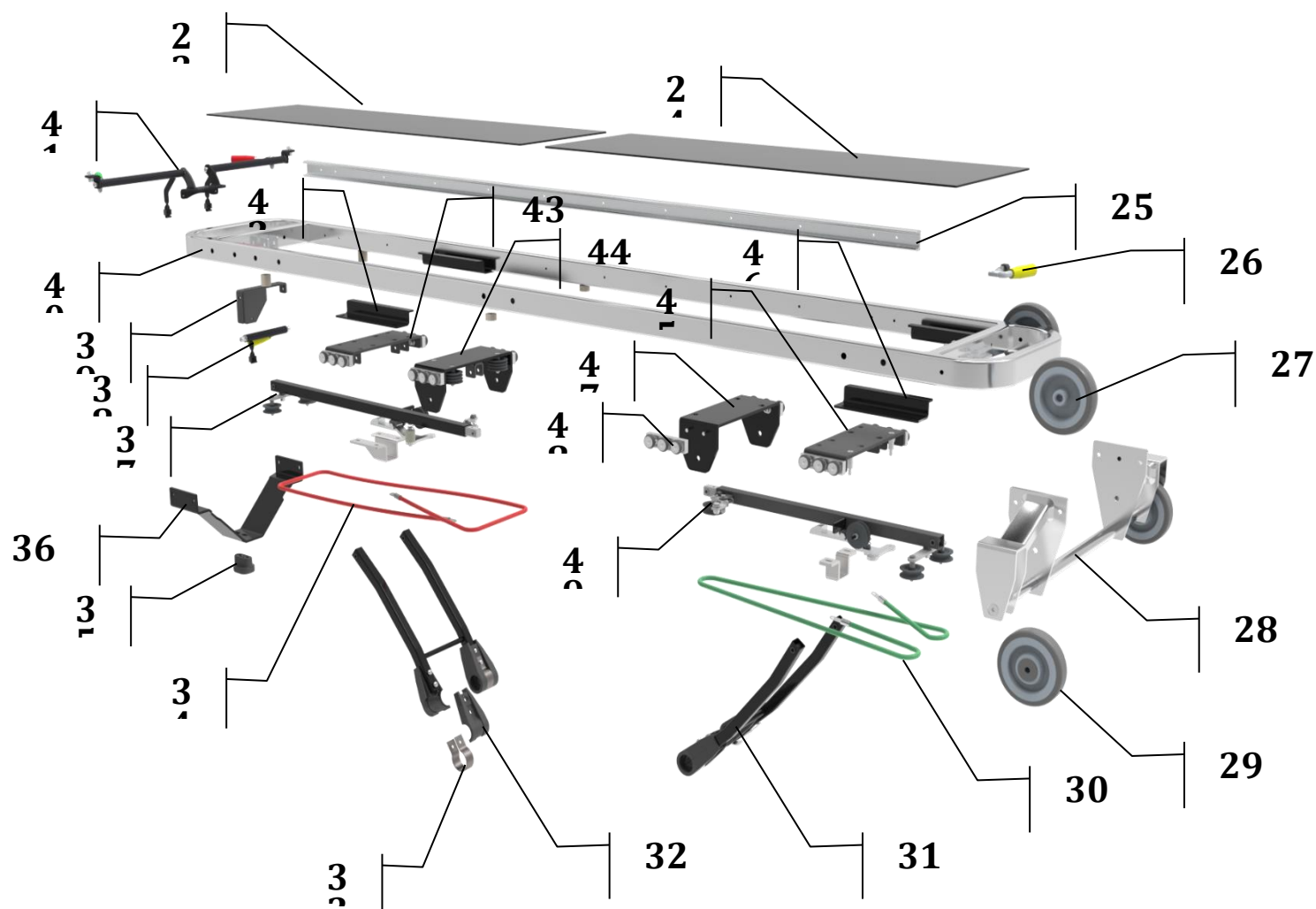

NOMENCLATURE BEQUILLE PIVOTANTE AVANT

REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION
50	D09.094	Pallier a collerette articulation béquille
51	S08.065	Béquille avant pivotante H55 (sans les roues)
52	D07.094	Baguette béquille pivotante avant H55
53	D06.082	Tringle blocage directionnel
54	D09.220	Roue Ø 60
55	D09.141	Roue mousse Ø 200
56	D08.181	Vis chc M12 X 45
57	D05.116	Equerre butée de tringle
58	D09.027	Butée antivibratoire
59	D06.133	Ressort verrouillage roue pivotante
60	D06.132	Axe de verrouillage roue pivotante
61	D01.022	Douille en Té
62	D09.003	Chape pivotante a blocage
63	D07.075	Cage plastique
64	D09.190	Joint vert cage de roue
65	D06.187	Insert cage de roue


BEQUILLE PIVOTANTE AVANT

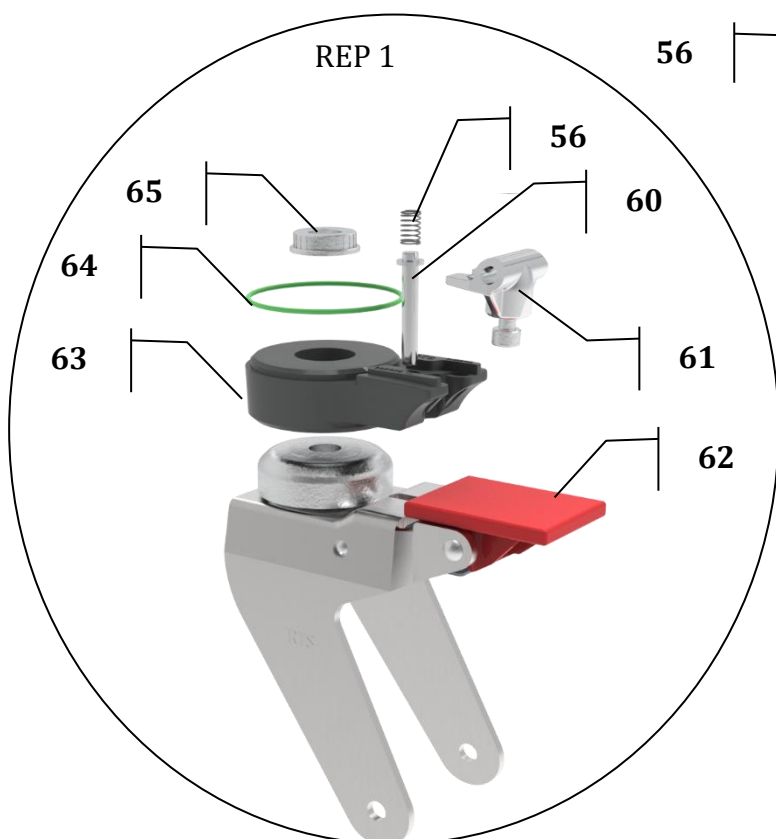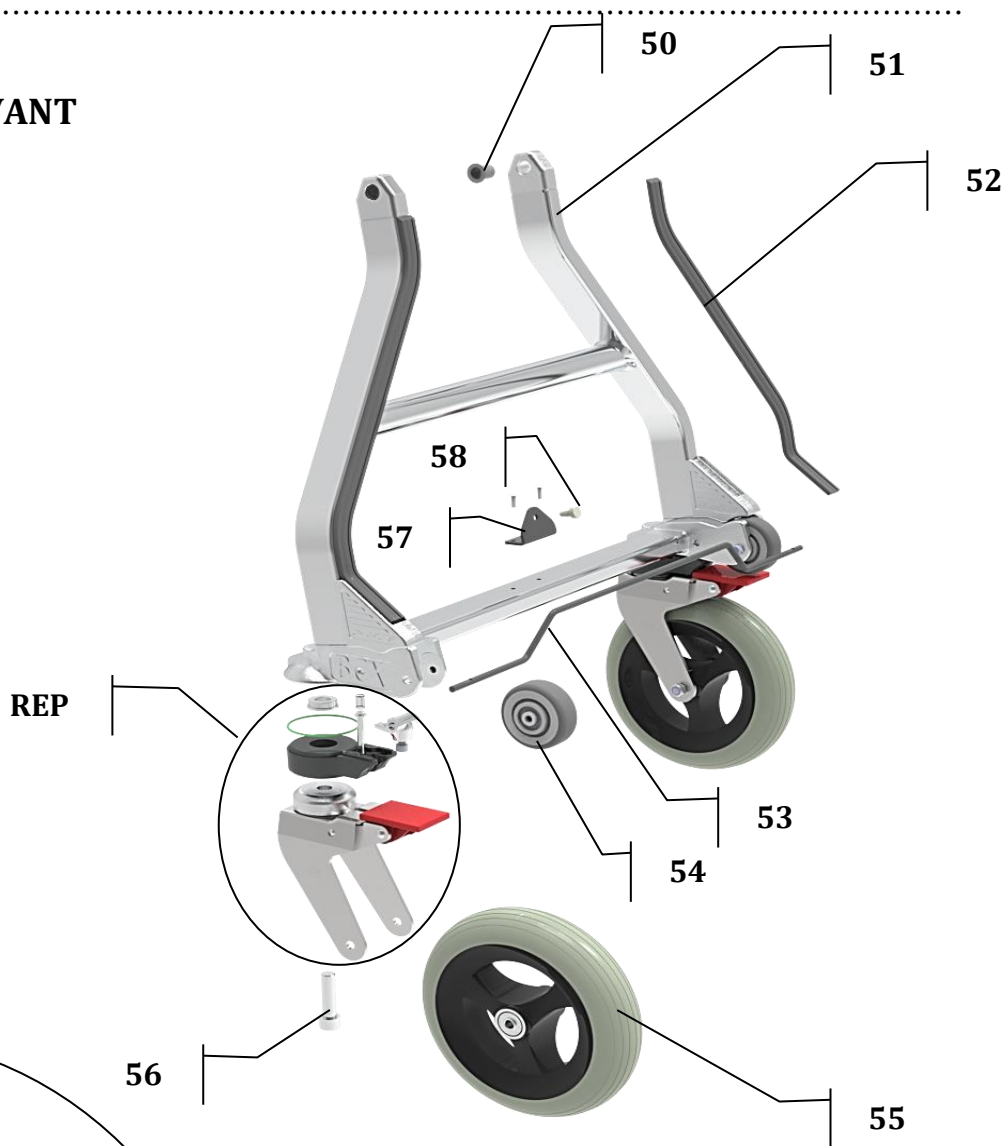


NOMENCLATURE BEQUILLE PIVOTANTE ARRIERE

[illegible]

BEQUILLE PIVOTANTE ARRIERE

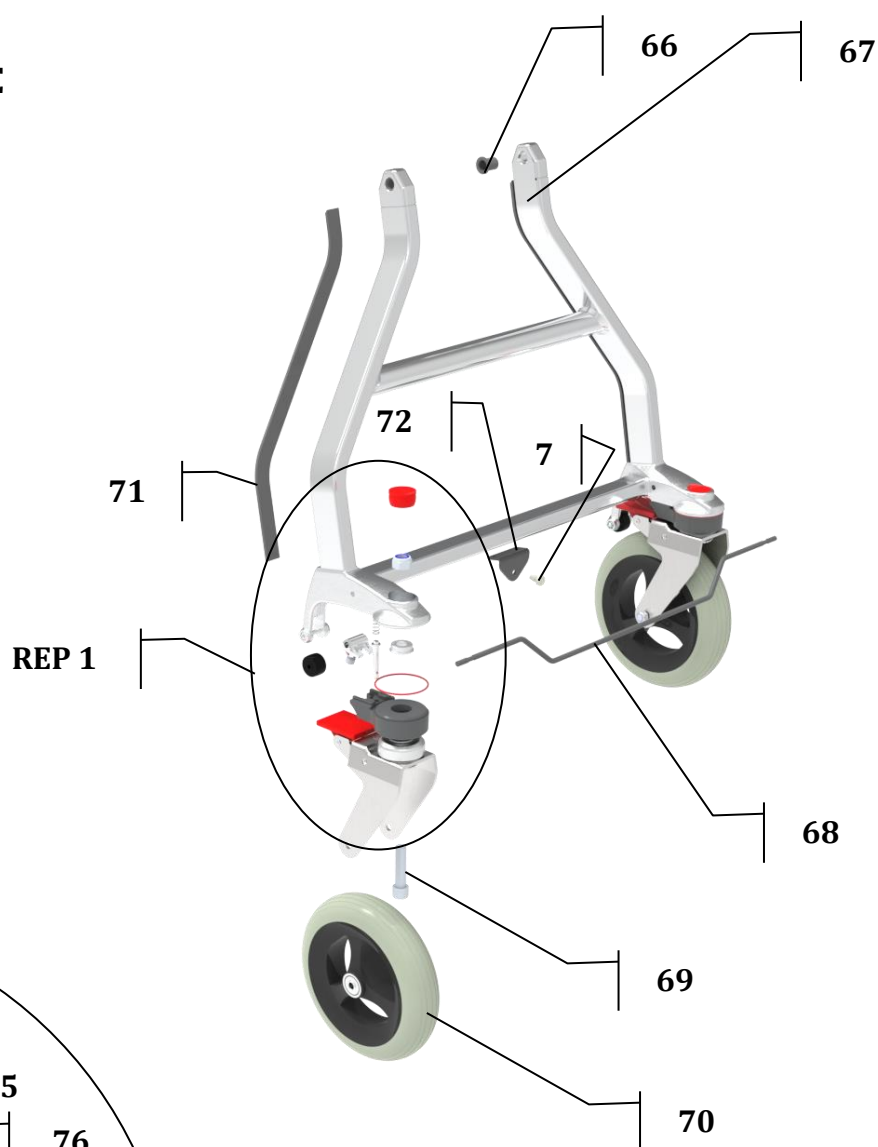

OPTIONS DISPONIBLE

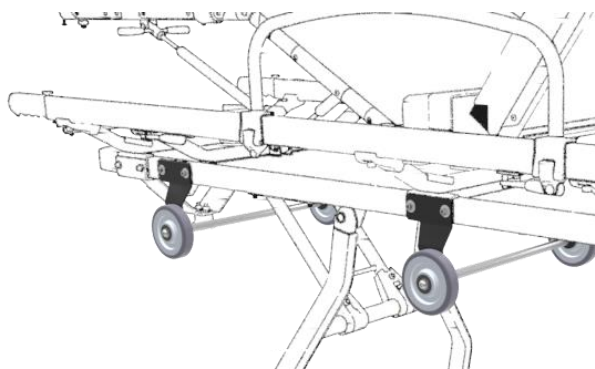

Kit de reprise de charge
central et/ou arrière
S25.082



Manette de commande de vérin sur
le dossier
S13.048



Double manettes de commande pour
vérin de dossier
S12.010 & S13.011


ACCESSOIRES




Tablette support cardio 4 appuis
S25.019
+Option sangle de maintien 10G
S24.015



Caisson de rangement série 400
D05.174

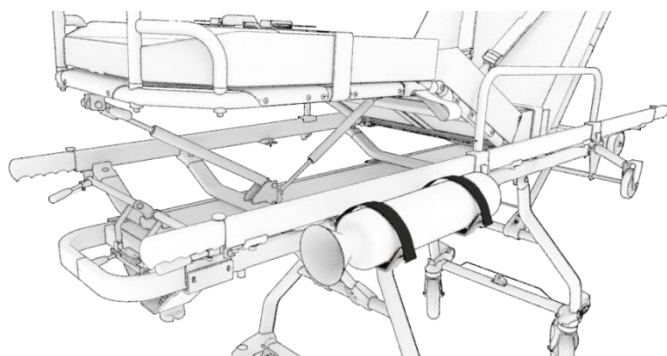

Porte bouteille d'Oxygène
S25.005

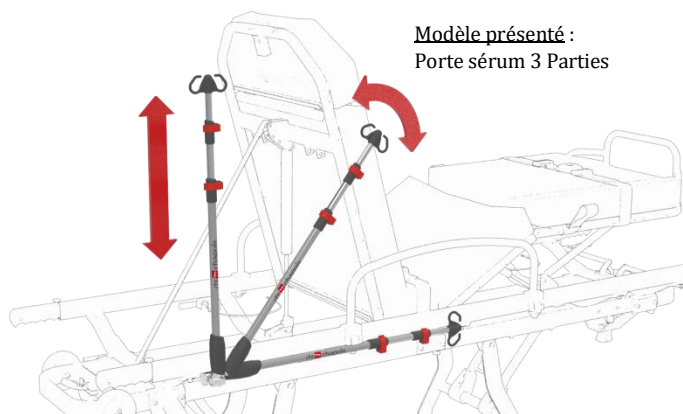

Modèle présenté :
Porte sérum 3 Parties

Porte sérum repliable 2 ou 3 parties

Modèle présenté :
Porte sérum 3 Parties



Porte sérum télescopique 2 ou 3 parties



Etau de porte sérum standard
S25.003

CONTACTS

- RTS CHAPUIS 2 rue des frères Lumière 69720 Saint Bonnet de Mure
- Tel 04 72 48 81 82
- Mail Secrétariat accueil@rtschapuis.com
- Mail SAV sav@rtschapuis.com

Horaires d'ouverture

- Lundi de 8h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00
- Mardi de 8h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00
- Mercredi de 8h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00
- Jeudi de 8h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00
- Vendredi de 8h00 à 12h30 de 13h30 à 16h00