

### Lot de 10 brassards adulte large (35x46cm) - Simple tube - Connecteur BP12



Code article	77701285
Réutilisable	OUI
Type de patient	Adulte large 35 x 46cm
Tubulure	Simple
Chambre	SANS
Connecteur	BP12
Longueur du tube	50cm
Matériau	Nylon doux + TPU

Unité de conditionnement	1 lot de 10 unités
Sans latex	OUI

Compatibilité	Connecteur spécial moniteurs DRAGER, GE, WELCH ALLYN, MINDRAY, PHILIPS .....
---------------	--

Nettoyage et désinfection	<p>Les brassards doivent être soigneusement nettoyés avec du détergent spécifié avant d'être réutilisés. Il faut veiller à éviter toute infiltration de liquide dans la tubulure du brassard, les ouvertures du tuyau d'air et les vannes du système de surveillances automatiques ou manuelles.</p> <p><b>MATERIAUX A UTILISER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Détergent enzymatique tel que ENZOL (USA) ou CIDEZYME (UK)</li> <li>. Eau distillée</li> <li>. Solution d'Eau de Javel à 10% dans de l'eau distillée</li> <li>Chiffon doux et brosse à poils doux</li> <li>Flacon pulvérisateur</li> </ul> <p><b>PROCEDURE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Préparer le détergent enzymatique (ou son équivalent) et une solution de blanchiment à 10% dans des flacons pulvérisateurs</li> <li>. Pulvériser le détergent sur les produits. Si le matériau est séché, laisser reposer pendant 1 minute</li> <li>. Essuyer la surface avec un chiffon doux</li> <li>. Utiliser une brosse à poils doux sur les zones sales et les surfaces irrégulières</li> </ul>
---------------------------	--