

Lot de 10 brassards enfant (9x14cm) - Simple tube - Connecteur BP12



Code article	77701289
Réutilisable	OUI
Type de patient	Enfant 9 x 14cm
Tubulure	Simple
Chambre	SANS
Connecteur	BP12
Longueur du tube	50cm
Matériau	Nylon doux + TPU

Unité de conditionnement	1 lot de 10 unités
Sans latex	OUI

Compatibilité	Connecteur spécial moniteurs DRAGER, GE, WELCH ALLYN, MINDRAY, PHILIPS
----------------------	--

Nettoyage et désinfection	<p>Les brassards doivent être soigneusement nettoyés avec du détergent spécifié avant d'être réutilisés. Il faut veiller à éviter toute infiltration de liquide dans la tubulure du brassard, les ouvertures du tuyau d'air et les vannes du système de surveillances automatiques ou manuelles.</p> <p>MATERIAUX A UTILISER :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Détergent enzymatique tel que ENZOL (USA) ou CIDEZYME (UK) . Eau distillée . Solution d'Eau de Javel à 10% dans de l'eau distillée . Chiffon doux et brosse à poils doux . Flacon pulvérisateur <p>PROCEDURE :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Préparer le détergent enzymatique (ou son équivalent) et une solution de blanchiment à 10% dans des flacons pulvérisateurs . Pulvériser le détergent sur les produits. Si le matériau est séché, laisser reposer pendant 1 minute . Essuyer la surface avec un chiffon doux . Utiliser une brosse à poils doux sur les zones sales et les surfaces irrégulières
----------------------------------	--