

# Ninonasal<sup>®</sup> Autotest

*«Il n'y a rien de plus cher qu'un test COVID bon marché.»*

Vous en avez assez des problèmes de qualité, des difficultés de transport et du processus d'enregistrement réglementaire?

Voici votre test de détection rapide du SARS-CoV-2 dans les échantillons nasaux !



**NG·BIOTECH<sup>®</sup>**  
LABORATOIRES



**Détection des  
VARIANTS\*  
préoccupants**



## Développé et fabriqué en Europe

La garantie d'une fiabilité, d'un transport simplifié et d'un service client de proximité.



## Marquage CE pour un usage domestique

Pas besoin de prendre rendez-vous dans un laboratoire. Disponible partout et à tout moment.



## Programme de surveillance

Mise en place d'un programme de surveillance pour la détection des nouveaux variants afin d'assurer la performance du test.



## Facile et rapide d'utilisation

Un dispositif de test complet fourni avec les différents accessoires pour un résultat en 15 min, facile à lire.





## Performance

SENSIBILITÉ	SPÉCIFICITÉ
98%	99%
CI 95% [93-100%]	CI 95%[98-100%]

### \* Détection des variants préoccupants approuvée cliniquement :

"Alpha" (B.1.1.7) "Mu" (B.1.621)  
"Beta" (B.1.351) "Lambda" (C.37)  
"Gamma" (P.1) "Iota" (B.1.526)  
"Delta" (B.1.617.2) "Kappa" (B.1.617.1)  
"Epsilon" (B.1.427 et B.1.429)

Déclaration officielle sur notre site internet :  
[www.ngtest-covid-19.com](http://www.ngtest-covid-19.com)

# Ninonasal® Autotest

## Facile d'utilisation :

**1** VERSER LA SOLUTION D'EXTRACTION

**2** COLLECTER L'ÉCHANTILLON

**3** DÉCHARGER L'ÉCOUVILLON

**4** PLACER LE BOUCHON COMPTE-GOUTTES

**5** VERSER LE MÉLANGE DANS LE PUIT «S/R»

Pressez

3 gouttes

**ATTENDRE POUR OBTENIR LE RÉSULTAT**

**15min.**

**INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT**

NÉGATIF	C T	POSITIF	C T	INVALIDE	C T	C T
---------	-----	---------	-----	----------	-----	-----

## Le kit contient :

- x1 1 cassette, 1 tube d'extraction avec bouchon compte-gouttes, 1 écouvillon nasal, 1 flacon de solution tampon ou 1 unidose + notice.
- x5 5 cassettes, 5 tubes d'extraction avec bouchon compte-gouttes, 5 écouvillons nasaux, 1 flacon de solution tampon ou 5 unidoses + notice.

Regarder  
le mode d'emploi  
en vidéo



PRODUIT	KIT	CARTONS	PALETTE
Ninonasal®	1 Test 5 Tests	320 KITS 140 KITS	16 CARTONS