



# AURA


LE COUSIN DE SIÈGE À AIR À PRESSION ALTERNÉES






# Le cousin de siège à air à pression alternées

Aura® permet aux patients de profiter des bénéfices de la position assise (amélioration des fonctions respiratoires, cardiaques, circulatoires,...) tout en assurant la continuité des soins d'aide à la prévention et au traitement des escarres.

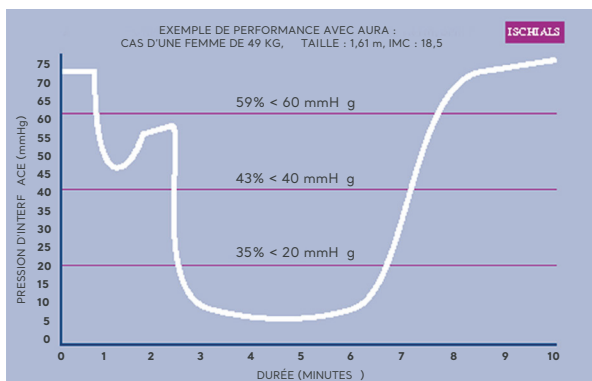

L'efficacité du coussin Aura est confirmée par un excellent index de soulagement des pressions. En effet, au cours du cycle dynamique de 10 mn, les pressions maximum d'appui sont de courte durée (environ 30 % du cycle) et d'un niveau relativement faible par rapport à un coussin standard. Ces pressions d'appui restent ensuite très basses sur une longue période et libèrent le flux sanguin.\*

Alliant un excellent soulagement de la pression à un confort supérieur, le coussin de siège Aura convient particulièrement aux patients à haut risque. Utilisé en combinaison avec un matelas ou surmatelas dynamique Arjo, il garantit la continuité des soins 24h/24 à l'hôpital, en maison de repos et de soins et à domicile.

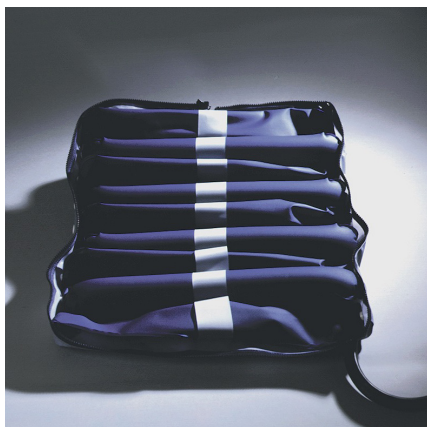

### Coussin d'assise robuste et fiable

- Efficace quel que soit le réglage pour des patients de 30 à 120 kg
- Cycle 1 cellule sur 2 (10 min.) pour un soulagement optimal de la pression
- Très grande stabilité pour le patient
- Cellules en Polyuréthane : résistent aux agressions (urines, détergents, désinfectants), amovibles et indépendantes.
- Poids maximum du patient : 120 kg

### Housse haute performance d'entretien facile

- Imperméable aux liquides
- Perméable à la vapeur d'eau
- En Polyuréthane : résiste aux détergents et aux désinfectants usuels
- Extensible dans les 2 sens
- Amovible, lavable en machine
- Contient de l'Actifresh qui limite ainsi le développement des bactéries et des odeurs



### Compresseur haute technologie

- Léger, compact et robuste. Faible niveau sonore de vibration
- Mode transport : autonomie de gonflage de 4 heures
- Aucun réglage de pression nécessaire
- Sa forme facilite le nettoyage
- Muni de 2 crochets de suspension. Peut être posé sur le sol ou accroché au fauteuil
- Double filtration, améliore sa longévité

### Sécurité

- Alarmes visuelles et sonores (alimentation électrique et baisse de pression)
- Connecteurs des arrivées d'air munis d'un système de sécurité autobloquant
- Indicateur lumineux de mise sous tension
- Batterie autonome pour alimentation des alarmes
- Mode de transport : autonomie de gonflage de 4 heures

### Confort

- Bouton de réglage pour un confort optimal
- Cycle dynamique de 10 min (lent et régulier)
- Coussin muni de bandes antidérapantes et de sangles de fixation



### Adaptabilité

- Convient aux :
  - Chaises à côtés ouverts
  - Chaises à côtés fermés
  - Chaises à coussin amovible
  - Chaises à coussin fixe
  - Fauteuils roulants (les fauteuils roulants à siège en toile ont besoin d'un coussin convexe supplémentaire)

### Garantie

- 2 ans sur la pompe, le coussin et la housse



Réglage du confort



Sangles pour fixation du coussin

# Caractéristiques Techniques

<b>Ensemble cousin compresseur</b>	<b>Réf : AURA</b>
<b>Compresseur</b>	<b>Réf : ALS04</b>
Dimensions	248x160x116 mm
Poids	2,8 kg
Durée du cycle	10 minutes
Alimentation	220 - 240V
Fréquence	50 Hz
Classe de protection	Catégorie II type BF
Normes	BS EN 60601-1
Garantie	2 ans

<b>Cousin Aura</b>	<b>Réf : 403001UN</b>
Poids	0,7 kg
Dimensions	455 x 470 mm
Epaisseur gonflée	50 mm
Matériau cellules	Polyuréthane
Matériau housse	Tissu revêtu de Polyuréthane
Résistance feu	BS7175 sources 0,1 et 5
Poids maximum du patient	120 kg
Garantie	2 ans
Housse supérieure supplémentaire	réf. 403050

Le cousin Aura est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Arjo. Il est indiqué pour la prévention et le traitement des caractères. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo.

Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Actifresh est une marque déposée de British Sanitised Ltd.  
® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.  
© Arjo, 2018.

\* L'humain avant tout

**Arjo France SAS**  
2 Avenue Alcide de Gasperi  
CS 70133  
59436 RONCQ CEDEX France  
Tél. : 03 20 28 13 13  
Fax : 03 20 28 13 14  
E-mail : info.france@Arjo.com

**Arjo Belgique SAS**  
Evenbroekveld 16  
9420 Erpe-Mere  
BELGIQUE  
Tél. : +32 (0)53 60 73 80  
Fax : +32 (0)53 60 73 81  
E-mail : info@arjo.be

