



# GUIDE Brassards de tension artérielle Welch Allyn FlexiPort™

## 1 Positionnement du brassard

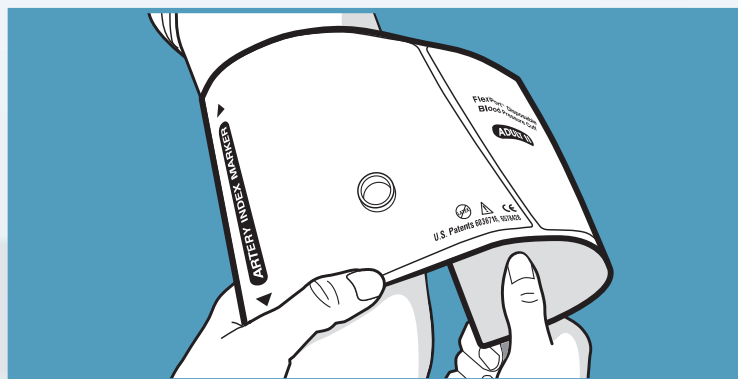


Positionnez le marqueur d'index artériel sur l'artère brachiale du patient et enroulez le brassard autour du bras du patient.

## 2 Vérification

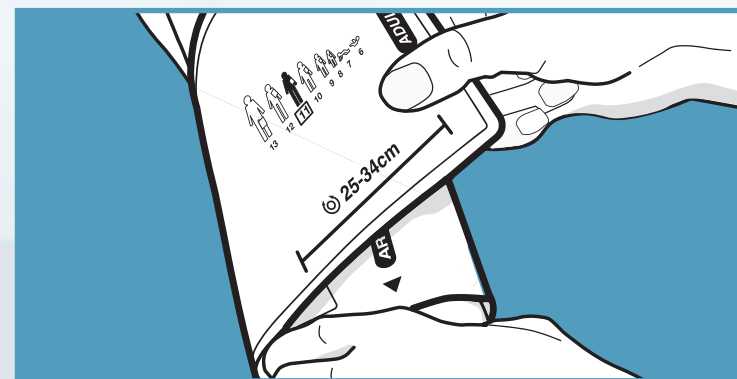


Assurez-vous que le marqueur de l'indice artériel se situe dans la plage indiquée sur le brassard.

## 3 Fixation

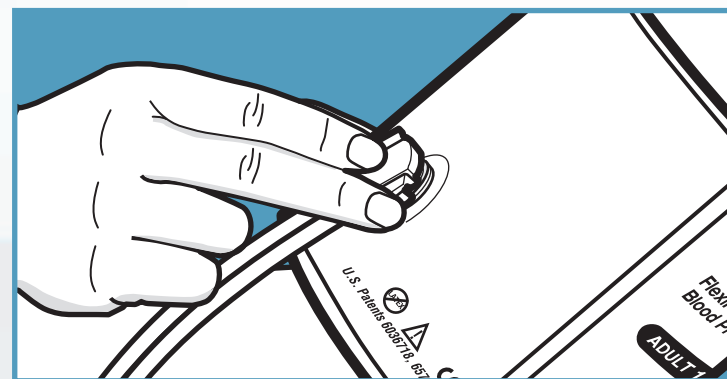


Clipsez le raccord FlexiPort, du dispositif directement dans le brassard.

## 4 Rotation

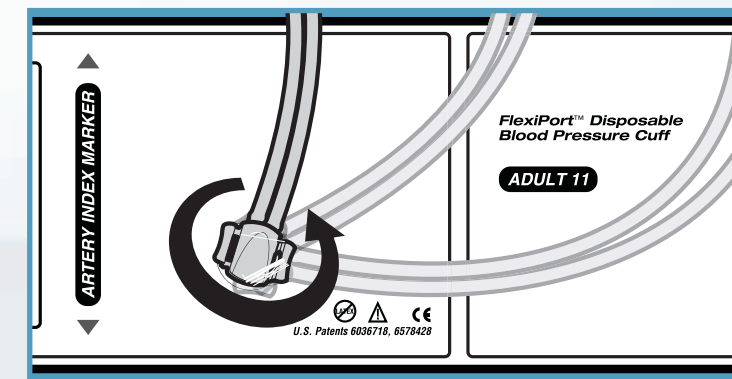

Faites pivoter la tubulure du dispositif pour obtenir une position confortable pour le patient et le soignant.

## 5 Détachement

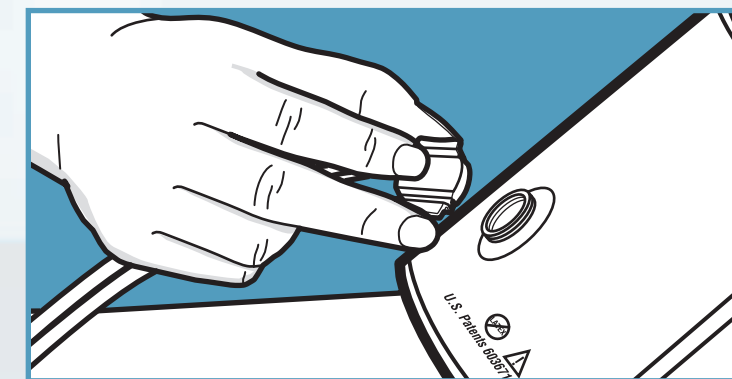

Appuyez sur le raccord FlexiPort et tirez-le pour le détacher du brassard.