

Le guidon **MILO®**

Appareil Modulaire de Verticalisation

CONTENU DU CARTON

Appareil

- Barre d'appui
- Dossier
- Plate-forme
- Pot

Visserie

- Ecrous borgne 13 mm (x 2), 10 mm (x2)
- Vis BTR 60 mm (x2), 35 mm (x 2)
- 2 rondelles

Etape de montage

- 1 Insérer le mât de la barre d'appui dans le manchon du socle pivotant. Puis visser avec les 2 vis BTR 60 mm, les 2 rondelles et les 2 écrous borgne 13 mm.
 > Tête des vis BTR à placer côté appuis tibiaux
 > Les rondelles sont à installer côté écrou .
- 2 Assembler le dossier sur la plateforme, au niveau de l'assise et visser avec les 2 vis BTR 35 mm et les 2 écrous 10 mm.
 > Tête des vis BTR à placer côté « assise » .
- 3 Installer le pot sous l'assise.
Votre MILO® est prêt à l'emploi !

