

FB WIPES

LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES



■ AVANTAGES ET QUALITÉS

- Traitement des surfaces et des dispositifs médicaux destinés à la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (ex : lit, table d'opération, monitoring, générateurs d'hémodialyse, respirateurs, unités dentaires)
- Adaptées aux grandes surfaces (FB wipes XXL)
- Solution d'imprégnation à pH neutre, sans parfum
- Activité virucide contre les virus enveloppés
- Actives sur les spores de *Bacillus subtilis* et de *Clostridium difficile*
- Compatibles avec un large panel de matériaux dont les revêtements synthétiques

CONTACT
ALIMENTAIRE

LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES

■ MODE D'EMPLOI

■ 1^{ère} utilisation des lingettes:

- Porter des gants et retirer l'opercule protecteur.
- Sortir la 1^{ère} lingette d'une main **en maintenant le paquet de l'autre main.**

■ Utilisation :

- 1- Nettoyer la zone à traiter en prenant autant de lingettes que nécessaire
- 2- S'assurer que le temps de contact est conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.
- 3- Bien refermer le paquet après usage. Ne pas réutiliser la lingette.

Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

■ PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Temps de contact
Bactéricidie	EN 1276 / EN 13727 / EN 13697	1 minute
	EN 16615	2 minutes
	EN 14561	5 minutes
Levuricidie	EN 13624 / EN 1650	1 minute
	EN 16615	2 minutes
	EN 13697 / EN 14562	5 minutes
Fongicidie	EN 13697	5 minutes
	EN 1650 / EN 13624 / EN 14562	10 minutes
Virucidie	EN 14476	5 minutes
	Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV (virus modèle de l'hépatite C), Virus VRS	5 minutes
	EN 14476 Vaccinia Virus	5 minutes
Sporicidie	EN 13704	15 minutes
	B.subtilis et Clostridium difficile	15 minutes
	EN 17126 Clostridium difficile	15 minutes

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

■ CARACTÉRISTIQUES

- Taille de la lingette : FB wipes (180 x 200 mm)
FB wipes XXL (240 x 300 mm)
- pH de la solution d'imprégnation : 6
- Péréemption : 3 ans

■ COMPOSITION

- Agents de surface non ioniques
- Ammonium quaternaire
- Excipients

■ CONDITIONNEMENTS

- FB Wipes**
- ① Carton de 12 sachets 100 lingettes.....réf. **10785142**
- FB Wipes XXL**
- ② Carton de 12 sachets 60 lingettes.....réf. **10785145**



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.