

ECOSEPTOL FOAM

MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE
SANS ALCOOL

TRAITEMENT DE SURFACE DES DM



PULVÉRISATION



■ AVANTAGES ET QUALITÉS

- Solution à pH neutre
- Sans phosphates, sans EDTA, sans colorant, sans parfum
- Prêt à l'emploi
- Flacon avec dispenseur de mousse
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Formulation sans chlorure
- Efficace contre les virus enveloppés

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



TRAITEMENT
MANUEL



PRÊT À
L'EMPLOI

CE
0459



www.sterifrance.com

ECOSEPTOL FOAM

MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE SANS ALCOOL

■ MODE D'EMPLOI

■ 1^{ère} utilisation du vaporisateur :

- Porter des gants et déverrouiller le pistolet

■ Utilisation :

- 1- Pulvériser uniformément **ECOSEPTOL FOAM** directement sur la surface à traiter ou sur une lingette sèche non tissée à usage unique
- 2- Répartir la solution / mousse sur la surface avec la lingette
- 3- Temps de contact : Selon activité antimicrobienne recherchée
- 4- Ne pas rincer*

*Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec la peau et les muqueuses.

- 5- Jeter le support

- 6-Renouveler l'opération si nécessaire

■ PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	5 min.
	EN 13697	5 min.
	EN 1276	2 min.
	EN 14561	10 min.
Levuricidie	EN 13624	5 min.
	EN 13697	5 min.
	EN 1650	5 min.
	EN 14562	10 min.
Fongicidie	EN 13624	15 min.
	EN 13697	15 min.
	EN 1650	15 min.
Virucidie	EN 14476 (Vaccinia Virus)	5 min.
	EN 14476 (Virus PRV modèle de l'hépatite B) (Virus BVDV modèle de l'hépatite C)	5 min.
	EN 14476 (Rotavirus)	5 min.
	EN 14476 (Rotavirus)	5 min.
Sporicidie	EN 13704 Clostridium Difficile	15 min.
	EN 17126 Clostridium Difficile	15 min.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- pH : 6

■ COMPOSITION

- Agents de surface cationiques
- Agents de surface non ioniques
- Agents séquestrants
- Excipients

■ CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 12 flacons de 750 mLréf. **23030**



Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif Médical de classe IIb.