

ANIOSYME PRIME

Mousse détergente
désinfectante de
l'instrumentation souillée


PRODUIT
PRÊT À L'EMPLOI



INDICATIONS

- Pré-traitement de l'instrumentation médico-chirurgicale :
 - Lors d'un transport en mode non humide
 - Lors du stockage de l'instrumentation souillée
 - Avant nettoyage en machine
- Maintient une humidité suffisante pour éviter le séchage du sang et autres matières organiques.

PROTOCOLE D'UTILISATION

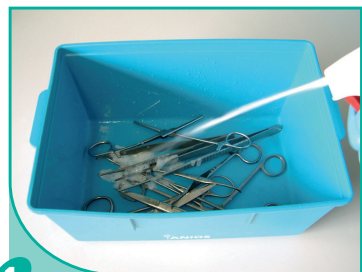

- 1** Pulvériser au préalable ANIOSYME PRIME au fond du bac de trempage et déposer l'instrumentation collectée



- 2** Pulvériser uniformément l'ANIOSYME PRIME sur l'instrumentation.



- 3** Couvrir le bac à l'aide du couvercle pendant le stockage ou le transport.



- 4** Rincer l'instrumentation avant de procéder au nettoyage, en machine ou manuel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.